

GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
USER'S MANUAL



FYSIC[®]

FC-240

1 BEOOGD GEBRUIK

De FYSIC FC-240 wekkerklok is alleen bedoelt voor het wakken van de gebruiker met licht, geluid of trilsignalen in een privé omgeving.

Optueel is een shaker (triller) verkrijgbaar om te wakken met behulp van trilsignalering.

2 ONDERHOUD

Reinig deze wekkerklok uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigings-middelen. Vóór het reinigen de adapter loskoppelen.

3 MILIEU EN AFDANKEN

- De verpakking van deze wekkerklok kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, het apparaat degelijk verpakt kan worden.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi uitgewerkte batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.
- Wordt deze wekkerklok afgedankt, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



4 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De FYSIC FC-240 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website www.fysic.com




5. OMSCHRIJVING VAN DE WEKKERKLOK


Voorzijde:



23:58 weergave van de (wek)tijd

-  de stip (•) knippert als de stroom is uitgevallen en de ingebouwde batterijen de spanning verzorgen
- AL1 de stip (•) licht op als alarm-1 is ingeschakeld
- AL2 de stip (•) licht op als alarm-2 is ingeschakeld

Bovenzijde:

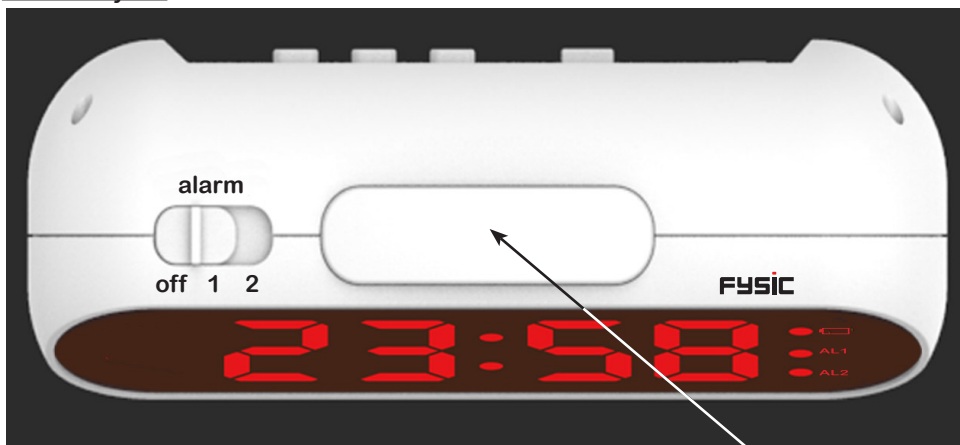

off alarmfunctie uitgeschakeld

1 alarm ingeschakeld met alarmtijd '1'

2 alarm ingeschakeld met alarmtijd '2'


Midden bovenop bevindt zich de SNOOZE toets:

- In rust indrukken voor 5 seconden licht

- bij alarm indrukken voor een snooze-periode van 5 minuten

SNOOZE toets

Achterzijde:

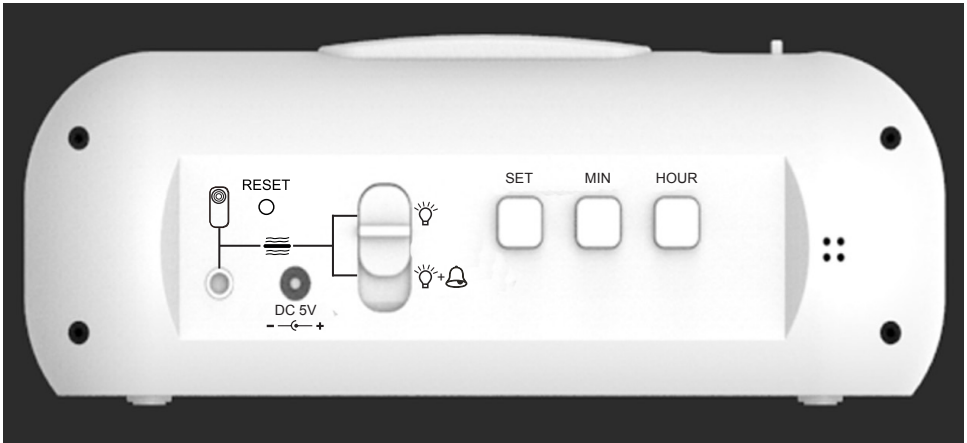

wekkerfunctie ingesteld op wekken met licht



wekkerfunctie ingesteld op wekken met licht en met geluid
aansluiting voor de shaker (deze aansluiting wordt geactiveerd na het licht/geluid alarm, zie ook hoofdstuk 8)



SET instellen (wek)tijd


MIN insteltoets 'minuten'

HOUR insteltoets 'uren'


DC5V aansluiting voor de voedingsadapter (incl.)

RESET hier zit een reset-knopje, deze kunt u met de hulp van een paperclip indrukken in geval van storing

Onderzijde:

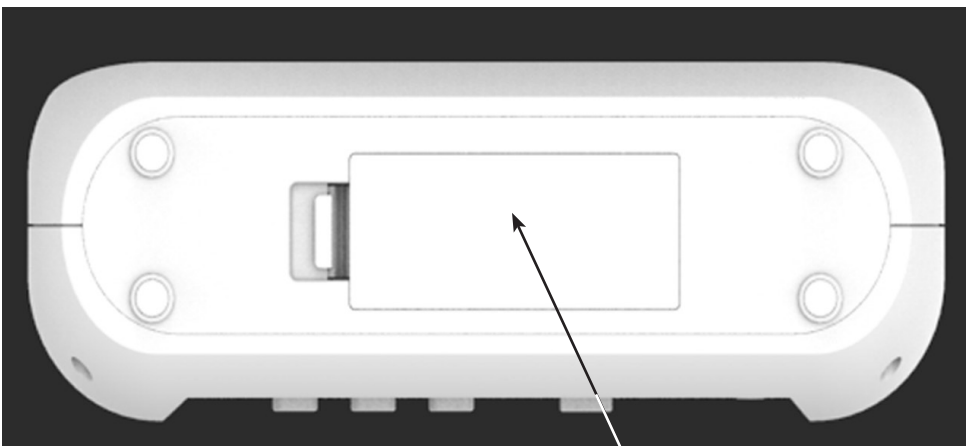

compartiment voor de backup-batterijen
(batt. excl)

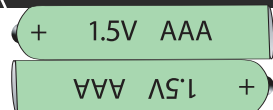

6. INSTALLEREN

Voedingsadapter:


Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de DC5V aansluiting aan de achterzijde van de wekker en doe de adapter in een stopcontact.



Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter met typenummer JOD-S-050050GS-C-2. Een voedingsadapter met afwijkende specificaties kan een defect veroorzaken met in het ergste geval een kortsluiting en/of brand tot gevolg.

Zodra de voedingsadaopter in een stopcontact is gedaan, licht het display op.

Shaker:

Sluit, voor zover van toepassing de shaker aan op aansluiting  achterop de klok.

Rol het snoetje af en leg de shaker in uw bed. De beste plaats voor de shaker moet proefondervindelijk bepaald worden.

Backup batterijen:

Om gedurende een spanningsuitval van het lichtnet, de klok te laten doorlopen, kunnen aan de onderzijde 2 stuks AAA batterijen geplaatst worden.

1. open het batterijcompartiment aan de onderzijde van de klok
 2. plaats de batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven
 3. sluit het batterijcompartiment
- Bij voorkeur 2 gelijke alkaline batterijen van een goede kwaliteit gebruiken. Liever geen oplaadbare batterijen gebruiken, deze hebben een lagere batterijspanning.
 - Batterijen worden niet meegeleverd.
 - De klok heeft geen batterij-zwak indicatie. Vervang, ook als u nooit last heeft van een spanningsuitval, eens per jaar deze batterijen.
 - Gedurende een spanningsuitval verzorgen de batterijen voor enkele dagen de stroom voor de klok en/of de alarmfunctie. Zie hiervoor hoofdstuk 8, item 'Werking met alleen de backup batterijen'.

7. INSTELLEN

Actuele tijd:

1. zet de ALARM schakelaar in positie OFF
2. houd toets SET ingedrukt totdat na ongeveer 2 seconden de dubbele punt tussen de uren- en de minuten-weergave gaat knipperen, laat nu toets SET los
3. druk herhaaldelijk op toets HOUR om de uren in te stellen (toets HOUR even ingedrukt houden voor een snelle instelling)
4. druk herhaaldelijk op toets MIN om de minuten in te stellen (toets MIN even ingedrukt houden voor een snelle instelling)
5. druk aan het einde kort op toets SET om de instelling af te sluiten

Wektijd:

1. zet de ALARM schakelaar in positie ALARM-1 of ALARM-2
2. houd toets SET ingedrukt totdat na ongeveer 2 seconden het lampje bij AL1 of AL2 gaat knipperen, laat nu toets SET los
3. druk herhaaldelijk op toets HOUR om de uren in te stellen (toets HOUR even ingedrukt houden voor een snelle instelling)
4. druk herhaaldelijk op toets MIN om de minuten in te stellen (toets MIN even ingedrukt houden voor een snelle instelling)
5. druk aan het einde kort op toets SET om de instelling af te sluiten

8. WERKING

Met voedingsadapter:

In rust:

- In rust geeft het display de actuele tijd aan. De dubbele punt tussen de uren- en de minutenweergave licht continu op.
- Bij weinig omgevingslicht wordt automatisch de helderheid van het display gedimd.
- Druk op de SNOOZE toets om het lampje onder deze toets voor 5 seconden in te schakelen.

Alarm inschakelen:




- Schuif de alarmschakelaar naar AL1 of AL2 om het alarm in te schakelen.
- Ter controle toont het display kort de ingestelde alarmtijd, na een seconde wordt de actuele tijd weer getoond. Is de shaker aangesloten, dan trilt deze ter controle gedurende een seconde.
- Het lampje bij AL1 of AL2 licht op als indicatie dat die betreffende alarmfunctie is ingeschakeld.

Bij Alarm:

Zodra de ingestelde alarmtijd is gekomen is de alarmafhandeling als volgt.

	<u>lampje</u>	<u>buzzer (*)</u>	<u>shaker (**)</u>
start	lampje licht op	1 beep/sec	
na 10 sec:	"	2 beep/sec	
na 20 sec:	"	4 beep/sec	
na 30 sec:	"	continu beeps	
na 60 sec:	lampje dooft	buzzer stopt	3x shake/sec 2 sec pause
na 120 sec:			shaker stopt


Druk binnen deze 120 seconden op de SNOOZE toets om het alarm voor 5 minuten te pauzeren of schuif de schakelaar in de positie OFF om het alarm uit te schakelen.

* *De buzzer werkt alleen als de alarmschakelaar aan de achterzijde in de stand  +  staat. In de stand  is de buzzer uitgeschakeld.*

**** De shaker moet apart achter op de klok aangesloten worden. Merk daarnaast op dat de shaker pas 1 minuut na de ingestelde alarmtijd gaat trillen. Houd hier eventueel rekening mee.**

Werking met alleen de backup batterijen:

Zodra de voedingsspanning uitvalt en de batterijen nemen de voeding over, dan functioneert de klok als volgt:

- Het display dooft.
- Het lampje bij het symbool  licht elke 4-5 seconden kort op.
- Zodra en zolang de snooze knop wordt ingedrukt, licht het display op en toont de actuele tijd (pas op, dit verbruikt relatief veel stroom).
- Voor zover de lading van de batterij het toestaat wordt de alarmafhandeling uitgevoerd alsof er geen spanningsuitval is, het display licht hierbij niet op.
- Afhankelijk van de conditie van de batterijen en hoe vaak de snooze knop ingedrukt wordt en het alarm afgaat, houden de batterijen dit een paar dagen tot een paar weken week vol.
- Nadat de batterijen verder zijn ontladen, gaat het lampje elke 4-5 seconden 2x knipperen. Het is nu niet meer mogelijk om de tijd te zien en het alarm gaat niet af. De klok blijft intern nog wel lopen. Herstel de spanningstoevoer nu zo snel als mogelijk.
- Lopen de batterijen verder leeg, dan moeten de klok en de alarmtijden uiteindelijk opnieuw worden geprogrammeerd als de adapter wordt aangesloten.

GARANTIE

Op de FYSIC FC-240 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.


HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze wekkerklok of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland), 03 238 5666 (België), 018 0503 0085 (Duitsland) of via internet www.fysic.com

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

FYSIC[®]

Service

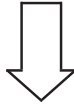

Help



WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355

(Lokaal tarief)



BE 03 238 5666

(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085

Lokale Festnetzkosten



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

CE