



*lisa*

**D**

**Bedienungsanleitung**

Seite 2

Tischblitzlampe

**GB**

**Operating Instructions**

Page 8

Table flash lamp

**F**

**Mode d'emploi**

Page 14

Lampe-flash de table

**NL**

**Gebruiksaanwijzing**

Pagina 20

Tafelflitslamp

**I**

**Istruzioni per l'uso**

Pagina 26

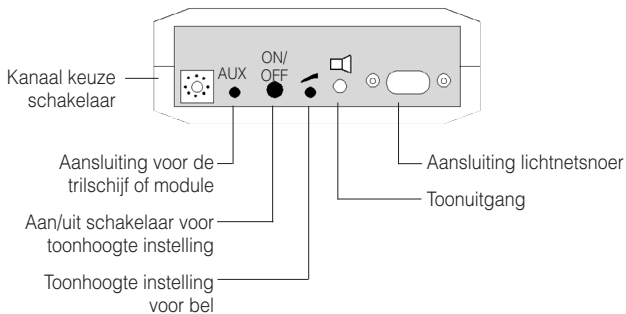
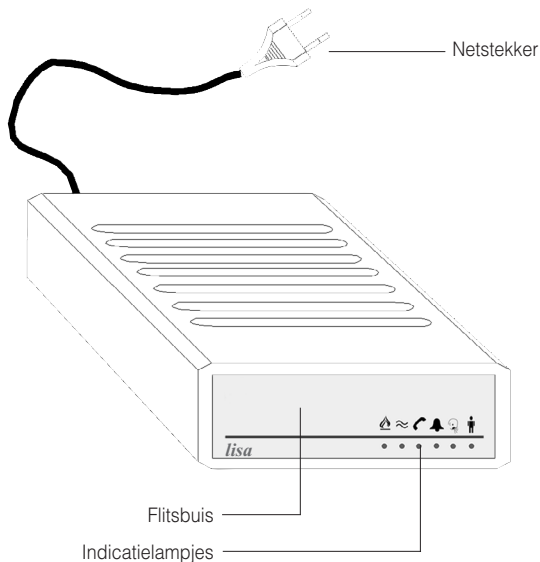
Lampada flash da tavolo

**E**

**Instrucciones de servicio**

Página 32

Lámpara de destellos de mesa



Wij feliciteren u met de aankoop van uw *lisa draadloze tafelflitslamp* en hopen dat u er lang plezier aan zal beleven. U heeft daarmee gekozen voor een modern en betrouwbaar systeem.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om het systeem correct in gebruik te kunnen nemen en met alle mogelijkheden van het systeem vertrouwd te worden.

### Standaard leveringsomvang

Controleer of alle hierna opgesomde onderdelen aanwezig zijn:

- *lisa draadloze tafelflitslamp*
- 230 V voedingskabel
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

Indien bepaalde onderdelen ontbreken, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw audicien of rechts-treeks met de fabrikant.

### Werkingsprincipe

De *draadloze tafelflitslamp* ontvangt de signalen van verschillende radiozenders en geeft deze weer via flitsimpulsen. Daarnaast helpen 6 signaallampjes de verschillende zendersignalen te herkennen.

### Ingebruikname –

#### Instellen van het correcte radiokanaal

Door een speciale, digitale transmissiemethode wordt de foutloze herkenning van de zendersignalen gewaarborgd. Bij deze methode is het mogelijk 10 verschillende radiokanalen in te stellen.

Fabrieksmatig is de *draadloze tafelflitslamp* ingesteld op kanaal 0. Alleen wanneer er in een huis systemen van verschillende gebruikers werkzaam zijn, moeten de apparaten van de afzonderlijke gebruikers op verschillende kanalen ingesteld worden. U kan het gewenste kanaal instellen door de pijl van de keuzeschakelaar op de linkerzijde van het apparaat met een kleine schroevendraaier op het gewenste kanaalnummer te zetten.



Alle zenders en ontvangers moeten ingesteld zijn op hetzelfde kanaal.

## Ingebruikname –

### Installatie van de *lisa draadloze tafelflitslamp*

Sluit de *draadloze tafelflitslamp* gewoon aan op een stopcontact. Het toestel is dan onmiddellijk gebruiksklaar. Zorg ervoor, dat het flitslicht zo ongehinderd mogelijk kan uitstralen in de kamer.

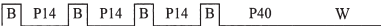
### Zendersignaal-herkenning

De verschillende zendersignalen worden door de *draadloze tafelflitslamp* omgezet in verschillende lichtflitsreeksen en signaalindicaties.

**Telefoon:** De telefoon-LED brandt

Flitsritme   $\overline{\text{B}} \text{ P14 } \overline{\text{B}} \text{ P30 } \text{ W}$


**Deurbel I:** De deurbel-LED brandt

Flitsritme   $\overline{\text{B}} \text{ P14 } \overline{\text{B}} \text{ P14 } \overline{\text{B}} \text{ P14 } \overline{\text{B}} \text{ P40 } \text{ W}$

**Deurbel II:** De deurbel-LED knippert

Flitsritme   $\overline{\text{B}} \text{ P20 } \overline{\text{B}} \text{ P20 } \overline{\text{B}} \text{ P20 } \overline{\text{B}} \text{ P40 } \text{ W}$

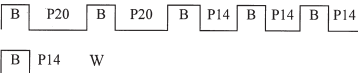
**Babyoproep:** Babyoproep-LED brandt

Flitsritme   $\overline{\text{B}} \text{ P35 } \overline{\text{B}} \text{ P40 } \text{ W}$

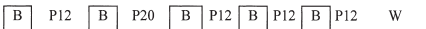
**Personenoproep:** Personenoproep-LED brandt

Flitsritme   $\overline{\text{B}} \text{ P12 } \overline{\text{B}} \text{ P12 } \text{ W}$

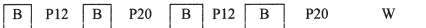
**Alarm:** Alle LED's knipperen

Flitsritme   $\overline{\text{B}} \text{ P20 } \overline{\text{B}} \text{ P20 } \overline{\text{B}} \text{ P14 } \overline{\text{B}} \text{ P14 } \overline{\text{B}} \text{ P14 } \overline{\text{B}} \text{ P14 } \text{ W}$

**Wateralarm:** Wateralarm-LED brandt

Flitsritme 

**Brandalarm:** Brandalarm-LED brandt

Flitsritme 

**P12** Pauze 1,2 seconden**P30** Pauze 3,0 seconden**P14** Pauze 1,4 seconden**P35** Pauze 3,5 seconden**P20** Pauze 2,0 seconden**P40** Pauze 4,0 seconden**B** Lichtflits**W** Herhaling

De indicatie-LED's branden/knippern gedurende 40 seconden.

**Stroomuitvaloverbrugging**

De ingebouwde accu kan een stroomuitvaltijd van maximaal 7 uren overbruggen. Gedurende deze tijd zijn de volgende functies beschikbaar:

- 1 akoestische geluidsgenerator
- 2 aansturing van de indicatie-LED's
- 3 aansturing van een eventueel aangesloten trilschijf of modules

**Let op:** Het flitslicht wordt tijdens een stroomuitval niet geactiveerd.

**Radiobereik**

De radiosignalen van de zender hebben in optimale omstandigheden een bereik van 80 meter.

Mogelijke oorzaken van een verminderd bereik kunnen zijn:

- Bebouwing of vegetatie.
- Stoorstralingen van beeldschermen en mobiele telefoons. Deze kunnen zelfs een uitval van de ontvanger veroorzaken.
- De afstand van de zender tot reflecterende oppervlakken zoals vloeren en muren is ongunstig gekozen, zodat de signaal golf en de reflecterende golf elkaar verzwakken of zelfs uitdoven.
- Metalen voorwerpen verkorten het bereik door de metalen afscherming.

- Met name in stedelijke gebieden zijn er veel stralingsbronnen, die het bronsignaal kunnen vervormen.
- Apparaten met overeenkomstige werkfrequenties, die op korte afstand van elkaar gebruikt worden, kunnen eveneens onderlinge storingen veroorzaken.

### Onderhoud en storingen

Alle *lisa* apparaten zijn onderhoudsvrij. U hoeft de apparatuur slechts af en toe met een droge of enigszins met water bevochtigde doek af te nemen. **Let op:** eerst de stekker uit het stopcontact halen. Gebruik hiervoor nooit alcohol, verdunner of andere agressieve of organische stoffen. De apparatuur mag niet langdurig aan hitte, bijvoorbeeld aan zonnestraling, worden blootgesteld. Extreem stoffige of vochtige ruimten dienen gemeden te worden.

Bescherm ook de apparatuur tegen vloeistoffen en er mag geen grote mechanische kracht of druk op worden uitgeoefend.

**Opmerking:** Het apparaat is **niet** beschermd tegen spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het apparaat. Ook open vuur, zoals bijv. brandende kaarsen, mag in geen geval op het apparaat worden geplaatst.

### Garantie

De *draadloze tafellitslamp* is zeer betrouwbaar en veilig. Mochten er ondanks correcte montage en bediening storingen optreden, neem dan contact op met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant. De garantie omvat de kostenloze reparatie en het gratis terugsturen van defecte apparaten. Voorwaarde voor de garantie is dat het apparaat in de originele verpakking teruggestuurd wordt. Gooi de originele verpakking dus niet weg! De garantie vervalt bij beschadigingen die veroorzaakt werden door onoordeelkundig gebruik of bij reparatiepogingen van niet erkende personen (verbreking van het garantiezegel op het apparaat).

Reparaties op garantie kunnen alleen worden uitgevoerd als de garantiekaart samen met een kopie van de rekening/bon van de handelaar wordt ingestuurd.

**Het serienummer van het apparaat moet steeds vermeld worden.**



**Verwijdering** van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (toe te passen in de landen van de Europese Unie en andere Europese landen met een eigen inzamelsysteem voor zulke apparaten). Het symbool op het product en de verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huisafval mag worden behandeld maar op een verzamelpunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch moet worden afgegeven. Door uw bijdrage tot

de correcte verwijdering van dit product, beschermt u de het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door foute verwijdering in gevaar gebracht. Materiaalrecyclage helpt het verbruik van grondstoffen te reduceren. Meer informatie over de recyclage van dit product krijgt u bij uw gemeente, de communale afvalverwijderingsbedrijven of in de zaak waar u dit product heeft gekocht.

### **Technische gegevens**

Voeding:	230 V, 50 Hz
Vermogensopname:	ca. 1 W
Frequentie:	868,35 MHz
Hoogte:	42 mm
Breedte:	117 mm
Diepte:	133 mm
Gewicht:	ca. 350 g



Dit product is in overeenstemming met de normen van de Europese Unie. EG-conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar bij uw vakhandel of direct bij de fabrikant van dit product.

Technische wijzigingen voorbehouden.