

**D**

## **Bedienungsanleitung**

Seite 2

Schaltmodul MS-1

**GB**

## **Operating Instructions**

Page 6

Switch Module MS-1

**F**

## **Mode d'emploi**

Page 10

Module de commutation MS-1

**NL**

## **Gebruiksaanwijzing**

Pagina 14

Schakelmodule MS-1

**I**

## **Istruzioni per l'uso**

Pagina 18

Modulo switch MS-1


**E**

## **Instrucciones de servicio**


Página 22

Módulo de conmutación MS-1


In-/ uitschakelaar voor schakelcontactdoos

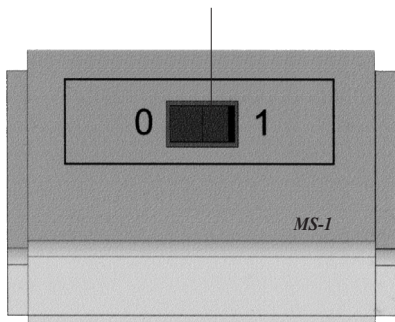

Voorzijde van het apparaat

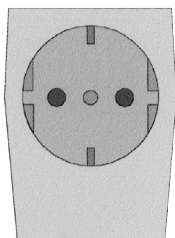

Schakel-  
stekker

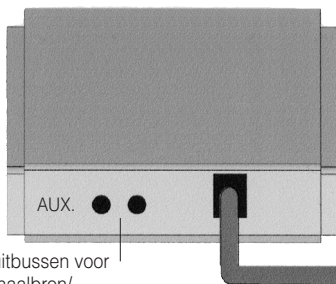

Aansluitbussen voor  
de signaalbron/  
andere modules/  
vibratiekussen

Achterzijde van het  
apparaat

**De schakelmodule MS-1 kan op alle apparaten worden aangesloten, die met een aansluitbus (3,5 mm stekkerbus) voor een vibratiekussen uitgerust zijn.**

Wij feliciteren u met de aankoop van uw *schakelmodule MS-1*. U heeft daarbij gekozen voor een modern en betrouwbaar systeem.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om het systeem correct in gebruik te kunnen nemen en met alle mogelijkheden van het systeem vertrouwd te worden.

Met de *schakelmodule MS-1* kunnen alle apparaten, die een aansluitbus (3,5 mm stekkerbus) voor een vibratiekussen hebben, met een zeer luide signaaltoon worden uitgebreid.

### **Leveringsomvang**

Controleer of alle hierna opgesomde onderdelen aanwezig zijn:

- *schakelmodule MS-1*
- besturingskabel
- gebruiksaanwijzing
- garantiekaart

Indien bepaalde onderdelen ontbreken, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw audicien of rechts-treeks met de fabrikant.

### **Ingebruikname**

Verbind de besturingskabel met één van de beide aansluitbussen voor de signaalbron. Het andere uiteinde van de kabel wordt aangesloten op een

apparaat met een aansluitbus voor een vibratiekussen bijv. digitale wekker DS-1, vibratiewekker VC-1/VC-10, time *flash/lisa* time *flash*, *lisa* ontvangers (tafelvlitslamp, radiovlitslamp, radio-knipperlamp, draagbare radio-ontvanger).

Steek aansluitend de stekker van de 9 V-voedingseenheid in de daarvoor voorziene bus aan de achterzijde van de *schakelmodule MS-1*.

Schakelstekker van de *schakelmodule MS-1* aansluiten op een 230 V-contactdoos en een lamp in de schakelcontactdoos van de module steken. (Zorg ervoor dat de lamp ingeschakeld is.) Met de schakelaar aan de voorzijde van de *schakelmodule MS-1* kan de lamp worden in- resp. uitgeschakeld.

### Opmerking:

Op de vrije aansluitbus van de *schakelmodule MS-1* kan een vibratiekussen of een andere module (bijv. akoestische module) worden aangesloten.

### **Signalering**

Actieve signalen (bijv. wekalarm, *lisa*-alarm) worden via een zeer luide akoestische toon weergegeven.

## Onderhoud en verzorging

Alle apparaten zijn onderhoudsvrij. Wanneer het apparaat vuil is, hoeft u het enkel met een zachte, vochtige doek te reinigen. Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere organische oplosmiddelen.

Alle apparaten mogen niet gedurende langere tijd blootgesteld worden aan directe zonnestralen en moeten daarnaast beschermd worden tegen grote hitte, vocht of sterke mechanische schokken.

**Opmerking:** Het apparaat is **niet** beschermd tegen spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het apparaat. Ook open vuur, zoals bijv. brandende kaarsen, mag in geen geval op het apparaat worden geplaatst.

Let erop dat de batterijen niet blootgesteld worden aan sterke warmtebronnen, zoals zonnestraling, brand o.i.d.

## Garantie

De *MS-1* is zeer betrouwbaar en veilig. Mochten er ondanks correcte montage en bediening storingen optreden, neem dan contact op met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant.

De garantie omvat de kostenloze reparatie en het gratis terugsturen van defecte apparaten.

Voorwaarde voor de garantie is dat het apparaat in de originele verpakking teruggestuurd wordt. Gooi de originele verpakking dus niet weg!

De garantie vervalt bij beschadigingen die veroorzaakt werden door onoordeelkundig gebruik of bij reparatiepogingen van niet erkende personen (verbreking van het garantiezegel op het apparaat).

Reparaties op garantie kunnen alleen worden uitgevoerd als de garantiekaart samen met een kopie van de rekening/bon van de handelaar wordt ingestuurd.

**Het serienummer van het apparaat moet steeds vermeld worden.**



**Verwijdering** van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (toe te passen in de landen van de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelsysteem voor deze apparaten). Het symbool op het product of de verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld maar bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden afgegeven. Met uw bijdrage tot de correcte verwijdering van dit product beschermt u het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Milieu en gezondheid worden geschaad door een foute verwijdering. Materiaalrecyclage helpt het gebruik van grondstoffen te reduceren. Meer informatie over de recycling van dit product krijgt u bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwijderingsbedrijven of de zaak waar u dit product heeft gekocht.

### Technische gegevens

Voeding: 230 V, 50 Hz

Vermogensopname: ca. 1 W



Dit product is in overeenstemming met de normen van de Europese Unie.

EG-conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar bij uw akhandel of direct bij de fabrikant van dit product.

Technische wijzigingen voorbehouden.