


GEBRUIKSAANWIJZING

Bezoek onze website om te controleren of er een update is van deze Gebruikershandleiding

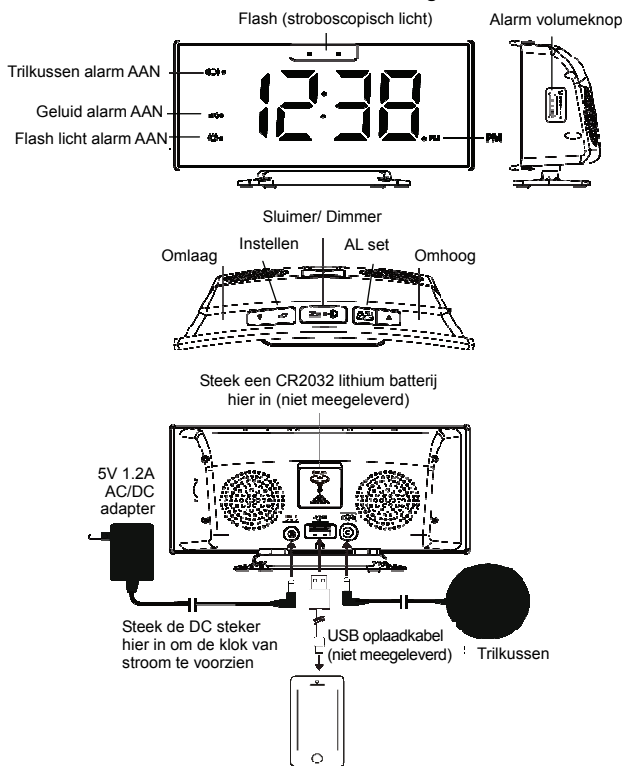

PLAATSIJG VAN DE RESERVEBATTERIJ

Uw klok heeft een CR2032 lithium batterij nodig (niet meegeleverd) om voeding te leveren bij een tijdelijke uitval van de stroom. Plaats uw klok ondersteboven op een plat oppervlak.

1. Verschuif het batterijdeksel aan de onderkant van de klok en verwijder het.
2. Plaats een nieuwe CR2032 lithium batterij in het batterijvakje met de '+' zijde naar boven gericht (zoals aangegeven).
3. Zet het batterijdeksel terug.

Een reservebatterij plaatsen is niet nodig voor de werking van de klok, maar de reservebatterij behoudt de tijd- en alarminstellingen in het geval van stroomuitval of het ontkoppelen van de gelijkstroomadapter. **Als de hoofdvoeding onderbroken wordt of de adapter wordt ontkoppeld, dan gaat de LED display uit en het alarm werkt niet meer.**

Vervang de batterij elk jaar om er zeker van te zijn dat uw klok niet beschadigd wordt.

INSTALLATIE

Steek de AC/DC adapter in een wisselstroom (AC) stopcontact en steek daarna de gelijkstroom (DC) stekker in de achterkant van de klok. Uw klok zal nu werken.

TIJD EN SLUIMERDUUR INSTELLEN


1. Druk eenmaal op **SET**; de uren cijfers '00' knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de tijd in uren in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
2. Druk nogmaals op **SET**; de minutencijfers '00' knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de tijd in minuten in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
3. Druk nogmaals op **SET**; de display toont '24Hr' en knippert. Druk op ▲ of ▼ om '12Hr' of '24Hr' te kiezen. Bij '12Hr' verschijnt de PM LED rechtsonder om aan te geven dat het middag is; AM wordt niet aangegeven.
4. Druk nogmaals op **SET**; de display toont '05' en knippert. Druk op ▲ of ▼ om uw sluimertijd vanaf 5 tot 60 minuten in te stellen.
5. Om de instellingsstand te beëindigen drukt u nogmaals op **SET** of drukt u geen enkele toets in voor ca. 10 seconden.

HET ALARM INSTELLEN

1. Druk op **AL SET/SELECT** en houdt dit ingedrukt; de LED en de uren cijfers knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het alarm in uren in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
2. Druk nogmaals op **AL SET/SELECT**; de minutencijfers knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het alarm in minuten in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
3. Druk nogmaals op **AL SET/SELECT**; LED vertoont **HI** (trilling op hoog niveau). Druk op ▲ of ▼ om select **LO** (trilling op laag niveau) te kiezen.
4. Druk nogmaals op **AL SET/SELECT**; LED vertoont **F-1 (ex. 800 Hz)** en knippert. Druk op ▲ of ▼ om de alarmtoon (frequentie) te kiezen:
F-1 (lage toon, 800 Hz), F-2 (tussentoon, 1 KHz), F-3 (hoge toon, 1.5 KHz)
5. Om de instellingsstand van het alarm te beëindigen drukt u nogmaals op **AL SET/SELECT** of drukt u geen enkele toets in voor ca. 10 seconden.

ALARM AAN/UIT ZETTEN EN DE STAND KIEZEN

1. In de stand van normale tijd tonen drukt u één voor één op **AL SET / SELECT** om het alarm te activeren en om de bijbehorende alarmindicator(s) aan de linkerkant van de display aan te zetten:

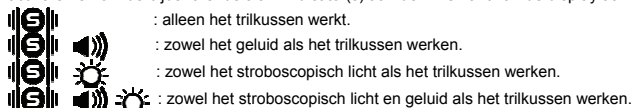

2. Druk nogmaals op **AL SET/SELECT** om alle alarmen uit te zetten; alle alarmindicators staan uit.

NB: Om het trilkussen te gebruiken moet u de stekker van het trilkussen in de achterkant van de klok steken. Als u het trilkussen niet wilt te gebruiken haalt u de stekker van het trilkussen uit de klok.

ALARMVOLUME (BUZZER) VERSTELLEN

U kunt de volumeknop aan de rechterkant van de klok verdraaien om het alarmvolume te verstellen. Deze alarmklok kan op hoge volumeniveaus worden ingesteld – a.u.b. met zorg gebruiken. Verhoog het volume stapsgewijs tot een comfortabel niveau.

HET ALARM STOPPEN EN RESETTEN OM DE VOLGENDE DAG AAN TE GAAN

Als het alarm afgaat, knippert de bijbehorende alarmindicator. Druk eenmaal op **AL SET/SELECT** om het alarm te stoppen en te resetten om de volgende dag aan te gaan. Nadien verschijnt de bijbehorende alarmindicator continu op de display.

SLUIMER GEBRUIKER (standaard sluimerduur is 5 minuten)

Als het alarm afgaat, drukt u eenmaal op **Zz**; het alarm stopt tijdelijk en de bijbehorende alarmindicator blijft knipperen. Het alarm zal opnieuw afgaan nadat de ingestelde sluimerduur voorbij is.

HI-MED-LO DIMMER GEBRUIKEN (LED TIJDCIJFERS)

Er is een helderheidsbediening met drie niveaus voor de LED display. Druk op **Zz** om de helderheid (**HI / MED / LO**) van de LED display in te stellen. Kan alleen als de klok geen alarm geeft. In de beginstand is de helderheid op **HI** ingesteld.

UW MOBIEL MET DE USB POORT OPLADEN

Verbindt de oplaadkabel van uw mobiel met de USB poort aan de achterkant van de klok en verbindt het andere uiteinde met de micro-USB oplaadcontact van uw mobiel. De klok zal uw mobiel automatisch opladen.

NB:

1. Overtuig uzelf ervan dat de met uw mobiel meegeleverde kabel voor opladen gebruikt kan worden.
2. Overtuig uzelf ervan dat de met de klok meegeleverde adapter (9V 1,5A) gebruikt kan worden om het van stroom te voorzien.
3. Het is niet mogelijk om een iPad® of tablet vanuit de USB poort van deze klok op te laden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw klok niet de juiste tijd toont of niet correct functioneert, kan dat veroorzaakt worden door elektrostatische ontlading of een andere storing. Als een elektrische timer van een kachel aan/uit schakelt, trekt dit een hoop stroom (slechte filtratie v/d netspanning). De adapter voor de klok mag alleen maar in een wandstopcontact gestoken worden en niet in een verlengsnoer, enz dat tevens gebruikt wordt door een elektrische kachel (of andere apparatuur met hoog wattage).

GOED VOOR UW PRODUCT ZORGEN

1. Plaats uw klok op een stevig oppervlak, verwijderd van direct zonlicht of extreme hittebronnen of vocht.
2. Bescherm uw meubilair als u uw klok op natuurlijk hout of geverniste afwerking plaatst door een doek of beschermend materiaal te gebruiken tussen uw klok en het meubilair.
3. Maak uw klok schoon met een zachte doek, bevochtigd met milde zeep en water. Sterkere middelen zoals benzeen, spiritus en dergelijke materialen kunnen de behuizing van uw klok beschadigen. Zorg ervoor dat de klok ontkoppelt is vóór het schoonmaken.
4. Om eventuele corrosie te voorkomen moet u de reservebatterij verwijderen als de klok voor een maand of langer niet gebruikt wordt. Mocht het batterijvakje vuil of aangetast worden, maak dan het vakje grondig schoon en vervang de batterij.

SPECIFICATIES

Alarmduur	: 1 uur
Sluimerduur	: Instelbaar van 5 tot 60 minuten
Standaard instellingen	Tijdsformaat : 24 uur
	Tijd : 0:00
	Alarm : 6:00
	Alarm en trilkussen niveau : HI
	Alarm geluidsfrequentie : F-1
	Sluimerduur : 05 (5 minuten)
Hooraar alarm	: 95dB op 1m

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

VERKLARING: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/UE betreffende radioapparatuur en telecommunicatie eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2.

De telefoon werkt niet als de lijnvoeding lager dan 18 mA is.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Elektrische verbinding: Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.) Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg er bij installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen.

RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever een van de volgende stortingsplaatsen:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.
E-mail : customerservices@geemarc.com

