

CL7310

Digitaal TV Luisterapparaat



Nederlands

Inleiding

Het Geemarc Digitaal TV Luisterapparaat is een versterkingsstelsel dat speciaal ontworpen is voor slechthorenden.

Het kan zonder storing met alle soorten audio- en televisiesystemen voor individueel of groepsgebruik gebruikt worden.

Audio-uitvoer van een TV of audioapparaat wordt gecodeerd en door het basisstation uitgezonden. De draadloze koptelefoon ontvangt het signaal en decodeert het naar het originele geluid.

Maximaal 4 koptelefoons kunnen met n basisstation verbonden worden.



Veiligheids- en Verzorgingsadvies

Lees deze instructies zorgvuldig voorafgaande aan het gebruik om dit product optimaal en veilig te gebruiken. Bewaar deze instructies voor raadpleging in de toekomst.

Waarschuwing: Dit product kan zeer luid zijn. Voorkom dat andere mensen, die niet in dezelfde mate aan gehoorverlies lijden, dit product gebruiken. Bovenmatig geluidsdruk van oor- en koptelefoons kunnen gehoorverlies veroorzaken.

Voorzichtig: ELEKTRISCHE SCHOKKEN. Steek de onverbonden stekkerkoppen **NIET** in wandcontactdozen. Stekkerkoppen **MOETEN** in de voedingsadapter worden gestoken.

Elektrische verbinding: Het apparaat is ontworpen om met een 100 - 240V wisselstroom van 50/60HZ te werken (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.)

Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg ervoor dat u gemakkelijk bij de wandcontactdoos kunt komen wanneer u het apparaat installeert.

Voorzichtig: Risico van explosie als de batterijen door een verkeerd type worden vervangen. Werp gebruikte batterijen weg volgens de voorschriften.

Houdt het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.

Het apparaat **NIET** aan direct zonlicht blootstellen.

Maak de koptelefoon en oordopjes regelmatig schoon.


Maak op **GEEN** enkele manier veranderingen aan het apparaat.

De batterijen mogen niet blootgesteld worden aan extreme hitte zoals zonneshijm, vuur en dergelijke.

De lichtnetstekker of een koppelstuk van een toestel wordt gebruikt om het apparaat te ontkoppelen. Het ontkoppelde apparaat blijft klaar voor exploitatie.

NB: Het apparaat kan storing ondervinden van apparaten die een sterk elektrisch of magnetisch veld produceren zoals magnetrons, mobiele telefoons en lichttransformatoren.

Inhoud van de verpakking

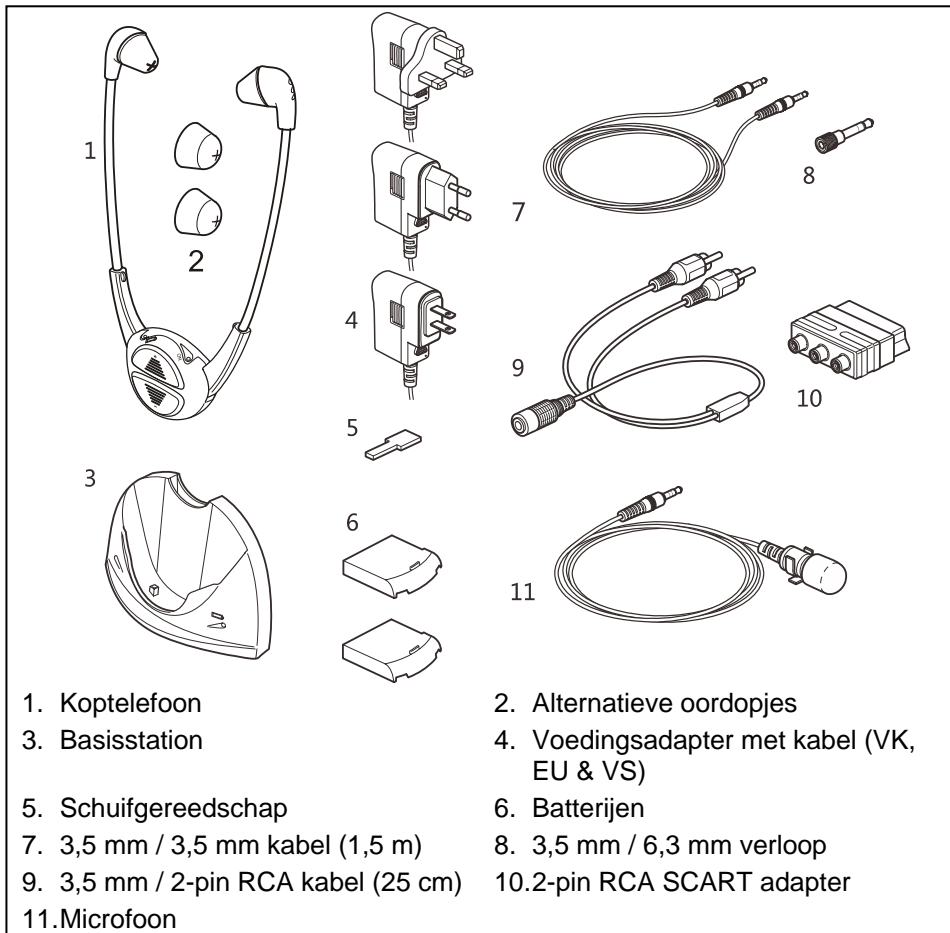

Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking	2	Extra koptelefoons verbinden	11
1 ^{ste} gebruik / Batterijen opladen	3-4	Schoonmaken & Onderhoud	12
Verbinden met de TV, HiFi en andere geluidsapparaten	5-7	Reserve- en vervangingsonderdelen	12
Gebruik van de koptelefoon	7	Klantenservice	12
De koptelefoon aanpassen	8-9	Algemene informatie	13-14
Batterijstatus & weer opladen	10		

Eerste gebruik / Batterijen opladen

Belangrijk: Het Geemarc Digitaal TV Luisterapparaat wordt geleverd met twee batterijen

De batterijen **MOETEN** voor het gebruik volledig opgeladen worden, wat ongeveer 2-3 uur zal duren als de batterijen leeg zijn.

Voorzichtig: Als de batterijen al volledig opgeladen zijn, zal het LED **NIET** aangaan.


Als de batterijen eenmaal volledig zijn opgeladen, zal het TV luisterapparaat (per batterij en met de koptelefoon op medium volume) een bedrijfsduur van ongeveer 3 uur hebben.

Batterijen kunnen niet teveel worden opgeladen, maar om energie te besparen wordt aangeraden het basisstation uit de voeding te halen wanneer deze niet wordt gebruikt.




Waarschuwingen m.b.t. de batterijen:

- Probeer **NIET** om ze uit elkaar te halen.
- **NIET** weggooien in vuur.
- **NIET** inslikken.
- Uit de buurt van kinderen houden.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit erin gestoken worden.
- **GEEN** kortsluiting veroorzaken tussen de voedingsklemmen.
- Lege batterijen moeten uit het apparaat verwijderd worden.
- Gebruik alleen maar 'Li-Po' batterijen die door Geemarc worden geleverd.
- **Voorzichtig:** Risico van explosie als de batterijen verkeerd worden vervangen of als een verkeerd type wordt geïnstalleerd. Werp gebruikte batterijen weg volgens de voorschriften.

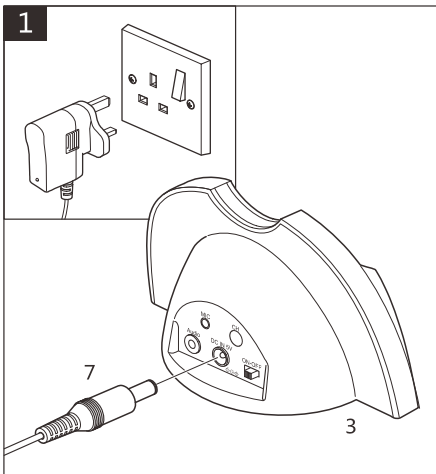


Steek de voedingsadapter in de wandcontactdoos. Steek de stekkerbus (7) in het 'DC IN 5V' contact aan de achterkant van het basisstation.

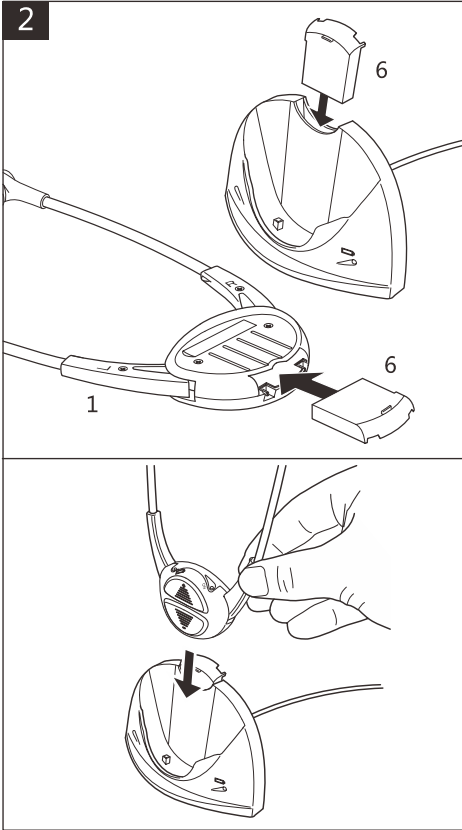

Steek de batterijen (6) in de koptelefoon en het basisstation. Zet de koptelefoon in het basisstation.

Voorzichtig: Zorg ervoor dat u de batterijen er op de juiste manier insteekt (zie hierboven).

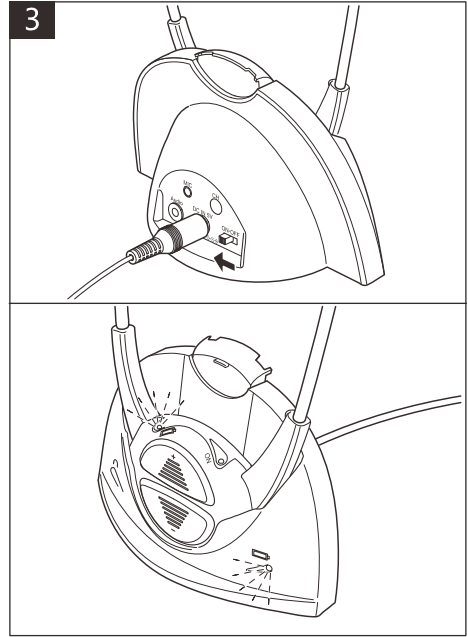

Zet de voeding AAN op het basisstation.

Rode lichtjes op het basisstation en de koptelefoon zullen aangeven dat de batterijen opgeladen worden.

Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen na 2-3 uur zullen de rode lichtjes uitgaan.


Verbinden met de TV, HiFi en andere geluidsapparaten

Afhankelijk van het fabrikaat van de TV of HiFi apparaten zijn er verschillende methoden om het luisterapparaat te verbinden.


Belangrijk: Het basisstation **MOET** verbonden worden met het 'OUTPUT' contact op de TV of het HiFi apparaat en **NOOIT** met de 'INPUT' contacten.

Belangrijk: Als u kabeltelevisie, satelliet, Internet of andere diensten samen met u TV of geluidsapparaat gebruikt, zorg er dan voor dat u de CL7300 met een audio-output contact op uw TV verbindt en NIET met het audio-output contact op uw convertor/decoder kastje. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV als u niet zeker weet of u de juiste verbinding te pakken heeft of de INPUT/OUTPUT definitie niet herkent. Een verbinding van de CL7300 met uw convertor/decoder kastje i.p.v. met uw TV output contact kan tot gevolg hebben dat sommige kanalen zonder geluid te zien zullen zijn.


NB: Als uw moeilijkheden heeft met de verbindingen kunt u altijd de Klanten Helpdesk bellen: 01707 384438

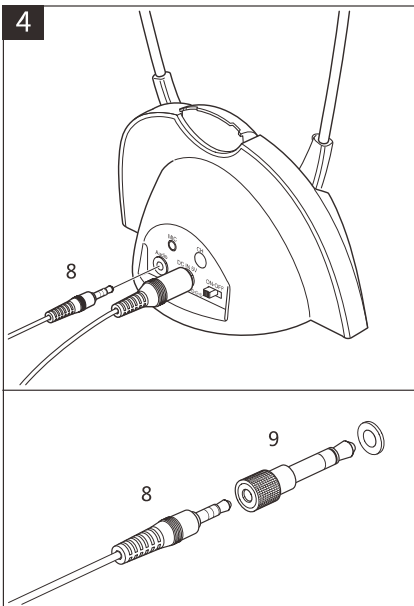

De 3,5mm / 3,5mm kabel gebruiken: Steek een 3,5mm stekkerbus (8) in het AUDIO contact op het basisstation en de andere in het HEADPHONE (= koptelefoon) contact op uw TV of HiFi apparaat. Gebruik zonodig het 3,5mm / 6,3mm verloop (9).

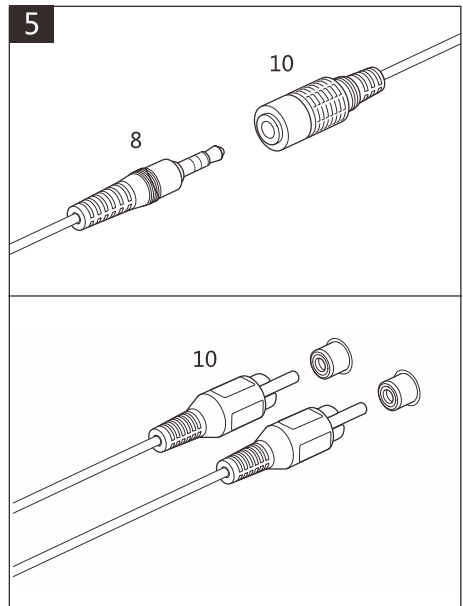


De 3,5mm / RCA kabel gebruiken: Steek de 3,5mm stekkerbus (8) in de 3,5mm / RCA kabel (10). Verbindt de RCA stekkerbussen (10) met de corresponderende rode en witte OUTPUT contacten op uw TV of HiFi apparaat.

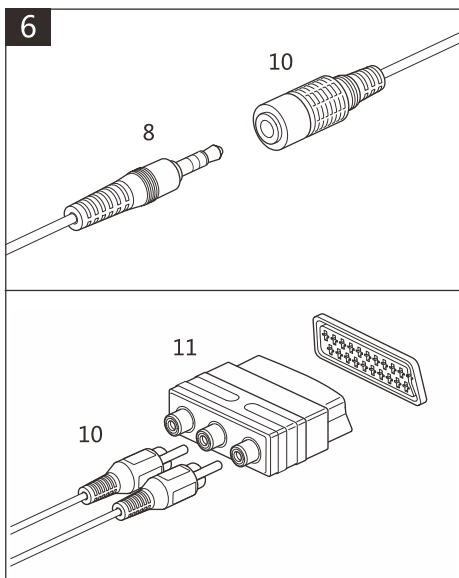


De SCART adapter gebruiken: Steek de 3,5mm stekkerbus (8) in de 3,5mm / RCA kabel (10). Steek de SCART adapter in een aansluitbaar SCART contact op uw TV of HiFi apparaat. Verbindt de corresponderende rode en witte RCA stekerbussen (10) met de SCART adapter (niet het gele contact gebruiken).

NB: Sommige TV's en geluidapparaten hebben een hoger niveau van SCART geluidsoutput dan de 300 mV standaard. Dit kan vervorming veroorzaken of een zeer hoog akoestisch niveau, zelfs als het Volume op 'laag' is gezet. Als dit gebeurt, neem dan contact op met de Klantendienst van Geemarc. Zij zijn in staat u een oplossing te bieden om de gevoeligheid van uw CL7310 te verzwakken.

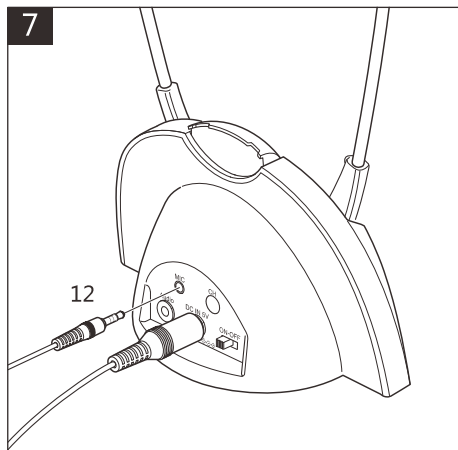


De microfoon verbinden: Gebruik alleen maar de meegeleverde Geemarc microfoon. Steek de stekkerbus van de microfoon (12) in het MIC contact op het basisstation en zet de microfoon vlakbij de geluidsbron dat u wilt horen.

NB: Als u de microfoon gebruikt, zal het geluid zwakker klinken en kan achtergrondgeluid opgevangen worden.

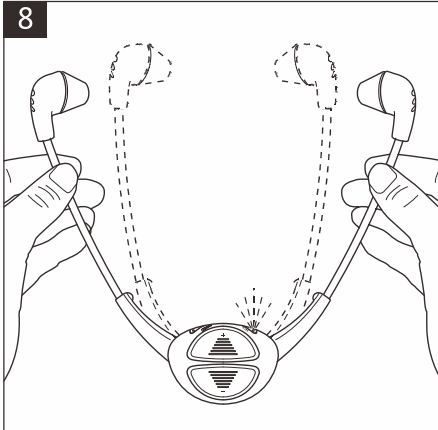

Gebruik van de koptelefoon: Als de koptelefoon eenmaal opgeladen is en met uw TV of HiFi apparaat verbonden is, opent u de 'armen' en de koptelefoon zal werken. Een groen lichtje op de koptelefoon zal oplichten wanneer het gebruikt wordt.

De koptelefoon zal uitgaan als de 'armen' helemaal dichtgeklapt worden.

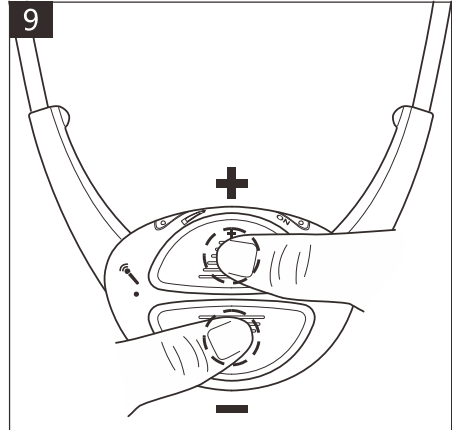


Aanpassing van het volume:

Druk op het midden van de knoppen om het volume te verhogen of te verlagen.

Druk op de '+' knop om het volume te verhogen en op de '-' knop om het volume te verlagen.

De koptelefoon zal een pieptoon laten horen wanneer het volume het maximum of minimum bereikt.

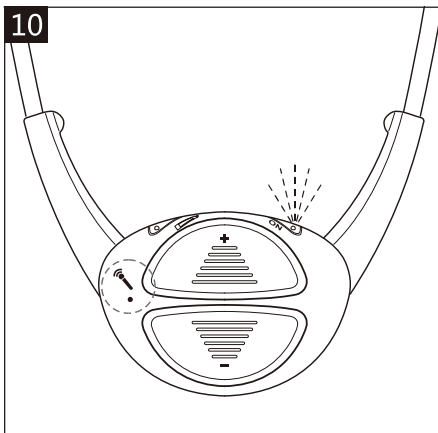

Microfoonfunctie van de koptelefoon

Als de voeding van de koptelefoon AAN staat en de Volume '+' 3 seconden wordt ingedrukt om de Microfoonfunctie van de koptelefoon te activeren, de geluidsbron schakelt van LINE IN van de basis naar MIC IN van de koptelefoon om het omgevingsgeluid te versterken. De groene LED knippert 3 keer elke 2 seconden.

Druk op de volumeknop en houdt deze 3 seconden ingedrukt om terug te keren naar de LINE IN stand van de basis.

Het eenmalig sluiten en openen van de armen stelt de MIC IN ook weer in op LINE IN van de basis.


Aanpassingen van de koptelefoon

Volume, balans, toon en de instelling van Mono/Stereo zijn vooraf in het midden ingesteld. Deze instellingen zijn geschikt voor de meeste gebruikers.


Zorg ervoor dat u de koptelefoon eerst probeert voor dat u de vooraf ingestelde instellingen verandert.

Als aanpassingen nodig zijn, gebruik dan het 'schuifgereedschap' om de instellingen te veranderen.

Belangrijk: Als al de aanpassingen eenmaal klaar zijn, zorg er dan voor dat de schuifregelaar van de koptelefoon voor volumeverandering zoals beschreven in Stap 11 ingesteld is.

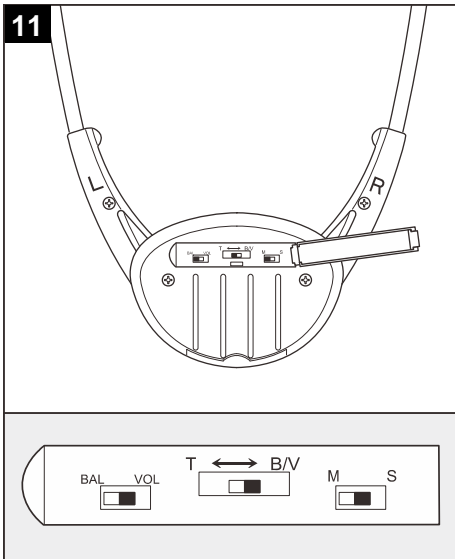

Gebruik het 'schuifgereedschap' om het volume, de balans, toon en instelling van Mono of Stereo te veranderen. Open het achterpaneel van de koptelefoon. Drie schuifschakelaars worden dan zichtbaar.

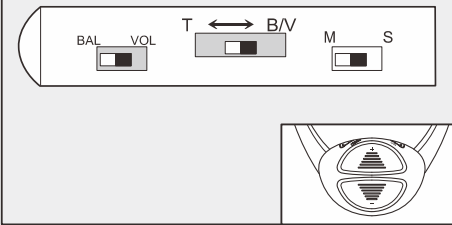
12**Aanpassing van het volume:**

Stel de 'BAL VOL' schuifregelaar op 'VOL' in.

Stel de 'T <-> B/V' schuifregelaar op 'B/V' in.

Druk op de '+' knop om het volume te verhogen en op de '-' knop om het volume te verminderen.

De koptelefoon zal een pieptoon laten horen wanneer het volume het maximum of minimum bereikt.

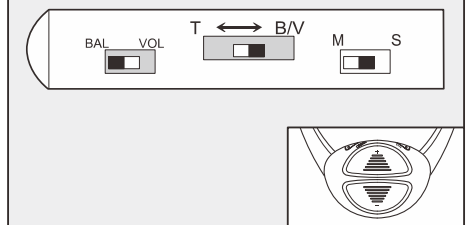13**Aanpassing van de balans:**


Stel de 'BAL VOL' schuifregelaar op 'BAL' in.

Stel de 'T <-> B/V' schuifregelaar op 'B/V' in.

Druk op de '-' knop om het geluid aan de RECHTERKANT te verminderen.

Druk op de '+' knop om het geluid aan de LINKERKANT te verminderen.

De koptelefoon zal een pieptoon laten horen wanneer de balans het maximum, midden of minimum bereikt.

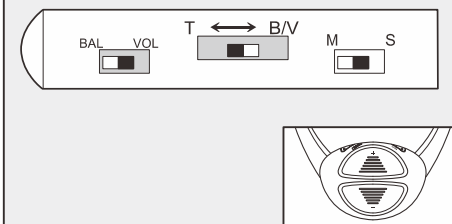
14**Aanpassing van de toon:**

Stel de 'BAL VOL' schuifregelaar op 'VOL' in.

Stel de 'T <-> B/V' schuifregelaar op 'T' in.

Druk op de '+' knop om de hoge tonen te vermeerderen en de lage tonen te verminderen. Druk op de '-' knop om de lage tonen te vermeerderen en de hoge tonen te verminderen.

De koptelefoon zal een pieptoon laten horen wanneer de toonverandering het maximum, midden of minimum bereikt.

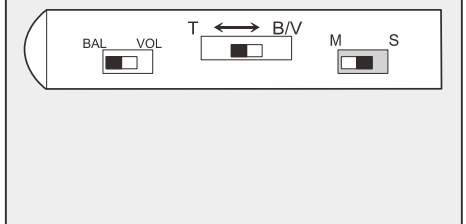
15**Aanpassing van mono of stereo:**

Stel de 'MS' schuifregelaar op 'S' in: de koptelefoon zal het geluid in stereo weergeven.

Stel de 'MS' schuifregelaar op 'M' in: de koptelefoon zal het geluid in mono weergeven.


Batterijstatus & opnieuw opladen: Als de batterijlading laag is, zal het groene lichtje van de koptelefoon knipperen en een lage pieptoon zal te horen zijn via de koptelefoon.

16

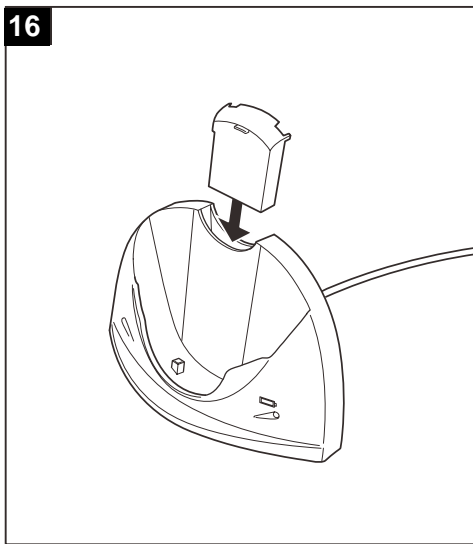

De batterij opladen in het basisstation: Steek de batterij in het oplaadvakje van het basisstation en zet hem aan. Tijdens het opladen zal een rood lichtje branden totdat de batterij volledig opgeladen is.

17

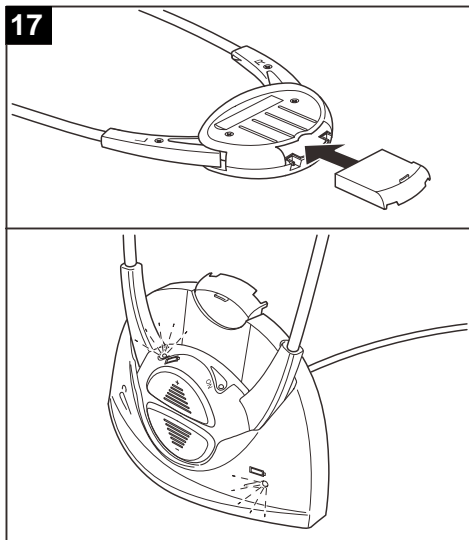


De batterij opladen in de koptelefoon: Steek de batterij in de koptelefoon en zet deze in het basisstation. Tijdens het opladen zal het rood lichtje van de koptelefoon branden totdat de batterij volledig opgeladen is.

Extra koptelefoons verbinden

Belangrijk: Het verbinden moet afgemaakt worden terwijl de lichtjes van het basisstation knipperen. Als de lichtjes ophouden te knipperen voordat het verbinden is afgemaakt, moet de hele procedure herhaald worden.


Om het basisstation en de koptelefoon te verbinden moet u ervoor zorgen dat de batterijen volledig opgeladen zijn en het basisstation verbonden is met de netvoeding. Ga als volgt te werk:

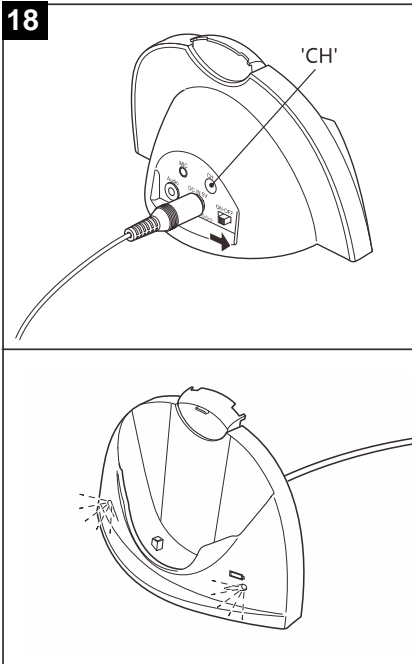

Basisstation: Schakel het basisstation UIT.


Druk op de 'CH' knop en houdt deze ingedrukt. Zet het basisstation AAN terwijl u de 'CH' knop ingedrukt houdt, totdat beide lichtjes aan de voorkant beginnen te knipperen.

Het basisstation kan nu verbonden worden met de koptelefoon(s).

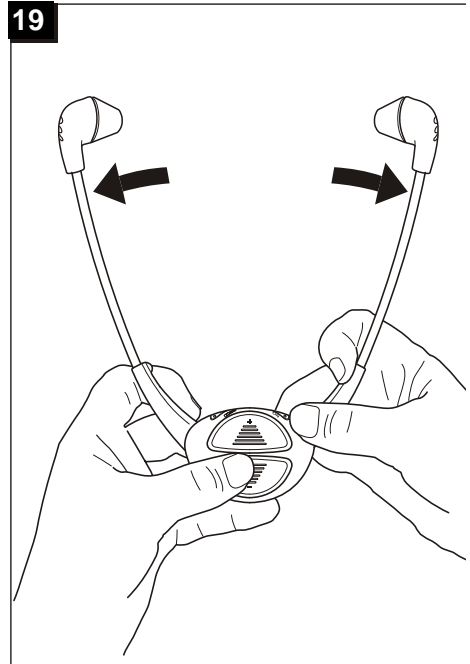

Koptelefoon: Druk op de '-' (minus) knop en houdt deze ingedrukt

Terwijl u deze knop ingedrukt houdt, opent u de 'armen'. Het groene indicatielampje begint te branden. Het verbinden is voltooid als het lampje begint te knipperen.

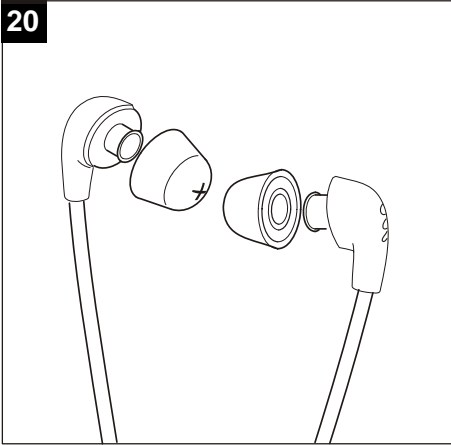

Schoonmaken & Onderhoud

NB: Gebruik GEEN alcohol en schoonmaakmiddelen gebaseerd op chemicaliën of spiritus.

Veeg het basisstation en de koptelefoon met een vochtige doek af.

Verwijder de oordopjes regelmatig en maak deze schoon met warm water en zeep.

Twee typen oordopjes worden meegeleverd. Kies de oordopjes die voor u geschikt zijn.

Reserve- en vervangingsonderdelen

Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar van het verkoopsadres of door te bellen met de Klanten Helpdesk telefoon:
01707 384438

1. Twee batterijen
2. Extra koptelefoons
3. Twee oordopjes van elk type

Klantenservice

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.

E-mail: customerservices@geemarc.com

Algemene Informatie

Specificaties

Digitale 2,4GHz AFHSS transmissie (Adaptive Frequency Hopping) - CD geluidskwaliteit!

79 kanalen (20 hoppingkanalen)

Ontvangstversterking: tot maximaal 125dB spl.

Frequentie: 45 - 15000Hz.

Werkingsijd: tot maximaal 3 uur per batterij

Opladen indien nodig – Koptelefoon laadt zichzelf op als hij in het basisstation wordt gezet.

Het basisstation heeft een oplaadvak voor de extra batterij.

3,5mm stereo stekerbuis voor audio in het basisstation

2,5mm stereo stekerbuis voor de microfoon in het basisstation

Gewicht: 50g

Garantie

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helplijn of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt.

Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

Belangrijk: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

EEG verklaring

Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/UE betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Informatie over afvalverwerking



Lozing van oude elektrische en elektronische apparaten (geldend in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalverwerking)

De symbolen op het product en de verpakking geven aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. In plaats daarvan moet het ingeleverd worden bij de verzamelpunten voor het recycleren van **elektrische en elektronische apparaten**.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggegooid, helpt u potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen, die veroorzaakt kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product, te voorkomen.

Voor gedetailleerde informatie over het recycleren van dit product neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten, de vuilophaaldienst of de winkel waar u het product gekocht heeft.



UGCL7310_NL_v1.4

geemarc™ FRANCE
Telecom SA

Parc de l'Etoile
2 rue Galilée
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex
www.geemarc.com