



PowerTel 92


Handleiding

**Manual de
instrucciones**

**Bruks-
anvisning**

User guide



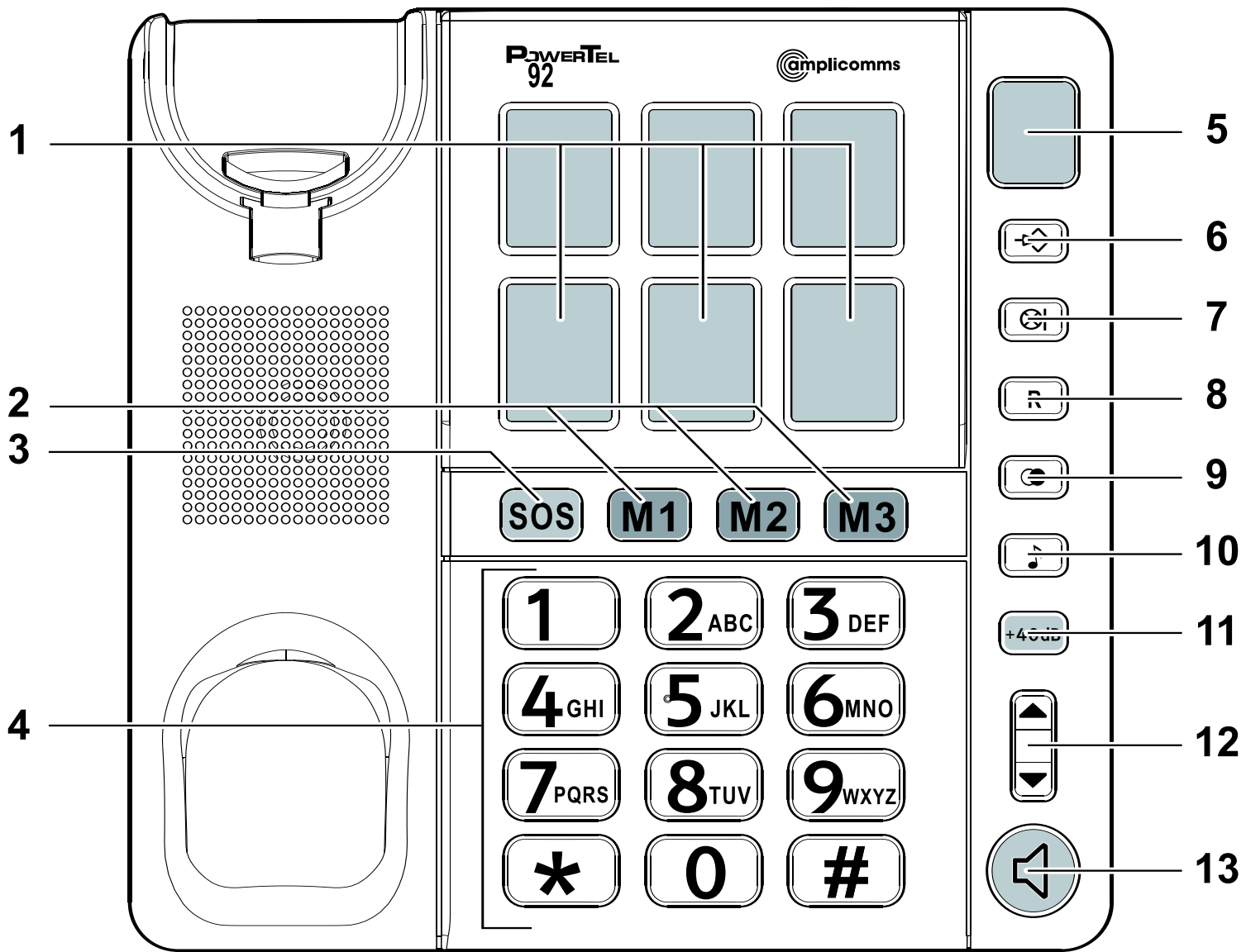

1

2

3

4

POWERTEL
92

@mplicomms

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SOS

M1

M2

M3

1

2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

*

0

#

Overzicht

- 1 Fototoetsen
- 2 Snelkiestoetsen M1/M2/ M3
- 3 SOS-toets
- 4 Selectietoetsen
- 5 Oproep-indicatorlampje
- 6 Geheugentoets
- 7 Geluiddempingstoets
- 8 Flash-toets (R-toets)
- 9 Nummerherhaling
- 10 Klankinstelling
- 11 Geluidsversterker
- 12 Volumetoets
- 13 Handsfree-toets

Overzicht

De telefoon in werking stellen3
 Inhoud van de verpakking controleren.....3
 De telefoon aansluiten4

Telefoneren6
 Handmatig een telefoonnummer invoeren en bellen6
 Een gesprek beëindigen.....6
 Een oproep beantwoorden6
 Luidspreker aan/uit-schakelen7
 De versterking van het hoornvolume inschakelen8
 Volume van hoorn instellen.....8
 De klank van de hoorn instellen.....8
 Volume van luidspreker instellen8
 Microfoon uitschakelen (geluidsdemping).....9
 Een telefoonnummer bellen via nummerherhaling9
 Een direct telefoonnummer / noodnummer bellen.....10



Telefoon instellen	11
Beltoonvolume.....	11
Snelkiesnummers / noodnummers opslaan	11
Knippertijd	12
Bijzonder gebruik.....	13
Bijlage	14
Veiligheidsinstructies.....	14
Rechtmatig gebruik	14
Installatieplek	14
Compatibel met gehoorapparaten.....	15
Afvalverwijdering.....	16
Storingen oplossen	17
Onderhoudsinstructies	17
Garantie	18
Conformiteitsverklaring.....	19



De telefoon in werking stellen

Belangrijk: Lees eerst de veiligheidsinstructies op bladzijde 14 voordat u de telefoon in werking stelt.

Opgelet: Deze telefoon kan heel hoge volumes weergeven wanneer de versterker ingeschakeld is en het volume op maximum ingesteld staat. Wees voorzichtig wanneer u wisselt tussen gebruikers met normaal gehoor en gebruikers met beperkt gehoor.

Inhoud van de verpakking controleren

In de verpakking zit het volgende:

- 1 telefoon (basisstation)
- 1 hoorn
- 1 spiraalkabel voor de hoorn
- 1 telefoonaansluitingskabel
- 1 tafelhoed
- 1 gebruikshandleiding

Belangrijk:


- **Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonaansluitkabel, want met andere kabels werkt de telefoon mogelijk niet.**

De telefoon aansluiten

Verbind eerst de hoorn met het basisstation. Neem een uiteinde van de spiraalkabel en steek het in de ingang aan de onderkant van de hoorn. Steek het andere uiteinde van de spiraalkabel in de ingang van de telefoon.

Sluit de meegeleverde telefoonkabel aan op uw telefooncontactdoos en op de ingang aan de onderkant van het basisstation. Klem de kabel vast in het kabelkanaal.

Wanneer u de telefoon als tafelmodel wilt gebruiken, monteer dan de tafelvoet op de onderkant van de telefoon. De uitsparing van de tafelvoet bevindt zich boven de bovenste ophangvoorziening (zie afbeelding). Zorg ervoor dat alle 4 vergrendelingen correct vastgeklikt zijn.

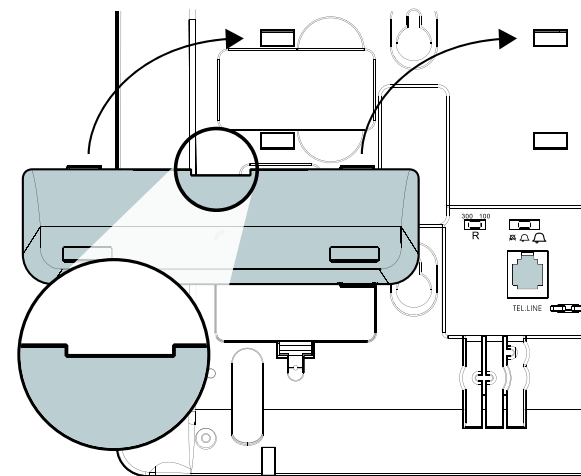


U kunt de telefoon ook aan de wand monteren. In dat geval mag de tafelvoet niet gemonteerd zijn. Om de telefoon op de wand te monteren hebt u twee pluggen en bijbehorende schroeven nodig.

Waarschuwing: In de buurt van de te boren gaten mogen zich geen leidingen (kabel, waterleidingen etc.) bevinden.

Boor op een horizontale lijn twee gaten op een afstand van 83 cm van elkaar. Laat de schroeven ongeveer 5 mm uit de wand steken. Hang de telefoon met behulp van de ophangvoorzieningen aan de schroeven en trek de telefoon een beetje naar onderen.

Draai de hoornhaak 180° om zodat u er de hoorn op kunt hangen.

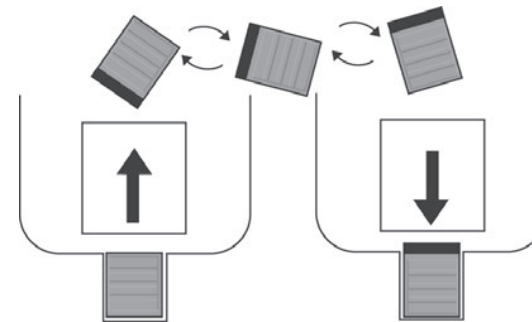

Telefoneren

Handmatig een telefoonnummer invoeren en bellen

Hef de hoorn op en voer het telefoonnummer in

of

Druk op de handsfree-toets  en voer het telefoonnummer in.


De luidspreker wordt ingeschakeld en het telefoonnummer wordt gebeld.

Een gesprek beëindigen

Om een gesprek te beëindigen kunt u:

- de hoorn opleggen;

of

- op de handsfree-toets  drukken als u het gesprek via de luidspreker hebt gevoerd (het rode lampje van de toets brandt).

Een oproep beantwoorden

Hef de hoorn op of druk op de handsfree-toets .

Luidspreker aan/uit-schakelen

Tijdens een telefoongesprek dat u via de hoorn voert, kunt u de luidspreker inschakelen.


Druk daartoe op de handsfree-toets  en leg vervolgens de hoorn op.

Wilt u het gesprek opnieuw verderzetten via de hoorn, hef dan simpelweg de hoorn op.

Houd rekening met het volgende:


- **Tijdens het bellen met de luidspreker spreekt u met uw gesprekspartner via de microfoon die in het basisstation ingebouwd is. Bewaar een afstand van maximaal 50 cm tot de microfoon.**
- **Luide geluiden in uw omgeving worden ook overgedragen en kunnen uw stem moeilijk verstaanbaar maken voor uw gesprekspartner.**

De versterking van het hoornvolume inschakelen


Het volume in de hoorn kan worden versterkt tot +40 dB. Druk daartoe op de toets . De toets is nu verlicht.

Waarschuwing: Dit volume kan bij mensen met normaal gehoor schade aan het gehoor veroorzaken!

Volume van hoorn instellen

U kunt het volume van de hoorn instellen met behulp van de wipschakelaar .

De klank van de hoorn instellen

U kunt de klank van de hoorn aanpassen met behulp van knop  **wanneer de versterking tot +40 dB ingeschakeld is**. Druk kort op de toets om tussen beide opties te schakelen (normale/diepe frequenties gedempt).

Volume van luidspreker instellen

U kunt het volume van de luidspreker instellen met behulp van de wipschakelaar .



Microfoon uitschakelen (geluidsdemping)

Wanneer u bv met iemand in de kamer iets wilt bespreken zonder dat uw gesprekspartner aan de telefoon meeluistert, kunt u de microfoon uitschakelen.

Houd de toets voor geluidsdemping  ingedrukt op de microfoon uit te schakelen. Om de microfoon opnieuw in te schakelen, laat u de toets los.

Een telefoonnummer bellen via nummerherhaling


De telefoon slaat het laatste gekozen telefoonnummer op.

Hef de hoorn op of druk op de handsfree-toets  en vervolgens op de toets  .

Een direct telefoonnummer / noodnummer bellen

Met de fototoetsen of met de snelkiestoetsen M1, M2 en M3 kunt u personen bellen zonder hun telefoonnummer in te voeren. Wanneer u op de toets een foto aanbrengt van de persoon van wie het telefoonnummer in de toets opgeslagen is, hoeft u niet meer het telefoonnummer te onthouden. Gebruik de SOS-toets voor het opslaan van een telefoonnummer dat u in noodgevallen bellen wilt.

Hoe u een telefoonnummer in de snelkiestoets of SOS-toets opslaat, staat beschreven in hoofdstuk 'Snelkiesnummer/noodnummers opslaan' op bladzijde 11.

- Hef de hoorn op of druk op de handsfree-toets .
- Druk op een van de **fototoetsen** of op een van de snelkiestoetsen **SOS**, **M1**, **M2** of **M3**.

Telefoon instellen







Beltoonvolume

U kunt het volume van de beltoon instellen met behulp van de schuiver op de onderkant van de telefoon (Uit - Stil - Luid).

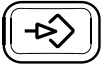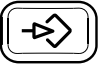


Snelkiesnummers / noodnummers opslaan

In de **fototoetsen** en in de snelkiestoetsen **M1**, **M2** en **M3** kunt u de telefoonnummers opslaan van mensen met wie u regelmatig belt. Gebruik de **SOS-toets** voor het opslaan van een telefoonnummer dat u in noodgevallen bellen wilt.

- Hef de hoorn op.
- Druk op .
- Voer het telefoonnummer in en druk nogmaals op .
- Druk op een van de **fototoetsen** of op een van de snelkiestoetsen , ,  of , waar u het snelkiesnummer wilt opslaan.


Opmerking: Raadpleeg bladzijde 10 om te bellen met behulp van een snelkiesstoets.

Om de foto te veranderen grijpt u, zoals afgebeeld, het deksel vast tussen duim en wijsvinger en heft u het deksel omhoog. Leg er een nieuwe foto in (20 x 25 mm) en druk het deksel terug op de toets.

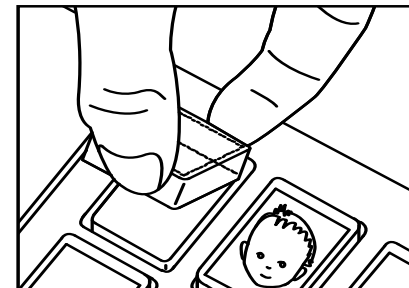

Knippertijd

U kunt de knippertijd instellen met behulp van de schuiver op de onderkant van de telefoon (300 ms - 100 ms).

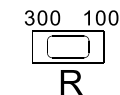


U kunt de flash-functie gebruiken door op de knop  te drukken; zie ook bladzijde 13.

Flashtijd -


Om deze functie in een analoog netwerk te gebruiken, is een flashtijd van 100 milliseconden nodig. In sommige gevallen, bv. bij gebruik van een telefooncentrale, is een flashtijd van 300 milliseconden nodig. Meer informatie vindt u in de gebruikshandleiding van de telefooncentrale.

Bijzonder gebruik

Gebruik in combinatie met een telefooncentrale

Wanneer u uw telefoon gebruikt in combinatie met een telefooncentrale (bv. wanneer u een '0' moet kiezen om een intern nummer te bellen), kunt u voor het gebruiken van de functies van deze telefooncentrale, de knop  gebruiken. Om de vereiste lengte van het flash-signaal te kennen, raadpleegt u de handleiding van uw telefooncentrale.

Kiespauze toevoegen

Wanneer u bij het opslaan van een telefoonnummer in een snelkiestoets of fototoets een kiespauze wilt invoeren, druk dan op de toets  .

Diensten van uw telecomaandbieder gebruiken

U kunt met uw telefoon ook gebruik maken van diensten die door uw telecomaandbieder worden aangeboden, bv. de functies 'Aankloppen' en 'Conferentiegesprek'. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw telecomaandbieder.

Bijlage

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar ze.

Rechtmatig gebruik

Deze telefoon is bedoeld om te telefoneren via een analoog telefoonnetwerk. Elk ander gebruik geldt als onrechtmatig gebruik. Zelf uitgevoerde wijzigingen aan het toestel zijn verboden. Open nooit zelf het toestel en probeer het nooit zelf te repareren.

Installatieplek

Houd rekening met het volgende:

- Plaats uw telefoon op een horizontaal, effen oppervlak of monteer hem op een wand.
- Leg de aansluitkabel zo, dat er niemand over kan struikelen.
- Voorkom verontreiniging door rook, stof, trillingen, chemische producten, vochtigheid, hitte of direct zonlicht.

Compatibel met gehoorapparaten

Deze telefoon is met een T-spoelkoppeling uitgerust, die ervoor zorgt dat de telefoon met de meeste bekende gehoorapparaten compatibel is. Op basis van het uitgebreide assortiment verkrijgbare gehoorapparaten kunnen we geen garantie geven of de telefoon daadwerkelijk met alle modellen gehoorapparaten werkt. Controleer of de immuniteit hoger ligt dan M2. Deze waardering wordt door de fabrikant van het gehoorapparaat toegewezen. Apparaten met een waardering lager dan M2 zijn mogelijk niet compatibel met deze telefoon. Druk, bij het gebruik van deze telefoon, op de "T"-toets op uw gehoorapparaat voor de telespoelen-modus, die uw gehoorapparaat met de telefoon verbindt en een heldere klank zonder achtergrondgeluiden mogelijk maakt. Test of uw gehoorapparaat over de "T"-functie beschikt en of deze automatisch of handmatig in werking treedt. Gehoorapparaten met een hogere immuniteit en automatische T-modus moeten de telefoon automatisch kunnen detecteren en naar de T-positie kunnen omschakelen. Gehoorapparaten met een handmatige T-functie moeten deze functie handmatig op hun gehoorapparaat activeren.

Opgelet: Deze telefoon kan heel hoge geluidsvolumes weergeven wanneer de versterker ingeschakeld is en het volume op maximum ingesteld staat. Wees voorzichtig wanneer u wisselt tussen gebruikers met normaal gehoor en gebruikers met verminderd gehoor.


Afvalverwijdering

U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op gepaste manier als afval te verwijderen. Dit symbool op het apparaat geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet bij het huisvuil geworpen mogen worden.



U moet elektrisch of elektronische apparaten bij een gepast inzamel-punt inleveren.

Werp verpakkingsmateriaal weg volgens de lokale voorschriften.

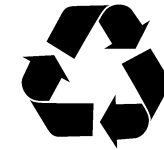

Storingen oplossen

Service-hotline

Ondervindt u problemen met uw telefoon, lees dan eerst de volgende tips. Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer kunt u vinden op onze website www.amplicomms.com Bij garantieclaims kunt u contact opnemen met uw vakhandel. De garantie is 2 jaar vanaf de datum van aankoop geldig.

Geen telefoongesprek mogelijk

- De telefoonaansluitkabel is niet correct aangesloten of defect. Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonaansluitkabel.

Onderhoudsinstructies

- Reinig de behuizing met een zacht en pluisvrij doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden met hulp van de meest moderne productieprocessen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een storingsvrije werking en lange levensduur.

De garantie geldt niet wanneer de oorzaak van een defect van het apparaat bij de telecomaandbieder of bij een tussengeschakeld apparaat ligt. De garantie geldt niet voor de in de toestellen gebruikte batterijen, accu's en accupacks. De garantietijd bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de dag van aankoop.

Binnen de garantieperiode worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een fout in het materiaal of in de productie, gratis gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen door de koper of door derde partijen. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

We behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen te repareren, te vervangen of het toestel te vervangen. Ter vervanging geretourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met voorbedachte rade of uit nalatigheid veroorzaakt is.

Als er tijdens de garantieperiode toch nog een defect optreedt in uw toestel, neem dan contact op met de vakhandel waar u uw AMPLICOMMS-toestel gekocht heb en toon hen uw ontvangstbewijs. Alle garantieclaims moeten bij uw vakhandel worden ingediend. Twee jaar na de aankoop en overhandiging van onze producten kunnen geen garantieclaims meer worden ingediend.

Conformiteitsverklaring

Dit toestel voldoet aan de voorschriften van de Europese Richtlijn:



1999/5/EG inzake radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de bovenvermelde richtlijn wordt op het toestel aangegeven met het CE-teken.

De volledige conformiteitsverklaring is gratis te downloaden op onze website www.amplicomms.com.

