



# PowerTel 96


Handleiding

Manual de  
instrucciones

Bruks-  
anvisning

User guide



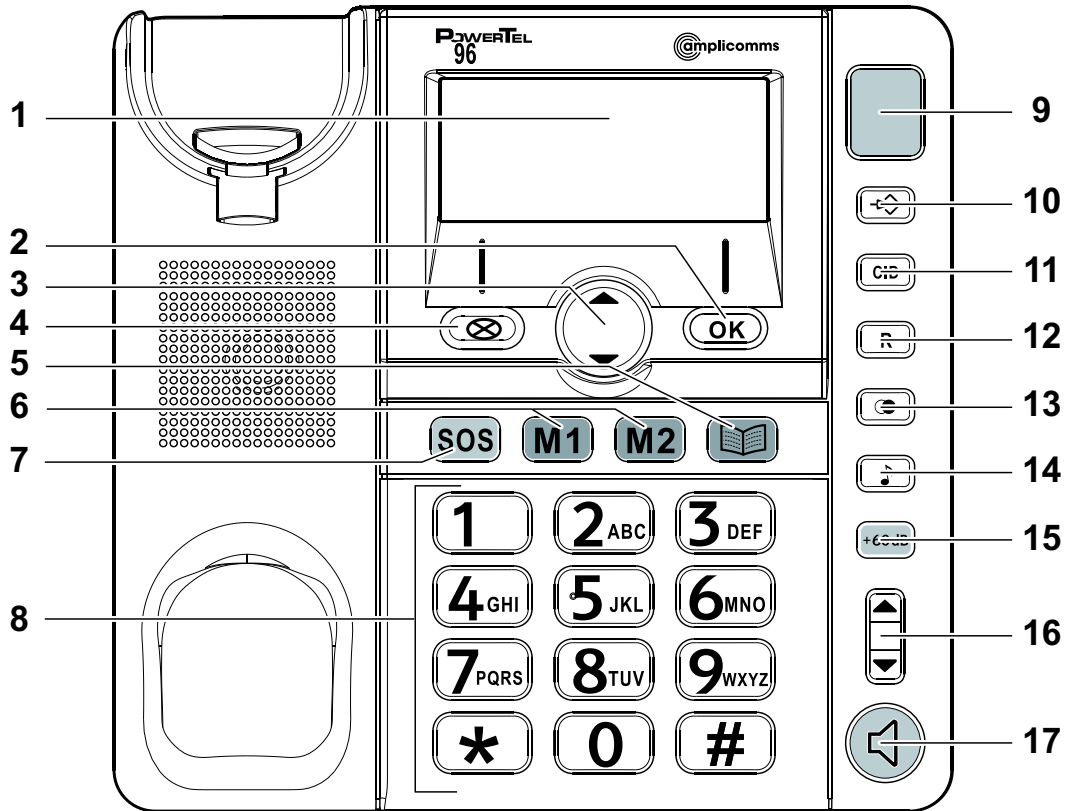

# Overzicht

- 1 Scherm
- 2 OK-toets
- 3 Navigatietoetsen ▲/▼
- 4 Delete-toets
- 5 Telefoonboektoets
- 6 Snelkiestoetsen M1/M2
- 7 SOS-toets
- 8 Toetsenbord
- 9 Oproepweergave
- 10 Opslaan-toets
- 11 CID-toets (terugschakelen naar ruststand)
- 12 Flash-toets (R-toets)
- 13 Nummerherhaling
- 14 Klankregeling
- 15 Versterkertoets
- 16 Volumeregeling
- 17 Handsfree-toets

**Overzicht**

**De telefoon in werking stellen ..... 4**

    Inhoud van de verpakking controleren.....4

    De telefoon aansluiten .....5

    Tril-apparaat .....7

    Indicaties op het scherm.....9

    Aan de slag..... 10

**Telefoneren ..... 13**

    Handmatig een telefoonnummer invoeren en bellen ..... 13

    Een gesprek beëindigen..... 14

    Een oproep beantwoorden ..... 14

    Luidspreker aan/uit-schakelen ..... 14

    De versterking van het hoornvolume inschakelen ..... 15

    Volume van hoorn instellen..... 15

    De klank van de hoorn instellen..... 16

    Volume van luidspreker instellen..... 16

Een telefoonnummer bellen via nummerherhaling .....	16
Een snelkiesnummer/noodnummer bellen .....	17
Een telefoonnummer uit het telefoonboek bellen.....	18
<b>Telefoon instellen.....</b>	<b>19</b>
Beltoonvolume.....	19
Telefoonboek.....	19
Snelkiesnummers/noodnummers opslaan .....	23
Oproeplijst.....	24
Instellingen wijzigen .....	26
Bijzonder gebruik.....	27
<b>Bijlage .....</b>	<b>28</b>
Veiligheidsinstructies.....	28
Rechtmatig gebruik .....	28
Installatieplek .....	28
Adapter .....	29



Compatibel met gehoorapparaten .....	30
Afvalverwijdering.....	31
Storingen oplossen .....	32
Onderhoudsinstructies .....	33
Garantie .....	33
Conformiteitsverklaring.....	34
<b>Notities .....</b>	<b>35</b>



# De telefoon in werking stellen

**Belangrijk:** Lees eerst de veiligheidsinstructies op bladzijde 28 voordat u de telefoon in werking stelt.

**Opgelet:** Deze telefoon kan heel hoge volumes weergeven wanneer de versterker ingeschakeld is en het volume op maximum ingesteld staat. Wees voorzichtig wanneer u wisselt tussen gebruikers met normaal gehoor en gebruikers met beperkt gehoor.

## Inhoud van de verpakking controleren

In de verpakking zit het volgende:

- 1 telefoon (basisstation)
- 1 hoorn
- 1 spiraalkabel voor de hoorn
- 1 telefoonaansluitingskabel
- 1 adapter
- 1 tafelhoed
- 1 gebruikshandleiding

**Belangrijk :**

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonaansluitkabel, want met andere kabels werkt de telefoon mogelijk niet.

## De telefoon aansluiten


Om **alle functies** van de telefoon, bv. **handsfree bellen** en **versterking** van het hoornvolume te kunnen gebruiken, is een **stroombron** nodig. Dit kan de meegeleverde adapter of de (niet-meegeleverde) batterijen zijn.

Leg de batterijen in het geopende batterijvak.

Gebruik uitsluitende batterijen van het type AAA 1,5 V. Let op de juiste poling van de batterij.

Sluit het batterijvak.

Zorg er altijd voor dat de stekkers van de telefoon uit de telefooncontactdoos en/of het stopcontact gehaald zijn voordat u batterijen inlegt of vervangt.

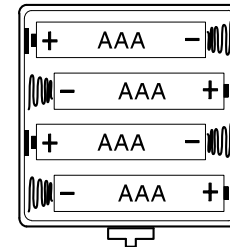





Verbind de hoorn met het basisstation. Neem een uiteinde van de spiraalkabel en steek het in de ingang aan de onderkant van de hoorn. Steek het andere uiteinde van de spiraalkabel in de ingang van de telefoon.

Sluit de meegeleverde telefoonkabel aan op uw telefooncontactdoos en op de ingang aan de onderkant van het basisstation. Klem de kabel vast in het kabelkanaal.

Wanneer u de telefoon als tafelmodel wilt gebruiken, monteer dan de tafelhoek op de onderkant van de telefoon. De uitsparing van de tafelhoek bevindt zich boven de bovenste ophangvoorziening (zie afbeelding). Zorg ervoor dat alle 4 vergrendelingen correct vastgeklikt zijn.

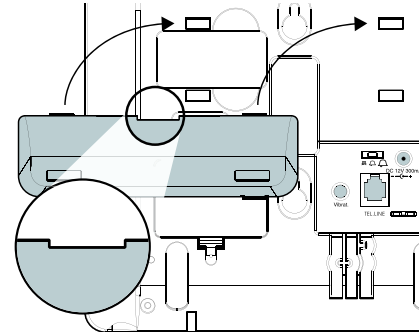

Sluit de adapter aan op de met DC 12V 300 mA gemarkeerde ingang en steek de stekker in een gepast wandstopcontact.

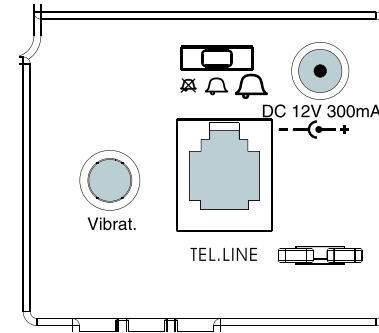

## Tril-apparaat

Om een compatibel tril-apparaat te gebruiken, steekt u de stekker van het tril-apparaat in de met "Vibrat" gemarkeerde ingang van de telefoon.


Er zijn geen verdere instellingen nodig. Het tril-apparaat is niet inbegrepen.

U kunt de telefoon ook aan de wand monteren. In dat geval mag de tafelvoet niet gemonteerd zijn. Om de telefoon op de wand te monteren hebt u twee pluggen en bijbehorende schroeven nodig.

**Waarschuwing: In de buurt van de te boren gaten mogen zich geen leidingen (kabel, waterleidingen etc.) bevinden.**

Boor op een horizontale lijn twee gaten op een afstand van 83 cm van elkaar. Laat de schroeven ongeveer 5 mm uit de wand steken. Hang de telefoon met behulp van de ophangvoorzieningen aan de schroeven en trek de telefoon een beetje naar onderen.

Draai de hoornhaak 180° om zodat u er de hoorn op kunt hangen.

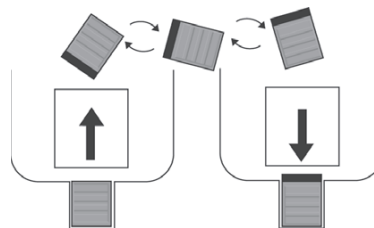

## Indicaties op het scherm



14:45

11/06

Vervang de batterijen.

Weergave van tijd.

Weergave van datum.



U bevindt zich in het telefoonboek.

**CID**

U bevindt zich in de oproeplijst.

**NEW**

Deze oproep in de lijst is nieuw.



Herhaalde oproep vanuit dit nummer.



Weergave van volgnummer in de oproeplijst.

**TOT: XX**

U hebt XX oproepen in de oproeplijst.

**NIEUW: XX**

U hebt XX nieuwe oproepen in de oproeplijst.




De handsfree-functie is ingeschakeld.

## Aan de slag

Wanneer u voor de eerste keer de telefoon met behulp van de adapter op een stopcontact aansluit of de batterijen inlegt, wordt u gevraagd om diverse instellingen in te voeren.

**Wanneer het instellen onderbroken wordt, bv door de hoorn op te heffen, kunt later nog op elk moment de instellingen invoeren.**

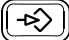Druk kort op de Opslaan-toets  om het instellingenmenu weer te geven.

In het scherm knippert het bericht DEUTSCH (fabrieksinstelling).

Selecteer met  /  de gewenste taal.


Druk kort op  om de instellingen op te slaan.




In het scherm verschijnt LCD-CONTRAST.




Selecteer met  /  een instelling ( 1 2 3 4).




Druk kort op  om de instellingen op te slaan.

In het scherm verschijnt TIJD/DATUM INSTL en de "uren" knipperen.




Voer met  /  het uur in en druk op .

Voer met  /  de minuten in en druk op .

Voer met  /  de dag in en druk op .

Voer met  /  de maand in en druk op .

In het scherm knippert TOON (of PULS)

Selecteer met  /  het kiesproces. De meeste telefoonlijnen maken gebruik van het toongebaseerde kiesproces (TOON). Druk op .

In het scherm knippert FLASH TIJD.





Selecteer met  /  de juiste flashtijd voor uw telefoonlijn in.

Voor de meeste telefoonlijnen is 100 ms (fabrieksinstelling) de juiste flashtijd;

u hoeft niet te veranderen. Druk op .


**Flashtijd - Om deze functie in een analoog netwerk te gebruiken, is een flashtijd van 100 milliseconden nodig. In sommige gevallen, bv. bij gebruik van een telefooncentrale, is een flashtijd van 270 of 600 milliseconden nodig. Meer informatie vindt u in de gebruikshandleiding van de telefooncentrale.**

In het scherm knippert NIEUWE OPR IND..

Druk op  en selecteer met  /  AAN wanneer nieuwe oproepen aangegeven moeten worden. Wanneer u UIT selecteert, dan begint de indicator niet te branden wanneer er een nieuwe oproep binnengekomen is. Druk op .

In het scherm knippert DIENST TOEGANG. Deze functie wordt niet ondersteund. Druk op  om het instellingenmenu te verlaten.

**Uw telefoon is nu klaar voor gebruik en het scherm is in rusttoestand.**

U kunt deze instellingen op elk moment wijzigen. Druk kort op de Opslaan-toets  om het instellingenmenu weer te geven.


# Telefoneren

## Handmatig een telefoonnummer invoeren en bellen

Om iemand te bellen, kunt u:

- eerst de hoorn opheffen en dan het telefoonnummer invoeren;
- een telefoonnummer invoeren en dan de hoorn opnemen;

of

- een telefoonnummer invoeren en op de handsfree-toets  drukken.

De luidspreker wordt ingeschakeld en het telefoonnummer wordt gebeld (voor het gebruik van de luidspreker zijn de adapter/batterijen nodig).

Tijdens een gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

**Opmerking:** Wanneer u eerst het telefoonnummer invoert voordat u de hoorn opneemt of op de handsfree-toets drukt, dan kunt u foute cijfers met

behulp van de Delete-knop  wissen.




## Een gesprek beëindigen

Om een gesprek te beëindigen kunt u:

- de hoorn opleggen;

of

- op de handsfree-toets  drukken als u het gesprek via de luidspreker hebt gevoerd (het rode lampje van de toets brandt).

## Een oproep beantwoorden

Hef de hoorn op of druk op de handsfree-toets .

## Luidspreker aan/uit-schakelen

Tijdens een telefoongesprek dat u via de hoorn voert, kunt u de luidspreker inschakelen.


Druk daartoe op de handsfree-toets  en leg vervolgens de hoorn op.

Wilt u het gesprek opnieuw verderzetten via de hoorn, hef dan simpelweg de hoorn op.

**Houd rekening met het volgende:**

- Tijdens het bellen met de luidspreker spreekt u met uw gesprekspartner via de microfoon die in het basisstation ingebouwd is. Bewaar een afstand van maximaal 50 cm tot de microfoon.
- Luide geluiden in uw omgeving worden ook overgedragen en kunnen uw stem moeilijk verstaanbaar maken voor uw gesprekspartner.

## **De versterking van het hoornvolume inschakelen**

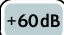
Het volume in de hoorn kan worden versterkt tot +60 dB. Druk daartoe op de toets  . De toets is nu verlicht.

**Waarschuwing: Dit volume kan bij mensen met normaal gehoor schade aan het gehoor veroorzaken!**

## **Volume van hoorn instellen**

U kunt het volume van de hoorn instellen met behulp van de wipschakelaar  .

## De klank van de hoorn instellen


U kunt de klank van de hoorn aanpassen met behulp van knop  **wanneer de versterking tot +60 dB ingeschakeld is**. Druk kort op de toets om tussen beide opties te schakelen (normale/diepe frequenties gedempt).


## Volume van luidspreker instellen

U kunt het volume van de luidspreker instellen met behulp van de wipschakelaar .

## Een telefoonnummer bellen via nummerherhaling

De telefoon slaat het laatste gekozen telefoonnummer op.

Druk op de toets . Het laatst gekozen telefoonnummer verschijnt.

Om andere gekozen telefoonnummers te zien, drukt u meermaals op .

Wanneer het gewenste telefoonnummer weergegeven wordt, heft u de hoorn op of drukt u op de handsfree-toets .

## Een snelkiesnummer/noodnummer bellen

Via de snelkiesnummers/noodnummers kunt u nooddiensten of privépersonen om hulp vragen. Hoe u een telefoonnummer in de snelkiestoets of SOS-toets opslaat, staat beschreven in hoofdstuk "Snelkiestoetsen/SOS-toetsen" op bladzijde 23.

- Hef eerst de hoorn op of druk op de handsfree-toets .
  - Druk kort op de vooraf geprogrammeerde snelkiestoets **SOS**, **M1** of **M2**.
- of
- Druk kort op de vooraf geprogrammeerde snelkiestoets **SOS**, **M1** of **M2**.
  - Hef de hoorn op of druk op de handsfree-toets .

## Een telefoonnummer uit het telefoonboek bellen

Hoe u telefoonnummers kunt opslaan in het telefoonboek, leest u in het hoofdstuk "Telefoonboek" op bladzijde 19.

- Druk op de telefoonboektoets  en selecteer met  /  het gewenste telefoonnummer.
- Hef de hoorn op of druk op de handsfree-toets .

# Telefoon instellen

## Beltoonvolume

U kunt het volume van de beltoon instellen met behulp van de schuiver op de onderkant van de telefoon (Uit - Stil - Luid).



## Telefoonboek

In het telefoonboek kunnen 50 telefoonnummers en namen worden opgeslagen.

- Voer bij alle telefoonnummers ook het regionummer in, zodat ook binnenkomende lokale gesprekken kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek.
- Als het geheugen vol is, dan verschijnt daarover een melding. Om weer plaats te maken, moet u eerst een ander telefoonnummer wissen.
- De namen van de contactpersonen zijn alfabetisch gerangschikt. Om direct naar de gewenste contactpersoon te gaan, voert u de eerste letters ervan in.

## Namen invoeren

De cijfertoetsen zijn voorzien van letters. Door meermaals op de gepaste knop te drukken, kunt u letters, cijfers en speciale tekens invoeren.




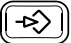
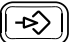
### Tekentabel:

<b>1</b>	[space] + & - / X 1	<b>7</b>	P Q R S 7
<b>2</b>	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2	<b>8</b>	T U V 8 Ü ü
<b>3</b>	D E F ë 3	<b>9</b>	W X Y Z 9
<b>4</b>	G H I ï 4	<b>*</b>	` @ ( ) * < >
<b>5</b>	J K L 5	<b>0</b>	, . : ? = 0
<b>6</b>	M N O Ñ ñ Ö ö 6	<b>#</b>	\$ _ % ! #




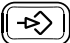
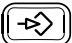
U kunt tekens wissen met .

Om dezelfde letter tweemaal na elkaar in te voeren, drukt u eerst eenmaal op de letter. Wacht vervolgens totdat de cursor (knipperende streep) één plaats verdergesprongen is. Voer nu de letter opnieuw in.


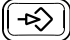
## Contactgegevens aanmaken

- Druk op .
- Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt en bevestig **OPSLAAN?** met .
- Voer het telefoonnummer in en druk op .
- Voer een naam in en druk op .






## Contactgegevens wijzigen

- Druk eerst op  en selecteer met  /  de gewenste contactpersoon.
- Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt en bevestig **BEWERKEN?** door  ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.







- Voer het nieuwe telefoonnummer in en druk op  .
- Voer de nieuwe naam in en druk op  .

## Individuele contactgegevens uit het telefoonboek wissen

- Druk eerst op  en selecteer met  /  de gewenste contactpersoon.
- Druk op  . In het scherm verschijnt `WISSEN?`.
- Druk op  ongeveer 3 seconden ingedrukt. De gegevens worden gewist.

## Alle contactgegevens uit het telefoonboek wissen

- Druk eerst op  en selecteer vervolgens met  /  om het even welke contactpersoon.
- Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt.  
In het scherm verschijnt `ALLES WISSEN?`.




- Houd  opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt.

**Tip: Om het invoerproces te onderbreken, drukt u op de OK-toets.**

**Tip: Om telefoonnummers vanuit het telefoonboek te bellen, raadpleegt u bladzijde 18.**

## Snelkiesnummers/noodnummers opslaan

De drie toetsen SOS, M1 en M2 zijn geheugentoetsen voor drie noodnummers. Gebruik de SOS-toets voor het opslaan van een telefoonnummer dat u in noodgevallen bellen wilt.

- Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt.
- Voer het telefoonnummer in en druk op .
- Voer een naam in en druk op .
- Druk op de snelkiestoets **SOS**, **M1** of **M2**, de toets waar u het telefoonnummer wilt opslaan.



**Opmerking: Raadpleeg bladzijde 17 om te bellen met behulp van een snelkiesstoets.**

## Oproeplijst




**Tip: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet uw telefoonlijn beschikken over telefoonnummertransmissie. Neem contact op met uw telecomaandier voor meer informatie.**

Als uw telefoonlijn beschikt over de CLIP-functie (nummerweergave bij inkomende gesprekken), dan wordt het telefoonnummer van de beller - of zijn/haar naam als die in het telefoonboek opgeslagen is - weergegeven wanneer de telefoon rinkelt. Als de beller de weergave van zijn/haar telefoonnummer geblokkeerd heeft of als het telefoonnummer om andere redenen niet beschikbaar is, dan wordt dit in een bericht gemeld. Het telefoonnummer kan dan niet weergegeven worden en ook niet in de oproeplijst opgeslagen worden.

In ruststand ziet u hoeveel oproepen er in de oproeplijst staan en hoeveel daarvan **NIEUW** (nog niet bekeken) zijn. In totaal worden 32 telefoonnummers in de oproeplijst opgeslagen. Het knipperend rode indicatorlampje geeft aan

dat er nieuwe oproepen in de oproeplijst zijn opgeslage. **Het lampje blijft knipperen zolang er nog niet bekeken oproepen zijn. Om het knipperen te stoppen, drukt u meermaals op  / ** tot u alle oproepen bekeken hebt.





### Telefoonnummer in de oproeplijst weergeven


- Druk op  en selecteer met  /  een oproep.

### Telefoonnummer uit de oproeplijst opslaan in telefoonboek





- Druk op  en selecteer met  /  een oproep.
- Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt en bevestig **NUMMER KOPIEREN?** door  ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.

### Individuele oproepen wissen

- Druk op  en selecteer met  /  een oproep.
- Druk op . In het scherm verschijnt **WISSEN?**.

- Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt. De gegevens worden gewist.

## Volledige oproeplijst wissen

- Druk op  en selecteer met  /  een oproep.
- Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt.

In het scherm verschijnt ALLES WISSEN?.

- Houd  opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt.


## Instellingen wijzigen

U kunt de instellingen die u bij het eerste gebruik van de telefoon (zie bladzijde 10) ingevoerd hebt, veranderen wanneer dit uw telefoonlijn dit vereist of wanneer u de telefoon wilt aansluiten op een telefooncentrale.


Om het **instellingenmenu te openen**, drukt u kort op de toets  .

## Bijzonder gebruik

### Gebruik in combinatie met een telefooncentrale

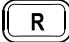Wanneer u uw telefoon gebruikt in combinatie met een telefooncentrale (bv. wanneer u een '0' moet kiezen om een intern nummer te bellen), kunt u voor het gebruiken van de functies van deze telefooncentrale, de knop  gebruiken. Om de vereiste lengte van het flash-signaal te kennen, raadpleegt u de handleiding van uw telefooncentrale.

### Kiespauze toevoegen

Wanneer u bij het opslaan van een telefoonnummer in een snelkiestoets of fototoets een kiespauze wilt invoeren, druk dan op de toets  .

### Diensten van uw telecomaandbieder gebruiken

U kunt met uw telefoon ook gebruik maken van diensten die door uw telecomaandbieder worden aangeboden, bv. de functies 'Aankloppen' en 'Conferentiegesprek'. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw telecomaandbieder.

# Bijlage

## Veiligheidsinstructies

Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar ze.

## Rechtmatig gebruik

Deze telefoon is bedoeld om te telefoneren via een analogo telefoonnetwerk. Elk ander gebruik geldt als onrechtmatig gebruik. Zelf uitgevoerde wijzigingen aan het toestel zijn verboden. Open nooit zelf het toestel en probeer het nooit zelf te repareren.

## Installatieplek

Houd rekening met het volgende:

- Plaats uw telefoon op een horizontaal, effen oppervlak of monteer hem op een wand.
- Leg de aansluitkabel zo, dat er niemand over kan struikelen.
- Zorg ervoor dat het stopcontact met de adapter op elk moment toegankelijk is, om het toestel snel los te kunnen koppelen van het stroomnet.
- Bewaar een afstand van minstens 1 meter van andere elektronische apparaten, om een wederzijdse interferentie te voorkomen.
- Voorkom verontreiniging door rook, stof, trillingen, chemische producten, vochtigheid, hitte of direct zonlicht.

## Adapter

**Opgelet: Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter, want andere adapters kunnen de telefoon beschadigen. Hinder de toegang tot de adapter niet met meubels of andere voorwerpen.**

De adapter voldoet aan de normen van de Europese Unie betreffende Eco-design (Richtlijn 2005/32/EG). Dit betekent dat zowel tijdens gebruik als in ruststand het stroomverbruik in vergelijking met oudere modellen aanzienlijk lager is.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient



## Compatibel met gehoorapparaten

Deze telefoon is met een T-spoelkoppeling uitgerust, die ervoor zorgt dat de telefoon met de meeste bekende gehoorapparaten compatibel is. Op basis van het uitgebreide assortiment verkrijgbare gehoorapparaten kunnen we geen garantie geven of de telefoon daadwerkelijk met alle modellen gehoorapparaten werkt. Controleer of de immuniteit hoger ligt dan M2. Deze waardering wordt door de fabrikant van het gehoorapparaat toegewezen. Apparaten met een waardering lager dan M2 zijn mogelijk niet compatibel met deze telefoon. Druk, bij het gebruik van deze telefoon, op de "T"-toets op uw gehoorapparaat voor de telespoelen-modus, die uw gehoorapparaat met de telefoon verbindt en een heldere klank zonder achtergrondgeluiden mogelijk maakt. Test of uw gehoorapparaat over de "T"-functie beschikt en of deze automatisch of handmatig in werking treedt. Gehoorapparaten met een hogere immuniteit en automatische T-modus moeten de telefoon automatisch kunnen detecteren en naar de T-positie kunnen omschakelen. Gehoorapparaten met een handmatige T-functie moeten deze functie handmatig op hun gehoorapparaat activeren.

**Opgelet: Deze telefoon kan heel hoge geluidsvolumes weergeven wanneer de versterker ingeschakeld is en het volume op maximum ingesteld staat. Wees voorzichtig wanneer u wisselt tussen gebruikers met normaal gehoor en gebruikers met verminderd gehoor.**

## Afvalverwijdering

U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op gepaste manier als afval te verwijderen. Dit symbool op het apparaat geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet bij het huisvuil geworpen mogen worden.

U moet elektrisch of elektronische apparaten bij een gepast inzamel-punt inleveren.

Werp verpakkingsmateriaal weg volgens de lokale voorschriften.



## Storingen oplossen

### Service-hotline

Ondervindt u problemen met uw telefoon, lees dan eerst de volgende tips. Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer kunt u vinden op onze website [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com). Bij garantieclaims kunt u contact opnemen met uw vakhandel. De garantie is 2 jaar vanaf de datum van aankoop geldig.

### Geen telefoongesprek mogelijk

- De telefoonaansluitkabel is niet correct aangesloten of defect. Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonaansluitkabel.

### Enkele functies, bv. de versterking van +60 dB of de handsfree-functie, werken niet

- Controleer of de adapter correct werkt.
- Controleer of het juiste type batterij ingelegd is en dat dat batterijen juist ingelegd zijn en niet leeg zijn.

### Het telefoonnummer wordt niet weergegeven

- Het weergeven van het telefoonnummer is een extra service die door uw telecomaandbieder aangeboden wordt. Neem contact op met uw telecomaandbieder voor meer informatie.
- De beller heeft de transmissie van zijn/haar telefoonnummer geblokkeerd.

## Onderhoudsinstructies

- Reinig de behuizing met een zacht en pluisvrij doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

## Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden met hulp van de meest moderne productieprocessen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een storingsvrije werking en lange levensduur.

De garantie geldt niet wanneer de oorzaak van een defect van het apparaat bij de telecomaandbieder of bij een tussengeschakeld apparaat ligt. De garantie geldt niet voor de in de toestellen gebruikte batterijen, accu's en accupacks. De garantietijd bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de dag van aankoop.

Binnen de garantieperiode worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een fout in het materiaal of in de productie, gratis gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen door de koper of door derde partijen. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

We behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen te repareren, te vervangen of het toestel te vervangen. Ter vervanging gere-

tourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met voorbedachte rade of uit nalatigheid veroorzaakt is.

Als er tijdens de garantieperiode toch nog een defect optreedt in uw toestel, neem dan contact op met de vakhandel waar u uw AMPLICOMMS-toestel gekocht heb en toon hen uw ontvangstbewijs. Alle garantieclaims moeten bij uw vakhandel worden ingediend. Twee jaar na de aankoop en overhandiging van onze producten kunnen geen garantieclaims meer worden ingediend.

## Conformiteitsverklaring

Dit toestel voldoet aan de voorschriften van de Europese Richtlijn:



1999/5/EG inzake radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de bovenvermelde richtlijn wordt op het toestel aangegeven met het CE-teken.

De volledige conformiteitsverklaring is gratis te downloaden op onze website [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com).