



PowerTel 501


Gebbruikers-
handleiding



Overzicht

Ga naar deze pagina voor een beknopte handleiding voor de PowerTel 501

Handtelefoon en lader / basisstation

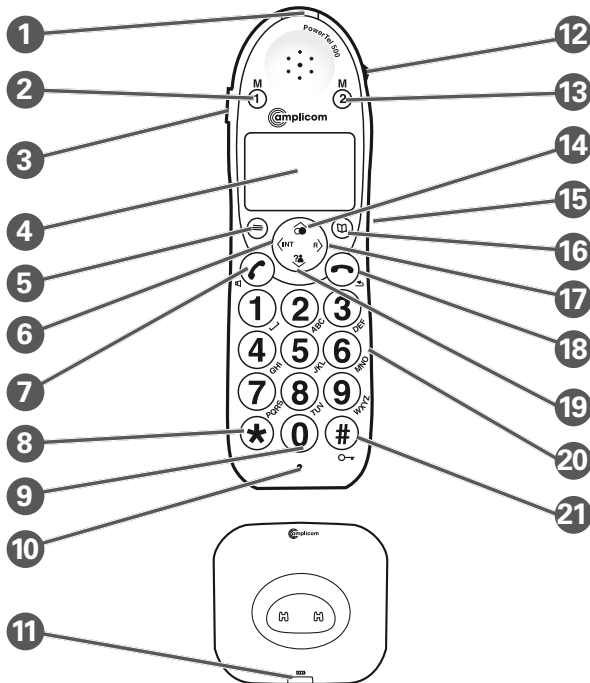

- 1 Lampje ink. telef.
- 2 Geheugen 1
- 3 35dB verst.
- 4 Scherm
- 5 Menu/dempen/wissen inv.
- 6 Intern gespr.
- 7 Extern gespr./handenvrij
- 8 *****/beltoon aan/uit
- 9 Pauze (druk 0 lang in)
- 10 Microfoon
- 11 Laden
- 12 Volume +/-
- 13 Geheugen 2
- 14 +/-herkiezen
- 15 Bus voor headset (headset niet meegel.)
- 16 Telefoonb./opsl./OK
- 17 Terugb.
- 18 Ophangen
- 19 -/lijst ink. telef./equaliser
- 20 Toetsen
- 21 **#**/toetsslot

De telefoon aansluiten.....	5
De inhoud van de doos controleren...	6
Uw handtelefoon en lader / basisstation in vier eenvoudige stappen opzetten	7
Uitleg over de schermpictogrammen op de handtelefoon	14
Toelichting handtelefoonmenu.....	17
Algemene informatie	19
Help en ondersteuning	20
Veiligheidsinformatie.....	20
Afvoeren	23
Technische details	24
Onderhoud en garantie	25
Conformiteitverklaring	27

De telefoon aansluiten

De telefoon aansluiten

Belangrijk: u moet beslist de veiligheidsinformatie op pagina 20 hebben gelezen voordat u uw handtelefoon en lader / basisstation instelt.

De inhoud van de doos controleren

De doos moet de volgende onderdelen bevatten:


- 1 draadloze handtelefoon
- 1 batterijdeksel
- 1 riemklem
- 1 basisstation met lader
- 1 stroomadapter (reeds aangesloten op het basisstation)
- 2 oplaadbare AAA 1,2 V 800 mAh NiMH batterijen

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapters en batterijen die u bij uw PowerTel 501 hebt ontvangen. Anders werkt uw telefoon misschien niet.

Uw handtelefoon en lader / basisstation in vier eenvoudige stappen opzetten

1 Basisstation / lader aansluiten


Steek de andere stroomadapter die reeds is aangesloten op het laadelement in het stopcontact en schakel de stroom in.

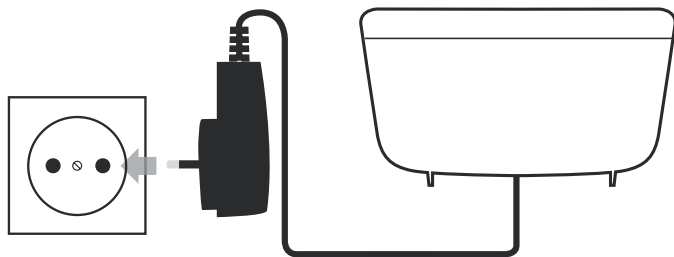

2 Plaats de batterijen

- Plaats de twee oplaadbare batterijen in de draadloze handtelefoon. Zorg ervoor dat ze in de juiste richting wijzen, dus '+' bij '+'.

- ii. Plaats het dekseltje van het batterijvak van de draadloze handtelefoon weer.

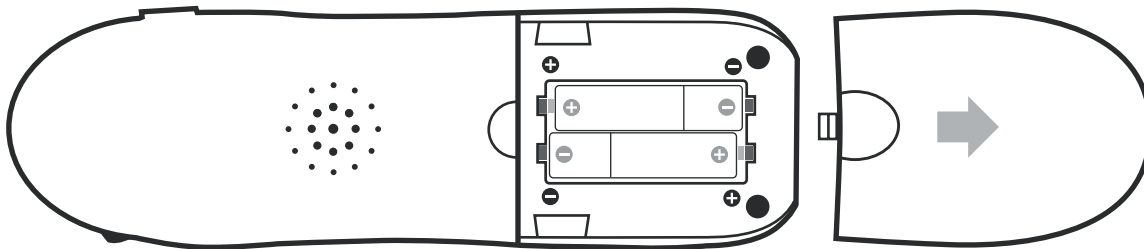

3 De handtelefoon opladen

Zorg dat de handtelefoon goed oplaadt: laat de handtelefoon minimaal 15 uur in het basisstation / lader zitten (controleer dat de wandcontactdoos stroom levert!).

Belangrijk: gebruik uitsluitend de meegeleverde oplaadbare 800mAh NiMH batterijen. Wanneer u na verloop van tijd de batterijen moet vervangen, schaf dan beslist hetzelfde type als de meegeleverde batterijen aan. Gebruik nooit Alkaline batterijen.

4 Uw draadloze handtelefoon registreren


U moet u nieuwe extra handtelefoon op uw PowerTel basisstation registreren voordat u hem kunt gebruiken.

Wanneer u een PowerTel 500, 580 of 580 Combo hebt, registreer deze dan volgens onderstaande instructies. Wanneer u een ouder PowerTel model hebt, volg dan de instructies op pagina 10.



Belangrijk: zorg dat de handtelefoon die u wilt registreren volledig is opgeladen.

Uw handtelefoon registreren op een PowerTel 500, 580 of 580 Combo

Op uw nieuwe PowerTel 501 extra handtelefoon:

Houd  circa 10 seconden ingedrukt tot het scherm toont **Hou Page op basis ingedrukt**. Dit activeert de registratiemodus.


Wanneer u een PowerTel 500 of 580 hebt, doe dan het volgende op het basisstation:

Houd  (500) of  (580) minstens 10 seconden ingedrukt tot het laadlampje op het basisstation knippert.

Opmerking: wanneer u de  of  registratiecode niet kunt zien, kijk dan op pagina 13.







Of:


Wanneer u een PowerTel 580 Combo hebt, doe dan het volgende op het basisstation:

Houd  minstens 10 seconden ingedrukt tot het scherm toont: **Registreren**.


De handtelefoon registreren op een ouder PowerTel model basisstation


Belangrijk: zorg dat de handtelefoon die u wilt registreren volledig is opgeladen.

1. Open het menu door op  te drukken en blader  drie maal tot **Handtelefoon** is geselecteerd en druk op .
2. Druk op  om **Registratie** te selecteren en druk op .
3. Het scherm geeft aan **Basisstation 1**. Druk op . U ziet **PIN**.

4. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de PIN-code in: **0000** (bij het invoeren van iedere '0' verschijnt deze als een *****) en druk dan op  om te bevestigen.

Het scherm toont **Houd de knop Pagina voor basisstation ingedrukt.**

5. Houd de **Pagina** toets  op het PowerTel basisstation ingedrukt tot de handtelefoon piept. Dit kan ongeveer 10–15 seconden duren.

Opmerking: met behulp van de Pagina toets kunt u de registratie verrichten. Deze toets bevindt zich op het PowerTel basisstation waarop u de handtelefoon kunt registreren. De toets vertoont een pictogram als deze . Zie pagina 13 voor een voorbeeld waar deze zich kan bevinden.

6. Uw nieuwe extra handtelefoon is nu geregistreerd op het basisstation. **POWERTEL** en het nummer van de handtelefoon dat op het basisstation is geregistreerd (bijvoorbeeld **POWERTEL 2**), verschijnen.

Wanneer u een DECT/GAP basisstation hebt dat geen PowerTel product is:


Volg de instructies in de gebruikershandleiding van de producent van het basisstation.

De riemklem bevestigen (optioneel)


In de doos vindt u ook een riemklem die u desgewenst aan de achterkant van uw draadloze telefoon kunt bevestigen. Leg de draadloze telefoon op de kop en haal de riem zorgvuldig door de twee openingen aan beide zijden van de telefoon.

Uw handtelefoon is nu klaar voor gebruik!


Handleiding registratietoets

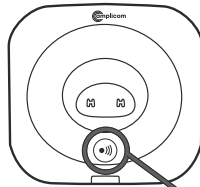

PowerTel
500/502

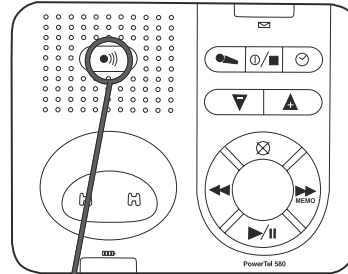

PowerTel 580

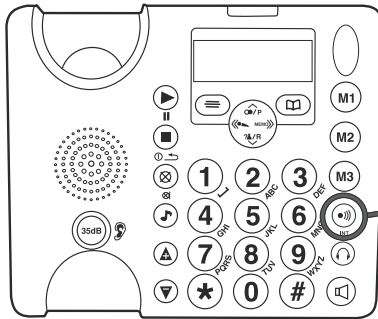

PowerTel 580 Combo

Houd de registratie-
toets  ingedrukt
gedurende ten
minste 10 seconden

Uitleg over de scherpictogrammen op de handtelefoon

De volgende pictogrammen verschijnen in het scherm van de handtelefoon om aan te geven:



Menu



Bevestigen / OK



Telefoonboekmodus



Links wordt meer informatie weergegeven



Rechts wordt meer informatie weergegeven



Batterijstatus



Bel uit



Toetsvergrendeling ingeschakeld



Handenvrije modus



Telefoongesprek gaande



Versterking ontvangstvolumen ingeschakeld (pictogram knippert)



Microfoon van draadloze handtelefoon dempen



U hebt nieuwe telefoontjes



Antwoordapparaat aan (uitsluitend beschikbaar indien geregistreerd op een PowerTel 580, 580 Combo of 680)



Antwoordapparaat uit (uitsluitend beschikbaar indien geregistreerd op een PowerTel 580, 580 Combo of 680)



Wanneer dit lampje brandt, bevindt de draadloze handtelefoon zich binnen het bereik van het basisstation

Wanneer dit lampje knippert, bevindt de handtelefoon zich buiten het bereik van het basisstation





Intern telefoongesprek gaande




Toelichting handtelefoonmenu



In dit gedeelte leert u hoe u het menuscherm op de handtelefoon gebruikt.




Basisaanwijzingen

Open het hoofdmenu: druk op .

Blader door het submenu: open het hoofdmenu en druk op  of .

Selecteer een onderdeel uit het submenu: blader met behulp van  of  tot het gewenste onderdeel is gemarkeerd en druk dan op .

Blader naar een functie: open het submenu en druk op  of .

Een functie selecteren: blader met behulp van  of  tot de gewenste functie is gemarkeerd en druk dan op .

Voer cijfers of letters in: gebruik het toetsenpaneeltje.

Bevestig een invoer of actie of sla deze op: druk op .

Annuleren en terugkeren naar standby: druk op .

Opmerking: wanneer u niets doet, gaat uw telefoon na 20 seconden automatisch op standby.

Algemene informatie

Help en ondersteuning

Veiligheidsinformatie

Lees beslist deze gebruikershandleiding zorgvuldig.

Bedoeld gebruik

Deze telefoon is bedoeld voor gebruik op een openbaar telefoonnet. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als onjuist gebruik. Onbevoegde aanpassing of constructieveranderingen zijn niet toegestaan. Open het toestel **niet** en probeer zelf geen reparatiewerkzaamheden te verrichten.

Plaats van de handtelefoon

Zorg dat de handtelefoon:

- zich op een droge, vlakke en stevige ondergrond bevindt
- samen met het stroomsnoer geen struikelgevaar vormt
- niet wordt gehinderd door meubels
- zich minimaal een meter van andere elektrische apparaten bevindt
- niet is blootgesteld aan rook, stof, trillingen, chemische stoffen, vocht, warmte en direct zonlicht.

Stroomtoevoer

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter die bij de PowerTel 501 is geleverd.

Een stroomstoring kan de telefoon en de apparatuur beïnvloeden. Bij stroomuitval kunt u deze handtelefoon niet gebruiken om te bellen. U moet speciale voorzieningen treffen voor toegang tot nooddiensten.

Energie-efficiënte stroomadapter

De meegeleverde hoofdadapter voldoet aan de eco-ontwerpeisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Het stroomgebruik is dus aanzienlijk lager (zowel indien gebruikt als indien in ruststand) dan de hoofdadapter van het vorige ontwerp.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medische apparatuur

Gebruik de telefoon:

- niet bij medische apparatuur voor noodsituaties of bij medische apparatuur voor intensive care
- tijdens onweer

Wanneer u een hartstimulator hebt, adviseren we u eerst te overleggen met een medisch expert of uw gezondheidsadviseur voordat u dit product gebruikt.

Oplaadbare batterijen

Gooi de batterijen niet in het vuur of in het water.


Compatibiliteit met gehoorapparaten

De telefoon werkt met de meest gangbare gehoorapparaten. Gezien het grote scala aan beschikbare gehoorapparaten kunnen we niet garanderen dat de telefoon volledig werkt bij ieder gehoorapparaat.

Belangrijk: de telefoon kan een heel hoog geluid produceren wanneer Luider is ingeschakeld. Ga behoedzaam te werk wanneer anderen de draadloze handtelefoon gebruiken.

Afvoeren

U moet consumentenelektronica op de juiste wijze afvoeren, volgens de geldende wettelijke voorschriften.

Het  symbool op dit product geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen **gescheiden** van huishoudelijk afval moeten worden ingeleverd op de betreffende inzamelpunten die de openbare afvalautoriteiten hebben aangewezen. Batterijen kunt u ook inleveren op het verkooppunt.

Verpakkingsmaterialen moet u afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.

Technische details

Standaard	DECT ¹ GAP ²
Stroomtoevoer (lader/basisstation)	Toevoer: 230VAC 50Hz 30mA Uitvoer: 7,5VDC 100mA
Bereik	Buiten circa 300 m Binnen circa 50 m
Standby	Maximaal 100 uur
Maximale gespreksduur	Maximaal 10 uur
Oplaadbare batterijen	AAA 1,2V 800mAh NiMH
Kiesmodus	Toon (DTMF) Puls
Optimale omgevingstemperatuur	0 °C tot 45 °C
Optimale relatieve vochtigheid	20% tot 80%
Herkiezen	100, 300 ms

¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = standaard voor draadloze telefoons.

² GAP: Generic Access Profile = norm voor het gebruik van draadloze handtelefoons en basisstations van verschillende producenten.

Onderhoud en garantie

Onderhoud

- Reinig de buitenzijde van de apparatuur met een zachte, pluisvrije doek.
- Gebruik nooit reinigings- of oplosmiddelen.

Garantie

AMPLICOM-apparatuur is vervaardigd en getest volgens de laatste productiemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en hoogontwikkelde technologieën garanderen een storingsvrij functioneren en een lange levensduur. De garantievoorwaarden gelden niet wanneer een fout van de netbeheerder of een eventuele bedrijfscentrale de oorzaak is voor de apparaatstoring. De garantievoorwaarden gelden niet voor oplaadbare batterijen of accupakketten die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

Alle gebreken tengevolge van materiaal- of productfouten die tijdens de garantieperiode ontstaan, verhelpen we gratis. Het aanspraakrecht volgens de garantievoorwaarden vervalt na interventie van de koper of derde partijen. De garantie dekt geen schade tengevolge van onvakkundige hantering of gebruik, onjuiste plaatsing of opslag, ondeskundige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

Bij klachten behouden we ons het recht voor defecte onderdelen te repareren of te vervangen, of een vervangend apparaat te leveren. Vervangen onderdelen of apparaten worden ons eigendom.

Restitutierechten zijn in schadegevallen uitgesloten, wanneer er geen bewijzen van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de fabrikant aanwezig zijn.

Wanneer uw AMPLICOM-apparaat binnen de garantieperiode een defect laat zien, brengt u het samen met het aankoopbewijs terug naar de winkelier waar u het hebt gekocht. Alle aanspraakrechten op garantie volgens deze overeenkomst mag u uitsluitend doen gelden tegenover uw leverancier.

Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten kunt u geen aanspraakrechten op garantie meer doen gelden.

Conformiteitverklaring

Dit toestel voldoet aan de eisen uit de volgende EU-richtlijnen:

1999/5 EU-richtlijnen over draadloze installaties en telecommunicatiezendinginrichtingen en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

Het CE-symbool op het toestel bevestigt de conformiteit met de bovengenoemde richtlijn.

De volledige conformiteitverklaring kunt u gratis van onze website www.amplicom.eu halen.





Distributeur: Audioline GmbH, D-41460 Neuss, Duitsland

APRIL 10 – ISSUE 1.