



PowerTel 57



Overzicht




Distributeur: Audioline GmbH, D-41460 Neuss, Duitsland
AUG 10 – ISSUE 1.



**Gebruikers-
handleiding**

Ga naar deze pagina voor een beknopte handleiding voor de PowerTel 57

PowerTel 57 Snoertelefoontoestel

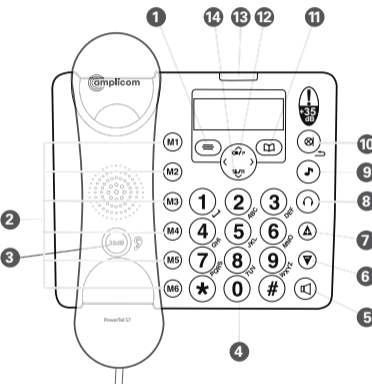

- 1 Menu/OK
- 2 Snelkies-toetsen/gebruikersprofielen
- 3 35dB verst. (onder hoorn)
- 4 Toetsen
- 5 Handenvrij
- 6 Volume -
- 7 Volume +
- 8 Headset
- 9 Equaliser
- 10 Dempen/wissen
- 11 Telefoonboek
- 12 Naar boven/herkiezen/pauze
- 13 Lampje ink. telef.
- 14 Naar onder/lijt ink. telef./terugb.

De telefoon aansluiten	7	Het volume van het luidsprekertje instellen	18
De inhoud van de doos controleren ..	8	Het volume van het luidsprekertje versterken.....	18
Uw telefoonsysteem opzetten	9	De handenvrije functie	19
Sluit het snoertelefoontoestel aan	9	Gebruik de handenvrije functie om te bellen.....	19
Uitleg over de scherm-pictogrammen	11	De toon instellen.....	19
Toelichting telefoonmenu	12	De duur van het telefoongesprek aflezen.....	19
De menuschermen op uw telefoon gebruiken	12	Basisaanwijzingen	12
De menuschermen op uw telefoon gebruiken	12	Bellen en telefoontjes ontvangen	15
Basisaanwijzingen	12	Bellen	16
Bellen en telefoontjes ontvangen	15	Een gesprek beëindigen	16
Een headset (niet meegeleverd) gebruiken.....	20	Een telefoongesprek voeren	16
Dempen	20	Nummerherhaling	16
Wat te doen bij een stroomstoring ..	20	Een voorgaande beller terugbellen ..	17
Het menu gebruiken	21	Een nummer uit het telefoonboek draaien.....	17
Prioriteitsinstelling / standaardinstelling	22	Een nummer kiezen met de snelkies-toetsen	18
Gebruikersprofielen	22		
De profielnaam veranderen	22		
Het hoornvolume van een profiel veranderen	23		

De boostinstelling van een profiel veranderen	23	Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek	32
De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen	24	Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren	33
Kiezen welk profiel u wilt gebruiken	25	Een telefoonboekitem bewerken	33
Beltoon veranderen	25	Een telefoonboekitem verwijderen .	34
Beltoonvolume veranderen	26	Alle telefoonboekitems verwijderen	35
De toetstoon in- of uitschakelen	26	De snelkieslijst gebruiken	36
Scherfcontrast veranderen	27	De naam en het snelkiesnummer opslaan	36
Scherftaal veranderen	27	Een snelkiesnummer bewerken	36
Versterking opslaan	28	Een snelkiesnummer verwijderen ...	37
Nummer voorlezen	28	De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken.....	38
Pendelen tussen hoofdletters en kleine letters	29	Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan in het telefoonboek of de snelkieslijst (M1, M2, M3, M4, M5, M6)	39
Datum / tijd veranderen	30	Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen	39
Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie	30		
Terugstellen op de standaard instellingen	31		
Het telefoonboek gebruiken.....	32		

Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes verwijderen	40
Gebruik op een bedrijfscentrale	41
De herkiestijd instellen	42
Een kiespauze invoegen	42
Aanvullende diensten gebruiken	43
De kiesmethode instellen.....	43
Help en ondersteuning	45
Helpgids.....	46
Algemene informatie	49
Veiligheidsinformatie.....	50
Afvoeren.....	52
Technische details	53
Standaard instellingen	54
Onderhoud en garantie	55
Conformiteitverklaring	56
Index	57

De telefoon aansluiten

De telefoon aansluiten

Belangrijk: u moet beslist de veiligheidsinformatie op pagina 50 hebben gelezen voordat u uw telefoonsysteem instelt.

De inhoud van de doos controleren

De doos moet de volgende onderdelen bevatten:


- 1 snoertelefoontoestel
- 1 handtelefoon en kabel
- 1 stroomadapter
- 1 telefoonkabel

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapters en telefoonlijn die u bij uw PowerTel 57 hebt ontvangen. Anders werkt uw telefoon misschien niet.

Uw telefoonsysteem opzetten

Sluit het snoertelefoontoestel aan

1. Steek de stroomadapter in de met  gemarkeerde contrastekker aan de achterzijde van het snoertelefoontoestel en het andere einde in een stopcontact.
2. Steek de telefoonkabel in de met  gemarkeerde contrastekker aan de achterzijde van het basisstation en het andere einde in een stopcontact.
3. Steek het ene einde van de hoornsnoer in de handtelefoon en het andere einde in de zijkant van het toestel.

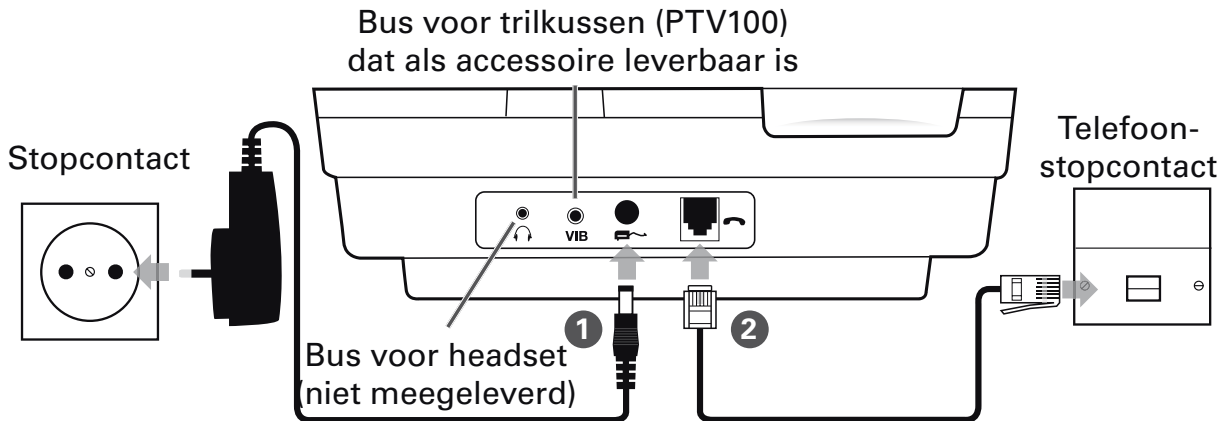

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapters en telefoonlijn die u bij uw PowerTel 57 hebt ontvangen. Anders werkt uw telefoon misschien niet.

Eigen telefooncentrales: wanneer uw telefoon is aangesloten op een eigen telefooncentrale (wanneer u bijvoorbeeld een 9 moet draaien voor een buitenlijn), volg dan de stappen op pagina 42).

Uw PowerTel 57 is nu klaar voor gebruik!

Uitleg over de scherpictogrammen

De volgende pictogrammen verschijnen in het scherm van het snoertelefoon-toestel om aan te geven:



Telefoonboekmodus



Bel uit



Handenvrije modus



Telefoongesprek gaande



Versterking ontvangstvolume ingeschakeld (pictogram knippert)



Microfoon van hoorn dempen



U hebt nieuwe telefoontjes



Nieuwe telefoontjes in de lijst van inkomende telefoontjes



Oude telefoontjes in de lijst van inkomende telefoontjes

Toelichting telefoonmenu




In dit gedeelte leert u de menuschermen op het telefoon gebruiken.





De menuschermen op uw telefoon gebruiken




Wanneer u uw telefoons hebt ingesteld en alle aansluitingen zijn gemaakt, gebruik dan het menuscherm om met uw telefoons te werken, van telefoontjes plegen en ontvangen tot gebruikersprofielen opstellen en telefoonnummers opslaan.





Basisaanwijzingen

Open het hoofdmenu: druk op .

Blader door het submenu: open het hoofdmenu en druk op   / P of  / R.

Selecteer een onderdeel uit het submenu: blader met behulp van   / P of  / R tot het gewenste onderdeel is gemarkeerd en druk dan op .

Blader naar een functie: open het submenu en druk op   / P of  / R.

Een functie selecteren: blader met behulp van   / P of  / R tot de gewenste functie is gemarkeerd en druk dan op .

Voer cijfers of letters in: gebruik het toetsenpaneeltje.

Bevestig een invoer of actie of sla deze op: druk op .

Annuleren en terugkeren naar standby: druk op .


Opmerking: wanneer u niets doet, gaat uw telefoon na 20 seconden automatisch op standby.

Bellen en tele- foontjes ontvangen

Bellen en telefoontjes ontvangen

Bellen


Ieder nummer dat u intoetst, wordt voorgelezen. Daartoe moet u echter wel de functie Nummer voorlezen aanzetten, zie pagina 28.

1. Voer het te draaien nummer in met behulp van het toetsenpaneeltje op het basisstation.
2. Wanneer u een vergissing maakt, drukt u op  om het laatste cijfer te wissen.
3. U draait het nummer door de hoorn op te nemen of op  te drukken.
4. U beëindigt het gesprek door de hoorn weer op de haak te leggen.

Een gesprek beëindigen

Wanneer u de snoertelefoon gebruikt, legt u de hoorn weer op de haak.

Een telefoongeprek voeren

U neemt gewoon de hoorn van de haak of drukt op  om te antwoorden in de handenvrije modus.

Nummerherhaling


Uw telefoon slaat de laatste vijf nummers op die u hebt gedraaid (maximaal 24 cijfers per nummer).

1. Open de herkieslijst door op /P te drukken.
2. Blader met de knoppen /P of /R door de herkieslijst tot het nummer dat u wilt draaien, wordt gemarkeerd. U draait het nummer door gewoon de hoorn van de haak te nemen of in de handenvrije modus op  te drukken.

Opmerking: wanneer u de functie Nr. lezen hebt ingeschakeld, leest het apparaat ieder nummer voor wanneer u door de herkieslijst bladert. Zie pagina 28, Nummer voorlezen, voor details.

Een voorgaande beller terugbellen





De telefoon slaat de laatste 30 inkomende telefoontjes op.

1. U opent de lijst van inkomende telefoontjes met de knoppen .
2. Blader met   of  naar het nummer dat u wilt terugbellen en neem de hoorn van de haak of druk op  om in de handenvrije modus te bellen.

Opmerking: wanneer u de functie Nummer voorlezen hebt ingeschakeld, leest het apparaat ieder nummer voor wanneer u door de lijst van inkomende telefoontjes bladert. Zie pagina 28, Nummer voorlezen, voor details.

Een nummer uit het telefoonboek draaien








Wanneer u een nummer wilt opslaan in het telefoonboek, kijk dan op pagina 33.

1. U opent het telefoonboek met de knoppen .
2. Blader met   of  naar het juiste nummer en neem de hoorn van de haak of druk op  om in de handenvrije modus te kiezen.

Opmerking: wanneer u de functie Nummer voorlezen hebt ingeschakeld, leest het apparaat ieder nummer voor wanneer u door het telefoonboek bladert. Zie pagina 28, Nummer voorlezen, voor details.

Een nummer kiezen met de snelkiestoetsen



Wanneer u een nummer wilt opslaan onder een snelkiestoets, kijk dan op pagina 36.

1. Bij de snoertelefoon kiest u het snelkiesnummer met , , , , , of .
2. Neem de hoorn van de haak of druk  om in de handenvrije modus te kiezen.


Opmerking: wanneer u de functie Nr. lezen hebt ingeschakeld en u drukt op een snelkiestoets, zal het apparaat het nummer voorlezen. Zie pagina 28, Nummer voorlezen, voor details.

Het volume van het luidsprekertje instellen

Het volume van het luidsprekertje in de hoorn is hoger dan van een standaard telefoon. U kunt het volume echter aanpassen aan uw wensen.

Wanneer u tijdens een telefoongesprek het volume wilt veranderen, drukt u op  of .

Het volume van het luidsprekertje versterken

Wanneer u tijdens een telefoongesprek het volume wilt veranderen, drukt u op  . In het scherm knippert een oorpictogram om aan te geven dat de versterker aan staat.

De handenvrije functie

Gebruik de handenvrije functie om een telefoongesprek te voeren zonder de hoorn vast te houden of om andere mensen in de kamer te mee te laten luisteren naar het telefoongesprek.




Gebruik de handenvrije functie om te bellen

Met  schakelt u de handenvrije modus aan of uit.

Met  of  (5 niveaus) stelt u het volume voor handenvrij bellen in.

Opmerking: tijdens het handenvrij bellen kunt u het volume verhogen met  .

De toon instellen



Wanneer u tijdens een telefoongesprek de toon wilt veranderen, drukt u op  en  of  tot u de juiste toon hebt gevonden.

Opmerking: het veranderen van de toon kan invloed hebben op het volume; misschien moet u bij een andere toon ook het volume aanpassen.

De duur van het telefoongesprek aflezen

Op het scherm kunt u de duur van het telefoongesprek lezen.


Een headset (niet meegeleverd) gebruiken

Steek de headset gewoon in de contactbus voor de headset (symbool  aan de achterkant van het toestel en druk op .

Dempen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon dempen zodat de persoon aan de andere kant van de lijn u niet kan horen.

Met  schakelt u de microfoon uit. Het scherm geeft aan **Microf. uit**.

Wanneer u opnieuw op  drukt, schakelt u de microfoon weer in. Het scherm geeft aan **Microf. aan**.

Wat te doen bij een stroomstoring

Wanneer de stroom uitvalt, kunt u de snoertelefoon wel blijven gebruiken om te bellen en telefoontjes aan te nemen, hoewel het lampje voor inkomende telefoontjes niet brandt, de gegevens van de beller niet worden opgeslagen en het scherm uitsluitend oplicht wanneer u de hoorn van de haak neemt.

Tevens kunt u:

- nummers bekijken en kiezen met behulp van het telefoonboek of de toetsen , , , ,  en 
- naar buiten bellen met behulp **Recall** (Flash) en pauzeren
- het volume van het luidsprekertje in de hoorn instellen
- de microfoon dempen

Het menu gebruiken

Het menu gebruiken

Voor informatie over het telefoonboek gaat u naar pagina 32.

Prioriteitsinstelling / standaardinstelling










Wanneer u de hoofdgebruiker van deze telefoon bent, moet u in het menu de ideale instellingen voor uzelf kiezen. Deze instellingen worden automatisch opgeroepen wanneer u wilt bellen of een telefoontje wilt aannemen.






Anderen in uw huishouden kunnen de functie voor het gebruikersprofiel gebruiken en hun voorkeursinstellingen voor volume, versterking en equalizer blijven ook bewaard en toegepast zoals hieronder aangegeven.

Gebruikersprofielen

U kunt zes verschillende gebruikersprofielen opslaan, ieder met verschillende instellingen voor de variabelen Volume, Boost en Equalizer. Teven kunt u ieder profiel persoonlijker maken door het een naam te geven (maximaal 10 letters).


De profielnaam veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  of  **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  of  tot **Profiel 1, 2, 3, 4, 5** of **6** is geselecteerd en druk op .





- Blader met behulp van /P of /R tot Naam is geselecteerd en druk op .
- Wis de huidige naam door op  te drukken.
- Voer een nieuwe naam in (maximaal 10 letters) en druk op .










Het hoornvolume van een profiel veranderen

U kunt vijf volumeniveaus kiezen.














- Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van /P of /R tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .
- Blader met behulp van /P of /R tot **Profiel 1, 2, 3, 4, 5** of **6** is geselecteerd en druk op .
- Blader met behulp van /P of /R tot **Volume** is geselecteerd en druk op .
- U ziet het huidige volumeniveau (bijvoorbeeld **4**).
- Verander het volumeniveau met behulp van /P of /R en druk op .


De boostinstelling van een profiel veranderen

- Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van /P of /R tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .







2. Blader met behulp van  of /R tot **Profiel 1, 2, 3, 4, 5** of **6** is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van  of /R tot **Luider** is geselecteerd en druk op .
4. U ziet de huidige versterkerinstelling (dat wil zeggen **Aan** of **Uit**).
5. Verander de versterkerinstelling met behulp van  of /R en druk op .

De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen







1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of /R tot **Profiel 1, 2, 3, 4, 5** of **6** is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van  of /R tot **Equalizer** is geselecteerd en druk op .
4. U ziet de huidige tooninstelling.
5. Verander de tooninstelling met behulp van  of /R en druk op .

Opmerking: wanneer u klaar bent met het veranderen van profielinstellingen, drukt u op  om het toestel weer gebruiksgereed te maken.

Kiezen welk profiel u wilt gebruiken

Voordat u een inkomend telefoontje beantwoordt, drukt u op , , , ,  of , afhankelijk van het profiel dat u wilt gebruiken. Het scherm geeft uw keuze weer en u kunt het inkomende telefoontje op gebruikelijke wijze beantwoorden.



Opmerking: u kunt geen profiel kiezen in de handenvrije modus.





Wanneer u wilt bellen, houdt u voordat u het nummer draait , , , ,  of  ingedrukt, afhankelijk van het profiel dat u wilt gebruiken. Het scherm geeft uw keuze weer en u kunt nu uw uitgaande telefoontjes op gebruikelijke wijze plegen.

Opmerking: wanneer u het profiel hebt gekozen dat u wilt gebruiken, hebt u ongeveer 30 seconden de tijd om onder dat profiel het nummer te draaien voordat het systeem terugkeert naar de standaard instellingen.

Beltoon veranderen

U kunt kiezen uit tien beltonen.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Beltoon** is geselecteerd en druk op .
2. Blader door  of  om **Extern** te selecteren en druk op .
3. U ziet de huidige instellingen (bijvoorbeeld **Melodie 8**).

4. Blader met behulp van   / **P** of  / **R** tot de beltoon is geselecteerd die u wilt gebruiken en druk op .










Beltoonvolume veranderen

U kunt kiezen uit vijf volumeniveaus en **Uit**.

1. Druk op de knoppen  of  om het beltoonvolume te veranderen. Wanneer u op de knoppen drukt, hoort u de volumeniveaus en ziet u ze op het scherm (bijvoorbeeld **Belvolume 5**). Wanneer u het beltoonvolume wilt uitschakelen, kiest u de optie **Belvol. uit**.

De toetstoon in- of uitschakelen

Dit is de toon die u hoort wanneer u een knop indrukt.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van   / **P** of  / **R** tot **Toetstoon** is geselecteerd en druk op .
2. U ziet de huidige toetstooninstelling (dat wil zeggen **Aan** of **Uit**).
3. Schakel de toetstoon in of uit met behulp van   / **P** of  / **R** en druk op .

Schermincontrast veranderen

U kunt kiezen uit vijf contrastniveaus voor het scherm.


1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Display** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Contrast** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige contrastinstelling (bijvoorbeeld 4).
4. Verander de contrastinstelling met behulp van  of  en druk op .










Schermtaal veranderen

U kunt kiezen uit vijf talen voor de handsets: **Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans** en **Nederlands**.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Display** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Taal** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige taalinstelling (bijvoorbeeld **Nederlands**).
4. Verander de taalinstelling met behulp van  of  en druk op .





Versterking opslaan







Wanneer u deze functie op **Aan** zet en u de knop  gebruikt, zal de draadloze handtelefoon die u gebruikt de laatste versterkerinstelling onthouden en gebruiken voor al uw gesprekken.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R tot Instell. is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of /R tot **Geh. boost** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige opgeslagen instelling voor versterking (bijvoorbeeld **Uit**).
4. Verander de opgeslagen instelling voor de versterking met behulp van  of /R en druk op .

Nummer voorlezen

Wanneer deze functie is ingesteld op **Aan**: iedere keer wanneer u een nummer invoert of een snelkiesstoets indrukt om te bellen, of wanneer u door het telefoonboek bladert, leest de telefoon de nummers uit de nummerherhalinglijst of lijst van inkomende telefoontjes (wanneer u bent geabonneerd op een nummerweergave-/nummerherkenningdienst) voor u op. Voor deze dienst bent u misschien een driemaandelijks bijdrage verschuldigd, zie pagina 38 voor meer informatie.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R tot Instell. is geselecteerd en druk op .

2. Blader met behulp van /P of /R tot **Nr. lezen** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instelling voor het voorlezen van het nummer (bijvoorbeeld **Aan**).
4. Verander de instelling voor het voorlezen van het nummer met behulp van /P of /R en druk op .

Pendelen tussen hoofdletters en kleine letters

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van /P of /R tot **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van /P of /R tot **Hfdl.op/af** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instelling (bijvoorbeeld **ABC**).
4. Verander de instelling met behulp van /P of /R en druk op .

Voor informatie over de kiesmethode gaat u naar pagina 43.

Voor informatie over herkiezen gaat u naar pagina 42.

Datum / tijd veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van /P of /R tot **Alarm/Klok** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van /P of /R tot **Dag & Tijd** is geselecteerd en druk op .
3. Voer de dag, maand en jaar in en druk op .
4. Voer de uren in (de handset heeft een 24-uurs notatie) en druk op .

Opmerking: U kunt ook de toetsen < en > gebruiken om heen en weer te manoeuvreren zodat u de gewenste veranderingen kunt aanbrengen.






Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van /P of /R tot **Alarm/Klok** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van /P of /R tot **Tijdformaat** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instelling voor het tijdformaat (bijvoorbeeld **24 h**).
4. Verander het tijdformaat met behulp van /P of /R en druk op .

Terugstellen op de standaard instellingen

U kunt de handset eenvoudig terugstellen op zijn standaard instellingen. Op pagina 54 vindt u een overzicht van de standaard instellingen.

Opmerking: wanneer u dat doet, verwijdt u ook de inhoud van het telefoonboek, de gesprekken, de lijst met nummerherhaling, berichten in het antwoordapparaat en memo's.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Reset** is geselecteerd en druk op .
2. Voer het systeem PIN (standaard = **0000**) in en druk op  om uw keuze te bevestigen of op  om te annuleren.

Het telefoonboek gebruiken

U kunt (in alfabetische volgorde) maximaal 200 namen en hun telefoonnummers opslaan in het telefoonboek. Wanneer u een nummer snel wilt terugvinden, voert u gewoon de eerste letter van de naam in die u hebt opgeslagen.

Opmerking: iedere naam in het telefoonboek kan maximaal 16 letters lang zijn en het bijbehorende nummer maximaal 24 cijfers lang.

Belangrijk: vergeet niet voor ieder nummer ook het netnummer in te voeren.

Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek







U ziet dat de toetsen zowel letters als cijfers hebben. Wanneer u een toets indrukt, toont deze een aantal maal alle cijfers en letters die hij vertegenwoordigt.

Hier zijn een paar toetsen die misschien handig voor u zijn bij het invoeren van namen en telefoonnummers.








- Druk op **1** voor een spatie.
- Druk op **⊗** om een ingevoerd(e) cijfer of letter te verwijderen.
- Druk op **0** voor bepaalde speciale tekens.










Opmerking: wanneer u een letter tweemaal achter elkaar wilt invoeren, voert u gewoon de letter in en wacht u tot de cursor erachter verschijnt. Vervolgens voert u de letter nogmaals in.

Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren










1. Houd  circa 2 seconden ingedrukt tot het scherm **Naam inv.** en een knipperende cursor toont.
2. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam in en druk op .
3. Voer het telefoonnummer in en druk op .
4. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op . Op het scherm leest u **Opgeslagen**.

Een telefoonboekitem bewerken








1. Druk op .
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt bewerken.
3. Open opties door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Bewerken** is geselecteerd en druk op .

4. Bewerk de naam met  of  om de cursor te verplaatsen, voer de nieuwe letters in en druk op .
5. Bewerk het nummer met  of  om de cursor te verplaatsen, voer de nieuwe cijfers in en druk op .
6. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op . Op het scherm leest u **Opgeslagen**.







Een telefoonboekitem verwijderen

1. Druk op .
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt verwijderen.
3. Open opties door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Wis invoer** is geselecteerd en druk op .
4. Op het scherm leest u **Wis invoer?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.











Alle telefoonboekitems verwijderen

1. Druk op .
2. Open opties door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Wis Alles** is geselecteerd en druk op .
3. Op het scherm leest u **Wis Alles?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.










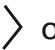

De snelkieslijst gebruiken

Onder iedere snelkiestoets kunt u een naam (maximaal 16 tekens) en telefoonnummer (maximaal 24 cijfers) opslaan: , , , ,  en .

De naam en het snelkiesnummer opslaan












1. Kies met één van de knoppen , , , ,  en  de snelkiestoets waaronder u de naam en het snelkiesnummer wilt opslaan.
2. Druk tweemaal op .
3. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam in en druk op .
4. Voer het telefoonnummer in en druk op .
5. Blader met behulp van  of  of  of  om een beltoon voor deze naam / dit nummer te kiezen en druk op . Op het scherm leest u **Opgeslagen**.

Een snelkiesnummer bewerken

1. Kies het snelkiesnummer dat u wilt bewerken en druk op één van de knoppen , , , ,  en .
2. Druk op . **Bewerken** verschijnt, druk nogmaals op .
3. Bewerk de naam met  of  om de cursor te verplaatsen, voer de nieuwe letters in en druk op .


4. Bewerk het nummer met \langle of \rangle om de cursor te verplaatsen, voer de nieuwe cijfers in en druk op .
5. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op . Op het scherm leest u **Opgeslagen**.




Een snelkiesnummer verwijderen

1. Kies het snelkiesnummer dat u wilt verwijderen en druk op één van de knoppen , , , ,  of .
2. Druk op . Druk op /R om **Wissen** te selecteren en druk op .
3. Op het scherm leest u **Wis invoer?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.

De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken













Opmerking: u moet eerst een abonnement nemen op de nummerweergave-/nummerherkenningdienst van uw netbeheerder. Misschien moet u een driemaandelijks bijdrage betalen.

De nummers van inkomende telefoontjes moeten dan in de lijst van inkomende telefoontjes verschijnen. Wanneer u het nummer van de beller in uw telefoonboek opslaat, ziet u de naam in plaats van het nummer. U kunt maximaal 30 inkomende telefoontjes opslaan in de lijst van inkomende telefoontjes (16 letters per naam en 23 cijfers per nummer). Het aantal nieuw ontvangen telefoontjes verschijnt in het scherm met het knipperende  pictogram. Wanneer het nummer niet verschijnt, komt dat omdat degene die u belt zijn identificatie (ID voor nummerweergave) niet will vrijgeven.

Met  kunt u de lijst van inkomende telefoontjes openen en bekijken. U kunt gewoon met  of  door de lijst bladeren.







Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan in het telefoonboek of de snelkieslijst (M1, M2, M3, M4, M5, M6)

U kunt de nummers van inkomende telefoontjes gemakkelijk opslaan in het telefoonboek of de snelkieslijst.










1. Druk op  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt opslaan.
3. Open opties door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Opsl. in PB** of **M1, M2, M3, M4, M5** of **M6** is geselecteerd en druk op .
4. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam voor dit opgeslagen nummer in en druk op .
5. Bewerk de naam wanneer dat nodig mocht zijn en druk op .
6. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op .

Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen

1. Druk op  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt verwijderen.

3. Open opties door op  te drukken en blader met behulp van  of /R tot **Wis invoer** is geselecteerd en druk op .
4. Op het scherm leest u **Wis invoer?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.

Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes verwijderen

1. Druk op /R om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van  of  om een item te selecteren.
3. Open opties door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Wis Alles?** is geselecteerd en druk op .
4. Op het scherm leest u **Wis Alles?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.

Gebruik op een bedrijfscentrale

Gebruik op een bedrijfscentrale


Wanneer uw telefoons zijn verbonden met een centrale (bijvoorbeeld wanneer u een 9 moet draaien om een buitenlijn te krijgen), kunt u telefoontjes doorzenden en tergubellen gebruiken met behulp van de **R**-knop. In de handleiding van de bedrijfscentrale leest u welke tijden u moet gebruiken voor gebruik op de centrale. U kunt kiezen uit twee herkiestijden: 100 ms (**Kort**) en 300 ms (**Lang**).

De herkiestijd instellen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van /P of /R tot **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van /P of /R tot **Recall** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige herkiesinstelling (bijvoorbeeld **Kort**).
4. Kies met behulp van /P of /R de gewenste instelling voor de herkiestijd (Kort of Lang) en druk op .

Een kiespauze invoegen

Wanneer u een nummer voor een buitenlijn moet draaien en het duurt even voordat de verbinding plaatsvindt, kunt u een pauze invoegen zodat u niet hoeft te wachten om de kiestoon te horen.

Wanneer u een kiespauze wilt invoegen, voert u gewoon het nummer in dat u altijd draait voor een buitenlijn en drukt u vervolgens op /P. Een **P** op het scherm toont dat een kiespauze actief is.











Opmerking: u kunt ook een kiespauze invoegen bij een telefoonnummer in het telefoonboek.

Aanvullende diensten gebruiken

Uw telefoon moet diensten kunnen ondersteunen zoals wisselgesprek en telefonische vergadering. U moet contact opnemen met de netbeheerder voor meer informatie over deze diensten.

De kiesmethode instellen

U kunt kiezen uit twee kiesmethoden: toon en puls. **TOON** is de standaardinstelling en dit is de correcte instelling voor gebruik binnen Europa.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Kiesmode** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige kiesmodus-instelling (bijvoorbeeld **Tonen**).
4. Kies met behulp van  of  de gewenste kiesmodus (Tonen of Puls) en druk op .

Help en ondersteuning

Help en ondersteuning

Sommige problemen kunt u eenvoudig oplossen door de stroomtoevoer te verbreken. In dergelijke gevallen moet u de stroomtoevoer naar het basisstation 20 minuten uitschakelen en de batterijen uit de draadloze handtelefoon even lang verwijderd laten. Vervolgens herstelt u de stroomtoevoer weer en plaatst u de batterijen terug.

Helpgids

Ik kan niet bellen

1. Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten. Als dat zo is, kan er een storing zijn. Controleer of u de meegeleverde telefoonkabel gebruikt.
2. Controleer dat alle voedingen zijn aangesloten, zijn ingeschakeld en werken.
3. Test de telefoonlijn en het telefoonstopcontact met een andere telefoon.

Het telefoonsysteem reageert niet

Misschien moet u het terugstellen op de standaardinstellingen. Zie pagina 31.

Nummerweergave (identificatie van de beller) werkt niet

1. Controleer dat uw netbeheerder deze dienst biedt. Bel uw netbeheerder.
2. De beller heeft misschien een geheim nummer.

Mijn telefoon gaat niet over

Controleer of de bel is ingeschakeld. Zie pagina 26.



U gebruikt de telefoon en er treedt interferentie op in het luidsprekertje en / of de internetverbinding is erg langzaam

Wanneer u breedbandinternet op de telefoonlijn hebt, moet u een ADSL-filter tussen de telefoon en het wandstopcontact plaatsen.

Algemene informatie

Veiligheidsinformatie

Lees beslist deze gebruikershandleiding zorgvuldig.

Bedoeld gebruik

Deze telefoon is bedoeld voor gebruik op een openbaar telefoonnet. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als onjuist gebruik. Onbevoegde aanpassing of constructieveranderingen zijn niet toegestaan. Open het toestel **niet** en probeer zelf geen reparatiewerkzaamheden te verrichten.

Plaats van de telefoon

Zorg dat de telefoon:

- zich op een droge, vlakke en stevige ondergrond bevindt
- samen met het stroomsnoer geen struikelgevaar vormt
- niet wordt gehinderd door meubels
- zich minimaal een meter van andere elektrische apparaten bevindt
- niet is blootgesteld aan rook, stof, trillingen, chemische stoffen, vocht, warmte en direct zonlicht.

Stroomtoevoer

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter die bij de PowerTel 57 is geleverd.

Een stroomstoring kan de telefoon en de apparatuur beïnvloeden. Bij een stroomstoring werkt uitsluitend de snoertelefoon. Zie pagina 20.

Energie-efficiënte stroomadapter

De meegeleverde hoofdadapter voldoet aan de eco-ontwerpeisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Het stroomgebruik is dus aanzienlijk lager (zowel indien gebruikt als indien in ruststand) dan de hoofdadapter van het vorige ontwerp.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medische apparatuur

Gebruik de telefoon:

- niet bij medische apparatuur voor noodsituaties of bij medische apparatuur voor intensive care
- tijdens onweer

Wanneer u een hartstimulator hebt, adviseren we u eerst te overleggen met een medisch expert of uw gezondheidsadviseur voordat u dit product gebruikt.


Compatibiliteit met gehoorapparaten

De telefoon werkt met de meest gangbare gehoorapparaten. Gezien het grote scala aan beschikbare gehoorapparaten kunnen we niet garanderen dat de telefoon volledig werkt bij ieder gehoorapparaat.

Belangrijk: de telefoon kan een heel hoog geluid produceren wanneer Luider is ingeschakeld. Ga behoedzaam te werk wanneer anderen de draadloze handtelefoon gebruiken.

Afvoeren

U moet consumentenelektronica op de juiste wijze afvoeren, volgens de geldende wettelijke voorschriften.

Het  symbool op dit product geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen **gescheiden** van huishoudelijk afval moeten worden ingeleverd op de betreffende inzamelpunten die de openbare afvalautoriteiten hebben aangewezen. Batterijen kunt u ook inleveren op het verkooppunt. Verpakkingsmaterialen moet u afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.



Technische details

Stroomtoevoer (basisstation)	Toevoer: 230VAC 50Hz Uitvoer: 12VDC 670mA
Kiesmodus	Toon (DTMF) Puls
Optimale omgevingstemperatuur	0 °C tot 45 °C
Optimale relatieve vochtigheid	20% tot 80%
Herkiezen	100, 300 ms

Standaard instellingen

Voor het terugstellen naar de standaardinstellingen raadpleegt u pagina 31.

Taal	Nederlands
Tijdformaat	24-uurs
Beltoonvolume	5
Beltoon	8
Toetstoon	Aan
Contrast	4
Versterkergeheugen	Uit
Nummer voorlezen	On
Herkiestijd	100 ms
Kiesmodus	Toon
PIN-code	0000

Onderhoud en garantie

Onderhoud

- Reinig de buitenzijde van de apparatuur met een zachte, pluisvrije doek.
- Gebruik nooit reinigings- of oplosmiddelen.

Garantie

AMPLICOM-apparatuur is vervaardigd en getest volgens de laatste productiemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en hoogontwikkelde technologieën garanderen een storingsvrij functioneren en een lange levensduur. De garantievoorwaarden gelden niet wanneer een fout van de netbeheerder of een eventuele bedrijfscentrale de oorzaak is voor de apparaatstoring. De garantievoorwaarden gelden niet voor oplaadbare batterijen of accupakketten die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

Alle gebreken tengevolge van materiaal- of productfouten die tijdens de garantieperiode ontstaan, verhelpen we gratis. Het aanspraakrecht volgens de garantievoorwaarden vervalt na interventie van de koper of derde partijen. De garantie dekt geen schade tengevolge van onvakkundige hantering of gebruik, onjuiste plaatsing of opslag, ondeskundige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

Bij klachten behouden we ons het recht voor defecte onderdelen te repareren of te vervangen, of een vervangend apparaat te leveren. Vervangen onderdelen of apparaten worden ons eigendom.

Restitutierechten zijn in schadegevallen uitgesloten, wanneer er geen bewijzen van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de fabrikant aanwezig zijn.

Wanneer uw AMPLICOM-apparaat binnen de garantieperiode een defect laat zien, brengt u het samen met het aankoopbewijs terug naar de winkelier waar u het hebt gekocht. Alle aanspraakrechten op garantie volgens deze overeenkomst mag u uitsluitend doen gelden tegenover uw leverancier.

Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten kunt u geen aanspraakrechten op garantie meer doen gelden.

Conformiteitverklaring

Dit toestel voldoet aan de eisen uit de volgende EU-richtlijnen:

1999/5 EU-richtlijnen over draadloze installaties en telecommunicatiezendinginrichtingen en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.



Het CE-symbool op het toestel bevestigt de conformiteit met de bovengenoemde richtlijn.

De volledige conformiteitverklaring kunt u gratis van onze website www.amplicom.eu halen.

Index

B

Basisstation en de lader verbinden 9
Bellen 16
Beltoon 25
Beltoonvolume 26
Boostgeheugen 28
Buitenzijde verwisselen 29

C

Conformiteitverklaring 56
Contrast 27

D

Datum / tijd 30
Door het menu bladeren 12
Duur van het telefoongesprek 19

E

Eigen telefooncentrales 42
Equalizer 24

G

Garantie 55
Gebruikersprofielen 22-25
Gemiste oproepen terugbellen 17
Gesprek beëindigen 16

H

Handenvrij bellen 19
Headset gebruiken 20
Help 46
Herkiezen 42

I

Inhoud van de doos controleren 8
Item voor een snelkiestoets opslaan 36
Items uit de lijst van inkomende telefoontjes weergeven 38

K

Kiesmodus 43
Kiespause 42

L

Lijst van inkomende telefoontjes 38-40

M

Menu gebruiken 22
Menugids 12-13
Microfoon dempen 20

N

Naam in het telefoonboek invoeren 33
Nummer voorlezen 28
Nummerherhaling 16
Nummers kiezen met een
snelkiestoets 18
Nummers uit het telefoonboek
kiezen 17

O

Onderhoud 55

P

Pauze 42
Profielen 22-25

S

Schermincontrast 27
Schermpictogrammen 11
Schermtaal 27
Snelkiestoetsen 18, 36-37
Standaard instellingen 54
Stroomstoring 20

T

Taal 27
Technische details 53
Telefoonboek 17, 32
Telefoonboekitem opslaan 33
Telefoongeprek voeren 16
Terugstellen op de standaard
instellingen 31
Tijd voor het herkiezen instellen 42
Toetstoon aan / uit 26
Toon 19

V

Veiligheidsinformatie 50-52
Volume 18, 19, 26
Volume van het luidsprekertje in de
hoorn instellen 18
Volume van het luidsprekertje in de
hoorn vergroten 18
Volume voor handenvrij bellen
instellen 19

W

Weergave gespreksduur 19



