



PowerTel 601


Gebuikers-
handleiding



Overzicht

Ga naar deze pagina voor een beknopte handleiding voor de PowerTel 601

Pols-trilalarm

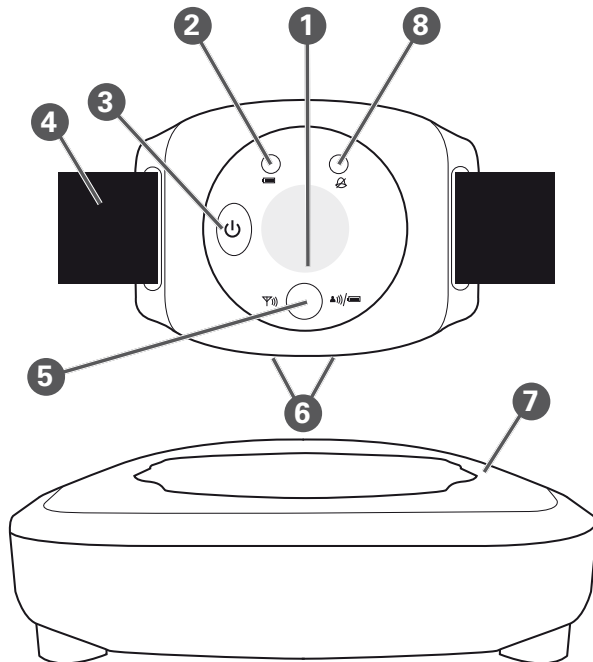

- 1 Noodknop
Opmerking: is uitsluitend te gebruiken in combinatie met de PowerTel 680 telefoon
- 2 Rood waarschuwingslampje batterijlading
- 3 Stroom aan/uit
- 4 Polsbandje
- 5 Registratiemodus / geen ontvangst / batterij leeg 2 kleuren: groen of rood lampje
- 6 Laadcontacten
- 7 Laadelement
- 8 Groen lampje inkomend telefoontje

Aan de slag	4	Batterij bijna leeg.....	12
De inhoud van de doos controleren ..	4	Inkomende telefoontjes.....	12
Uw pols-trilalarm in vier eenvoudige stappen opzetten	4	Help en ondersteuning	13
1 Het laadelement plaatsen	4	Helpgids.....	14
2 Sluit het laadelement aan	5	Algemene informatie	17
3 Plaats het pols-trilalarm in het laadelement	5	Veiligheidsinformatie.....	18
4 Het pols-trilalarm registreren bij uw PowerTel telefoon.....	6	Plaats laadelement	18
Handleiding registratietoets	8	Stroomtoevoer.....	18
Het pols-trilalarm gebruiken	9	Energie-efficiënte stroomadapter	19
Inschakelen.....	10	Stroomstoring.....	19
Uitschakelen.....	11	Medische apparatuur	19
Polsbandje.....	11	Afvoeren.....	20
Zorg ervoor dat het pols-trilalarm ontvangst heeft.....	11	Onderhoud	20
		Garantie	21
		Conformiteitverklaring	23

Aan de slag

Aan de slag

Belangrijk: u moet beslist de veiligheidsinformatie op pagina 18 hebben gelezen voordat u uw telefoonsysteem instelt.

De inhoud van de doos controleren

De doos moet de volgende onderdelen bevatten:

- 1 pols-trilalarm met een polsbandje
- 1 laadeenheid met vastgemaakte adapterstekker

Uw pols-trilalarm in vier eenvoudige stappen opzetten

1 Het laadelement plaatsen

Controleer dat het laadelement:

- zich op een droge, vlakke en stevige ondergrond bevindt
- samen met het stroomsnoer geen struikelgevaar vormt
- zich minimaal een meter van andere elektrische apparaten bevindt


2 Sluit het laadelement aan

Steek het laadelement in de stroomborn. En zorg dat de wandcontactdoos stroom levert.

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter die bij uw PowerTel 601 geleverd is, anders werkt het mogelijk niet goed en kan het schade toebrengen aan het product.

3 Plaats het pols-trilalarm in het laadelement

Wanneer u het pols-trilalarm in diens laadelement plaatst, controleer dan dat de twee aansluitpunten neerwaarts in het laadelement wijzen. Wanneer er een rood lampje op het trilalarm brandt, wordt hij opgeladen.

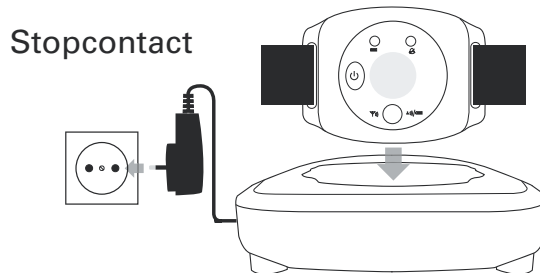

Uw pols-trilalarm heeft een interne oplaadbare batterij die moet worden opgeladen voordat u het alarm gaat gebruiken. Voor voldoende oplading moet het trilalarm minimaal 10 uur worden opgeladen. Pas dan kunt u hem gebruiken. (Zorg ervoor dat de wandcontactdoos stroom levert!).

Opmerking: wanneer de batterij goed is opgeladen, kan zij vijf dagen mee. Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het grote rode lampje langzaam. Dan moet u de batterij opnieuw minimaal 10 uur bijladen.


4 Het pols-trilalarm registreren bij uw PowerTel telefoon

Belangrijk: als u uw pols-trilalarm apart van uw telefoon aangeschaft hebt, dient u het alarm te registreren om het te laten werken.


- i. Schakel het pols-trilalarm in door de knop  circa 5 seconden ingedrukt te houden.
- ii. Houd de knop  nogmaals ingedrukt, nu voor circa 12 seconden, tot het registratielampje snel groen knippert. Het pols-trilalarm is circa 1 minuut in registratie.

iii. Activeer de registratiemodus op uw PowerTel telefoon.

Als u een PowerTel 500, 502 of PowerTel 580 telefoon gebruikt:

Houd de registratietoets  circa tien seconden ingedrukt totdat het oplaadlampje knippert.

Als u een PowerTel 580 combo gebruikt:


Ingedrukt houden  tot u **Registreer** op het scherm ziet staan.

Opmerking: wanneer u de registratietoets  niet kunt zien, zie pagina 8.


iv. Wanneer het registratielampje groen brandt (dat wil zeggen, niet knippert), weet u dat het pols-trilalarm geregistreerd en gebruiksgereed is.

Opmerking: wanneer het registratielampje groen en rood knippert, is het pols-trilalarm óf niet geregistreerd óf heeft het geen ontvangst. Plaats het alarm dichterbij uw PowerTel telefoon om te garanderen dat u ontvangst krijgt.


Handleiding registratietoets

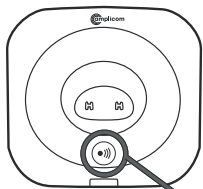

PowerTel
500/502

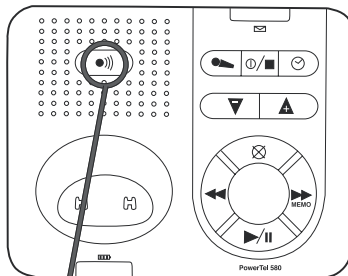

PowerTel 580

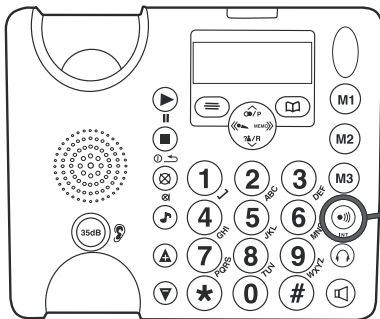


PowerTel 580 Combo


Houd de registratie-
toets  ingedrukt
gedurende ten minste
10 seconden

Het pols-trilalarm gebruiken

Het pols-trilalarm gebruiken


Inschakelen

Houd de knop  circa 5 seconden ingedrukt. Het groene lampje met de waarschuwingsdriehoek gaat branden.

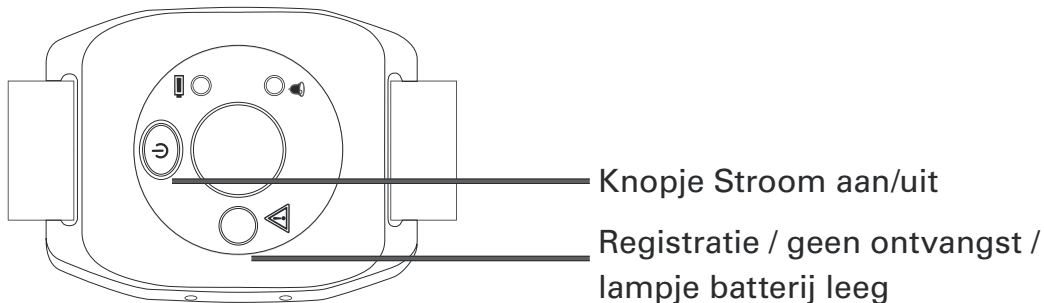

Opmerking: een groen en vervolgens rood knipperend lampje geeft aan dat het pols-trilalarm óf niet is geregistreerd óf buiten het "zendbereik" is. Plaats hem korter bij de PowerTel telefoon om te garanderen dat u ontvangst krijgt. Wanneer het lampje blijft knipperen, kijk dan op pagina 6 voor registratie-instructies.

Uitschakelen

Houd de knop  circa 5 seconden ingedrukt. Het groene lampje gaat dan uit.

Polsbandje

Bij de aflevering is het polsbandje reeds aan het pols-trilalarm bevestigd, maar wanneer u het later opnieuw wilt bevestigen of aanpassen, volg dan deze instructies:

Werk het bandje door de gleuf aan een zijde van het trilalarm (voor naar achter), achter de achterkant langs en dan door de andere gleuf (achter naar voor), op de manier die u juist vindt voor het trilalarm.

Nu kunt u uw pols-trilalarm comfortabel dragen en vastmaken met de velcro bevestiging.

Zorg ervoor dat het pols-trilalarm ontvangst heeft

Wanneer het pols-trilalarm zich niet binnen het ontvangstgebied bevindt, werkt het niet. Wanneer het grote lampje goen en rood knippert, weet u dat het geen ontvangst heeft. In dat geval moet u het trilalarm korter bij de PowerTel telefoon brengen.

Batterij bijna leeg

Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat het grote lampje rood knipperen. Dan moet u het pols-trilalarm 10 uur in het basisstation / de lader zetten om de batterij op te laden.

Inkomende telefoontjes

U weet dat u inkomende oproep hebt wanneer uw pols-trilalarm trilt en het belsymbool op het scherm groen knippert.

Beantwoord en beëindig uw oproep op de gebruikelijke manier met uw PowerTel telefoon.

Help en ondersteuning

Help en ondersteuning

Helpgids

Mijn pols-trilalarm trilt niet wanneer ik een inkomende oproep krijg

Controleer of uw pols-trilalarm geregistreerd is. Als u uw pols-trilalarm apart van uw telefoon aangeschaft hebt, dient u het te registreren. Zie Stap 4 van Aan de slag op pagina 6.

Als u uw pols-trilalarm geregistreerd hebt en het nog steeds niet trilt bij een inkomende oproep, kan het zijn dat u zich buiten het zendbereik van uw telefoon bevindt. Plaats het alarm dichterbij de telefoon.

Mijn scherm knippert rood

De batterij is bijna leeg. Laad het pols-trilalarm op door het op het laadelement te plaatsen. Het duurt ongeveer tien uur om het alarm volledig op te laden.

Algemene informatie

Veiligheidsinformatie

Lees beslist deze gebruikershandleiding zorgvuldig.

In geen geval mag u het product openmaken of zelf reparaties uitvoeren.

Plaats laadelement

Controleer of het laadelement:

- zich op een droge, vlakke en stevige ondergrond bevindt
- samen met het stroomsnoer geen struikelgevaar vormt
- zich minimaal een meter van andere elektrische apparaten bevindt
- niet is blootgesteld aan rook, stof, trillingen, chemische stoffen, vocht, warmte en direct zonlicht.

Stroomtoevoer

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter die bij de PowerTel 601 is geleverd anders werkt het mogelijk niet goed en kan het schade toebrengen aan het product.

Energie-efficiënte stroomadapter

De meegeleverde hoofdadapter voldoet aan de eco-ontwerpen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Het stroomgebruik is dus aanzienlijk lager (zowel indien gebruikt als indien in ruststand) dan de hoofdadapter van het vorige ontwerp.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Stroomstoring

Dit product kan niet gebruikt worden in geval van een stroomstoring. Zorg ervoor dat u een alternatieve oplossing hebt voor het geval u een noodoproep moet maken.

Medische apparatuur


Gebruik uw pols-trilalarm niet:

- niet bij medische apparatuur voor noodsituaties of bij medische apparatuur voor intensive care
- tijdens onweer

Wanneer u een hartstimulator hebt, adviseren we u eerst te overleggen met een medisch expert of uw gezondheidsadviseur voordat u dit product gebruikt.

Afvoeren

U moet consumentenelektronica op de juiste wijze afvoeren, volgens de geldende wettelijke voorschriften.

Het  symbool op dit product geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen **gescheiden** van huishoudelijk afval moeten worden ingeleverd op de betreffende inzamelpunten die de openbare afvalautoriteiten hebben aangewezen. Batterijen kunt u ook inleveren op het verkooppunt.

Verpakkingsmaterialen moet u afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.

Onderhoud

- Reinig de buitenzijde van de apparatuur met een zachte, pluisvrije doek.
- Gebruik nooit reinigings- of oplosmiddelen.

Garantie

AMPLICOM-apparatuur is vervaardigd en getest volgens de laatste productiemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en hoogontwikkelde technologieën garanderen een storingsvrij functioneren en een lange levensduur. De garantievoorwaarden gelden niet wanneer een fout van de netbeheerder of een eventuele bedrijfscentrale de oorzaak is voor de apparaatstoring. De garantievoorwaarden gelden niet voor oplaadbare batterijen of accupakketten die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

Alle gebreken tengevolge van materiaal- of productfouten die tijdens de garantieperiode ontstaan, verhelpen we gratis. Het aanspraakrecht volgens de garantievoorwaarden vervalt na interventie van de koper of derde partijen. De garantie dekt geen schade tengevolge van onvakkundige hantering of gebruik, onjuiste plaatsing of opslag, ondeskundige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

Bij klachten behouden we ons het recht voor defecte onderdelen te repareren of te vervangen, of een vervangend apparaat te leveren. Vervangen onderdelen of apparaten worden ons eigendom.

Restitutierechten zijn in schadegevallen uitgesloten, wanneer er geen bewijzen van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de fabrikant aanwezig zijn.

Wanneer uw AMPLICOM-apparaat binnen de garantieperiode een defect laat zien, brengt u het samen met het aankoopbewijs terug naar de winkelier waar u het hebt gekocht. Alle aanspraakrechten op garantie volgens deze overeenkomst mag u uitsluitend doen gelden tegenover uw leverancier.

Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten kunt u geen aanspraakrechten op garantie meer doen gelden.



Conformiteitverklaring

Dit toestel voldoet aan de eisen uit de volgende EU-richtlijnen:

1999/5 EU-richtlijnen over draadloze installaties en telecommunicatiezendinginrichtingen en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

Het CE-symbool op het toestel bevestigt de conformiteit met de bovengenoemde richtlijn.

De volledige conformiteitverklaring kunt u gratis van onze website www.amplicom.eu halen.



Distributeur: Audioline GmbH, D-41460 Neuss, Duitsland

FEB 10 – ISSUE 1.