




HearPlus 317c

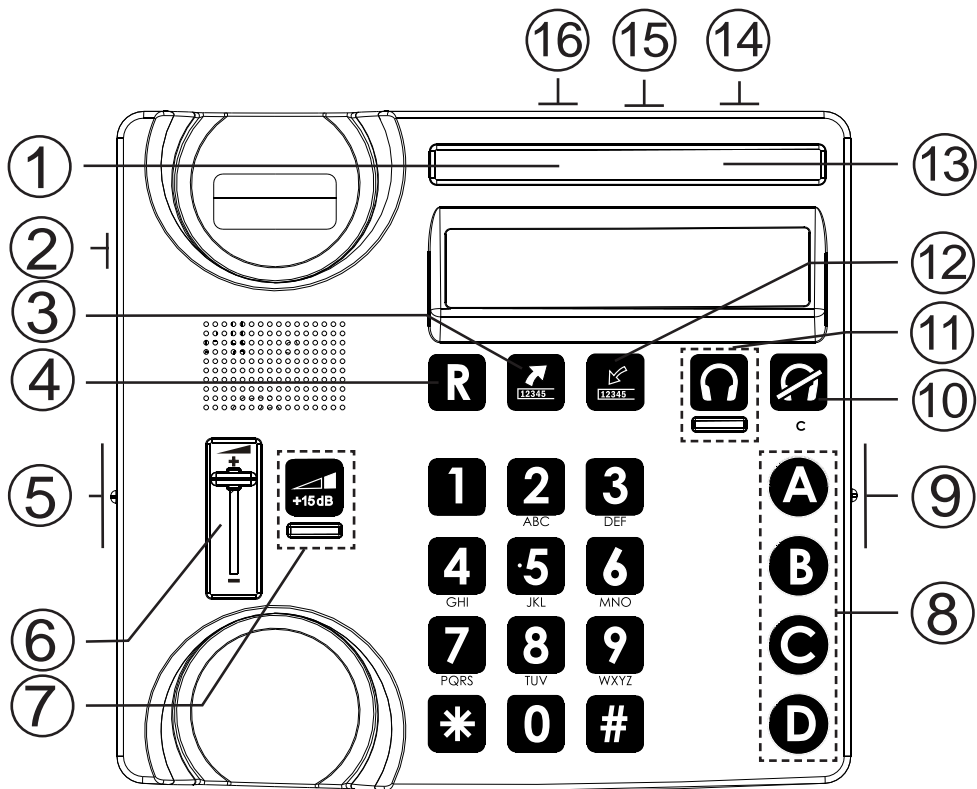

Nederlands

- 1 Fel knipperlicht
- 2 Headsetaansluiting
- 3 Terugbellen
- 4 Flash-toets
- 5 Toonregeling
- 6 Volumeregeling hoorn
- 7 Toets voor extra versterking
- 8 Snelkeuze

Español

- 9 Volumeregeling headset
- 10 Einde headset-oproep/
wissen/annuleren
- 11 Headset en LED
- 12 Beller-ID
- 13 Lijnindicator
- 14 Aansluiting telefoonkabel
- 15 Aansluiting voor voeding
- 16 Aansluiting voor triller

Bediening


Een oproep plaatsen

Gewoon bellen

1. Neem de hoorn op.
2. Toets het gewenste nummer in.



Kiezen met de correctiefunctie

Indien nodig kunt u het ingevoerde telefoonnummer wijzigen voordat het wordt gebeld.

1. Toets het gewenste nummer in. U kunt wissen met .
2. Neem de hoorn op, het nummer wordt nu gebeld.

Zie voor bellen met de headset de aparte beschrijving.

Terugbellen


Druk een of meerdere keren op  om door de vijf meest recent gekozen nummers te scrollen. Neem de hoorn op om te kiezen of druk op  om te annuleren.

Geheugen

Deze telefoon beschikt over 4 snelkeuzenummers.

Nadat een nummer op een geheugenplaats is opgeslagen, hoeft u nog slechts op één toets te drukken om de oproep te doen. Snelkeuzenummers zijn gemerkt **A**, **B**, **C** en **D**.

Bellen met snelkeuze

1. Kies de gewenste snelkeuze (**A-D**) door op de bijbehorende toets te drukken.
2. Het opgeslagen nummer verschijnt op het display.
3. Neem de hoorn op om te kiezen of druk op  om te annuleren.

Volumeregeling

Op deze telefoon kunt u het geluid op diverse manieren aanpassen:



Normale volumeregeling voor de hoorn.



Druk op de toets om het geluid krachtig te versterken. De versterking wordt normaal aan het eind van elk gesprek uitgeschakeld om letsel te voorkomen bij mensen met een normaal gehoor. Deze veiligheidsfunctie kan worden aangepast, zie *Technische informatie*.



Frequentiebereik/geluidsniveau en kwaliteit aanpassen (aan de linkerkant). LET OP! Functioneert alleen als de krachtige versterking actief is.



Volumeregeling headset.

Waarschuwing!

Het volume van de hoorn kan zeer luid worden gezet. De krachtige versterking moet alleen worden gebruikt door mensen met een gehoorstoornis.

Beller-ID

Met Beller-ID kunt u zien wie er belt voordat u een oproep aanneemt of kunt u zien wie er tijdens uw afwezigheid heeft gebeld. Als het nummer in het geheugen is opgeslagen, verschijnt in plaats daarvan de naam.



Ontvangen oproepen worden chronologisch opgeslagen, waarbij het volgnummer wordt afgebeeld naast het nummer.

Als het geheugen vol is, wordt het oudste nummer automatisch gewist zodra de nieuwe oproep is geregistreerd. Nieuwe nummers worden aangeduid met .

Let op!

Om van deze functie gebruik te maken, moet u een abonnement hebben bij uw telefoonmaatschappij.

Inkomende nummers ophalen en kiezen

1. Druk op  om te scrollen door het aantal ontvangen oproepen.
2. Neem de hoorn op om te kiezen of druk op  om te annuleren.

Berichten

Naast telefoonnummers kan op het display verschijnen:

????? Geen informatie ontvangen, bijvoorbeeld een internationale oproep.


!!!! De oproep komt van een geblokkeerd nummer of een telefooncentrale.



Nummer niet eerder gezien.






Berichtaanduiding (afkomstig van uw telefoonmaatschappij)*.

*Berichtaanduiding kan handmatig worden gewist door in de standby-modus enkele seconden op  te drukken.

Telefoonnummers wissen

1. Scroll naar het gewenste item met .
2. Druk op  tot het nummer verdwijnt.

Een headset aansluiten

U kunt een headset aansluiten op de aansluiting  aan de linkerkant van de telefoon. Als een headset is aangesloten, dienen de headsettoetsen  /  om een telefoongesprek te beginnen / te beëindigen (gelijk aan het opnemen en terugplaatsen van de hoorn). Het volume van de headset kan worden aangepast, zie de vorige pagina.

Let op!

In plaats van een headset kan op deze aansluiting een neklus / extra hoorn worden aangesloten.

De originele DORO-headsets zijn getest en aangepast aan deze telefoon. U kunt andere typen en merken headsets gebruiken, maar de functie en geluidskwaliteit kan dan niet worden gegarandeerd. In het ergste geval kunnen de headset en de telefoon beschadigd raken. Dit soort schade valt niet onder de garantie voor de telefoon.

Hoorlus



De hoorn is voorzien van een ingebouwde hoorlus voor degenen die bij het telefoneren hun gehoorapparaat willen gebruiken. Kies de modus T op uw gehoorapparaat om deze functie in te schakelen.

Instellingen

Aansluiten


1. Sluit de telefoonkabel aan op een wandcontact en op de aansluiting gemerkt  aan de achterkant van de telefoon.
2. Sluit de netstroomadapter aan op het stopcontact en op de aansluiting gemerkt  aan de achterkant van de telefoon.
3. Sluit het spiraalsnoer aan op de hoorn en op de aansluiting gemerkt  aan de onderkant van de telefoon.
4. U hoort een klik als de modulaire stekker goed is aangesloten.
5. Stel de tijd voor de toets **Flash** in op 100 (zie *Technische informatie*).
6. Neem de hoorn op en luister of u de kiestoon hoort.

Datum/Tijd

1. Druk op  tot  verschijnt.
2. Voer de datum in (DD/MM).
3. Voer het tijdstip van de dag in (UU:MM).

Druk op  om te annuleren en terug te keren naar de standby-modus.







Batterijen

Vier 1,5V type AAA-batterijen zorgen dat beller-ID, geheugen etc. ook bij een stroomstoring blijven functioneren. Als de batterijen bijna leeg zijn, gaat het symbool  branden. Gebruik alleen batterijen van een goede kwaliteit.



1. Controleer of de adapter correct is aangesloten om te voorkomen dat opgeslagen informatie verloren gaat.
2. Maak de telefoonkabel los en verwijder het klepje aan de onderkant van de telefoon.
3. Plaats de batterijen volgens de aanwijzingen voor de plus- en minpolen.
4. Plaats het batterijklepje weer terug en sluit de telefoonkabel opnieuw aan.

Belsignaal

Onder aan de telefoon bevindt zich een belsignaalschakelaar:









-  ...  Beltoonvolume
-  ...  Beltoonmelodie
-  ...  Beltoon

Achtergrond

Met de schakelaar  /  onder aan de telefoon kan de kleur van de achtergrond worden gewijzigd.

Geheugen


Snelkeuzenummers opslaan

1. Druk op  tot 123... verschijnt.
2. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer.
3. Druk op  tot ABC... verschijnt.
4. Aan elke cijfertoets zijn bepaalde letters toegekend.
Druk voor de gewenste naam een of meer keren op de bijbehorende cijfertoets. Spatie=.
5. Druk op  tot A-D verschijnt.
6. Kies snelkeuze (A-D) door op de bijbehorende toets te drukken.
7.  staat afgebeeld. Het nummer is nu opgeslagen.

Druk op  om een pauze op te nemen in het telefoonnummer.

Op het display verschijnt P.

Als u een nummer wilt veranderen, slaat u eenvoudig het nieuwe nummer op in plaats van het oude.

Voor achteruit/wissen gebruikt u .

Knipperlicht

Om u te attenderen op inkomende oproepen kan een fel knipperlicht worden geactiveerd dat gaat branden als de telefoon overgaat.

 Knipperlicht AAN.

 Knipperlicht UIT.

Aansluiting voor triller

Op de aansluiting ((o)) aan de achterkant van de telefoon kan extra apparatuur zoals een triller voor het belsignaal worden aangesloten.

Technische informatie

Achter het batterijdeksel aan de onderkant van de telefoon bevinden zich diverse schakelaars. Met deze schakelaars worden technische parameters ingesteld. Verwijder het dekseltje onder aan de telefoon.

Toetsengeluid ()

Het geluid dat klinkt als op de toetsen wordt gedrukt, kan uit / aan worden gezet.

Microfoon aanpassen ()

Mogelijk moet voor bepaalde mensen het microfoonniveau worden aangepast.

0 is de standaardinstelling voor de meeste landen.

+6 geeft een wat hoger geluid en -6 geeft een wat lager geluid.

Tijd voor flash-toets (100/300)

100 is de standaardinstelling voor de meeste landen.

300 voor Frankrijk/Portugal.


600 voor Nieuw-Zeeland.

Toon() / Puls(...)

Selecteer de kiesmethode.

De kiesmodusinstelling voor het Verenigd Koninkrijk moet Toon zijn (alleen Europa).

De krachtige versterking permanent instellen ()

Met de instelling  blijft de krachtige versterking (nadat deze is geactiveerd) ook bij volgende oproepen behouden. Deze instelling mag alleen worden geactiveerd als alle gebruikers een gehoorstoornis hebben en een krachtige versterking nodig hebben.

De standaardinstelling is .

Problemen oplossen

Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd is en op de juiste manier is aangesloten. Ontkoppel alle aanvullende apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoons. Als het probleem is opgelost, zit het defect in een ander apparaat. Test de apparatuur op een lijn waarvan u weet dat deze werkt (bijv. bij de burens). Als het product werkt, dan zit de fout waarschijnlijk in uw telefoonlijn. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij.

Mocht u daarna nog problemen hebben, neem dan contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

Garantie

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval dat zich tijdens deze periode een defect voordoet, kunt u contact opnemen met uw leverancier. Voor service of ondersteuning tijdens de garantieperiode moet u een aankoopbewijs kunnen tonen.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten veroorzaakt door ongelukken of soortgelijke incidenten of door schade, binnendringen van vloeistoffen, nalatigheid, abnormaal gebruik en alle andere omstandigheden van de zijde van de gebruiker. Voorts is deze garantie niet van toepassing op defecten die worden veroorzaakt door onweer of andere grote spanningsfluctuaties.

Als voorzorgsmaatregel adviseren wij u om tijdens onweer de telefoon los te koppelen.

Verklaring van Conformiteit

Doro verklaart hierbij dat dit product, Doro HearPlus 317c, voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften zoals vervat in Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE), 2002/95/EC (ROHS).

Een exemplaar van de verklaring van de fabrikant is verkrijgbaar op www.doro.com/dofc