

GEEMARC

# CLEAR SOUND<sup>®</sup>

HEAR THE DIFFERENCE

## AMPLIPOWER 40/50

Nederlands blz. 3



**Waarschuwing: de AmpliPOWER 40/50 heeft een extra harde versterking!**

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voorafgaande aan het gebruik!

**WAARSCHUWING:** Deze telefoon is speciaal ontworpen voor slechthorenden en is uitgerust met een volumeregelaar om het geluid van de hoorn aan uw individuele eisen aan te passen.

**ATTENTIE:** Gehoorschade mogelijk voor een andere gebruiker! Let u er op dat de volumeregelaar is ingesteld is op het laagste niveau dat acceptabel is voor iedere individuele gebruiker.


# INHOUD

<b>INHOUD</b>	<b>1</b>
<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>3</b>
<b>OPSTELLING</b>	<b>6</b>
1 - De telefoon aansluiten	6
2 - Volume-instelling van de wekker en het belsignaal	6
3 - Instelling van het belsignaal	7
4 - Toon/Puls schakelaar (T/P)	7
5 - Flash schakelaar (100/270)	8
6 - Wachtschakelaar voor hotelberichten	8
7 - Op de muur bevestigen	8
<b>DE TELEFOON GEBRUIKEN</b>	<b>8</b>
8 - Een binnenkomende oproep beantwoorden	9
9 - Afstelling van het volume en de ontvangsttoon	10
10 - Opbellen	11
11 - Laatste nummer opnieuw bellen	12
12 - Redial (herhaal), * & # knoppen	12
13 - Ruggespraak toets (MUTE)	12
14 - Telefoonnummers opslaan	12
15 - Opgeslagen nummers bellen	13
<b>OPTIES</b>	<b>14</b>
16 - Bone conducting handset (optioneel)	14
17 - Trikkussen (optioneel)	14
18 - Koptelefoon met microfoon (optioneel)	15
<b>ALGEMENE INFORMATIE</b>	<b>16</b>




Bezoek ons op  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)  
voor productondersteuning en hulp  
telefoon +33 (0)3 28 58 75 99  
of fax +33 (0)3 28 58 75 76

# OMSCHRIJVING

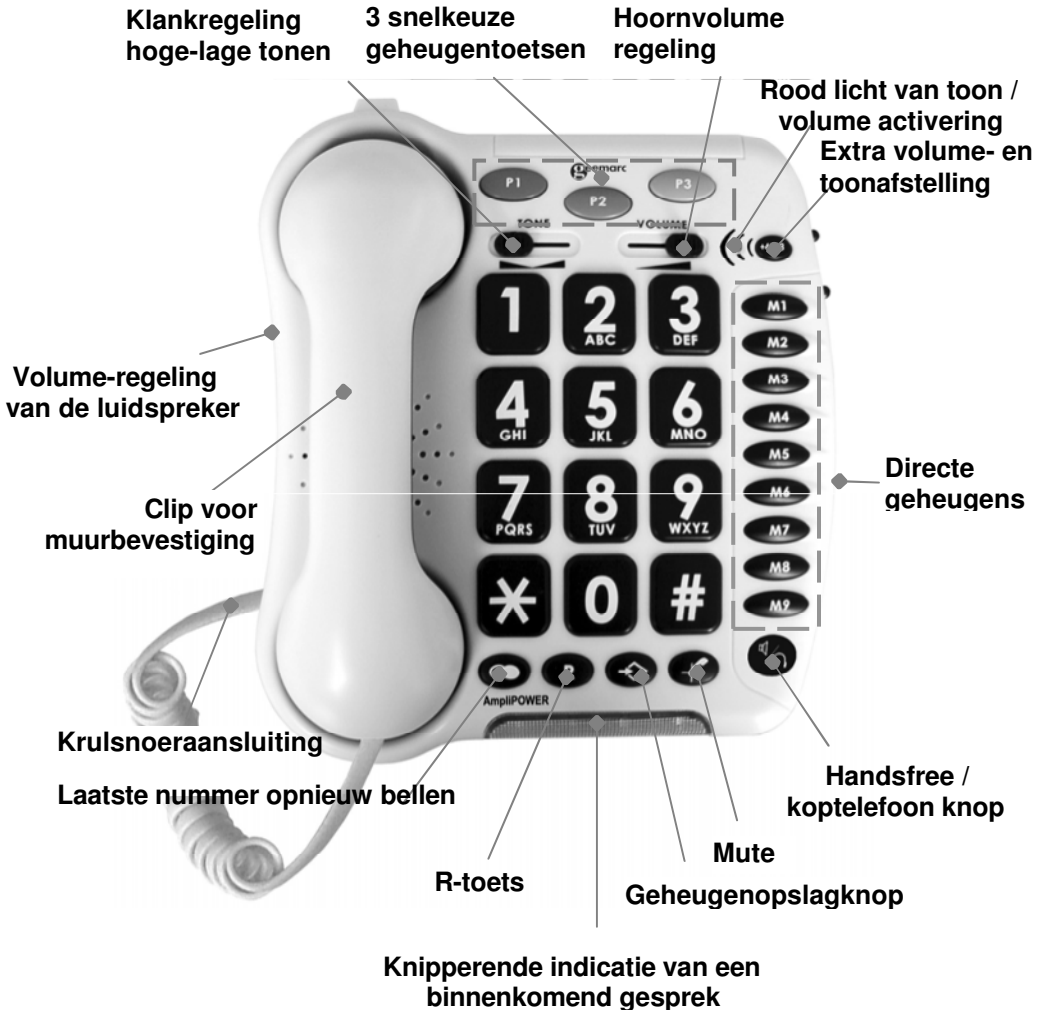

# OMSCHRIJVING

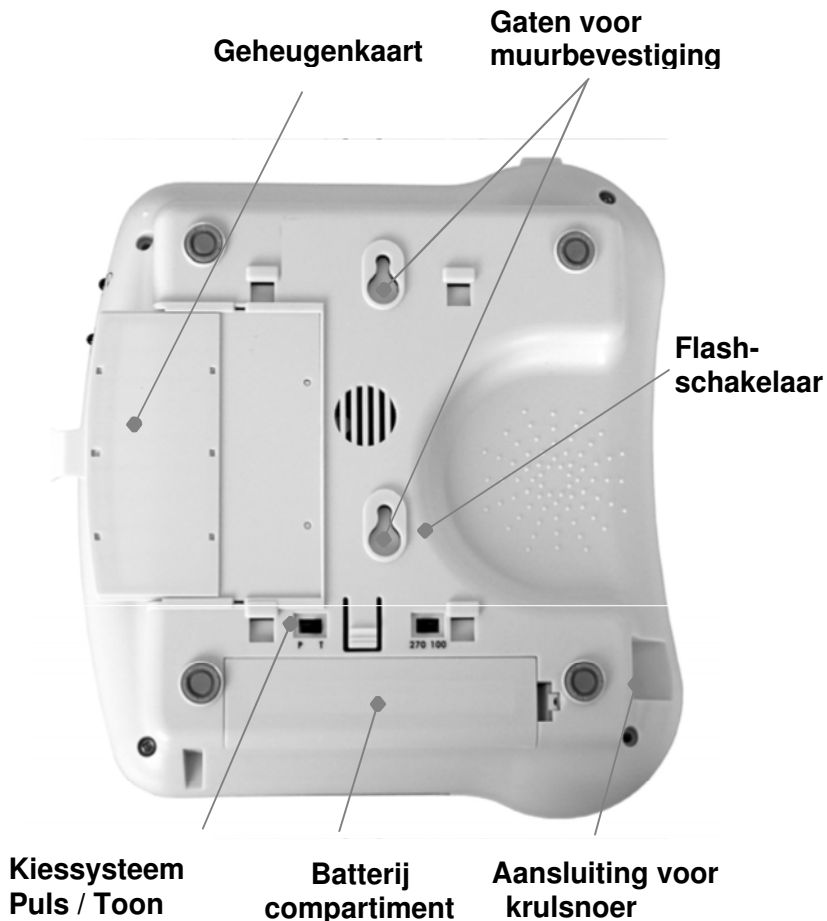


# OMSCHRIJVING



**Wekker / belseignaal  
instelling**

**HI/LOW/OFF  
schakelaar voor  
belseignaal**

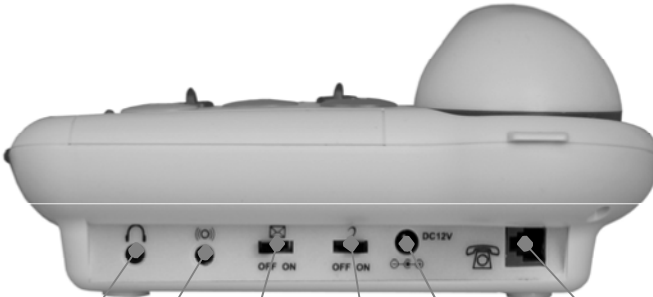

**Headset  
aansluiting**

**Aansluiting voor  
trilkussen**

**Schakelaar voor Aansluiting  
hotelberichten voor  
lichtnetadapter**

**ON/OFF schakelaar voor volume-  
en toonafstelling**

**Aansluiting voor  
telefoonlijn**

# OPSTELLING

## 1 - De telefoon aansluiten

---


- Sluit het kruisnoer van de telefoonhoorn aan.
- Open het vakje van het batterijcompartiment door de borgschroef los te schroeven. Steek er 4x een AAA alkaline batterij (niet meegeleverd) in.  
Klik het deksel van het batterijcompartiment op zijn plaats terug.  
In het geval van stroomuitval zijn er batterijen nodig voor het belsignaal.
- Verbind de lijnkabel.
- Verbind de kabel van het trilkussen (optioneel).
- Verbind de kabel van de koptelefoon (optioneel).
- Verbind de PTT stekker met de wandcontactdoos.
- Verbind de kabel van de 12V lichtnetadapter met de telefoon.
- Verbind de 12V lichtnetadapter met de wandcontactdoos (\*\*).

(\*\*) Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.

## 2 - Volume-instelling van de wekker en het belsignaal

---

Een zich aan de rechterkant van de telefoon bevindende schakelaar met 3 standen maakt het mogelijk de volgende instellingen te maken:

- 0: Alleen het belsignaal werkt.
- ((o)): Het belsignaal en het trilkussen werken.
- : Het belsignaal en het knipperende LED werken.

# OPSTELLING

## 3 - Instelling van het belsignaal

---

Een zich aan de rechterkant bevindende schakelaar maakt het mogelijk om het belsignaal op Hoog (= HI), Laag (= LOW) en Uit (= OFF) te zetten.

: OFF, : LOW, : HI

Uw telefoon wordt geleverd met de volgende instellingen:  
belsignaal op HIGH en de melodie op 6.

	Laag	Medium	Hoog
Melodie 1	1	2	3
Melodie 2	4	5	6 (standaard)
Melodie 3	7	8	9

Als u een andere melodie van het belsignaal wilt, kunt u een nieuwe instelling als volgt kiezen:

- Neem de handset ter hand.
- Druk op de  knop.
- Druk op de # knop.
- Druk op een van de 1-9 knoppen.

De melodie van het belsignaal zal bij de volgende oproep in werking treden.

## 4 - Toon/Puls schakelaar (T/P)

---

De Toon/Puls schakelaar is van fabriekswege ingesteld op Toon (T). Tegenwoordig gebruiken alle telefooncentrales het Toonkiessysteem. Voor aansluiting op oude bedrijfscentrales is mogelijk het Puls-kiessysteem (draaischijf) vereist.


# OPSTELLING

## 5 – Flash-schakelaar (100/270)

De Flash-schakelaar (engels: TBR) is van fabriekswege ingesteld op 100ms. De schakelaar kan op 270ms gezet worden voor speciale toepassingen.


## 6 - Wachtschakelaar voor hotelberichten

Deze worden gebruikt met diensten op hotelnetwerken.

Een zich aan de achterkant van uw telefoon bevindende  schakelaar maakt het mogelijk om de wachtfunctie van hotelberichten AAN (= ON) te zetten. Met de schakelaar AAN zal het rode licht aangaan om u te informeren dat u een bericht op uw telefoon heeft ontvangen.

## 7 - Op de muur bevestigen

Boor 2 gaten in de muur (met 80 mm tussenruimte). Steek de muurpluggen erin en dan de schroeven terwijl u de schroeven 6 mm eruit laat steken. Schuif de telefoon naar beneden over de schroeven om hem vast te zetten.

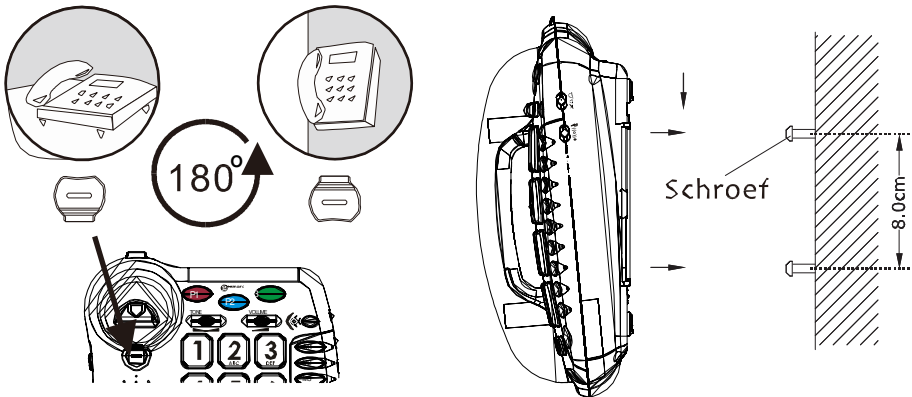

# DE TELEFOON GEBRUIKEN



## 8 - Een binnenkomende oproep beantwoorden

---



### Zonder koptelefoon:

- Als een binnenkomende oproep wordt ontvangen zal de telefoon overgaan. Om de oproep te beantwoorden neemt u de handset ter hand en begint te praten.
- Als het gesprek ten einde is, legt u de handset terug op het basisstation om de lijn vrij te maken.

### Met een koptelefoon (headset; optioneel):

- Als een binnenkomende oproep wordt ontvangen en u wilt de oproep beantwoorden, dan drukt u op de  knop en begint te praten.
- Als het gesprek ten einde is, drukt u nogmaals op de  knop om de lijn vrij te maken.

### In de handsfree stand:

- Als een binnenkomende oproep wordt ontvangen zal de telefoon overgaan. Om de oproep te beantwoorden drukt u op de  knop.
- Als het gesprek ten einde is, drukt u nogmaals op de  knop om de lijn vrij te maken.


# DE TELEFOON GEBRUIKEN

## 9 - Afstelling van het volume en de ontvangsttoon (klank)


---


U kunt het hoornvolume verhogen en de klank (toon) aanpassen aan uw wensen. Met de +40dB knop kunt u deze geluidsversterker naar wens in- of uitschakelen.

Bij ingeschakelde versterker zal het lode lampje naast de +40dB knop. U kunt middels de **TOON** en **VOLUME** de versterking op een comfortabel luisterniveau instellen.

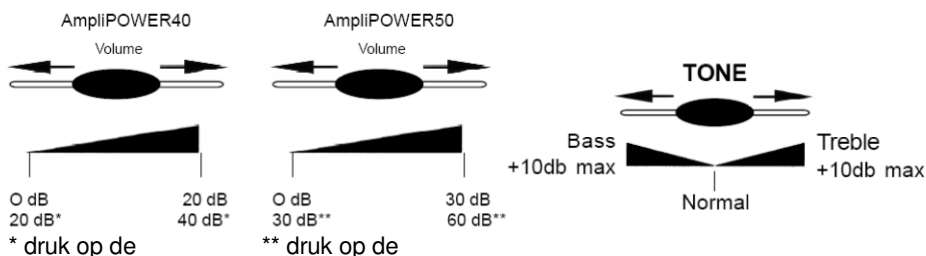

### NB:

Wanneer de zich aan de achterkant van de telefoon bevindende  schakelaar **AAN** staat, werkt de versterker elke keer dat u de telefoon gebruikt.

Wanneer de  schakelaar **UIT** staat, moet u de versterker activeren door op de +40dB knop te drukken (of op de +60-dB knop voor de AmpliPOWER 50). Toon- en volumeafstelling (20dB - 40dB voor de AmpliPOWER 40 resp. 30dB - 60dB voor de AmpliPOWER 50) werken alleen als de knop **AAN** is gezet. Als de knop **UIT** is gezet, kan alleen het volume van 0dB tot 20dB (0dB tot 30dB voor de AmpliPOWER 50) afgesteld worden.

# DE TELEFOON GEBRUIKEN



## 10 - Opbellen

---

### Zonder koptelefoon:

- Neem de handset ter hand.
- Wacht op de kiestoon en toets het gewenste nummer in.
- Als het gesprek afgelopen is, legt u de handset voorzichtig terug op het basisstation.


### Met een koptelefoon (optioneel):

- Druk op de  knop.
- Wacht op de kiestoon en toets het gewenste nummer in.
- Als het gesprek ten einde is, drukt u nogmaals op de  knop om de lijn vrij te maken.

### In de handsfree stand:

- Druk op de  knop.
- Wacht op de kiestoon en toets het gewenste nummer in.
- Als het gesprek ten einde is, drukt u nogmaals op de  knop om de lijn vrij te maken.
- Als de andere kant uw oproep niet beantwoordt, drukt u nogmaals op de  knop om de lijn vrij te maken.


### NB:

- Om tijdens een gesprek de handsfree functie uit te schakelen, neemt u de handset ter hand. Om tijdens een gesprek de handsfree functie te activeren, drukt u op de  knop en legt u de handset terug op het basisstation.
- Tijdens een handsfree gesprek kun u het volume van de luidspreker op een gewenst niveau afstellen. Gebruik eenvoudigweg de zich aan de linkerkant van het apparaat bevindende VOLUME schuifregelaar.

# DE TELEFOON GEBRUIKEN

## 11 - Laatste nummer opnieuw bellen

---

- Neem de handset ter hand.
- Wacht op de kiestoon en druk op de  (redial) knop.
- Het laatst gedraaide nummer zal automatisch opnieuw gebeld worden. (Niet te gebruiken voor nummers uit het geheugen.)

## 12 – R-toets, \* en # knoppen



---

Deze knoppen worden gebruikt met de diensten op digitale telefooncentrales. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor nadere gegevens hierover.

## 13 – Ruggespraak toets ('mute')

---

Als u met iemand anders privé in de kamer wilt praten zonder dat degene aan de andere kant van de lijn u kan horen, druk dan op

de  knop en houd deze ingedrukt. U kunt nog steeds degenen aan de andere kant van de lijn horen, maar zij kunnen u niet horen zolang de stilmodus werkzaam is. Om de normale conversatie te hervatten, laat u de  knop los.

## 14 - Telefoonnummers opslaan

---



Uw telefoon kan 12 directe telefoonnummers (inclusief 3 voorkeurnummers) opslaan (maximaal 21 cijfers voor elk telefoonnummer).

Bijvoorbeeld, de 3 voorkeurnummers **P1**, **P2** en **P3** stellen u in staat op de volgende 3 nummers op te slaan:

- 112 alarmnummer
- huisarts

# DE TELEFOON GEBRUIKEN

Volg de volgende aanwijzingen om een nummer op te slaan:

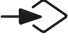- Neem de handset ter hand.
- Druk op de  knop.
- Druk op **M1** tot **M9** of één van de 3 voorkeurnummers om het nummer op te slaan.
- Toets het nummer in.
- Druk opnieuw op de  knop.

Indien de telefoon wordt losgekoppeld van de telefoonaansluiting zullen voorgeprogrammeerde nummers na een paar uur verloren gaan.

Een nieuw nummer in het geheugen invoeren, zal automatisch het oude nummer wissen.

---

## 15 - Opgeslagen nummers bellen

- Neem de handset ter hand en wacht op de kiestoon.
- Druk op één van de van toebassing zijnde **M1** tot **M9**

Gebruik de zich onder het basisstation bevindende indexkaart om uw opgeslagen telefoonnummers op te schrijven.

## **16 - Direct vibrerende handset (optioneel)**

---

Als u conductief gehoorverlies heeft, kunt u een Direct Vibrerende Handset gebruiken. Probeer om de Direct Vibrerende Handset vóór uw oor, enigszins onder uw oor of achter uw oor te zetten en kijk welke optie het beste werkt.

Als u geen gehoorverlies heeft, kunt u uw telefoon normaal gebruiken en de handset tegen uw oor plaatsen.

Als u een Direct Vibrerende Handset (art: CLA4) nodig heeft, kunt u deze betrekken van uw plaatselijke detailhandelaar of van uw audioloog.

Bezoek onze website ([www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)) in geval van problemen.

Om de Direct Vibrerende Handset te installeren, koppelt u de standaard handset los van het krulsnoer en vervang deze door de Direct Vibrerende Handset.

## **17 - Trilkussen (optioneel)**


---

Als u uw telefoon wenst uit te breiden met een trilkussen (art.: CLA2), dan steekt u de stekker van het trilkussen in de zich aan de achterkant van de telefoon bevindende ((o)) stekkerbus. Wanneer een binnenkomende oproep wordt ontvangen, zal het trilkussen in werking treden wanneer de telefoon overgaat.

**NB:** Om te werken moet deze optie in de WEKKER- EN BELSIGNAALOPTIES (bladzijde 9) ingesteld worden.

## **18 - Koptelefoon met microfoon (optioneel)**

---

Als u een oproep wilt beantwoorden of iemand wilt bellen m.b.v een Geemarc koptelefoon (art.: CLA3), dan steekt u de stekker van de koptelefoon in de zich aan de achterkant van de telefoon bevindende  stekkerbus van de koptelefoon.

**NB:** Het is aan te bevelen om het volume van de luidspreker in een lage stand te zetten.

# ALGEMENE INFORMATIE

## Recycle richtlijnen:

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak, maar behandel het als chemisch afval.

- Verwijder de batterijen en doe deze in een batterijafvalcontainer.
- Lever het oude product in bij uw leverancier

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

## Telefoonverbinding:

Voltages aanwezig op het telecommunicatienetwerk zijn geclassificeerd TNV-3 (Telecommunicatie Netwerk Voltage) volgens de EN60950 norm.

## Verklaring:

Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2.

*De nakomingsverklaring kan ingezien worden op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).*



UGAMPLIPOWER40\_50\_NL\_V1.0



UGAMPLIPOWER40\_50\_NL\_V1.0

**geemarc** UK

5 Swallow Court  
Swallowfields Welwyn  
Garden City  
Hertfordshire, AL7 1SB  
For product support:  
01707 384438

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**geemarc** FRANCE

Parc de l'Etoile  
2 rue Galilée BP20061  
59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX  
TEL. SERVICE APRES VENTE:  
03 28 58 75 99

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**geemarc** GERMANY

Siemensstrasse 10,  
53121 Bonn  
Germany  
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0  
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)