

## **GEEMARC AMPLIDECT 280-285**

De Geemarc AmpliDECT heeft weliswaar geen Nederlandstalige handleiding, maar de display kan prima op de Nederlandse taal worden ingesteld.

Zo is uw Geemarc telefoon nog eenvoudiger te gebruiken!

Druk op **MENU** (toets links onder de display)

Druk vervolgens **3x** op de onderzijde van de grote ronde knop totdat het pijltje voor **Réglage Comb** of **HS Settings** staat

Druk vervolgens op **SELECT** (toets links onder de display)

Druk vervolgens **4x** op de onderzijde van de grote ronde knop totdat het pijltje voor **Langue** of **Language** staat

Druk vervolgens op **SELECT** (toets links onder de display)

Druk vervolgens op de onderzijde van de grote ronde knop totdat het pijltje voor **NEDERLANDS** staat

Druk vervolgens op **Sauve** of **Save** (toets links onder de display)

Klaar!

NB: Wilt u dat het toestel **trilt** bij een oproep (vibra) en dat de **lichtsignalering** boven op het toestel werkt? Druk dan –iets langer—op cijfer 0 tot het toestel trilt. Uitschakelen gaat net zo.

Heeft u een **AmpliDECT 285 met beantwoorder**, dan dient u nog de taal van de bedienhulp van de beantwoorder in te stellen. Ook dit doet u via de handset,

U heeft de keuze uit: Engels, Frans of Duits

(NB-1: bij de beantwoorder instellingen komt op de display Nederlands, maar daar is kennelijk bedoeld: Deutsch–Duits)

(NB-2: de taalinstelling betreft de gesproken bedienhulp; niet de door uzelf in te spreken meldtekst / begroetingstekst)

Druk op **ANTW** (toets rechts onder de display)

Druk vervolgens **2x** op de onderzijde van de grote ronde knop totdat het pijltje voor **Antw Instel** staat

Druk vervolgens op **OK** (toets links onder de display)

Druk vervolgens op de onderzijde van de grote ronde knop totdat het pijltje voor **Taal** staat

Druk vervolgens op **OK** (toets links onder de display)

Druk vervolgens op de onderzijde van de grote ronde knop totdat het pijltje voor **ENGELS / FRANCAIS / NEDERLANDS (= DUIJS)** staat

(Nederlands is kennelijk een vertaalfoutje; bedoeld is: Deutsch–Duits)

Druk vervolgens op **OK** (toets links onder de display)

Klaar!