

GEEMARC AMPLIDECT 350

De Geemarc AmpliDECT 350 heeft weliswaar geen Nederlandstalige handleiding, maar het display kan prima op de Nederlandse taal worden ingesteld. Zo is uw Geemarc telefoon nog eenvoudiger te gebruiken!

Taalinstelling:

Druk op:

MENU (toets links onder het display)

Druk vervolgens **3x** op de onderzijde van de grote ronde knop totdat het pijltje voor **Réglage Comb** staat

Druk vervolgens op **SELECT** (toets links onder het display)

Druk vervolgens **4x** op de onderzijde van de grote ronde knop totdat het pijltje voor **Langue** staat

Druk vervolgens op **SELECT** (toets links onder het display)

Druk vervolgens **4x** op de onderzijde van de grote ronde knop totdat het pijltje voor **NEDERLANDS** staat

Druk vervolgens op **Sauve** (toets links onder het display)

Klaar!