

Draagbare telefoonversterker **PL-10**

Bedieningshandleiding


Inleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van de draagbare PL10 telefoonversterker. Het apparaat versterkt en verbetert het volume van het inkomende gesprek (met ongeveer factor 12) voor luide en duidelijke gesprekken. Het apparaat wordt

geleverd met een draagtas en reserveriem en bevat een AAA alkalinebatterij van 1,5 V. Installeer de batterij voor gebruik.

Werking

1. Bevestig de versterker op de aangegeven manier aan de telefoon. Zorg voor een goede bevestiging met behulp van de drie gaatjes waarmee u de verbinding indien nodig strakker kunt zetten. De riem kan eenvoudig worden losgemaakt en bevestigd door de gaatjes van de bevestigingspunten los te trekken c.q. er overheen te drukken.

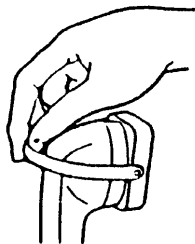

2. Zet de versterker AAN en stel het volume op uw gehoor af.

3. De versterker is compatibel met een gehoorapparaat en kan tegelijk daarmee worden gebruikt. Schakel het gehoorapparaat daartoe in de 'T'- of 'MT'-stand, zodat achtergrondgeluid wordt verminderd en u duidelijker kunt horen.

4. Indien u last hebt van 'rondzingen' (een hoog geluid), staat het volume van uw telefoon misschien te hoog. U kunt dit verhelpen door het volume zachter te zetten en/of de positie van de versterker op de telefoon te wijzigen.

5. Als de stem van de beller laag of vervormd klinkt, is de batterij misschien bijna leeg.

6. Als u klaar bent zet u het volume op UIT. U kunt de versterker desgewenst op de telefoon laten zitten maar zorg er dan voor dat de verbinding is verbroken. Het is misschien nodig om de hoek van de versterker te wijzigen om er zeker van te zijn dat de verbinding aan het eind van het gesprek wordt verbroken.

