




Telefon-Hörverstärker
Telephone Amplifier
Amplificateur téléphonique
Telefoonhoornverstarker
TA-2

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Operating Instructions

Gebruiksaanwijzing

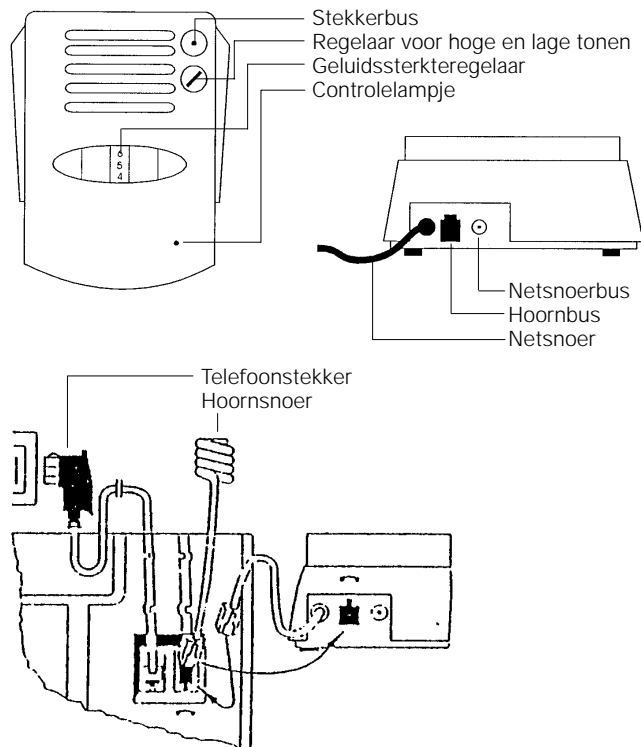

Ingebruikname

Om de hoornversterker in gebruik te kunnen nemen, moet u enkele handelingen uitvoeren:

1. Hoornsnoer

Trek eerst de telefoonstekker uit de contactdoos van uw telefoonaansluiting. Haal aan de onderkant van de telefoon hoornsnoer uit het kabelkanaal. Hierbij drukt u de klemhaak tegen de stekker, waarbij u hem tegelijkertijd aan het snoer uit het kabelkanaal trekt. Deze stekker van het hoornsnoer wordt op de achterzijde van de hoornversterker in de aansluitbus gestoken, die gemarkeerd is met een hoornsymbool, tot hij vastklikt.

2. Aansluitsnoer

De stekker op het uiteinde van het aansluitsnoer van de hoornversterker wordt in de hoornbus aan de onderzijde van de telefoon gestoken en het snoer wordt in het vrije kabelkanaal gelegd. Vervolgens steekt u de telefoonstekker opnieuw in de contactdoos van uw telefoonaansluiting.

Inschakelen

De hoornversterker wordt auto-

matisch ingeschakeld wanneer de hoorn van de haak genomen wordt. Een groene lichtdiode op de bovenzijde van het apparaat geeft aan dat de hoornversterker zich in de AAN-toestand bevindt.

Instellen van de geluidssterkte / klank

U kunt de geluidssterkte van het hoornsignaal naar wens aanpassen via de draaiknop op de bovenzijde van de hoornversterker. Door de draaiknop in de richting van de grotere waarden op de schaal te draaien, verhoogt de geluidssterkte en omgekeerd. De draaiknop heeft in beide eindposities een voelbare aanslag. Draai de draaiknop niet met geweld verder dan deze aanslagen. Daarnaast kunt u ook de klank aanpassen met de regelaar voor hoge en lage tonen.

Uitschakelen

De hoornversterker wordt ca. 60 seconden nadat de hoorn is opgelegd automatisch uitgeschakeld. Het groene controlelampje dooft opnieuw.

Aansluitmogelijkheden

Via de 3,5 mm stekkerbus kunnen de volgende accessoires aangesloten worden op de TA-2:

- m Kleine koptelefoon, bv. van een walkman.
- m Mensen met een hoorapparaat kunnen een halslus aansluiten op de stekkerbus. De hoorapparaten worden daarbij ingesteld op "T" of "MT." De geluidssterkte kan daarna gemakkelijk via de regelaar van de TA-2 ingesteld worden.
- m Hoorapparaten met een audiostekker maken een directe koppeling tussen de telefoonleiding en het hoorapparaat mogelijk. Hiervoor wordt een enkelvoudige kabel (voor mensen die een hoorapparaat dragen aan 1 oor) en een dubbele kabel (voor mensen die een hoorapparaat dragen aan beide oren) meegeleverd.

Gelieve er rekening mee te houden, dat de luidspreker van de telefoonhoorn bij gebruik van de stekkerbus uitgeschakeld wordt (ter voorkoming van interferenties).

Speciale accessoires:

- m Halslus best.-nr. A-4921-0
- m Enkelvoudige kabel best.-nr. A-4940-0
- m Dubbele kabel best.-nr. A-4950-0

Met behulp van de stekkerbus kan de TA-2 eveneens aange-

sloten worden op de volgende installaties:

- m Infrarood-transferinstallaties
- m Tele-transferinstallaties
- m Ringleiding-transferinstallaties

Stroomvoorziening van de hoornversterker TA-2:

Netvoeding:

Gebruik hiervoor uitsluitend de meegeleverde netadapter. De stekker op het uiteinde van de netadapterkabel wordt aan de achterzijde van de hoornversterker in de bus gestoken, die gemarkeerd is met het netadaptersymbool. Vervolgens steekt u de netadapter in een normaal 230V-stopcontact. Bij uitval van de netspanning kan de TA-2 enkel gebruikt worden wanneer er batterijen in het apparaat geplaatst zijn (zie batterijvoeding).

Batterijvoeding:

Open de batterijruimte door het batterijdeksel op de onderzijde van de hoornversterker opzij te schuiven. Plaats 4 batterijen, overeenkomstig de markeringen in de batterijruimte, en schuif het deksel opnieuw in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik steeds nieuwe mignonbatterijen. (type LR6) of oplaadbare batterijen van hetzelfde type.

Zelf storingen oplossen

Niet elke storing hoeft noodzakelijk te betekenen dat er een defect is aan uw hoornversterker. In sommige gevallen bespaart u tijd en geld, wanneer u eenvoudige storingen zelf verhelpt. Onderstaande aanwijzingen kunnen u daarbij helpen:

Hoorn van de haak genomen, geen kiestoon

- m Controleren of alle stekkers correct ingestoken zijn.
- m Hoornsnoer aan de hoornversterker / hoorn.
- m Netsnoer aan het apparaat / telefooncontactdoos.
- m Evt. nogmaals alle stekkers uittrekken en opnieuw insteken (contactfouten).

Verbinding is tot stand gebracht, hoornversterker werkt niet

- m Controler de aansluiting van de netadapter.
- m Batterijruimte openen en controleren of de batterijen correct geplaatst zijn.
- m Evt. nieuwe batterijen of volledig opgeladen batterijen van hetzelfde type inleggen.

Hoornversterker produceert luide fluittonen

- m Volume een beetje lager instellen en erop letten, dat de

telefoonhoorn zich niet in de onmiddellijke omgeving van de hoornversterker bevindt.

- m Evt. nieuwe batterijen of volledig opgeladen batterijen van hetzelfde type inleggen.

Onderhoud en verzorging

Alle apparaten zijn onderhoudsvrij. Wanneer de apparaten vuil worden, kunt u ze af en toe reinigen met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere organische stoffen!

Garantie


De garantievergoeding omvat de kostenloze herstelling en de kostenloze terugzending van het apparaat. Voorwaarde hiervoor is dat het apparaat teruggezonden wordt in de originele verpakking. Gooi de originele verpakking dus niet weg! De garantie vervalt bij beschadigingen, die voortkomen uit onjuiste behandeling en bij herstellingspogingen door niet door Humantechnik geautoriseerde personen (zegelverbreking). Garantieherstellingen worden enkel uitgevoerd bij inzending van de ingevulde garantiekaart door de vakhandelaar of van het originele Humantechnik-garantiebewijs in geval van rechtstreekse aankoop bij de fabriek.

Aanpassing TA-2 - Werkwijze voor de aanpassing van de TA-2


Door de uiteenlopende kabelaansluiting van vele telefoons (b.v. T-Easy P210) is de werking van de TA-2 op deze telefoons niet gewaarborgd. De TA-2 kan echter aangepast worden aan de verschillende kabelaansluitingen, door de DIP-schakelaars in de batterijruimte van de TA-2 te veranderen. Er wordt algemeen een onderscheid gemaakt tussen twee instellingen:

Standaardinstelling (leveringstoestand van de TA-2).

Instelling voor variant 2.

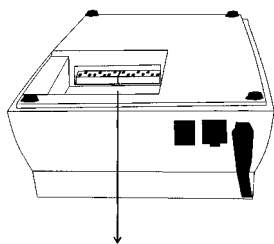

Standaardinstelling

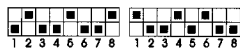

Instelling voor variant 2



Technische gegevens:

Afmetingen:	52 x 115 x 157 mm (H x B x D)
Kleur:	wit
Gewicht:	253 g
Versterkingsfactor:	max. 30 dB ± 20%
Stroomvoorziening:	met een 230V-netaansluiting of met 4 x 1,5V mignonbatterijen (type LR6)

Opgelet!

1. Gebruik voor de instelling van de DIP-schakelaars een kleine schroevendraaier.
2. Let erop, dat de DIP-schakelaars correct vastgeklikt zijn op de eindpositie.
3. Vermijd andere instellingen van de DIP-schakelaars.