

Veiligheidsinstructies

Lees absoluut de volgende veiligheidsinstructies en het hoofdstuk "In gebruik nemen" door, zodat u uw telefoon snel en veilig kunt gebruiken.

- Plaats het toestel op een slipvaste ondergrond.
- Plaats het aansluitsnoer zo dat niemand erover kan struikelen.
- Stel de telefoon niet bloot aan de volgende invloeden:
 - warmtebronnen
 - directe zonnestralen
 - vocht
 - andere elektrische apparaten
- Bescherm uw telefoon tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- Sluit de kabels alleen aan op de passende contactdozen/aansluitingen.
- Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.
- Nooit
 - De telefoon zelf openen!
 - De telefoon dragen aan het netsnoer!

Veiligheidsinstructies	
In gebruik nemen	
Inhoud van de verpakking	46
Telefoon aansluiten	46
Bedieningselementen	
Bedieningselementen voorkant	47
Bedieningselementen achterkant/onderkant	48
Toetsen en hun betekenis	49
Telefoneren	
Opbellen	50
Oproep aannemen	50
Luidspreker gebruiken tijdens een gesprek	50
Herhaling van het laatstgekozen nummer	50
Instelling hoornvolume/hoge- en lage-tonenregeling	51
Mute-functie (HOLD)	51
Kiespauze inlassen (PABX)	51
Ruggespraaktoets (HOOK/FLASH)	51
Snelkiestoetsen	
Nummers programmeren op snelkiestoetsen	52
Kiezen met snelkiestoetsen	52
Instellingen	
Flitslicht in-/uitschakelen	53
Volume van de beltoon instellen	53
Toonkiezen/impulskiezen	53
Bijkomende aansluitingen	
Headset-aansluiting	53
Hoofdtelefoonaansluiting	53
Als de telefoon niet werkt	
Allgemeen	54
De telefoon werkt niet	54
Onderhoud en verzorging	54
Garantie	55
CE-teken	55
Milieu / Verwijdering	56
Technische gegevens	56

In gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

De volgende delen bevinden zich in de verpakking:

- telefoontoestel
- hoorn
- hoornsnoer
- telefoonsnoer
- garantiekaart
- handleiding
- label snelkiestoetsen

Telefoon aansluiten

1. Steek de stekker van het hoornsnoer (spiraalkabel) in de aansluiting met het hoornsymbool aan de linkerkant van het toestel en in de hoorn.
2. De kleinere stekker van het telefoonsnoer steekt u in de aansluiting „LINE” (achterkant van het toestel), de grote stekker in de contactdoos van uw telefoonaansluiting.
3. De stekker van de netadapter steekt u in de aansluiting „AC 9 V”. De netadapter steekt u in een 230-V-stopcontact.


Opgelet!

Plaats de telefoon bijv. niet in de buurt van televisietoestellen, monitors, ventilators etc. om het storingsrisico zo klein mogelijk te houden. Plaats de telefoon niet direct in de zon of in de buurt van een warmtebron.

Gebruik alleen het originele telefoonsnoer of een vergelijkbaar snoer met internationale configuratie.


Bedieningselementen

Bedieningselementen voorkant

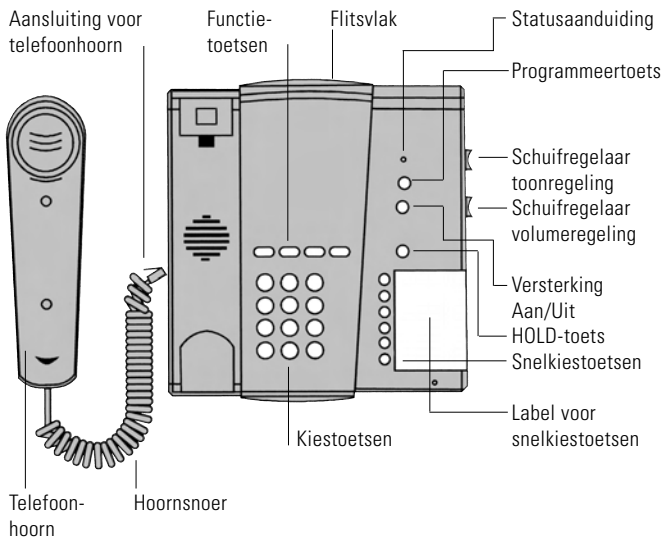

Bedieningselementen achterkant


Schuifregelaar voor
beltoonvolume

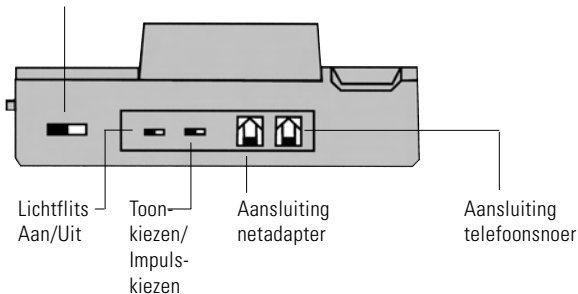

Bedieningselementen onderkant

Headset-aansluiting
(2,5 mm)

Audio-uitgang
(3,5 mm)

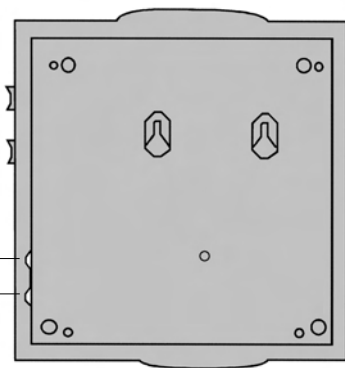

Toetsen en hun betekenis



Luidsprekertoets:

- »Handsfree«: leiding innemen, leiding scheiden
- »Meeluisteren« in-/uitschakelen tijdens een gesprek



Ruggespraaktoets, bijv. om gesprekken door te verbinden als de telefoon aangesloten is op een telefooncentrale



Kiespauze



Kiesherhaling




Versterking Aan / Uit



Programmeertoets



Hold-toets

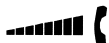

Schuifregelaar volumeregeling



Schuifregelaar toonregeling



Snelkiestoetsen

Telefoneren

Opbellen

1. Neem de hoorn op of druk op de toets .
2. Kies het telefoonnummer.
3. Om het gesprek te beëindigen, legt u de hoorn neer resp. drukt u opnieuw op de toets .


Oproep aannemen

1. De telefoon rinkelt.
2. Neem de hoorn op of druk op de toets .
3. Om het gesprek te beëindigen, legt u de hoorn neer resp. drukt u opnieuw op de toets .


Luidspreker gebruiken bij een gesprek

1. Druk op de toets  om tijdens een gesprek de luidspreker in te schakelen. De luidspreker van de hoorn blijft daarbij ingeschakeld.
2. U kunt nu de hoorn neerleggen en het telefoongesprek voortzetten via de luidspreker van het toestel en de ingebouwde microfoon.
3. Om de luidspreker van het toestel opnieuw uit te schakelen, drukt u op de toets .

Opmerking:

Een gesprek wordt beëindigd als u op de toets  drukt terwijl de hoorn neergelegd is.



Kiesherhaling van het laatstgekozen telefoonnummer


1. Neem de hoorn op.
2. Als u op de toets  drukt, wordt het laatstgekozen nummer opnieuw gekozen.

Instelling hoornvolume/hoge- en lage-tonenregeling




Het hoornvolume kan tijdens een telefoongesprek worden ingesteld met de schuifregelaar "Volume" aan de rechterkant van de telefoon.

Met de toets  kan een bijkomende versterking worden ingeschakeld. Als de versterking geactiveerd is, wordt in de hoorn een volume van maximaal 30 dB bereikt. Als de versterking ingeschakeld is, brandt de status-aanduiding op de telefoon. De versterking blijft ook ingeschakeld als de hoorn neergelegd is. Door nogmaals op de toets  te drukken, wordt de bijkomende versterking uitgeschakeld.

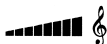


Met de toonregeling (schuifregelaar aan de rechterkant) kunt u de hoge resp. lage tonen extra 10 dB verhogen.


Mute-functie (HOLD)

Met deze functie kan het gesprek tijdelijk onderbroken worden zonder de verbinding te verbreken. Als u op de toets  drukt, wordt het gesprek tijdelijk onderbroken.

Kiespauze inlassen (PABX)

Als u op de toets  drukt, wordt de kiesprocedure gedurende 3,6 seconden onderbroken.

Ruggespraaktoets (Hook/Flash)

Deze functie is vereist om bepaalde functies in het telefoonnet te activeren. Als u op deze toets  drukt, wordt de telefoonleiding gedurende een bepaalde tijd onderbroken (300 ms – vast ingestelde waarde).


Snelkiestoetsen



Nummers programmeren op de snelkiestoetsen

Op de 6 snelkiestoetsen kunnen willekeurige telefoonnummers worden geprogrammeerd.

1. Neem de hoorn op of druk op de toets 
2. Druk op de toets 
3. Voer het gewenste „telefoonnummer“ in.
4. Druk nogmaals op de toets 
5. Wijs een snelkiestoets toe aan het ingevoerde telefoonnummer door op één van de toetsen   te drukken.
6. Leg de hoorn opnieuw neer of druk op de toets 

Kiezen met snelkiestoetsen

Neem de hoorn op of druk op de toets 

Als u op één van de toetsen   drukt, wordt het opgeslagen telefoonnummer gekozen.

Opmerking: als de telefoon gedurende meer dan 60 minuten van het stroom- of telefoonnet wordt gescheiden, worden de geprogrammeerde telefoonnummers gewist.

Instellingen

Flitslicht in-/uitschakelen

De visuele oproepaanduiding (flitslicht) van de telefoon kan d.m.v. een schuifregelaar aan de achterkant van de telefoon in- resp. uitgeschakeld worden.

Volume van de beltoon instellen

Het belvolume van de telefoon kan d.m.v. een schuifregelaar aan de achterkant van de telefoon worden ingesteld.

Toonkiezen / Impulskiezen

D.m.v. een schuifregelaar aan de achterkant van de telefoon kunt u het kiesprocédé instellen.

Opmerking: de meeste telefoonaansluitingen werken met het toonkiesprocédé.

Bijkomende aansluitingen

Headset-aansluiting

Standaard 2,5 mm-aansluiting voor headset.
(bijv. voor een PL-100/ PL-200)

Hoofdtelefoonaansluiting

Hoofdtelefoonuitgang voor het aansluiten van een hoofdtelefoon, een hoorapparaat o.i.d.

Als de telefoon niet werkt

Algemeen

Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd en correct aangesloten is. Verwijder eventuele accessoires, verlengsnoeren en andere telefoons. Als de telefoon daarna werkt, wordt de fout veroorzaakt door een ander apparaat.

Probeer de telefoon bijv. bij de burensluiting aan te sluiten. Als het toestel daar werkt, is uw telefoonaansluiting eventueel gestoord. Neem contact op met de storingsdienst.

De telefoon werkt niet

- Controleer of de netadapter correct aangesloten is op de telefoon en het stopcontact.
- Controleer of het telefoonsnoer correct aangesloten is op de telefoon en de contactdoos van de telefoonaansluiting.
- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting. Als deze telefoon werkt, is uw telefoon vermoedelijk defect.
- Gebruik alleen het originele snoer of een telefoonsnoer met internationale configuratie.

Onderhoud

De telefoon is onderhoudsvrij. Reinig het apparaat af en toe met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere organische oplosmiddelen.

De telefoon mag niet gedurende langere tijd worden blootgesteld aan directe zonnestraling en moet bovendien worden beschermd tegen grote hitte, vochtigheid of sterke mechanische schokken.

Belangrijke informatie

Het apparaat is **niet** beschermd tegen spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het apparaat. Ook open vuur, zoals bijv. brandende kaarsen, mag in geen geval op het apparaat worden geplaatst.

Garantie

De telefoon is zeer betrouwbaar. Mochten ondanks deskundige montage en bediening storingen optreden, dan kunt u contact opnemen met uw vakhandelaar of direct met de fabrikant.

De garantie omvat kostenloze reparatie en terugzending. Een voorwaarde hiervoor is dat het toestel in de originele verpakking wordt ingestuurd. Werp deze dus niet weg.

De garantie vervalt bij schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling of reparatiepogingen door niet-bevoegde personen (verbreking van het toestelzegel).

Reparaties op garantie worden alleen uitgevoerd bij inzending van de ingevulde garantiekaart van de vakhandelaar resp. het originele garantiebewijs bij direct aankoop. Het toestelnummer moet altijd worden aangegeven.



CE-teken

Dit toestel voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: 1999/5/EG Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de voornoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-teken op het apparaat.



Milieu/Verwijdering

Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (toe te passen in de landen van de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelsysteem voor deze apparaten).

Het symbool op het product of de verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld maar bij een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden afgegeven. Met uw bijdrage tot de correcte verwijdering van dit product beschermt u het milieu en de gezondheid van uw medemensen.

Milieu en gezondheid worden geschaad door een foute verwijdering. Materiaalrecyclage helpt het gebruik van grondstoffen te reduceren. Meer informatie over de recyclage van dit product krijgt u bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwijderingsbedrijven of de zaak waar u dit product heeft gekocht.

Technische gegevens

Voeding:	netadapter: 220/230 V 50 Hz
Afmetingen (L x B x H):	210 mm x 227 mm x 70 mm
Gewicht:	680 g