

Gebruiksaanwijzing
Bluetooth®
MULTI COMMUNICATIE
SYSTEEM

BH06 & BH08


Bedankt voor de aankoop van het Multi communicatie systeem. De BH06 is te gebruiken als geluidsversterker en Bluetooth ontvanger voor uw mobiel. Met de externe microfoon BH08 kunt u gesprekken op afstand beter verstaan en/of aansluiten op uw TV/geluidsinstallatie.

Inhoud


• Informatie over gehoorbescherming	3
• Voor ingebruikname	4
• Balansregeling	5
• Dragen van het Multi communicatie systeem	5
• Aanzetten van het Multi communicatie systeem	7
• Uitzetten van het Multi communicatie systeem	7
• Aan- en uitzetten van de ingebouwde microfoon	7
• Aanpassen van het volume	8
• Aanpassen van de klankkleur	8
• Verbinding tussen het Multi communicatie systeem en de externe microfoon	9

• Verbinding tussen het Multi communicatie systeem en uw gehoorapparaat	10	• Voorinstelling van SOS nummers	19
• Verbinding tussen het Multi communicatie systeem en een Bluetooth mobiele telefoon	11	• Activeren van een SOS noodgevalnummer	20
• Tot stand komen van de Bluetooth verbinding	13	• TV aansluitmogelijkheid (optioneel extra kabel)	21
• Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken als de interne microfoon uit is	14	• Verbinding tussen het Multi communicatie systeem, de externe microfoon en Bluetooth mobiele telefoon	22
• Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken als de interne versterker aan is	15	• Geluid afspelen van door de externe microfoon en telefoongesprekken beantwoorden	23
• Doorschakelen van telefoongesprekken	15	• Wisselen van de verbinding tussen de externe microfoon en de Bluetooth mobiele telefoon	23
• Telefoongesprekken beëindigen	16	• Geluidskabel voor de externe microfoon	24
• Afwijzen van een telefoongesprek	16	• Batterijoplaad aanduiding	24
• Dempen van de microfoon	17	• Batterij opladen	23
• Beantwoorden van een telefoongesprek in de wacht	17	• LED status	26
• Streaming muziek van uw mobiele telefoon	18	• Storingen verhelpen	27
• Pauze & stop streaming muziek	18	• Onderhoud en verzorging	28
• Voor- en achteruit spelen van de muzieklijst	19	• CE verklaring	30
• Noodnummer kiezen	19		

Multi communicatie systeem BH06

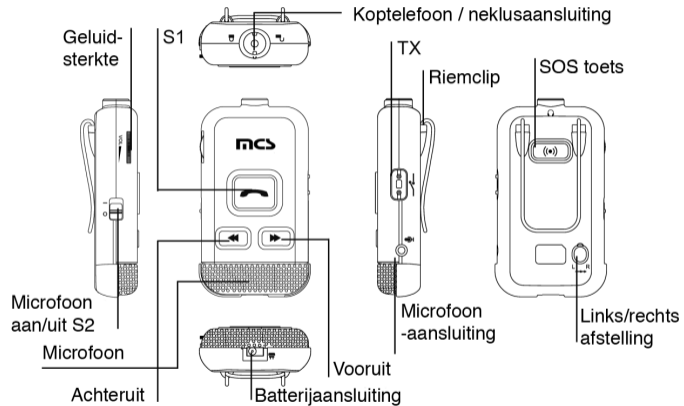

Stereo versterker BH08

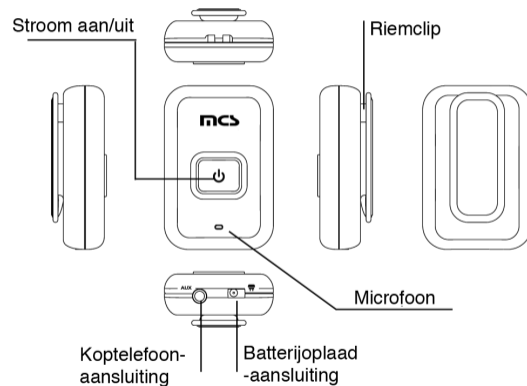

Informatie over gehoorbescherming

Waarschuwing!

Het Bluetooth Multi communicatie systeem is ontworpen om geluidsterkte te maximaliseren wat potentieel gehoorschade zou kunnen veroorzaken indien niet juist gebruikt wordt. Om uw gehoor en dat van anderen te beschermen let op de volgende punten:


1. Zet de geluidsterkte minimaal voordat u de koptelefoon opzet.
2. Gebruik de koptelefoon niet in de buurt van de microfoon omdat dan een echo of fluittoon mogelijk is.
3. Als dit gebeurt zet het geluid zachter en ga verder weg van de microfoon.
4. Let op dat kinderen en andere niet bevoegde personen geen toegang hebben tot dit product.

Voor ingebruikname

Hoe wordt het Multi communicatie systeem geïnstalleerd?

1. Sluit de koptelefoon/nekhus aan op de koptelefoon aansluiting overeenkomend met de gleuf.
2. Draai met de klok mee aan de koptelefoon/nekhusaansluiting tot die vergrendeld is.
3. Om te ontgrendelen tegen de klok in draaien.

Voordat u het Multi communicatie systeem gebruikt verzeker u ervan dat de koptelefoon/nekhus goed aangesloten en vergrendeld is.

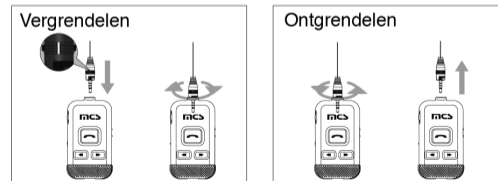

Balansregeling

Maak de rubberen bedekking open en gebruik een schroevendraaier om de balans tussen links en rechts af te stellen tot u het het aangenaamst vindt.

Dragen van het Multi communicatie systeem

Batterij opladen

Voor gebruik is het belangrijk om de batterij op te laden tot het rode LED uitgaat.

1. Plaats het Multi communicatie systeem over uw hoofd om uw nek.
2. Maak de riemclip vast aan uw kleding (let er wel op dat de microfoon in de richting van een persoon of het geluid gericht is dat u wilt ontvangen).



- 3a. Stop de koptelefoons op uw oren (voor koptelefoon).
- 3b. Beluisteren met de nek: plaats de lus om uw nek. Zet uw gehoortoestellen op de T-stand.

Aanzetten van het Multi communicatie systeem

Als het Multi communicatie systeem uitgeschakeld is, druk en houd de S1 toets vast tot het blauwe LED aangaat wat betekent dat het Multi communicatie systeem opgeladen is. Blauw licht zal om de 2 seconden oplichten.

Uitzetten van het Multi communicatie systeem

Als het Multi communicatie systeem opgeladen is, druk en houd de S1 toets vast tot het blauwe LED uitgaat.

Aan- en uitzetten van de ingebouwde microfoon

Als het Multi communicatie systeem aan is schuif de S2 toets in positie "I", de microfoon wordt aangezet.
Schuif S2 in positie "O" en de microfoon gaat uit.

Versterken van het geluidsniveau

Aanpassen van het volume

Het geluid kan aangepast worden door de volumeknop omhoog of omlaag te bewegen. Omhoog wordt het geluid harder, omlaag wordt het zachter.

Aanpassen van de klankkleur

Mocht u niet duidelijk kunnen horen in een lawaaijige omgeving druk eenmaal op de ◀◀ of ▶▶ toets en de toon respons zal worden aangepast aan de omgeving.

Verbinding tussen het Multi communicatie systeem en de externe microfoon

Bij de aankoop van het Multi communicatie systeem en de externe microfoon zijn beide al met elkaar verbonden.

Mocht u beide apart gekocht hebben volg de procedure hieronder beschreven om de verbinding te maken.

- Als het Multi communicatie systeem aan geen ander apparaat aangesloten is druk en houd de TX toets vast tot het rode en blauwe LED om de beurt oplichten.
- Is de externe microfoon uit, druk en houd "Power on/off" toets vast tot rood en blauw om de beurt oplichten.
- Het Multi communicatie systeem en de externe microfoon lichten blauw op als ze succesvol verbonden zijn. De TX toets van het Multi communicatie systeem licht groen op.
- Druk en houd de TX toets voor 2 seconden vast om de verbinding mogelijk of onmogelijk te maken zodra het Multi communicatie systeem en de microfoon eenmaal verbonden zijn.

Verbinding tussen het Multi communicatie systeem en uw gehoorapparaat

Het Multi communicatie systeem met neklus optie kan communiceren met uw gehoorapparaat als die in de T stand of de T-stand + Mic modus staat (voor de werking van uw gehoorapparaat raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel). Het Multi communicatie systeem zal geluid draadloos overbrengen. Wij raden u ten eerste aan om uw gehoorapparaat in de T-stand te zetten als u de het Multi communicatie systeem gebruikt.

Waarschuwing: Maak géén gebruik van het Multi communicatie systeem met neklus als u een pace maker of enig ander apparaat gebruikt dat gevoelig is voor een magnetisch/inductief veld.

Verbinding tussen het Multi communicatie systeem en een Bluetooth mobiele telefoon

Het Multi communicatie systeem in verbindingstatus

- Voordat u verbinding maakt verzeker u ervan dat het Multi communicatie systeem volledig is opgeladen en de batterijoplaadkabel niet aangesloten is. Mocht het Multi communicatie systeem uit zijn, druk en houd de S1 toets ingedrukt tot het rode en blauwe LED om de beurt oplichten. Dit betekent dat het Multi communicatie systeem in de verbindingstatus is.
- Volg de instructie van uw Bluetooth mobiel om de verbinding hiermee te beginnen. Meestal gebeurt dit door een Setup- of verbindingsmenu om dan de optie in uw Bluetooth apparaat te kiezen. Bluetooth kan enige seconden nodig hebben om een verbinding te maken.
- Uw telefoondisplay zou moeten aangeven dat het Multi communicatie systeem gevonden heeft en zal u vragen of u de verbinding wilt maken. Dit dient u te bevestigen.

Een Bluetooth mobiel dat is uitgerust met 2.1, heeft een eenvoudige verbindingsmogelijkheid zonder om een wachtwoord te vragen. Voor Bluetooth zonder 2.1 en eerdere modellen zal er om een wachtwoord of PIN gevraagd worden, toets dan "0000" in.

Het blauwe LED van het Multi Communicatie systeem zal om de 2 seconden oplichten als de verbinding succesvol is. Gewoonlijk zal het Multi communicatie systeem vragen of u de naam hiervan wilt veranderen, wij raden aan om dit niet te doen.

- Mocht de verbinding niet als verwacht tot stand komen zet dan zowel het Multi communicatie systeem als de mobiele telefoon uit en wacht 10 seconden. Zet beide weer aan en herhaal de stappen vanaf het begin. Zijn de mobiele telefoon en het Multi communicatie systeem verbonden worden beide apparaten door elkaar herkend en hoeft de procedure niet herhaald worden.

Tot stand komen van de Bluetooth verbinding

Nadat de verbinding tussen het Multi communicatie systeem en de mobiele telefoon tot stand is gebracht wilt u mogelijk een Bluetoothverbinding opzetten, hierbij volgt u de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon. Om de verbinding mogelijk te maken; druk kort op S1. Als u bijvoorbeeld een Nokia 6130i gebruikt, zal op het display de vraag verschijnen “Verbinding met het Multi communicatie systeem accepteren?” U kiest dan “Ja” om de verbinding mogelijk te maken. U kunt nu bellen of gebeld worden met het Multi communicatie systeem. Voor andere mobiele telefoons moet u de gebruiksaanwijzing hiervan raadplegen.

Let op:
Nadat het Multi communicatie systeem is uitgezet zal het Multi communicatie systeem na het opnieuw aanzetten zich met het laatst gebruikte apparaat verbinden. Als het Multi communicatie systeem niet aangesloten is maar nog wel stroom heeft, druk dan kort op S1 om de verbinding te herstellen. Mocht er abnormaal verlies van de verbinding zijn (buiten bereik e.d.),

zal het Multi communicatie systeem eenmaal automatisch proberen om een verbinding te maken met de mobiele telefoon.

Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken als de ingebouwde microfoon modus uit is

Als u het Multi communicatie systeem draagt terwijl er een telefoongesprek binnen komt zal het Multi communicatie systeem rinkelen, om het telefoongesprek aan te nemen drukt u op S1.

Let op: Sommige mobiele telefoons zetten de bluetoothverbinding in de standby modus als deze lang niet is gebruikt. Als er een telefoonoproep komt zal de mobiele telefoon rinkelen en het zal enige seconden duren tot het telefoongesprek wordt doorverbonden met het Multi communicatie systeem. U moet wachten tot u de beltoon op uw Multi communicatie systeem hoort. Als u op S1 drukt voordat u de beltoon op uw Multi communicatie systeem hoort zal het Multi communicatie systeem een Bluetooth verbinding maken. Dit zal een conflict tussen de mobiele telefoon en het Multi communicatie systeem veroorzaken.

Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken als de interne microfoon aan is

Als er een inkomend telefoongesprek komt terwijl u het Multi communicatie systeem draagt en gebruik maakt van de interne microfoon zal het Multi communicatie systeem rinkelen. Druk op S1 om het gesprek aan te nemen. De interne microfoon zal zich automatisch uitschakelen tijdens het gesprek en daarna weer automatisch inschakelen.

Doorschakelen van gesprekken

Tijdens een telefoongesprek kan dit doorgeschakeld worden van de Bluetooth mobiele telefoon naar het Multi communicatie systeem en andersom.

- Om door te schakelen van de Bluetooth mobiele telefoon naar het Multi communicatie systeem:

Druk **eenmaal** op de S1 toets en het telefoongesprek wordt doorgeschakeld naar het Multi communicatie systeem.

- Om door te schakelen van het Multi communicatie systeem naar de Bluetooth mobiele telefoon raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon.

Telefoongesprekken beëindigen

Tijdens een telefoongesprek kunt u dit gesprek beëindigen door op S1 te drukken.

Afwijzing van een telefoongesprek

Om een telefoongesprek af te wijzen als het Multi communicatie systeem rinkelt druk en houd de ►► toets ingedrukt tot u een toon hoort.

Dempen van de microfoon

Om de microfoon zachter te zetten tijdens een telefoongesprek druk de ◀◀ toets in. U hoort een periodieke pieptoon terwijl de microfoon zachter gezet wordt. Om dit proces te beëindigen drukt u weer op de ◀◀ toets. De periodieke pieptoon stopt en de microfoonfunctie wordt weer geactiveerd.

Beantwoorden van een telefoongesprek in de wacht

Als tijdens een telefoongesprek een ander gesprek binnen komt dat u wilt beantwoorden druk en houd de ▶▶ toets ingedrukt om het eerste gesprek in de wacht te zetten en het nieuwe telefoongesprek aan te nemen.

De ▶▶ toets zorgt ervoor dat u tussen twee telefoongesprekken kunt wisselen.

Telefoongesprekken in de wacht zetten, is alleen mogelijk als dit ondersteund wordt door uw SIM kaart of als uw mobiele telefoon uitgerust is met deze mogelijkheid.

Streaming muziek van uw mobiele telefoon

Als uw mobiele telefoon A2DP en AVRCP ondersteund en verbonden is met het Multi communicatie systeem, zal muziek gestreamd worden als u op de S1 toets drukt. U kunt dan het Multi communicatie systeem gebruiken om van muziek op uw mobiele telefoon te genieten. Als u gebelt wordt terwijl u muziek luistert, drukt u op S1 om het telefoongesprek aan te nemen. De muziek stopt gedurende het telefoongesprek en zal verder gaan nadat het telefoongesprek is beëindigt.

Pauze & stop muziek streaming

Om de muziek streaming in pauze te zetten drukt u op de S1 toets, als u er nogmaals op drukt zal de muziek streaming verder gaan. Om de muziek streaming te stoppen drukt en houdt u de S1 toets ingedrukt.

Voor- en achteruit spelen van de muziklijst

Als u op de ►► toets drukt terwijl u naar muziek luistert zal de volgende titel in de muziklijst worden afgespeelt op het Multi communicatie systeem. Als u op de ◀◀ toets drukt zal de vorige titel afgespeelt worden.

Noodnummer kiezen

Het Multi communicatie systeem is uitgerust met de mogelijkheid om vooraf ingestelde nummers van betrouwbare contacten te activeren in een noodgeval. Volg de onderstaande voorinstelling procedure om de SOS contactnummers in te stellen op uw mobiele telefoon.

Voorinstelling van SOS nummers

1. Zet het nummer van uw betrouwbaar contact in uw mobiele telefoonboek.

2. Zet het Multi communicatie systeem in verbindingstatus (zie p 11).
3. Volg het mobiele telefoonmenu om het specifieke nummer via Bluetooth naar de entertainment set te sturen. Bij de Sony Ericsson W800i bijvoorbeeld gaat u naar het contactnummer en u selecteert "zenden via Bluetooth". Het zal gaan zoeken en "het Multi communicatie systeem" op uw display laten zien. Bevestig dat u het nummer naar het Multi communicatie systeem wilt zenden.
4. Nadat het contactnummer succesvol geïnstalleerd is zal het Multi communicatie systeem de verbinding verbreken.
5. Gaat u na of het vooringestelde contactnummer correct is ingesteld door op de SOS toets te drukken en het nummer te bellen.

Let op: Zet alleen de meest betrouwbare contacten in uw SOS voorinstelling.

Activering van het SOS noodnummer

Zodra u op de SOS toets drukt en vasthoudt zal automatisch het vooringestelde SOS contact gebelt worden.

Opmerking: Dit is alleen mogelijk als u mobiele telefoon zich in het bereik is van het netwerk van uw telefoonprovider bevindt.

TV aansluitmogelijkheid (optioneel extra kabel)

Door een optioneel verkrijgbare kabel van 4 meter vergroot u het bereik van het Multi communicatie systeem.

Aansluiten van het Multi communicatie systeem op de TV:

1. Steek de kabel in de “externe microfoon aansluiting”
2. Zet de microfoon dicht bij de tv luidspreker.

Waarschuwing: Wees voorzichtig met de kabel tussen de tv en het Multi communicatie systeem. Wij raden u aan om de externe microfoon samen met het Multi communicatie systeem te kopen.

Verbinding tussen het Multi communicatie systeem, de externe microfoon en de Bluetooth mobiele telefoon

Nadat de verbinding tussen het Multi communicatie systeem, de externe microfoon en de Bluetooth mobiele telefoon tot stand is gekomen, kan het Multi communicatie systeem tegelijk verbonden worden naar de externe microfoon en de Bluetooth mobiele telefoon.

Geluid afspelen door de externe microfoon en telefoongesprekken beantwoorden

Als het Multi communicatie systeem geluid afspeelt door de externe microfoon terwijl het aan de Bluetooth mobiele telefoon aangesloten is en een telefoongesprek komt binnen, druk S1 om het gesprek aan te nemen. Het geluid van de externe microfoon zal vanzelf weer aangaan zodra het telefoongesprek beëindigd is.

Wisselen van de verbinding tussen de externe microfoon en mobiele telefoon

Is het Multi communicatie systeem verbonden met de externe microfoon, druk en houd de TX toets ingedrukt om de verbinding te verbreken, het groene LED gaat uit. Drukken op de S1 toets zal het afspelen van de muziek van de mobiel hervatten.

Druk en houdt de TX toets vast om de externe microfoon te verbinden met het Multi communicatie systeem als deze verbonden is met de mobiele telefoon. De TX toets zal groen oplichten.

Geluidskabel voor de externe microfoon


Om de beste geluidswaergave te verkrijgen van de tv of MP3; verbindt de geluidskabel in de geluidsaansluiting van de externe microfoon en geluidsaansluiting van de tv of MP3.

Batterijoplaad aanduiding

Zowel het Multi communicatie systeem LED en de LED van de externe microfoon zullen rood oplichten in plaats van blauw als de batterij bijna leeg is. Ook zal er periodiek een korte piep te horen zijn in uw Multi communicatie systeem. Na deze waarschuwing heeft u nog enige minuten de tijd hebben om te praten. Is de batterij leeg zal het apparaat zich uitschakelen. Het kan alleen ingeschakeld worden als de oplader aangesloten is of als de batterij voldoende geladen is.

Batterij opladen

Om de batterij op te laden verbindt u de oplaadkabel met het apparaat, terwijl het opgeladen wordt verschijnt er een rood LED licht. Zodra de batterij volledig opgeladen is zal het rode licht uit gaan.

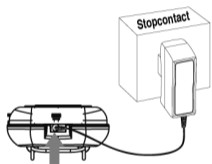

De mogelijke spreek- en standby tijd voor het Multi communicatie systeem kan verschillen i.v.m. het gebruik van Bluetooth apparaten die een andere uitschakelmodus toepassen. Houd het apparaat weg van vuur en vermijd beschadiging.

Waarschuwing: Het stopcontact voor de adapter dient zich bij voorkeur in de buurt van het apparaat te bevinden en dient makkelijk te bereiken te zijn.

LED status

LED	Status
Blauw LED licht 2x om de 2 sec. op	Spreeken/streaming muziek
Blauw LED licht 1x om de 2 sec. op	Géén activiteit
Groen LED knippert	Extern microfoon is in gebruik
Knipperend rood LED	Batterij bijna leeg
Rood LED is constant aan	Batterij wordt opgeladen
Rood LED is uit	Batterij is opgeladen
Rood/blauw LED knipperen	Verbindingstatus
Blauw LED knippert snel	Beltoon

Herinnering

Het LED zal niet aan gaan als de batterij bijna leeg is en zal pas aan gaan als de batterij opgeladen wordt. Dit kan enige minuten in beslag nemen.

Storingen verhelpen

Géén geluid

1. Controleer of de koptelefoon/nekklus goed aangesloten en vergrendeld is aan het Multi communicatie systeem.
2. Controleer of de batterij opgeladen is.
3. Controleer of het Multi communicatie systeem aan staat.
4. Controleer of de volume voor u hard genoeg is.
5. Controleer of uw gehoorapparaat in de T-stand of T-stand + MIC stand staat.

Zacht geluid






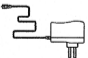
1. Controleer of de volume voor u hard genoeg is.
2. Controleer of de batterij opgeladen is.
3. Controleer uw mobiele telefoon volume
4. Controleer of het geluid van uw externe microfoon aan is.
5. Controleer of u mobiele telefoon zich in het bereik is van het netwerk van uw telefoonprovider bevindt.

Onderhoud en verzorging

1. Zorg dat het Multi communicatie systeem en de externe microfoon niet in de handen van kinderen kan komen.
2. Let erop dat het Multi communicatie systeem en de externe microfoon droog blijven.
3. Het Multi communicatie systeem en de externe microfoon mogen niet blootgesteld worden aan buitensporig vochtige omstandigheden.
4. Voorkom dat het Multi communicatie systeem en de externe microfoon vallen.

5. Door het Multi communicatie systeem en de externe microfoon niet in de buurt van water te gebruiken voorkomt u het gevaar van een elektrische schok.
6. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen e.d. maak gebruik van een zachte doek om het apparaat te reinigen.

Inhoudstabel

Beeld	Beschrijving	Beeld	Beschrijving
	Multi communicatie systeem		Neklus
	Externe microfoon		Oortelefoon
	3,5mm - 3,5 mm		AC/DC stroomadapter

Federale communicatie commissie storing verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen van een klasse B digitaal apparaat, op grond van deel 15 van de FCC wetten. Deze eisen zijn opgesteld om een redelijkerwijze bescherming tegen schadelijke storingen in de huiselijke installaties van elektrische apparatuur te voorkomen. Dit apparaat produceert, gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen. Als het niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan het schadelijke storingen veroorzaken bij radioapparatuur. Toch is er geen garantie dat deze storingen niet op kunnen treden in een installatie. Het apparaat kan schadelijke storingen veroorzaken. U kunt deze opsporen door het apparaat aan/uit te zetten. De gebruiker wordt aangeraden de volgende maatregelen te nemen:

- Stel de antenne opnieuw in en verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
- Verbindt het apparaat in een een ander stopcontact dat op een andere groep aangesloten is dan de ontvanger.
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio/tv installateur.

FCC waarschuwing: Enige veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door diegene die verantwoordelijk is voor naleving kan erin resulteren dat de gebruiker het apparaat niet meer mag gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan de normen van de FCC eisen, deel 15. Ingebruikname is toegestaan onder de volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat bestand zijn tegen schadelijke storingen, ook storingen die door ondeskundig gebruik veroorzaakt zijn.

Belangrijke opmerking

Stralingsblootstellingverklaring

Dit apparaat voldoet aan de grenzen van de FCC stralingsblootstellingsverklaring voor een oncontroleerde omgeving. De eindgebruiker moet de specifieke instructies en gebruiksaanwijzing volgen om aan de RF blootstellingseisen te voldoen. Om aan de vereisten

te voldoen wordt aanbevolen de instructies en deze gebruiksaanwijzing te volgen. De zender mag niet samen met een andere antenne of zender gebruikt worden.

Correcte verwijdering van dit product



Dit teken geeft aan dat dit product niet in de gewone vuilcontainer hoort volgens de EU regelgeving. Om milieuschade, of schade aan mensen te voorkomen is het wenselijk om het te recyclen voor hergebruik. Teruggave van het product is mogelijk in de milieustraat van uw vuilverwerker en bij de dealer waar u het produkt gekocht heeft. Zij zorgen ervoor dat dit product milieuvriendelijk ontzorgt wordt.



De CE kenmerk is verplicht merk op veel producten in de EU. Het CE kenmerk certificeert dat dit product overeenstemt met de in de EU overeengekomen regels i.v.m. zekerheid en gezondheid van de consument en het milieu.

CE verklaring

Wij,
Bedrijf: In-tech electronics LTD
Met ons,
Product(s): Het Multi communicatie systeem
Model no.: BH 06

verklaart dat het product aan de eisen is uitgezet in de richtlijn van de raad voor naleving van de wetgevingen van de lidstaten gerelateerd aan de R&tte Directive (1999/5/EC) als ook aan de laagspanning wetgeving 2006/95/EC. Voor de evaluatie van de bovengenoemde wetgevingen, werden de volgende standaarden toegepast:

EMC

EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN55022: 2006, EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995+A1+A2
EN50371:2002, LVD EN60950-1 : 2006
EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

De onderstaande fabrikant is verantwoordelijk voor deze verklaring:

In-Tech Electronics Ltd
Unit A, 13/F, Wing Tai Centre, 12 Hing Yip Street,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong