

GEEMARC CL400

SLECHTHORENDEN TELEFOON



INHOUDSOPGAVE

1.0 INLEIDING	3
2.0 BESCHRIJVING TOESTEL	4
2.1 AANSLUITEN VAN HET TOESTEL	7
2.2 WANDMONTAGE	7
3.0 INSTELLING BELSIGNAAL	8
3.1 INSTELLING ALARM EN BELTOON	8
3.2 INSTELLING KEUZESCHAKELAAR KIESTOON	9
3.3 INSTELLING TAAL	9
3.4 INSTELLING DATUM EN TIJD	9
3.5 WIJZIGEN DATUM EN TIJDSWEERGAVE	9
3.6 CONTRAST DISPLAY INSTELLEN	10
3.7 AUTO ON HOOK FUNCTIE	10
3.8 DIM:X-->x	10
3.9 TIME BREAK RECALL (TBR) INSTELLING	11
4.0 BELLEN EN GEBELD WORDEN	11
4.1 GEBRUIK VAN LUIDSPREKERVOLUME	12
4.2 LAATST GEKOZEN NUMMER KIEZEN	12
4.3 MUTE TOETS	13
4.4 FUNCTIE VAN TOETSEN R, * en #	13
5.0 HET OPSLAAN VAN TELEFOONNUMMERS	13
5.1 OPGESLAGEN NUMMERS BELLEN	14
5.2 BELLEN MET HEADSET VOORZIEN VAN MICROFOON	14
5.3 GEBRUIK VAN EEN NEKLUS	14
5.4 GEBRUIK VAN EEN TRILELEMENT	15
6.0 SPRAAKVOLUME INSTELLEN	15
6.1 HOORVOLUME INSTELLEN	15
7.0 TELEFOONBOEK	16
7.1 TELEFOONNUMMER VERWIJDEREN UIT TELEFOONBOEK	17
7.2 WIJZIGEN VAN TELEFOONBOEKGEGEVENS	17
7.3 BELLEN VIA HET TELEFOONBOEK	18

1.0 INLEIDING

De CL400 telefoon is een modieus toestel speciaal ontworpen voor slechthorenden. De hoorn van de telefoon is standaard voorzien van een ringleiding zodat u via de T-stand (coil/ringleiding) het geluid versterkt in uw gehoorgang krijgt!

Als u deze telefoon in combinatie met een hoorapparaat wenst te gebruiken, schakel dan uw hoorapparaat op "T"!

Daarnaast biedt de CL400 de mogelijkheid om het hoorvolume met maximaal 38dB te versterken! Tevens is het toestel voorzien van een aansluiting voor een trilelement, headset/koptelefoon en neklus. Tenslotte beschikt de CL400 over een strobe-lichtindicatie die u attendeert op inkomende gesprekken.

In de verpakking dient u de volgende onderdelen aan te treffen:

- telefoonhoorn en –krulsnoer;
- basisstation;
- doorkoppel stekker;
- telefoonsnoer;
- adapter;
- gebruiksaanwijzing.

Let op: Uw CL400 telefoon gebruikt voor het geheugen van opgeslagen data 4 alkaline batterijen (type AAA 1,5V, niet inbegrepen). Gebruik geen oplaadbare batterijen!

Tenslotte willen wij u attenderen op het volgende.

- De CL400 is ontworpen voor een netspanning van 230V 50Hz. (Geclassificeerd "gevaarlijke spanning" volgens norm EN60950).
- Het basisstation is niet voorzien van een ingebouwde aan-/uitschakelaar. Om de netspanning van het basisstation te halen dient u de netvoedingadapter uit het stopcontact te halen.
- Het basisstation dient op een stevige en vlakke ondergrond geplaatst te worden.
- Zorg bij installatie van het toestel dat de netvoedingadapter op een goed toegankelijk en degelijk stopcontact wordt aangesloten.
- Maak het toestel schoon met enkel een zachte doek.
- Haal voor het schoonmaken allereerst de netvoedingadapter uit het stopcontact!
- Beslist geen agressieve/schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- Het apparaat tijdens onweer en gaslekken niet gebruiken.
- Tijdens onweer alle elektrische apparatuur afsluiten van het elektriciteits- en telefoonnet.


Wij wensen u veel plezier toe met gebruik van de CL400!

2.0 BESCHRIJVING TOESTEL


Figuur 1: top aanzicht CL400




Figuur 2: linker zij aanzicht CL400

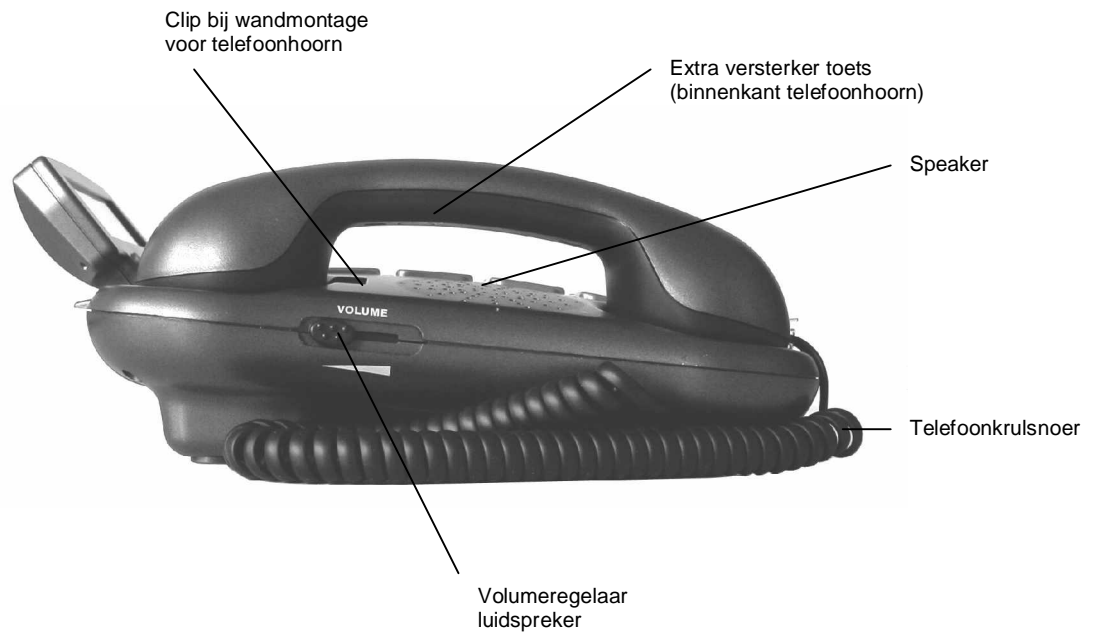

Figuur 3: rechter zij aanzicht CL400

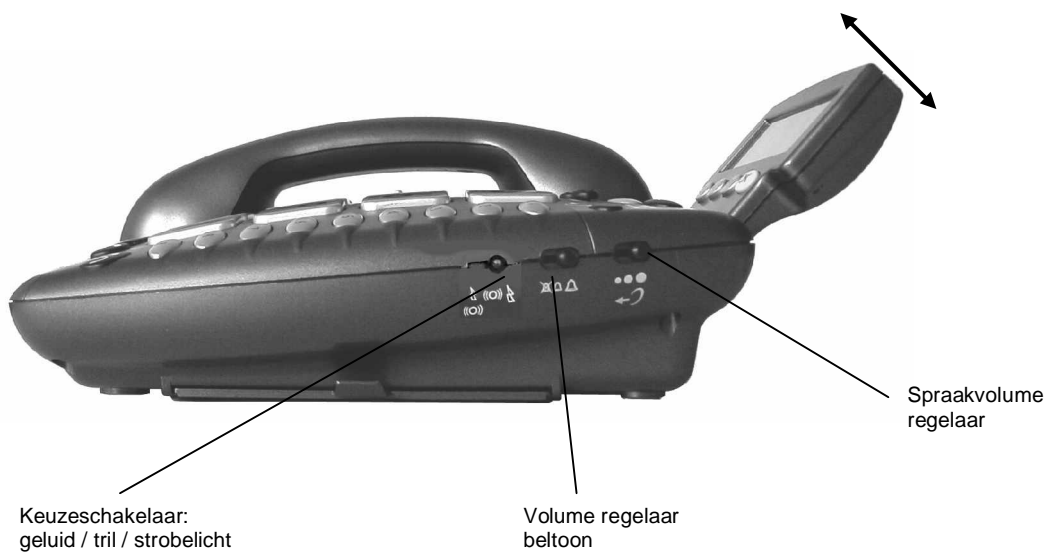


Figuur 4: voorbeeld display weergave

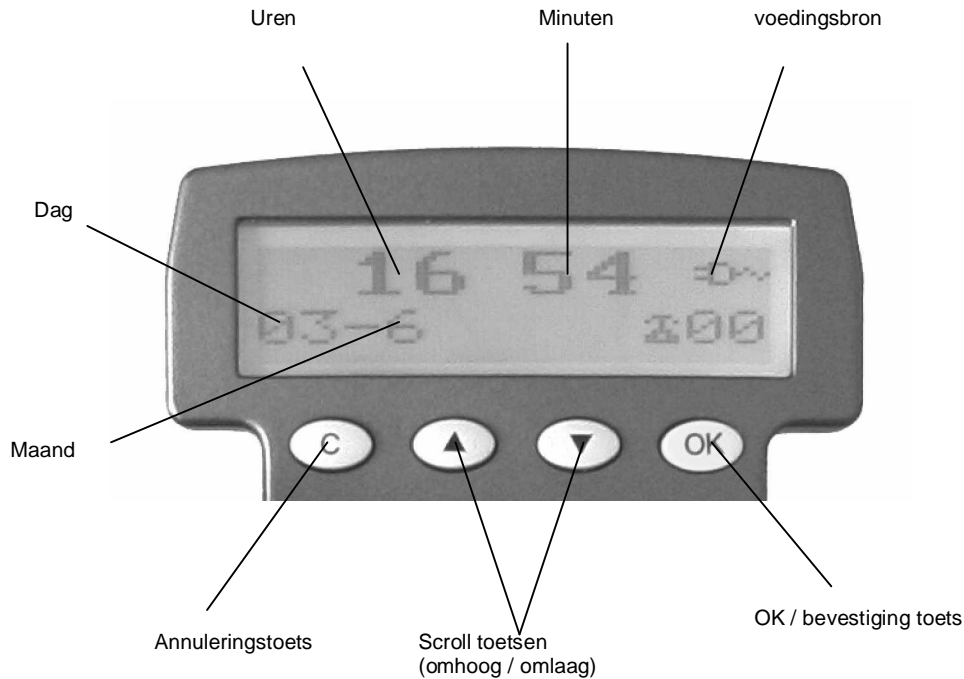

Opmerkingen


- De OK-toets dient gebruikt te worden om een actie en/of keuze te bevestigen.
- De C-toets wordt, generiek gesproken, gebruikt om een actie en/of een keuze af te breken. Echter, de C-toets kan in enkele gevallen ook worden gebruikt om een keuze te bevestigen (bijvoorbeeld: ter bevestiging van het verwijderen van een opgeslagen nummer in het telefoonboek).
- De toetsen ▲ en ▼ dienen voor het bladeren ("scrollen") door een menu.
- Voorts kunnen onderstaande symbolen op de display verschijnen.

: batterijen zijn de voedingsbron van de CL400

 : netspanning is de voedingsbron van uw CL400


 : geheugeninvoer is vereist

 : contrast niveau van de display

 : mute functie is geactiveerd

 : telefoongesprek m.b.v. luidspreker

 : telefoongesprek m.b.v. telefoonhoorn

 : nieuwe invoer

 : N


2.1 AANSLUITEN VAN HET TOESTEL

U sluit uw CL400 toestel als volgt aan.

- Sluit het telefoon kruisnoer aan op de telefoonhoorn en het basisstation.
- Plaats 4 alkaline batterijen (type AAA 1,5V, niet inbegrepen) in het batterijencompartiment. Let hierbij op de juiste polariteit en gebruik geen oplaadbare batterijen!
- Sluit het telefoonsnoer aan op het toestel en vervolgens in de PTT aansluiting met behulp van de doorkoppel stekker (zie figuur 5).
- Stop het snoer van de netvoedingadapter in de daarvoor bedoelde ingang aan de achterzijde van het basisstation en steek vervolgens het andere uiteinde van het snoer in het stopcontact (zie figuur 5).

OPMERKING: De 4 batterijen zorgen ervoor dat bij stroomuitval (of: afsluiting van het elektriciteitsnetwerk) de geheugeninstellingen van uw toestel bewaard blijven. Bij stroomuitval kunt u slechts bellen en gebeld worden! De overige functies kunnen niet worden uitgevoerd.

Figuur 5: achter aanzicht CL400

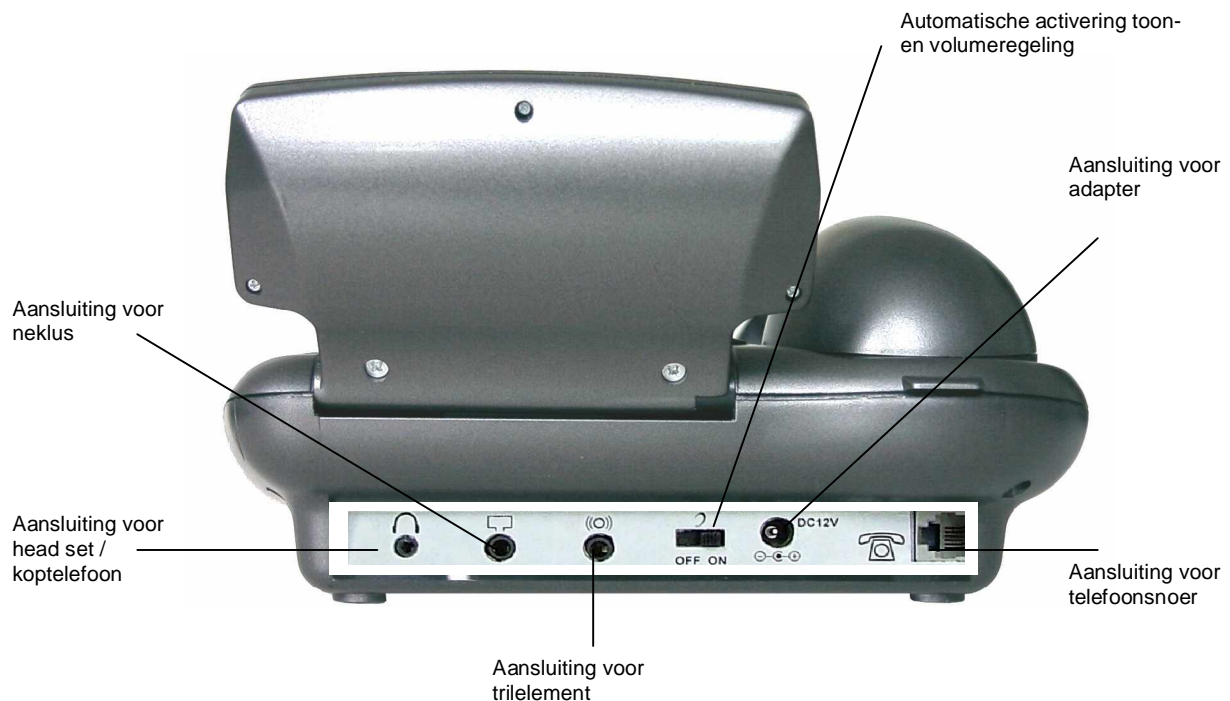


2.2 WANDMONTAGE


Om uw toestel verticaal aan de wand te monteren, gaat u als volgt te werk. Schuif de clip (zie figuur 7) naar buiten, draai hem om en plaats de clip weer terug. (Deze handeling zorgt er voor dat de hoorn goed op zijn plaats blijft wanneer het toestel verticaal aan de wand is gemonteerd.)

Boor vervolgens twee gaten in de wand 80mm uit elkaar (zie figuur 6), steek pluggen in de geboorde gaten en draai vervolgens schroeven erin. Laat de schroeven 6 tot 7 mm uitsteken. Plaats het toestel over de schroef(koppen) en schuif het toestel omlaag tot het niet verder kan. Het toestel is nu gemonteerd.

Figuur 6: onder aanzicht CL400

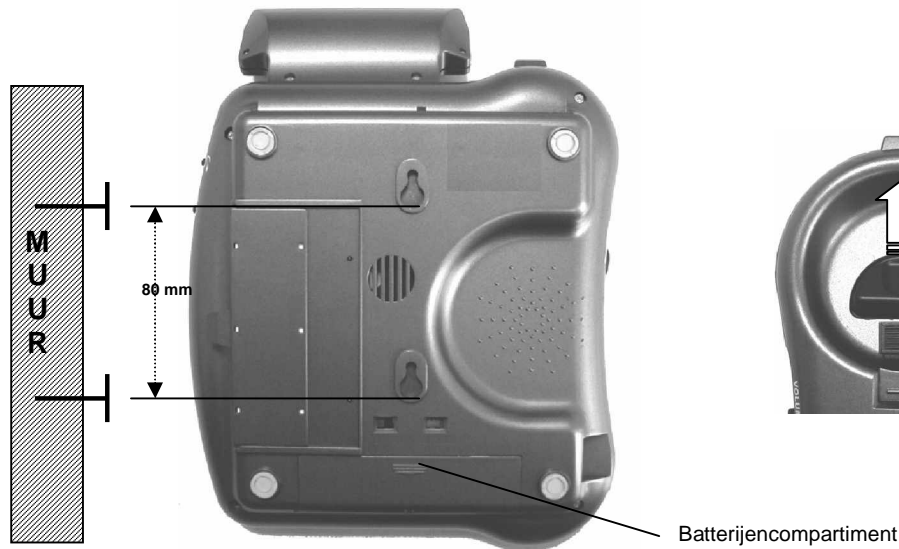

Figuur 7: bevestigingsclip telefoonhaak

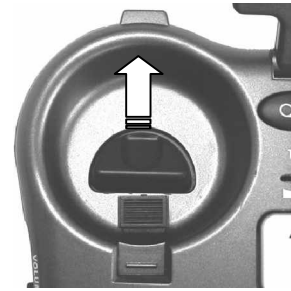




3.0 INSTELLING BELSIGNAAL

Met de volumeregelaar aan de rechterzijde van uw CL400 (zie figuur 3) kunt u het belsignaal (volume) instellen op HOOG, LAAG of UIT.

-  : UIT
-  : LAAG
-  : HOOG




Bij aflevering van uw toestel is het belsignaal (volume) standaard ingeschakeld op HOOG.

Naast het volume kunt u eveneens de melodie van het belsignaal wijzigen. U heeft hierbij keuze uit 4 verschillende melodieën. Om een belmelodie te wijzigen handelt u als volgt.

- Plaats de telefoonhoorn op de haak.
- Druk op de  toets.
- Selecteer met behulp van de toetsen  en  het menu "SET PHONE".
- Druk ter bevestiging op de OK-toets.
- Selecteer "SET RING".
- Druk op OK ter bevestiging.
- Bepaal nu de melodie overeenkomstig uw wens.
- Ter bevestiging drukt u wederom op OK.
- De gekozen belmelodie zal thans klinken.
- Druk 3 maal op de C-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.1 INSTELLING ALARM EN BELTOON

Met de drie-standenschakelaar aan de rechterzijde van het toestel (zie figuur 3) kunt u kiezen uit de drie volgende opties:

-  : beltoon en flitslicht zijn geactiveerd;
-  : beltoon en trilelement zijn geactiveerd;
-  : beltoon, flitslicht en trilelement zijn geactiveerd.




3.2 INSTELLING KEUZESCHAKELAAR KIESTOON

In de fabriek is de keuzeschakelaar voor toon of puls ingesteld op TONE (T). Als u niet kunt bellen met uw toestel is deze waarschijnlijk nog aangesloten op een oudere (privé)-centrale (PBX). In dat geval dient u de keuzeschakelaar op PULSE (P) te zetten.

3.3 INSTELLING TAAL






De informatie op de display van de CL400 kunt u in 16 verschillende talen laten weergeven, waaronder Nederlands.

Om de door u gewenste taal te selecteren, handelt u als volgt.

- Plaats de hoorn op de haak en druk op de  toets.
- Gebruik de toetsen  en  om "SET PHONE" te selecteren en druk na selectie op de OK toets ter bevestiging van uw keuze.
- Selecteer vervolgens "SET LANGUAGE" en bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Selecteer de door u gewenste taal en druk op OK.
- Druk vervolgens tweemaal op de C-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.4 INSTELLING DATUM EN TIJD


Om de gewenste datum en tijd in te stellen, handelt u als volgt.

- Vergewist u dat de hoorn op de haak ligt en druk vervolgens op de  toets.
- Gebruik de toetsen  en  om "SET TIME" te selecteren en druk vervolgens op de OK-toets ter bevestiging van uw keuze.
- Hierna kunt u eveneens met behulp de toetsen  en  de gewenste positie van de tijdsweergave (uren, minuten) wijzigen. Druk per juiste positie op de OK-toets.
- Om terug te keren naar het hoofdscherm drukt u op de C-toets.

3.5 WIJZIGEN DATUM EN TIJDSWEERGAVE

De display van uw CL400 geeft onder meer de datum en tijd weer. Voor gebruik dient u allereerst de instellingen van de datum- en tijdsweergave te bepalen. Dit gaat als volgt.

Datum weergave

- Plaats de hoorn op de haak.
- Druk op de  toets.

- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om “SET PHONE” te selecteren en druk na selectie op de OK-toets ter bevestiging van uw keuze.
- Selecteer nu “Date Format” en bevestig dit met de OK-toets.
- Selecteer vervolgens één van de twee datum instellingen en bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Druk tweemaal op de C-toets om in het hoofdscherm te geraken.

Tijdsweergave

- Plaats de hoorn op de haak.
- Druk op de ⊗ toets.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om “SET PHONE” te selecteren en druk na selectie op de OK-toets ter bevestiging van uw keuze.
- Selecteer “HOUR FORMAT” en bevestig dit met de OK-toets.
- Selecteer vervolgens één van de twee tijdsinstellingen en bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Druk tweemaal op de C-toets om in het hoofdscherm te geraken.

3.6 CONTRAST DISPLAY INSTELLEN

Om de lichtintensiteit van achtergrondverlichting van de display in te stellen, handelt u als volgt.

- Plaats de hoorn op de haak en druk op de ⊗ toets.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om “SET PHONE” te selecteren.
- Druk vervolgens op de OK-toets ter bevestiging van uw keuze.
- Selecteer vervolgens “LCD CONTRAST” en bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ eveneens om de lichtintensiteit in te stellen.
- Druk vervolgens op de C-toets of OK-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.7 AUTO ON HOOK FUNCTIE

Indien u een telefoonnummer tracht te bellen dat in gesprek is, dan zorgt de auto on hook functie er voor dat de lijn na 8 seconden weer wordt vrijgemaakt. Volg onderstaande instructies om de auto on hook functie te (de)activeren.

- Plaats de hoorn op de haak en druk op de ⊗ toets.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om “SET PHONE” te selecteren. Druk hierna ter bevestiging op de OK- toets.
- Selecteer vervolgens “AUTO ON HOOK” en bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om “ON” (auto on hook functie geactiveerd) of “OFF” (auto on hook functie niet geactiveerd) te selecteren.
- Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen.
- Druk vervolgens tweemaal op de C-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.8 DIM:X--->x

Indien de functie DIM:X--->x is geactiveerd, dan kunnen maximaal 18 karakters van een telefoonnummer worden getoond op de display van uw CL400 (anders “slechts” 8 karakters). Wij adviseren u dan ook om deze functie te activeren! Dit gaat als volgt.

- Plaats de hoorn op de haak en druk op de ☒ toets.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om "SET PHONE" te selecteren en druk op de OK-toets.
- Selecteer vervolgens "DIM:X--->x" en bevestig deze keuze met de OK-toets.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om "ON" (functie geactiveerd) of "OFF" (functie niet geactiveerd) te selecteren.
- Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen.
- Druk vervolgens tweemaal op de C-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.9 TIME BREAK RECALL (TBR) INSTELLING

Voor het Verenigd Koninkrijk is de TBR-instelling van uw CL400 toestel in de fabriek ingesteld op 100ms ten behoeve van (huis)centrales. Voor andere locaties of PBX-centrales dient u de TBR-instelling op 300ms te zetten. Hiervoor handelt u zoals hieronder beschreven.

- Plaats de hoorn op de haak en druk op de ☒ toets.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om "SET PHONE" te selecteren en druk op de OK-toets.
- Selecteer vervolgens "SET FLASH" en bevestig deze keuze met de OK-toets.
- Selecteer nu de gewenste instelling: 100ms, 300ms of 600ms.
- Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen.
- Druk vervolgens tweemaal op de C-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.



4.0 BELLEN EN GEBELD WORDEN

Afhankelijk van uw instellingen (zie paragraaf 3.1) wordt u bij een inkomend gesprek geattendeerd door de volgende signaleringen: geluid, licht en/of trilvibraties. Indien nummerweergave is geactiveerd dan verschijnt eveneens het telefoonnummer op de display van uw CL400.

U wordt gebeld

Neem de hoorn (handset) van de haak en begin uw telefoongesprek. Het gesprek kan worden beëindigd indien één van de twee partijen de hoorn weer op de haak legt.

De CL400 beschikt eveneens over een hands free functie. Indien deze functie is geactiveerd kunnen de u omringende mensen eveneens het telefoongesprek volgen! Om een inkomend gesprek hands free aan te nemen handelt u als volgt.

- Druk eenmalig kort op toets  om het gesprek hands free aan te nemen.
- Om het gesprek te beëindigen drukt u nogmaals op toets  of u neemt kort de hoorn van de haak.

U wilt bellen

U kunt, naast bellen via de speciale geheugentoetsen en/of telefoonboek, op 3 verschillende manieren bellen naar een andere persoon.

Mogelijkheid 1




- Neem de hoorn van de haak en wacht op de kiestoon.

- Toets het gewenste nummer in dat u wilt bellen (het nummer verschijnt op de display).
- Het gesprek kan worden beëindigd door de hoorn weer op de haak te leggen.

Mogelijkheid 2 (pre-dialling)

- Voer het gewenste nummer in met de hoorn op de haak. Uw nummerinvoer kunt u op de display van de CL400 terugzien. Met behulp van de **C**-toets kunt u foutieve invoer corrigeren.
- Wanneer de hoorn van de haak wordt genomen zal het toestel automatisch het telefoonnummer draaien dat u zojuist heeft ingevoerd.
- Om het gesprek te beëindigen plaatst u de hoorn weer op de haak.

Mogelijkheid 3 (hands free)

- Laat de hoorn op de haak en voer het gewenste nummer in met behulp van de cijfertoetsen.
- Foutieve nummerinvoer kunt u corrigeren met behulp van de C-toets.
- Na nummerinvoer drukt u op toets  en het nummer wordt gedraaid.
- Nadat de verbinding tot stand is gekomen kunt u spreken. Het microfoontje bij hands free bellen is gesitueerd rechtsonder op het basisstation (zie figuur 1).
- Het volume van de luidspreker kunt u regelen met behulp van de schuifschakelaar (, zie figuur 2).
- Na beëindiging van uw telefoongesprek kunt u de lijn weer vrij maken door éénmaal op toets  te drukken.


Opmerking: U kunt te allen tijde gedurende een telefoongesprek de hands free functie deactiveren door de hoorn van de haak te nemen. U kunt vervolgens het gesprek voortzetten met behulp van de telefoonhoorn. Wanneer de hands free functie is gedeactiveerd zal op de display het symbool  verdwijnen en verschijnt het symbool . Om gedurende een telefoongesprek de hands free functie te activeren, drukt u op de  toets waarbij u tegelijkertijd de hoorn op de haak legt. Hierna kunt u de toets  “loslaten”.

4.1 GEBRUIK VAN LUIDSPREKERVOLUME


Indien u hands free belt, dan kunt u gedurende uw telefoongesprek met behulp van volumeregelaar (zie figuur 2) aan de linker zijkant van uw CL400 toestel het volume bijstellen naar uw wensen.

4.2 LAATST GEKOZEN NUMMER KIEZEN

Met behulp van deze functie kunt u het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen.

- Neem de hoorn van de haak.
- Wacht op de kiestoon, druk op de knop  (zie figuur 1).
- Het nummer, dat u als laatste heeft gebeld, wordt automatisch opnieuw gekozen. (Let op: dit geldt niet voor telefoonnummers die zijn vastgelegd in het geheugen!)


Tevens is het mogelijk om de laatste 30 gebelde nummers op de display van uw CL400 te laten verschijnen en rechtstreeks 1 van deze 30 nummers te bellen.


- Vergewist u ervan dat de hoorn op de haak ligt en druk vervolgens op de OK-toets.
- Op de display verschijnt nu de tekst "KIEZEN" met achtereenvolgens de diverse telefoonnummers, data en tijdsaanduidingen.
- Blader vervolgens met behulp van de toetsen ▲ en ▼ door de nummers heen en selecteer het gewenste nummer.
- Indien u het geselecteerde nummer wilt bellen dan pakt u de hoorn van de haak (of: in geval van hands free bellen, drukt u op de toets )

Om één van de laatste 30 gebelde nummers te verwijderen, handelt u als volgt.

- Vergewist u ervan dat de hoorn op de haak ligt en druk vervolgens op de OK-toets.
- Op de display verschijnt nu wederom de tekst "KIEZEN" met achtereenvolgens de diverse telefoonnummers, data en tijdsaanduidingen.
- Blader vervolgens met behulp van de toetsen ▲ en ▼ door de nummers heen en selecteer het nummer dat u wilt verwijderen.
- Indien u het geselecteerde nummer daadwerkelijk wilt verwijderen drukt u vervolgens op de C-toets. Op de display verschijnt nu de tekst "WISSEN?".
- Druk ter bevestiging nogmaals op de C-toets. Het nummer is nu verwijderd.
- Druk op de OK-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.

4.3 MUTE TOETS

Houdt de mute-toets () ingedrukt als u liever niet heeft dat degene met wie u belt uw stem voor enkele ogenblikken kan horen. U hoort zelf wel de stem van de degene met wie u belt! Laat de mute-toets los om het gesprek te hervatten.

Indien de mute functie is geactiveerd verschijnt ter bevestiging op de display het symbool .

4.4 FUNCTIE VAN TOETSEN R, * en

Deze toetsen worden gebruikt voor (nieuwe) digitale diensten, bijvoorbeeld voicemail. Neem voor meer gegevens hierover contact op met uw netwerkbeheerder.

5.0 HET OPSLAAN VAN TELEFOONNUMMERS


De CL400 beschikt over 11 speciale geheugentoetsen (maximaal 30 karakters per nummer) om een telefoonnummer op te slaan.

Met de 3 gekleurde voorkeursoetsen **P1**, **P2**, en **P3** kunt u de drie voor u belangrijkste nummers opslaan, bijvoorbeeld:

- politie;
- huisarts;
- familielid.

Wij adviseren u deze nummers direct bij installatie van het toestel vast te leggen!


Om een nummer vast te leggen gaat u als volgt te werk:

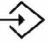- Neem de hoorn van de haak.
- Druk op toets .
- Voer het gewenste nummer in.
- Druk op één van de toetsen **M1** tot en met **M8** of op één van de drie gekleurde voorkeurstoetsen.
- Op de display verschijnt vervolgens de tekst "SAVE OK" ter bevestiging.


Opmerking: Als u een nieuw nummer over een bestaand nummer invoert, komt het bestaande nummer automatisch te vervallen. Als u uw telefoon uit het stopcontact haalt, worden de nummers na enkele uren uit het geheugen gewist tenzij u 4 batterijen (alkaline batterijen type AAA 1,5V) heeft geplaatst in uw CL400.

5.1 OPGESLAGEN NUMMERS BELLEN

Om de telefoonnummers achter één van de 11 speciale geheugentoetsen te bellen, handelt u als volgt.


- Neem de hoorn van de haak (of druk op  voor hands free) en wacht op de kiestoon.
- Druk op een geheugentoets (**M1** tot en met **M8** dan wel **P1**, **P2**, of **P3** voor het gewenste nummer).
- Het opgeslagen nummer wordt automatisch gekozen.

5.2 BELLEN MET HEADSET VOORZIEN VAN MICROFOON


Indien gewenst kunt u ook bellen met een headset. Plug het uiteinde van het snoer van de headset in de daarvoor bestemde ingang van het basisstation (, zie figuur 5).

Druk vervolgens op de toets  om een kiestoon te verkrijgen en toets dan het gewenste nummer in dat u wilt bellen.

Opmerking: Gedurende het bellen met headset kunt u het hoorvolume en –toon naar uw wensen aanpassen met behulp van de regeltoetsen voor volume en toon op de

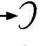bovenkant van het basisstation (zie figuur 1 en paragraaf). Deze twee functies dient u wel allereerst te activeren met behulp van de knop  (zie figuur 1). Tevens kunt u uw spreekvolume opvoeren middels de spreekvolume regelaar (zie figuur 3).


5.3 GEBRUIK VAN EEN NEKLUS

U kunt een neklus aansluiten op de CL400. Steek hiertoe het uiteinde van het neklus snoer in de daarvoor bestemde ingang van het basisstation (, zie figuur 5).


Opmerking: U dient wel de netvoedingadapter aangesloten te hebben op uw CL400 indien u een neklus wilt gebruiken!

Bij het bellen en gebeld worden met een aangesloten nekhus op een CL400 beschikt u over drie mogelijkheden.

Mogelijkheid 1

Druk op toets  om zowel de nekhus functie als de headset functie te activeren. U kunt spreken door de microfoon van de headset.


Mogelijkheid 2

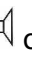Druk op toets  om de nekhus en hands free functie te activeren. U kunt spreken door de microfoon van het basisstation.

Mogelijkheid 3

Neem de hoorn van de haak en spreek door de hoorn.

5.4 GEBRUIK VAN EEN TRILELEMENT


De CL400 beschikt over een aansluiting (, zie figuur 5) voor een trilelement. Indien een trilelement is aangesloten op uw CL400 toestel dan zal bij een inkomend gesprek het trilelement gaan trillen.

U dient hiervoor wel allereerst de trilfunctie van uw CL400 geactiveerd te hebben. Zie hiervoor paragraaf 3.1.




6.0 SPRAAKVOLUME INSTELLEN

Als u een zachte stem heeft of als de door u gebelde personen u moeilijk kunnen verstaan, dan kunt u het spreekvolume verhogen door de schakelaar aan de rechter zijkant van uw toestel op een andere stand te zetten (zie figuur 8 op navolgende bladzijde).

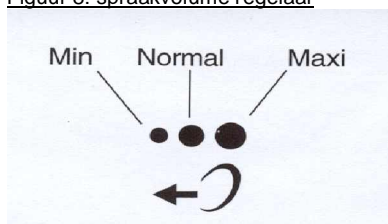
Figuur 8: spraakvolume regelaar



6.1 HOORVOLUME INSTELLEN

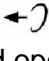Naar gelang uw individuele wensen kunt u het hoorvolume en de mate van “treble/bass” (TONE) instellen. U kunt deze functies activeren met behulp van knop . Indien toets  rood is opgelicht betekent dit dat het hoorvolume dan wel het niveau van “treble/bass” in enige mate wordt versterkt. Door nogmaals op toets  te drukken deactiveert u de versterking van het hoorvolume (toets is niet meer rood opgelicht).

Figuur 9

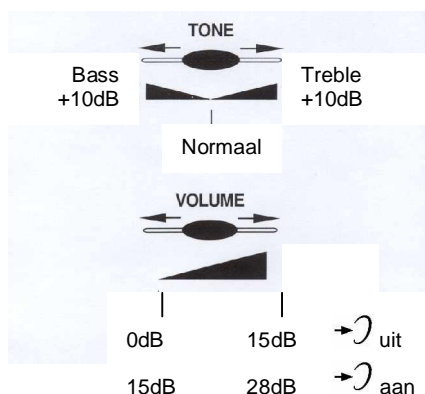

Wanneer de versterking niet is geactiveerd, kunt u het hoorvolume variëren van 0 tot 15dB. Nadat de versterking is geactiveerd, kunt u het hoorvolume vervolgens laten toenemen van 15dB tot 28dB.

Indien knop \curvearrowright , gesitueerd aan de achterkant van uw toestel, op ON staat, worden bovenstaande hoor- en toon functies automatisch geactiveerd bij ieder telefoongesprek dat u voert. Wanneer knop \curvearrowright niet op ON staat, dan dient u bij ieder gesprek de hoor- en toonfuncties elke male te activeren middels knop \curvearrowright .

Onafhankelijk van het bovenstaande, kunt u met behulp van de knop aan de binnenkant van de telefoonhoorn (zie figuur 2) het hoorvolume vergroten met een extra 10dB.

Opmerking: indien u gebruikt maakt van de extra 10dB versterking met behulp van de knop aan de binnenzijde van de telefoonhoorn, dient u er rekening mee te houden dat u de knop loslaat wanneer u zelf spreekt.

7.0 TELEFOONBOEK

In het telefoonboek (maximaal 99 telefoonnummers) kunt u namen en telefoonnummers opslaan. U kunt in het telefoonboek een telefoonnummer koppelen aan een zelf gekozen naam. Indien u door deze persoon wordt gebeld, verschijnt zowel telefoonnummer alsmede naam van deze persoon op de display van uw telefoon. Nummerherkenning en -weergave dienen uiteraard wel geactiveerd te zijn bij uw netwerkoperator.


Volg onderstaande instructies op de navolgende pagina om een telefoonnummer en/of naam in een telefoonboek op te slaan.

- druk op toets \otimes .
- Gebruik de toetsen \blacktriangle en \blacktriangledown om het menu "PHONE BOOK" te selecteren.
- Na selectie van PHONE BOOK drukt u op toets OK.
- Selecteer "TOEVOEGEN" en druk vervolgens op OK.
- Voer nu het telefoonnummer (maximaal 30 karakters) in.
- Foutieve invoer kunt u corrigeren met behulp van de C-toets .
- Na correcte invoer van het telefoonnummer, drukt u op de OK-toets.
- Voer vervolgens de gewenste naam in bij het telefoonnummer (zie onderstaande tabel).

Toets	Karakter
1	1 . , ? - " ' <
2	A B C a b c 2 Æ Ø
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5


6	M N O m n o 6 Ö Ø
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8 Ü
9	W X Y Z w x y z 9
0	0 + & @ / \$ %

- Om een spatie in te voegen, drukt u twee maal op de OK-toets.
- Indien de volgende letter gelijk is aan voorafgaande of indien de volgende letter onder dezelfde toets valt, druk dan eerst op de OK-toets alvorens de volgende letter in te voeren.
- Gebruik de C-toets om een foutieve letter invoer te corrigeren.
- Indien alle invoer compleet en correct is, druk dan gedurende 3 seconden op de OK-toets om uw invoer definitief op te slaan in het telefoonboek.
- Een volgende invoer kan nu plaatsvinden of u kunt met behulp van de C-toets uit het telefoonboekmenu komen.


Opmerking: Indien gewenst, kunt u een pauze inlassen bij het invoeren van een telefoonnummer door het indrukken van toets  (een P zal verschijnen op de display). Bijvoorbeeld indien u 0 (nul) dient in te voeren voor het verkrijgen van een buitenlijn.

7.1 TELEFOONNUMMER VERWIJDEREN UIT TELEFOONBOEK

U volgt hiervoor onderstaande instructies.

- Om nummer te verwijderen dient u allereerst de hoorn op de haak te leggen.
- Druk op toets .
- Blader met behulp van toetsen ▲ en ▼ door het menu om de "PHONE BOOK" functie te selecteren en vervolgens "OVERZICHT".
- Blader met behulp van toetsen ▲ en ▼ door de lijst van telefoonnummers om het juiste nummer te selecteren dat u wenst te verwijderen.
- Na selectie van het telefoonnummer drukt u vervolgens op de C-toets. Op het displayscherm verschijnt nu "WISSEN?".
- Druk ter bevestiging van het verwijderen nogmaals op de C-toets. Hierna is het telefoonnummer verwijderd uit het telefoonboek.
- Druk op OK om naar het hoofdmenu terug te keren.

7.2 WIJZIGEN VAN TELEFOONBOEKGEGEVENS

- Om wijzigingen in uw telefoonboekgegevens door te voeren dient u allereerst de hoorn op de haak te plaatsen.
- Druk op toets .
- Blader vervolgens met behulp van toetsen ▲ en ▼ door het menu om de telefoonboekfunctie te selecteren en vervolgens "OVERZICHT".
- Blader eveneens met behulp van toetsen ▲ en ▼ door de lijst van telefoonnummers om het nummer te selecteren dat u wenst te wijzigen.
- Nadat u het telefoonnummer, zoals hierboven beschreven heeft geselecteerd, houdt u de OK-toets ingedrukt totdat het laatste getal van het nummer knippert.
- Om het nummer aan te passen drukt u op de C-toets en daarna op de OK-toets.

- Nu kunt u de eerdere invoer aanpassen.
- Druk op de C-toets om een karakter te verwijderen.
- Nadat u alle wijzigingen heeft doorgevoerd, houdt u de OK toets 3 seconden ingedrukt ter bevestiging van de mutaties.
- Om uit het menu te komen drukt u op de C-toets.

7.3 BELLEN VIA HET TELEFOONBOEK

Om een persoon te bellen uit één van de telefoonboeken gaat u als volgt te werk:

- Plaats allereerst de hoorn op de haak en vervolgens drukt u op de ☒ toets.
- Blader met behulp van toetsen ▲ en ▼ door het menu om "PHONE BOOK" te selecteren en vervolgens "OVERZICHT". Druk op de OK-toets.
- Blader eveneens met behulp van toetsen ▲ en ▼ door de lijst van telefoonnummers om het nummer te selecteren dat u wenst te bellen.
- Om snel naar het gewenste nummer te geraken kunt u ook de eerste letter van de door ingevoerde naam (behorende bij het telefoonnummer) intoetsen.
- Nadat u het telefoonnummer heeft geselecteerd, zal het nummer automatisch worden gedraaid bij het opnemen van de hoorn dan wel wanneer de hands free functie of headset functie wordt geactiveerd.
