

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

AMPLICALL50

Draagbaar Alarmapparaat



geemarc™
Telecom SA

Nederlands

INHOUD

INHOUD	1
INLEIDING	3
De AMPLICALL™ 50 uitpakken	5
BESCHRIJVING	6
Algemene beschrijving	6
INSTALLATIE	8
Opstelling	8
Montage	9
Bereik	10
KOPPELEN	11
Koppelprocedure	11
Een koppeling afmelden	13
AMPLICALL™ 50	17

INHOUD

Voeding aan/uit instellen	17
Trilling aan/uit instellen	17
Volume instellen	17
De AMPLICALL™50 gebruiken	18
FOUTOPSPORING	19
VEILIGHEIDSINFORMATIE	23
VERKLARING	29
RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK	30

INLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Geemarc AMPLICALL™50. Dit is een draagbaar apparaat dat een door verschillende zenders uitgezonden signaal (bijv. de AMPLICALL™30/40) kan ontvangen. De AMPLICALL™50 zal knipperen en een alarm geven en/of trillen om u te alarmeren dat een persoon/baby uw hulp behoeft.

De AMPLICALL™50 is een fantastische ontvanger die zich kan verbinden met verschillende binnen bereik liggende zenders,

INLEIDING

terwijl het uiteraard goede, duidelijke ontvangst en gemakkelijke installatie en gebruik garandeert.

Om alle mogelijkheden van uw Geemarc AMPLICALL™50 volledig te benutten, is het van belang dat u eerst de onderstaande instructies leest. Bewaar deze gebruikshandleiding voor toekomstige raadpleging op een veilige plek.

De AMPLICALL™50 uitpakken

Wanneer u de AMPLICALL™50 uitpakt, moet u het volgende vinden in de verpakking:

- 1 AMPLICALL™50 apparaat
- 3 AAA batterijen (meegeleverd)



Bezoek ons op


www.geemarc.com

voor productondersteuning en hulp
telefoon 03.28.58.75.99
of fax 03.28.58.75.76

BESCHRIJVING


Algemene beschrijving

Omschrijving van de voorkant

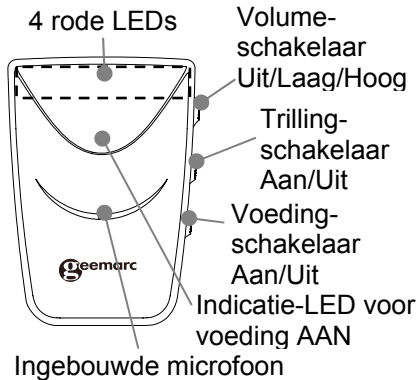

BESCHRIJVING

Omschrijving van de achterkant

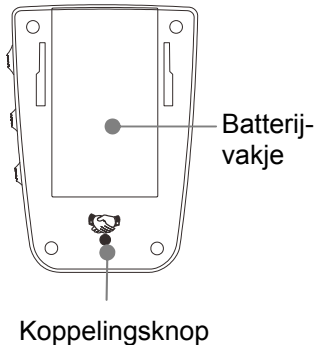

Opstelling

Voor draagbaar gebruik (meeluisteren) moet u eerst het zich aan de achterkant bevindende kapje van het batterijvakje verwijderen. Zet er de 3 meegeleverde alkaline batterijen (AAA 1,5V) in. Controleer de afbeeldingen van de polariteit in het batterijvakje wanneer u de batterijen erin steekt. Zet het kapje terug – het zal met een klik op zijn plaats komen.

INSTALLATIE

Zet de voedingschakelaar Aan/Uit in de Aan stand.

Wat betekent het knipperen van de indicatie-LED?



- Langzaam: normaal
- Snel: Batterij (bijna) leeg; vervang deze.

Montage

De AMPLICALL™50 kan meegenomen worden door het in de hand te houden of door het aan

INSTALLATIE

uw riem vast te maken m.b.v. de meegeleverde clip.

Bereik

Uw monitor is zodanig ontworpen dat het tot een bereik van 30 meter optimaal functioneert. Dit is geschikt voor een omgeving in de meeste huizen. Het bereik en de ontvangstkwaliteit kunnen variëren afhankelijk van het niveau van de batterijvoeding en het aantal obstakels zoals muren, enz.

De koppelprocedure

Het apparaat geeft een piep als u de Koppel/Test knop van de AMPLICALL™50 indrukt en deze ingedrukt houdt. De eerste LED licht op wat aangeeft dat u in de koppelstand staat.

U kunt nu het eerste apparaat/zender (bijv. de de AMPLICALL™30/40) aan de eerste LED koppelen. Druk op de Koppel/Test knop van de AMPLICALL™50 en tegelijkertijd op de **ALARM** knop van de zender

KOPPELEN

(bijv. de AMPLICALL™30/40), totdat de middelste LED oplicht. Het apparaat zal een lange piepton laten horen ter bevestiging van geslaagd koppelen.

Als u door wilt gaan en de tweede, derde of vierde zender ook wilt koppelen als de eerste LED oplicht, druk dan nogmaals op de Koppel/Test knop. De eerste LED zal uitgaan en de tweede LED zal oplichten. U kunt nu het tweede apparaat koppelen door op de Koppel/Test knop van de AMPLICALL™50 te drukken en

KOPPELEN

deze ingedrukt te houden en tegelijkertijd de **ALARM** knop van de zender te drukken, totdat de middelste LED oplicht. Het apparaat zal een lange pieptoon laten horen ter bevestiging van geslaagd koppelen.

U kunt dit herhalen voor de derde of vierde zender.

Een koppeling afmelden

Druk 5 seconden op de Koppel/Test knop en houdt deze ingedrukt tot alle LEDs oplichten. Nu bent u in de afmeldstand.

KOPPELEN

Om het eerste apparaat af te melden drukt u één keer op de Koppel/Test knop: de eerste LED zal gaan knipperen (de overige LEDs zullen branden). Druk dan nogmaals op de Koppel/Test knop en houdt deze ingedrukt. De eerste LED gaat uit en piept ter bevestiging dat de eerste zender is afgemeld.

Wat moet u doen om de tweede en derde zender af te melden, maar de eerste zender niet? Terwijl de eerste LED knippert, drukt u één keer op de Koppel/Test knop om het af te melden apparaat te

KOPPELEN

kiezen. Daarna drukt u op de Koppel/Test knop en houdt deze ingedrukt, totdat de tweede of derde LED uitgaat en piept ter bevestiging dat het nu afgemeld is. Wat moet u doen om de vierde zender af te melden, maar de eerste, tweede en derde zender niet? Terwijl de eerste LED knippert, druk u vier keer op de Koppel/Test knop. Alle drie LEDs zullen tegelijkertijd knipperen. Daarna drukt u op de Koppel/Test knop en houdt deze ingedrukt, totdat alle drie LEDs uitgaan en

KOPPELEN

piepen ter bevestiging dat het vierde apparaat afgemeld is.

Voeding aan/uit instellen

U kunt de voeding aan of uit zetten m.b.v. de Voedingschakelaar Aan/Uit.

Trilling aan/uit instellen

U kunt de trilling aan of uit zetten m.b.v. de Trillingschakelaar Aan/Uit. Als de schakelaar aan staat, zal de AMPLICALL™50 trillen als teken van alarm.

Volume instellen

Het piepalarm kan uit gezet

worden of op laag of hoog volume worden ingesteld m.b.v. de Volumeschakelaar Uit/Laag/Hoog.

De AC50 gebruiken

Als een gekoppelde zender een stem/geluid/huilen bemerkt of de ALARM knop wordt ingedrukt, zal het ontvangstapparaat gaan knipperen en/of een piep laten horen en/of trillen om u hiervan op de hoogte te brengen en van de eventuele noodzaak om hulp te verlenen.

FOUTOPSPORING

De monitor gaat niet aan.

- Verzeker u ervan dat de batterijen er op de juiste manier zijn ingestoken en dat ze voldoende stroom leveren.
- Verzeker u ervan dat de netspanning juist is aangesloten.

De Ontvanger (AMPLICALL™50) maakt een hoogtonig (feedback) geluid.

- Verzeker u ervan dat de AMPLICALL™30/40 en de AMPLICALL™50 ongeveer 3 meter van elkaar af staan.

FOUTOPSPORING

- Zet de volumeregeling op Laag.

De Ontvanger (AMPLICALL™50) waarschuwt me alleen met tussenpozen of helemaal niet.

- Verzeker u ervan dat de apparaten juist zijn gekoppeld. Loop nogmaals door het koppelproces.
- Verzeker u ervan dat de AMPLICALL™30/40 en de AMPLICALL™50 aan staan.
- Verzeker u ervan dat het volume van de AMPLICALL™50 niet uit staat.

FOUTOPSPORING

- Verzeker u ervan dat de batterijen er op de juiste manier zijn ingestoken en dat ze voldoende stroom leveren.
- Verzeker u ervan dat de netspanning juist is aangesloten.
- De apparaten kunnen te ver (buiten bereik) van elkaar af staan.
- Zet de tijdsvertraging op Laag en de geluidsgevoeligheid op Hoog.

Geluidskwaliteit is afgenomen.

FOUTOPSPORING

- Verzeker u ervan dat de batterijen er op de juiste manier zijn ingestoken en dat ze voldoende stroom leveren.

Voedingslampje knippert snel.

- Vervang de oude batterijen of gebruik de netstroom.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Algemeen

Open het apparaat niet (behalve om de batterijen te vervangen).

Neem voor alle reparaties contact op met de helpdesk.

Eén van de mogelijkheden van de AMPLICALL™ 50 is om te helpen uw kind in de gaten te houden, maar het is geen vervanging voor ouderlijk toezicht.

Dit product is geen speelgoed!

Uw monitor zendt over openbare radiogolven uit. Daarom kan de conversatie opgevangen worden

VEILIGHEIDSINFORMATIE

door producten die op dezelfde frequentie werken.

Houdt altijd door elektriciteit gevoede apparaten en hun kabels uit de buurt van baby's en jonge kinderen.

Verzekert u ervan dat kinderen niet verward kunnen raken of struikelen over kabels.

Schoonmaken

Maak het apparaat met een zachte doek schoon. Nooit schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken: deze kunnen de afwerklaag of de

VEILIGHEIDSINFORMATIE

elektrische onderdelen aan de binnenkant beschadigen. Als de netspanning is aangesloten voor het schoonmaken, ontkoppel de netspanning.

Omgeving

Nooit aan direct zonlicht blootstellen.

Zorg er altijd voor dat er een vrije luchtstroom over de oppervlakten van het apparaat is.

Zet geen enkel deel van uw product in water en gebruik het niet

in vochtige of natte omstandigheden zoals bijvoorbeeld in badkamers.

Stel uw product niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke condities.

Batterijen

Batterijen verwijderen of vervangen mag alleen door een volwassene worden gedaan of onder toezicht van een volwassene.

Verzeker u ervan dat de batterijen er op de juiste manier zijn ingestoken: let op de

VEILIGHEIDSINFORMATIE

polariteittekens (+ & -) op de batterijen en het product.

Verwijder gebruikte batterijen uit het apparaat.

Gebruik geen oplaadbare batterijen.

Gebruik geen oude (gebruikte) en nieuwe batterijen tegelijkertijd of batterijen van een verschillend type.

Werp geen batterijen in het gewone huisafval. Let op

VEILIGHEIDSINFORMATIE

regelgeving m.b.t het wegwerpen van batterijen.

Verwijder batterijen als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.

Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type of het equivalent daarvan als de aanbevolen batterijen.

VERKLARING

VERKLARING: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 3.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.



RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.





Bezoek ons op

www.geemarc.com

voor productondersteuning en hulp
telefoon 03.28.58.75.99
of fax 03.28.58.75.76



UGAmplicall50_NL_v1.0

geemarc United Kingdom

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438

www.geemarc.com

geemarc France

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée BP20061
59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX
TEL. SERVICE APRES VENTE:
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

geemarc Deutschland

Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20

www.geemarc.com