

United Kingdom
Geemarc Telecom SA
 5 Swallow Court
 Swallowfields
 Welwyn Garden City
 Hertfordshire
 AL7 1SB
 Tel: +44 (0) 1707 372372
 Fax: +44 (0) 1707 832529

France
Geemarc Telecom SA
 Parc de l'étoile
 2 rue Galilée BP20061
 59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX
 Tel : + 33 (0) 3 28 58 75 75
 Fax : + 33 (0) 3 28 58 75 76

GBCL11_V2.4



geemarc™ CL11
 Hear the Difference

En

- Telephone ringer alarm
- Extra loud ringer (95dB)
- Volume control (Hi / Lo)
- Visual ringer indicator
- Wall mountable
- No battery needed.

Fr

- Indicateur de sonnerie de téléphone
- Sonnerie électronique puissante (95dB)
- Réglage du volume (Fort / Faible)
- Indicateur lumineux de sonnerie
- Installation murale possible
- Fonctionne sans pile

D

- Telefon Klingelalarm
- Extralauter Klingelton (95dB)
- Lautstärkeregelung (Laut/Leise)
- Visuelle Klingelanzeige
- An der Wand montierbar
- Keine Batterien erforderlich



En USING

- Connect your telephone line cord to the socket located at front of CL11 then connect the plug into the wall socket.
- With the short lead supplied, connect one end to the telephone and the other end into the socket on the CL11 marked 'Tel'.
- A switch located on the right side of the CL11 unit allows LOW or HIGH ringer volume.
- UK users, some phones might need an additional telephone socket doubler – BT and RJ11 type.



Fr INSTALLATION


- Branchez votre ligne téléphonique dans la prise située à l'avant de votre CL11, puis l'autre extrémité dans votre prise téléphonique murale.
- Branchez votre téléphone à votre CL11 avec le cordon fourni.
- Un interrupteur situé sur le côté droit permet de régler le niveau Fort / Faible (HI/LO).

D EINSTELLUNG

- Verbinden Sie das Kabel Ihrer Telefonleitung mit dem Stecker vorn auf dem CL11 und stecken Sie dann den Stecker in die Wandsteckdose.
- Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem CL11 mit der mitgelieferten Kabelleitung.
- Auf der Nachtseite des CL11 befindet sich ein Schalter, mit dem die Klingel auf LEISE oder LAUT geschaltet werden kann.


geemarc™ CL11
 Hear the Difference

Visual Ringer Amplifier / Amplificateur de sonnerie avec Flash lumineux / Klingel-Verstärker mit Blitzlicht

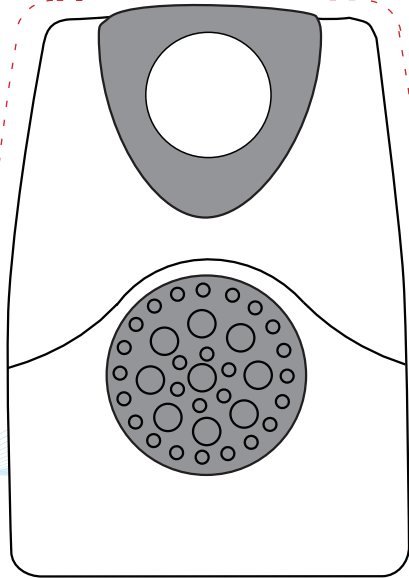

Front side

geemarc™ CL11
 Hear the Difference

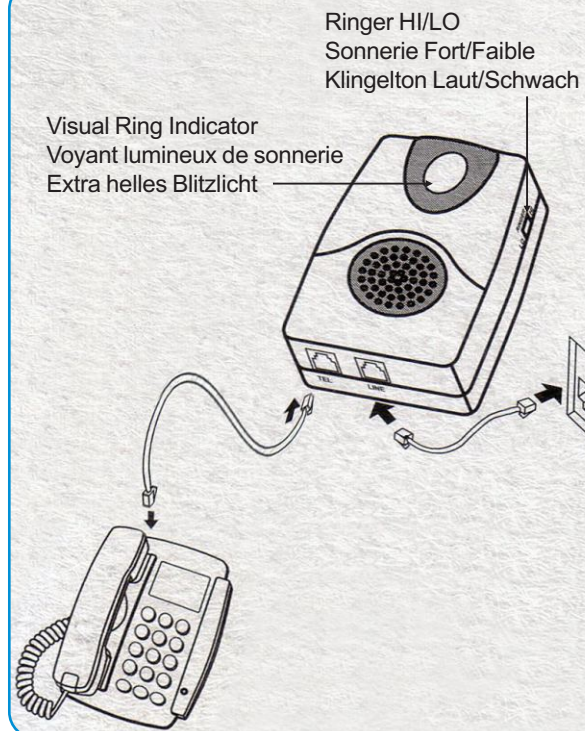

Back side

geemarc™ CL11
 Hear the Difference

For product support and help :
 UK 01707 384438
 International +44 1707 384438
 Tél. service après vente :
 FR 03 28 58 75 99

www.geemarc.com

C:100 M:25
 PANTONE 3005 C

C:30 M:10 Y:10 K:100
 PANTONE Black 2 C 2X

geemarc™
 Telecom SA

CL11

Blister Box

ISSUE : 06

DATE : 07 / 08 / 2013

DOC. IDENT. :
 BLCL11_v2.4