

GEEMARC

CLEAR SOUND®
HEAR THE DIFFERENCE

WAKE'N'SHAKE PLUS




Wekker met grote display and trilkussen



Gebruikershandleiding


geemarc™
Telecom SA

Omschrijving

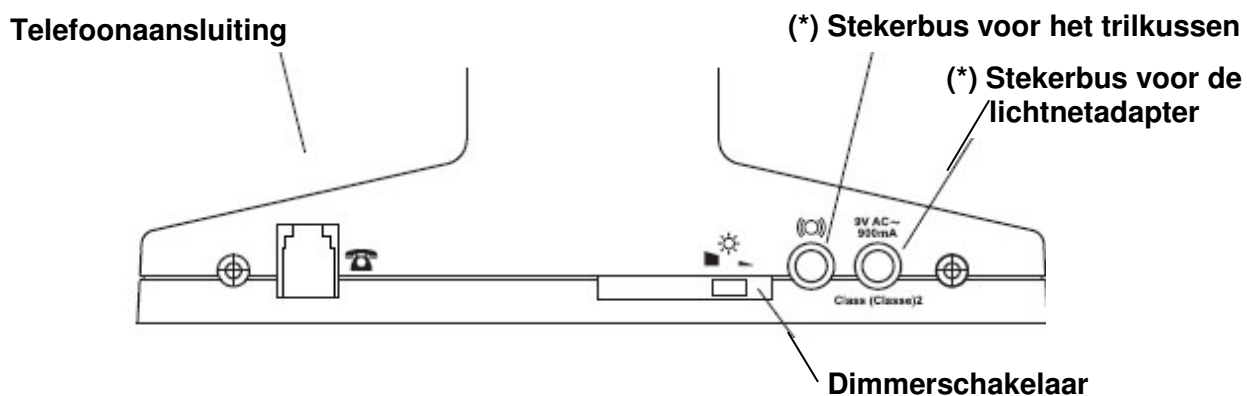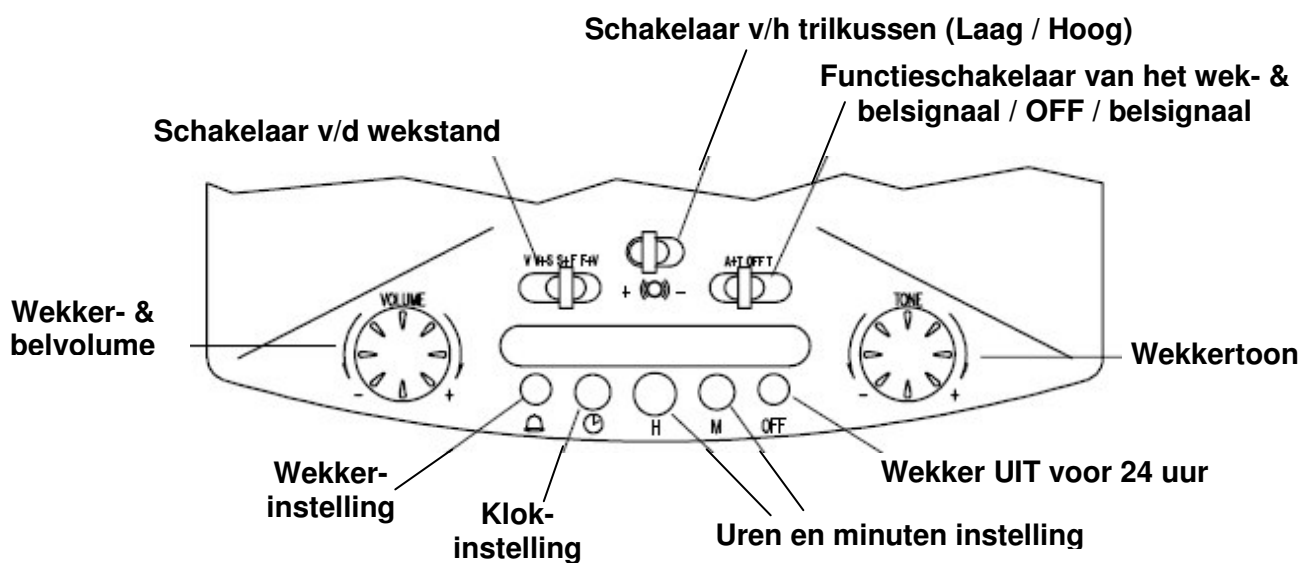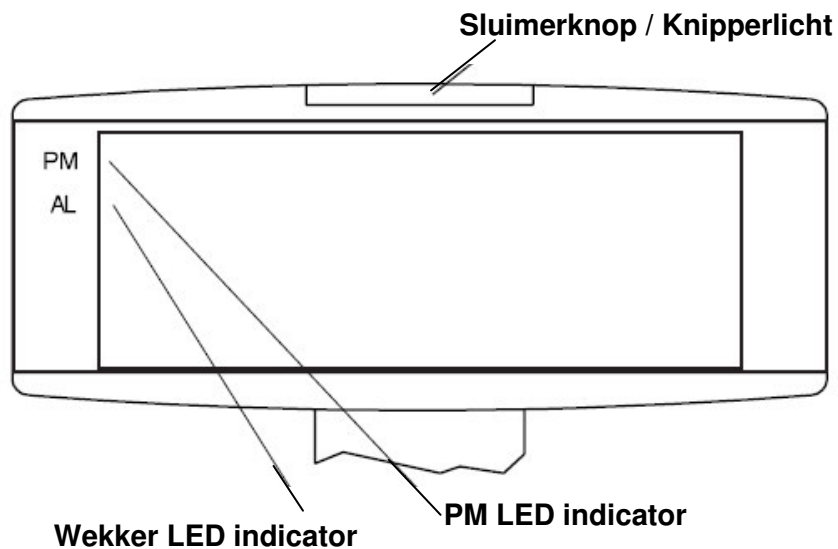

(*) TNV-3 classificatie volgens EN60950 norm.

1 - DE TELEFOON VERBINDEN

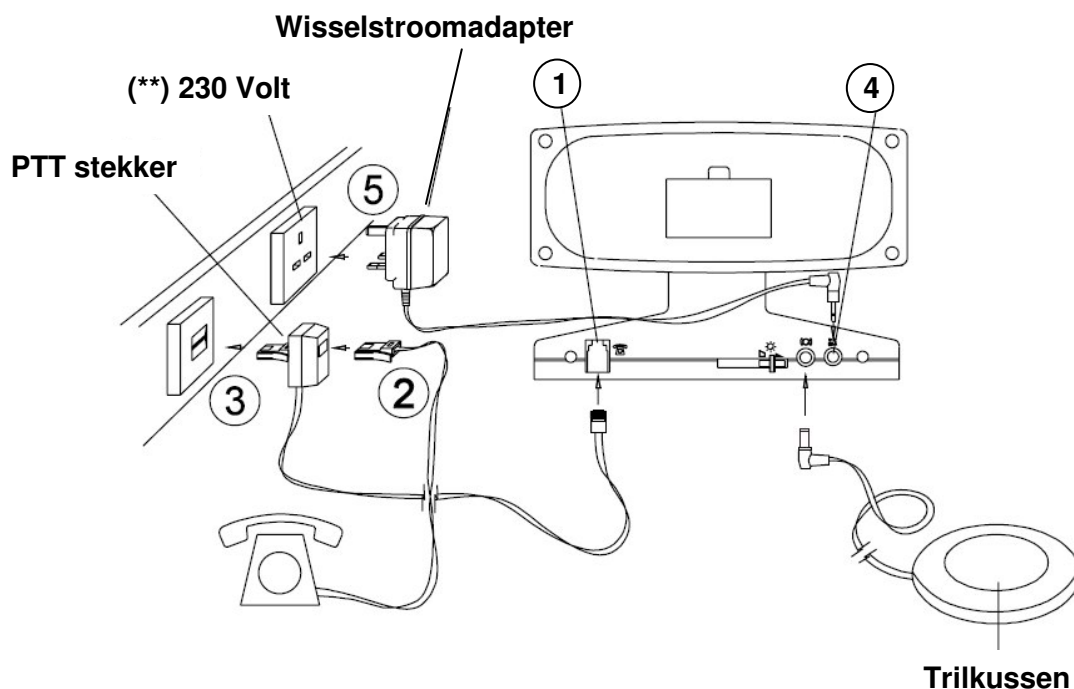

1. Verbind de telefoonkabel.
2. Aan u de keuze om uw telefoon met de telefoondubbelstekker te verbinden.
3. Steek het telefoondubbelstekker in de wandcontactdoos.
4. Verbind de lichtnetadapterkabel.
5. Steek de lichtnetadapter in de wandcontactdoos. (**)

(**) Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.

Elektrische verbinding: Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.) Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de lichtnetadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg ervoor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen wanneer u het apparaat installeert.

Telefoonverbinding: Voltages aanwezig op het telecommunicatienetwerk zijn geclassificeerd TNV-3 (Telecommunicatie Netwerk Voltage) volgens de EN60950 norm.

2- DE TIJD INSTELLEN (🕒)

- Druk op de 🕒 knop (klok instellen) en houdt deze ingedrukt.
- Druk op **H** (uur) totdat het juiste uur en op **M** (minuut) totdat de juiste minuten op het display verschijnen.
- Laat de 🕒 knop (klok instellen) los.
- De PM indicatie zal op de display verschijnen voor middag/avonduren vlakbij de **PM** inscriptie.

3- DE WEKTIJD INSTELLEN (🕒)

- Druk op de 🕒 knop (wekker instellen) en houdt deze ingedrukt.
- Druk op **H** (uur) totdat het juiste uur en op **M** (minuut) totdat de juiste minuten op het display verschijnen.
- Laat de 🕒 knop (wekker instellen) los.
- Druk op 🕒, **H** en **M** om de wekker weer op 12 uur te zetten.

4 - DE WEKSTAND INSTELLEN

Zet de functieschakelaar in de **A+T** stand. Kies welke wekstand u wenst door de schakelaar van de wekstand in één van de volgende standen te zetten:

V: alleen het trilkussen werkt.

V+S: zowel het geluid als het trilkussen werken.

S+F: zowel het stroboscopisch licht als het geluid werken.

F+V: zowel het stroboscopisch licht als het trilkussen werken.

Wanneer de wekker op één van de wekstanden is ingesteld, zal de wekindicatie op het display bij de **AL** inscriptie verschijnen.

The tabel hieronder toont hoe de wekstanden een binnenkomend gesprek op de wekker aangeven.

WEKSTAND	ACTIE	WEKKER	BINNENKOMEND GESPREK
GELUID	Zoemt	Continu	Met pauzes
TRILKUSSEN	Vibreert	Continu	Met pauzes
STROBOSCOPISCH LICHT	Knippert	Continu	Met pauzes

5 - SLUIMERKNOP (🔇)

Als de door u gekozen wekstand door de instelling van de wektijd ingeschakeld wordt, zal door op de 🔇 knop te drukken de wekker voor ongeveer 9 minuten niet afgaan. Daarna gaat de wekker voor de volgende 6 minuten weer af. Dit kunt u voor maximaal 2 uur herhalen waarna de wekker automatisch uitgeschakeld zal worden.

6 - DE WEKKER VOOR 24 UUR UITSCHAKELEN (UIT)

Druk op de **UIT** (= **OFF**) knop van de wekker; de wekker zal dan de volgende dag op dezelfde tijd afgaan. Als u de wekker niet heeft uitgeschakeld, zal deze voor maximaal 2 uur continu afgaan en zal daarna automatisch uitgeschakeld worden.

7 - AAN/UIT SCHAKELAAR VAN HET BELSIGNAAL (A+T / OFF / T)

- **A+T** (wekker + telefoon): voor het afgaan van de wekker en het bellen van de telefoon
- **UIT** (= **OFF**): de wekker en het belsignaal staan uit.
- **T** (telefoon): voor het bellen van de telefoon.

8 - WERKING VAN DE TELEFOON

- Zorg ervoor dat de telefoon conform de gebruikershandleiding van de telefoon is opgesteld en verbonden is zoals in de sectie over installatie getoond is.
- Zet de AAN/UIT schakelaar van het belsignaal in de **A+T** of de **T** stand voor het afgaan/bellen.
- Kies welke van de wekstanden u wenst om u te waarschuwen dat u een binnenkomend gesprek heeft (zie bladzijde 3: **V**, **V+S**, **S+F** of **F+V**).
- Wanneer de gekozen wekstand aangeeft dat u een binnenkomend gesprek heeft, neem dan de handset ter hand en beantwoord de oproep. Wanneer het gesprek beëindigd is, legt u de handset terug en het apparaat zal klaarstaan om eventueel het volgende gesprek aan te geven.

9 - DIMMERSCHAKELAAR ()

Stel de helderheid van het display af door de stand van de regelaar aan de achterkant van uw WAKE'N'SHAKE PLUS te veranderen.

10 - VOLUME (VOLUME)

Dit stelt het volume van het belsignaal en het wekgeluid in.

11 - TOON (TOON)

Dit stelt de toon van het wekgeluid in.

12 - TRILSCHAKELAAR (- / +)

Dit stelt de beweging van het trilkussen in op Laag (Lo / -) of Hoog (Hi / +).

BACK-UP M.B.V. EEN BATTERIJ

Het is voor de werking van de klok niet nodig om er een batterij in te steken. Echter, met een batterij back-up zal de klok in geval van een stroomonderbreking of het verbreken van het contact tussen de wisselstroomadapter en de wandcontactdoos de tijd en de wekinstellingen blijven weergeven/bewaren.

Controleer de conditie van de batterij eens per jaar en vervang eventueel een oude batterij. Een lekkende batterij kan grote schade aan uw klok veroorzaken.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 1 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier onze wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

N.B.: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

Verklaring: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2.

De conformiteitsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.



WAARSCHUWING: Interferentie van radiofrequenties kunnen een hoorbaar geluid van dit apparaat veroorzaken. Het geluid zal stoppen als de interferentie stopt.

RECYCLE RICHTLIJNEN

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) is opgesteld om producten die aan het einde van hun nut zijn gekomen op de beste manier te recyclen. Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Bezoek ons op
www.geemarc.com
voor productondersteuning en hulp
telefoon 020-616 6789
email: info@phone-master.nl