



Voorzijde van het apparaat

De linkerkant van het apparaat

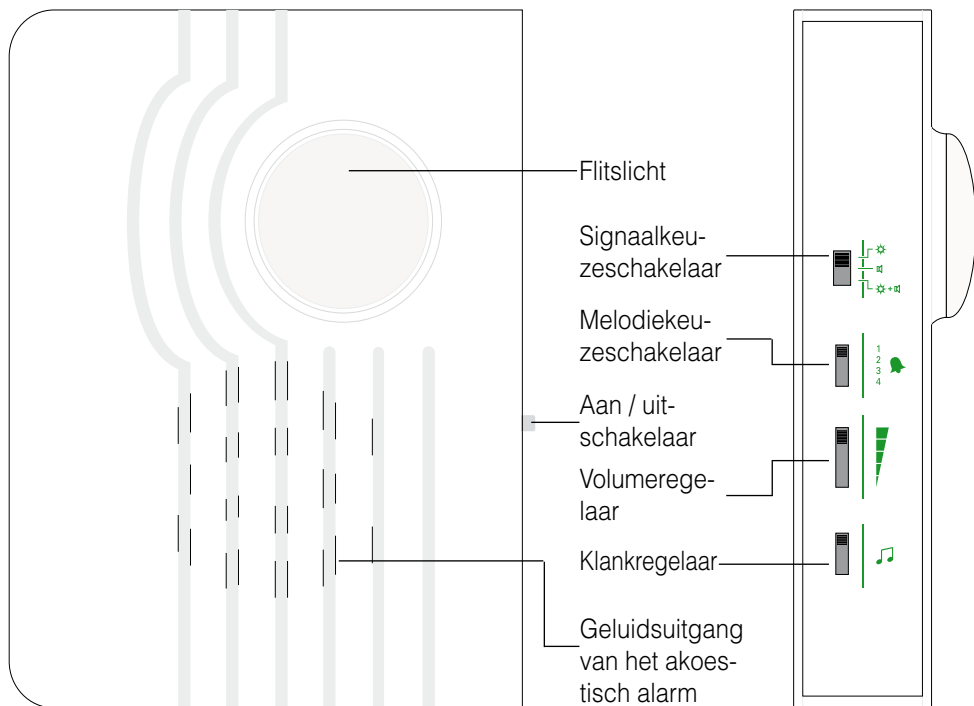

Onderkant van het apparaat

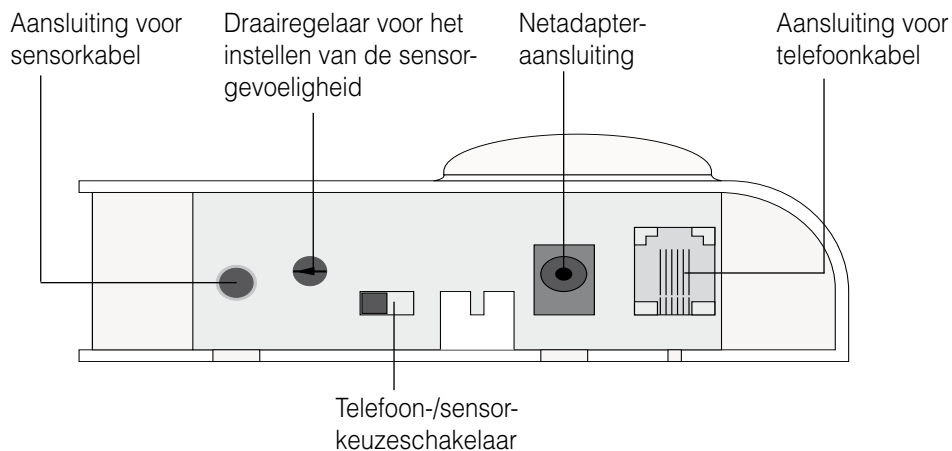

Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van de *visuTone*. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven. U heeft daarmee gekozen voor een modern en betrouwbaar systeem. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om het systeem correct in gebruik te kunnen nemen en met alle mogelijkheden van het systeem vertrouwd te worden.

Standaard leveringsomvang

Controleer of alle hierna opgesomde onderdelen aanwezig zijn:

- *visuTone*
- 4 mignonbatterijen (AA, LR06)
- telefoonkabel, 5 m
- sensorkabel, 5 m
- Handleiding
- Garantiekaart

Indien bepaalde onderdelen ontbreken, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant.

Werkingsprincipe


De *visuTone* registreert langs elektronische weg de belsignalen van uw telefoon een deurbel en zet deze om in akoestische en optische signalen.

1. Batterijen aanbrengen

Aan de achterkant van de *visuTone* bevindt zich een batterijvak. Open het vak door de kleine beugel met de duim tegen het batterijvakdeksel te drukken en dit dan op te tillen. Plaats nu de vier meegeleverde batterijen in de uitsparing. **Let daarbij op de juiste polariteit van de batterijen!** Sluit het apparaat vervolgens weer.

2a. Installatie van de telefoonkabel

Steek het uiteinde met de doorzichtige clipstekker (6-polige westernstekker) in de aansluiting aan de onderkant van de *visuTone*, het andere uiteinde in de N-aansluiting van uw telefooncontactdoos. Bij het gebruik van de telefoonkabel moet de telefoon-/sensor-

keuzeschakelaar aan de onderkant van de *visuTone* op  geschakeld worden.


Opgelet

Gebruik alleen de meegeleverde telefoonkabel, aangezien anders de storingsvrije werking van het apparaat niet gegarandeerd kan worden.

De *visuTone* is bestemd voor aansluiting op het analoge telefoonnet.

2b. Installatie van de sensorkabel

Kleef het sensorplaatje met behulp van de kleefring op de geluiduitgangsoopening van uw huisdeurbel en steek de sensorkabel in de aansluiting aan de onderkant van de *visuTone*. Trek daarvoor de beschermfolie van de kleefring op het sensorplaatje af.

Bij het gebruik van de sensorkabel moet de telefoon-/sensorkeuzeschakelaar aan de onderkant van de *visuTone* op  geschakeld worden. Voor een optimale werking van de *visuTone* moet de gevoeligheidsregelaar zo ingesteld worden dat de sensor goed op het signaal reageert.

Aanwijzing

Met de *visuTone* kunt u dan het geluid van de deurbel of het rinkelen van de telefoon signaleren. Beide signalen kunnen niet tegelijkertijd door de *visuTone* verwerkt en weergegeven worden.

3. Aan/ uit-schakelaar

Zet de aan/uit-schakelaar op „ON“. Nu is de *visuTone* operationeel.

4a. Signaaltype instellen

Met behulp van de signaalkeuzeschakelaar kunt u kiezen of een deur- of telefoonbel alleen optisch, alleen akoestisch of optisch en akoestisch gesignaleerd moet worden. Schuif de signaalkeuzeschakelaar daarvoor op één van de drie mogelijke posities:

- Schakelaar boven: alleen optisch
- Schakelaar in het midden: alleen akoestisch
- Schakelaar onder: optisch en akoestisch

4b. Melodie instellen

Stel één van de vier mogelijke melodieën in met behulp van de melodiekeuzeschakelaar.

4c. Volume instellen

Met behulp van de volumeregelaar kunt u het volume van het besignaal in vijf stappen instellen.

4d. Klank instellen

De klank van het besignaal kan met behulp van de klankregelaar in vier stappen worden ingesteld tussen een hoge en een lage toon.

Opmerking (speciaal toebehoren)

Een als speciaal toebehoren verkrijgbare netadapter kan op de met „DC 9V“ gemarkeerde aansluiting aan de onderkant van de *visuTone* worden aangesloten.

Onderhoud en verzorging

Het apparaat is onderhoudsvrij. Wanneer het apparaat vuil is, hoeft u het enkel met een zachte, vochtige doek te reinigen. **Let op: eerst de stekkers uit het stopcontact halen!**

Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere organische oplosmiddelen. De *visuTone* mag niet langdurig blootgesteld worden aan recht-

streekse zonnestrallen en moet beschermd worden tegen grote hitte, vocht of sterke mechanische trillingen.

Opmerking: Het apparaat is **niet** beschermd tegen spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het apparaat.

Ook open vuur, zoals bijv. brandende kaarsen, mag in geen geval op het apparaat worden geplaatst.

Garantie

De *visuTone* is zeer betrouwbaar en veilig. Mochten er ondanks correcte bediening storingen optreden, neem dan contact op met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant.

De garantie omvat de kostenloze reparatie en het gratis terugsturen van defecte apparaten. Voorwaarde voor de garantie is dat het apparaat in de originele verpakking teruggestuurd wordt. Gooi de originele verpakking dus niet weg! De garantie vervalt bij beschadigingen die veroorzaakt werden door onoordeelkundig gebruik of bij reparatiepogingen van niet erkende personen (verbreking van het garantiezegel op het apparaat). Reparaties op garantie kunnen alleen worden uitgevoerd als de garantiekaart samen met een kopie van de rekening/bon van de handelaar wordt ingestuurd.

Het serienummer van het apparaat moet steeds vermeld worden.



Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (toe te passen in de landen van de

Europese Unie en andere Europese landen met een eigen inzamelsysteem voor zulke apparaten). Het symbool op het product en de verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huisafval mag worden behandeld maar op een verzamelpunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch moet worden afgegeven. Door uw bijdrage tot de

correcte verwijdering van dit product, beschermt u de het milieu en de gezondheid van uw medemensen.

Milieu en gezondheid worden door foute verwijdering in gevaar gebracht. Materiaalrecyclage helpt het verbruik van grondstoffen te reduceren. Meer informatie over de recyclage van dit product krijgt u bij uw gemeente, de communale afvalverwijderingsbedrijven of in de zaak waar u dit product heeft gekocht.

Technische gegevens

Stroomtoevoer:	4 x 1,5V mignon-batterijen 9V-netadapter (speciaal toebehoren) aan 230 V, 50 Hz
Levensduur batterij:	ca. 3 maanden (bij 5 evenementen per dag)
Bedrijfstemperatuur:	0° C – 40° C
Optische signalering:	Flitslicht
Akoestische signalering:	in volume, toonhoogte en melodie varieerbare beltoon
Hoogte	150 mm
Breedte:	115 mm
Diepte:	40 mm
Gewicht:	350 g (met batterij):



Dit product is in overeenstemming met de normen van de Europese Unie. EG-conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar bij uw vakhandel of direct bij de fabrikant van dit product.

Technische wijzigingen voorbehouden.