



HUMANTECHNIK

**MA-1**

**D**

**Bedienungsanleitung**

Seite 2

Akustikmodul MA-1

**GB**

**Operating Instructions**

Page 6

Acoustic Module MA-1

**F**

**Mode d'emploi**

Page 10

Module acoustique MA-1

**NL**

**Gebruiksaanwijzing**

Pagina 14

Akoestische module MA-1

**I**

**Istruzioni per l'uso**

Pagina 18



Modulo acustico MA-1

**E**

**Instrucciones de servicio**

Página 22

Módulo acústico MA-1

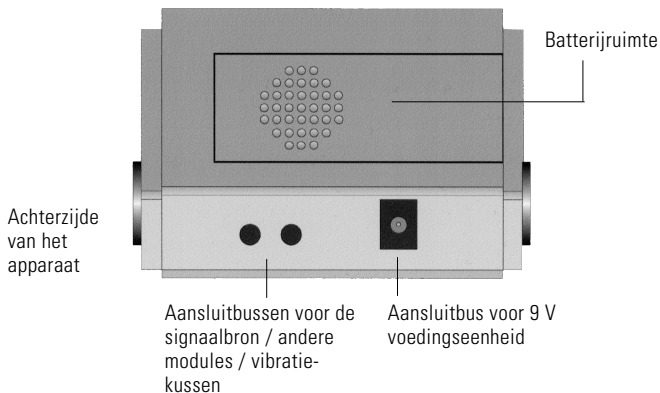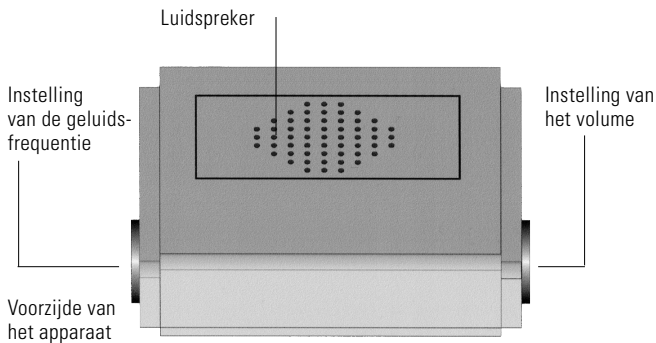

**De akoestische module MA-1 kan op alle apparaten worden aangesloten, die met een aansluitbus (3,5 mm stekkerbus) voor een vibratiekussen uitgerust zijn.**

Wij feliciteren u met de aankoop van uw *akoestische module MA-1*.

U heeft daarbij gekozen voor een modern en betrouwbaar systeem.

Met de *akoestische module MA-1* kunnen alle apparaten, die een aansluitbus (3,5 mm stekkerbus) voor een vibratiekussen hebben, met een zeer luide signaaltoon worden uitgebreid.

### **Leveringsomvang**

Controleer of alle hierna opgesomde onderdelen aanwezig zijn:

- *akoestische module MA-1*
- besturingskabel
- 9 V-voedingseenheid
- garantiekaart

### **Ingebruikname**

Verbind de besturingskabel met één van de beide aansluitbussen voor de signaalbron. Het andere uiteinde van de kabel wordt aangesloten op een apparaat met een aansluitbus voor een vibratiekussen (bijv. digitale wekker *DS-1*, vibratiewekker *VC-1 / VC-10*, time flash / *lisa* time flash, *lisa* ontvangers (tafelvlitslamp, radiovlitslamp, draagbare radio-ontvanger). Steek aansluitend de stekker van de 9 V-voedingseenheid in de daarvoor voorziene bus aan de achterzijde van de *akoestische module MA-1*.

### Opmerking:

Op de vrije aansluitbus van de *akoestische module MA-1* kan een vibratiekussen of een andere module (bijv. flitsmodule) worden aangesloten.

### **Signalering**

Actieve signalen (bijv. wekalarm, *lisa*-alarm) worden via een zeer luide akoestische toon weergegeven.

### **Bijzonderheden**

Volume:  
traploos instelbaar (max. 100 dB)

Toonhoogte:  
traploos instelbaar (100-2000 Hz)

Stroomuitvaloverbrugging:  
via een 9 V-blokbatterij batterijwerking (niet meegeleverd)

De *akoestische module MA-1* kan ook alleen met een 9 V-blokbatterij worden gevoed.

## Onderhoud en verzorging

Alle apparaten zijn onderhoudsvrij. Wanneer het apparaat vuil is, hoeft u het enkel met een zachte, vochtige doek te reinigen. Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere organische oplosmiddelen.

Alle apparaten mogen niet gedurende langere tijd blootgesteld worden aan directe zonnestralen en moeten daarnaast beschermd worden tegen grote hitte, vocht of sterke mechanische schokken.

## Garantie

De *MA-1* is zeer betrouwbaar en veilig. Mochten er ondanks correcte montage en bediening storingen optreden, neem dan contact op met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant.

De garantie omvat de kostenloze reparatie en het gratis terugsturen van defecte apparaten.

Voorwaarde voor de garantie is dat het apparaat in de originele verpakking teruggestuurd wordt. Gooi de originele verpakking dus niet weg! De garantie vervalt bij beschadigingen die veroorzaakt werden door onoordeelkundig gebruik of bij reparatiepogingen van niet erkende personen (verbreking van het garantiezegel op het apparaat).

Garantiereparaties worden enkel uitgevoerd bij inzending van de ingevulde garantietaal van de audicien of bij inzending van het originele garantiebewijs bij directe aankoop.

## Technische gegevens

Voeding: 9 V-voedingseenheid op 230 V, 50 Hz of via een  
9 V-blokbatterij

Geluidsfrequentie: 100-2000 Hz traploos instelbaar

