



HUMANTECHNIK

***MF-1***

**D**

**Bedienungsanleitung**

Seite 2

Blitzmodul MF-1

**GB**

**Operating Instructions**

Page 6

Flash module MF-1

**F**

**Mode d'emploi**

Page 10

Module à flash MF-1

**NL**

**Gebruiksaanwijzing**

Pagina 14

Flitsmodule MF-1

**I**

**Istruzioni per l'uso**

Pagina 18


Modulo flash MF-1

**E**

**Instrucciones de servicio**

Página 22

Àrea del flash MF-1

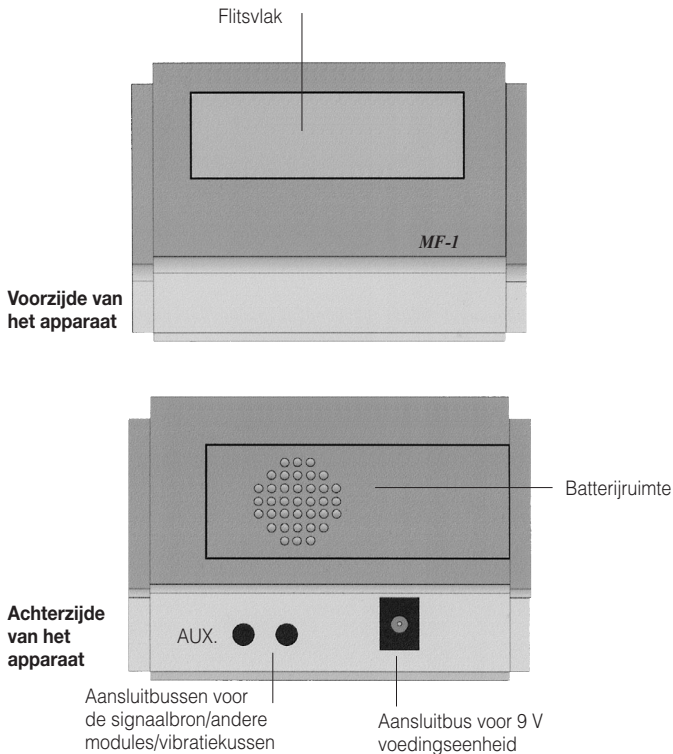

**De flitsmodule MF-1 kan op alle apparaten worden aangesloten, die met een aansluitbus (3,5 mm stekkerbus) voor een vibratiekussen uitgerust zijn.**

Wij feliciteren u met de aankoop van uw *flitsmodule MF-1*. U heeft daarbij gekozen voor een modern en betrouwbaar systeem.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om het systeem correct in gebruik te kunnen nemen en met alle mogelijkheden van het systeem vertrouwd te worden.

Met de *flitsmodule MF-1* kunnen alle apparaten, die een aansluitbus (3,5 mm stekkerbus) voor een vibratiekussen hebben, met een lichtflits worden uitgebreid.

### **Leveringsomvang**

Controleer of alle hierna opgesomde onderdelen aanwezig zijn:

- *flitsmodule MF-1*
- besturingskabel
- 9 V-voedingseenheid
- gebruiksaanwijzing
- garantiekaart

Indien bepaalde onderdelen ontbreken, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant.

### **Ingebruikname**

Verbind de besturingskabel met één van de beide aansluitbussen voor de signaalbron. Het andere uiteinde van de kabel wordt aangesloten op een

apparaat met een aansluitbus voor een vibratiekussen bijv. digitale wekker DS-1, vibratiewekker VC-1/VC-10, time *flash/lisa* time *flash*, *lisa* ontvangers (tafelvlitslamp, radiovlitslamp, radio-knipperlamp, draagbare radio-ontvanger). Steek aansluitend de stekker van de 9 V-voedingseenheid in de daarvoor voorziene bus aan de achterzijde van de *flitsmodule MF-1*.

### Opmerking

Op de vrije aansluitbus van de *flitsmodule MF-1* kan een vibratiekussen of een andere module (bijv. akoestische module) worden aangesloten.

### **Signalering**

Actieve signalen (bijv. wekalarm, *lisa*-alarm) worden met zeer felle lichtflitsen weergegeven.

### **Bijzonderheden**

Stroomuitvaloverbrugging:  
via een 9 V-blokbatteerij batterijwerking (blokbatteerij niet meegeleverd)

De *flitsmodule MF-1* kan ook alleen met een 9 V-blokbatteerij worden gevoed.

## Onderhoud en verzorging

Alle apparaten zijn onderhoudsvrij. Wanneer het apparaat vuil is, hoeft u het enkel met een zachte, vochtige doek te reinigen. Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere organische oplosmiddelen.

Alle apparaten mogen niet gedurende langere tijd blootgesteld worden aan directe zonnestralen en moeten daarnaast beschermd worden tegen grote hitte, vocht of sterke mechanische schokken.

**Opmerking:** Het apparaat is **niet** beschermd tegen spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het apparaat. Ook open vuur, zoals bijv. brandende kaarsen, mag in geen geval op het apparaat worden geplaatst.

Let erop dat de batterijen niet blootgesteld worden aan sterke warmtebronnen, zoals zonnestraling, brand o.i.d.

## Garantie

De *MF-1* is zeer betrouwbaar en veilig. Mochten er ondanks correcte montage en bediening storingen optreden, neem dan contact op met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant.

De garantie omvat de kostenloze reparatie en het gratis terugsturen van defecte apparaten.

Voorwaarde voor de garantie is dat het apparaat in de originele verpakking teruggestuurd wordt. Gooi de originele verpakking dus niet weg!

De garantie vervalt bij beschadigingen die veroorzaakt werden door onoordeelkundig gebruik of bij reparatiepogingen van niet erkende personen (verbreking van het garantiezegel op het apparaat).

Reparaties op garantie kunnen alleen worden uitgevoerd als de garantiekaart samen met een kopie van de rekening/bon van de handelaar wordt ingestuurd.

**Het serienummer van het apparaat moet steeds vermeld worden.**



**Verwijdering** van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (toe te passen in de landen van de Europese Unie en andere Europese landen met een eigen inzamelsysteem voor deze apparaten). Het symbool op het product of de verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld maar bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden afgegeven. Met uw bijdrage tot de correcte verwijdering van dit product beschermt u het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Milieu en gezondheid worden geschaad door een foute verwijdering. Materiaalrecyclage helpt het gebruik van grondstoffen te reduceren. Meer informatie over de recycling van dit product krijgt u bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwijderingsbedrijven of de zaak waar u dit product heeft gekocht.

### Technische gegevens

Voeding: 9 V-voedingseenheid op 230 V, 50 Hz of via een 9 V-blokbatterij



Dit product is in overeenstemming met de normen van de Europese Unie.

EG-conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar bij uw vakhandel of direct bij de fabrikant van dit product.

Technische wijzigingen voorbehouden.