


Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een maximaal datum gebruikershandleiding, omdat er belangrijke updates kunnen zijn veranderingen waar je op moet letten.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

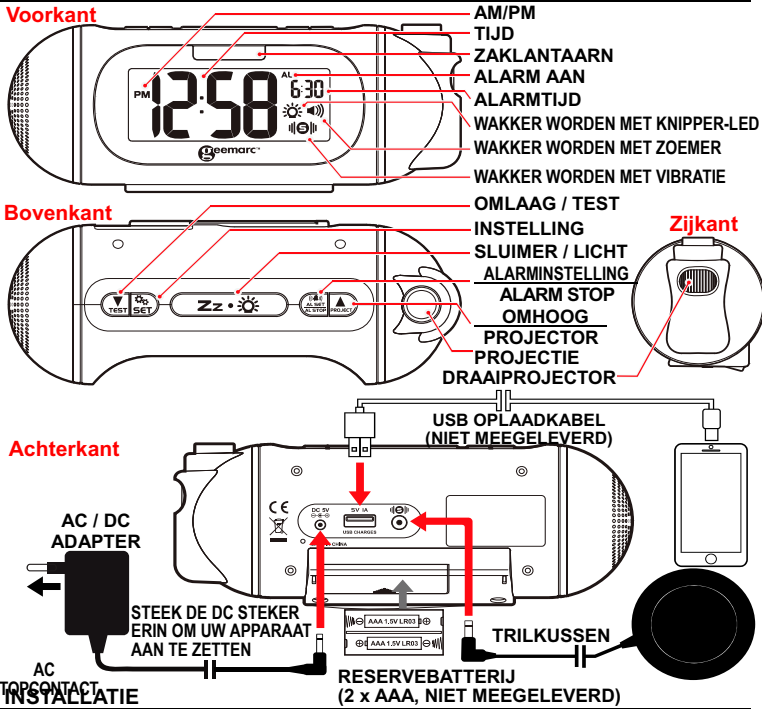

SLUIMEREN GEBRUIKEN

Als het alarm afgaat, drukt u eenmaal op **Zz** + [alarm icon]; het alarm stopt tijdelijk en de bijbehorende alarmindicator blijft knipperen. Het alarm zal opnieuw afgaan nadat de ingestelde sluimerduur voorbij is.

HI-MED-LO DIMMER GEBRUIKEN (TIJDCIJFERS)

Er is een helderheidsbediening met drie niveaus voor het licht aan de achterkant. Druk op **Zz** + [alarm icon] om de helderheid (HI / MED / LO) van het licht aan de achterkant aan te passen. Kan alleen als de klok niet afgaat.

ZAKLANTAARN GEBRUIKEN

Druk op **Zz** + [alarm icon] en houdt dit ingedrukt om de zaklantaarn aan te zetten. Druk op **Zz** + [alarm icon] en houdt dit ingedrukt om de zaklantaarn uit te zetten.

DE PROJECTIE GEBRUIKEN (werkt alleen m.b.v. de adapter)

1. Druk eenmaal op **PROJECT** om de projectie aan te zetten.
2. Druk eenmaal op **PROJECT** om de dimmer van de projectie aan te zetten.
3. Druk nogmaals op **PROJECT** om de projectie uit te zetten.
4. Als de projectie aan staat, drukt u op **PROJECT** en houdt deze ingedrukt om de projectie ondersteboven te zetten. Gebruik de draaiknop aan de rechterkant van uw apparaat om de projectie 90o te draaien.

UW MOBIELE APPARAAT OPLADEN VIA DE USB UITGANG

Verbindt de oplaadkabel (niet meegeleverd) van uw mobiel apparaat met de A-type USB uitgang aan de achterkant van het apparaat en verbindt het andere uiteinde met uw mobiel apparaat. De klok zal uw mobiel apparaat automatisch opladen.

Opmerkingen:

1. Overtuig uzelf ervan dat de originele kabel van uw mobiel apparaat voor het opladen wordt gebruikt.
2. Overtuig uzelf ervan dat de met de klokradio meegeleverde adapter (5V 1,2A) gebruikt wordt om uw klok van stroom te voorzien. Het gebruik van andere adapters kan verhinderen dat u uw mobiel kan opladen.
3. iPad en Notebook kunnen niet m.b.v. uw klokradio opgeladen worden.
4. Uw mobiel apparaat laadt NIET op wanneer het alarm actief is of afgaat.

TESTSTAND

Druk op **TEST** en houdt deze 2 seconden lang ingedrukt en de teststand doorloopt de test van het alarmgeluid van de zoemer, het knipperen van het stroboscopisch licht en de vibratie (HI – LO) die één cyclus van ca. 27 seconden doorloopt. Druk eenmaal op **TEST** om de teststand af te sluiten.

PROBLEEMEN OPlossen

Als uw klok irrelevante tijden toont of niet naar behoren werkt (wat veroorzaakt kan worden door elektrostatische ontlading van een andere storing), dan ontkoppelt u de DC stekker om de AC voeding te onderbreken (met verwijdering van de reservebatterij), wacht een paar minuten en verbindt daarna de adapter om uw klok opnieuw van stroom te voorzien.

Uw klok zal terug keren naar de fabrieksinstellingen die u volgens uw voorkeuren weer moet instellen.

GOED VOOR UW PRODUCT ZORGEN

1. Plaats uw klok op een stevig oppervlak, verwijderd van direct zonlicht of extreme hittebronnen of vocht.
2. Bescherm uw meubilair als u uw klok op natuurlijk hout of een verniste afwerking plaatst door een doek of beschermend materiaal te gebruiken tussen uw klok en het meubilair.
3. Maak uw klok schoon met een zachte doek, bevochtigd met milde zeep en water. Sterkere middelen zoals benzene, spiritus en dergelijke materialen kunnen de behuizing van uw klok beschadigen. Zorg ervoor dat de klok ontkoppeld is voor het schoonmaken.
4. Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt (een maand of langer) verwijder dan de batterijen om corrosie te voorkomen. Mocht het batterijvakje vuil of aangetast worden, maak dan het vakje grondig schoon en vervang de batterijen.
5. Gebruik van tijd tot tijd een borstelje om vuil zorgvuldig van de microfoon te verwijderen. Het borstelje moet zachte, schone en droge borstelharen hebben.

SPECIFICATIES

		Standaard instellingen	
Alarmduur	: Instelbaar van 5 tot 60 minuten	Tijdsformaat:	24 uur
Sluimerduur	: Instelbaar van 5 tot 60 minuten	Tijd:	0:00
		Alarm:	6:00 (AM)
Hoorbaar alarm	: 95 dB op 1m	Alarm en trilkussen niveau:	Hoog(Hi)
		Alarm geluidsfrequentie:	F-1
		Alarm geluidsniveau:	L1 (laag)
		Alarmduur:	A60(5 minuten)
		Sluimerduur:	n05 (5 minuten)

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc u voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons te keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

VERKLARINGEN:

CE Richtlijnen: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en telecomunicatie-eindapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com

Elektrische verbinding: Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V /50Hz voeding. (Geassocieerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.) Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg er bij installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen.

Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopaties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikt AEEA container.
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com
E-mail: customerservices@geemarc.com

Stek de AC/DC adapter in een wisselstroom (AC) stopcontact en steek daarna de gelijkstroom (DC) stekker in de achterkant van de klok. Uw klok zal nu werken.

Het stopcontact moet zich vlakbij het apparaat bevinden en gemakkelijk te bereiken zijn.

PLAATSING VAN DE RESERVEBATTERIJ

Uw klok heeft twee AAA batterijen nodig (niet meegeleverd) om voeding te leveren bij een tijdelijke uitval van de stroom.

1. Plaats uw klok ondersteboven op een plat oppervlak.
2. Verschuif het batterijdeksel aan de onderkant van de klok en verwijder het.
3. Steek twee nieuwe AAA batterijen in het batterijvakje; let op de juiste + en – polariteit.
4. Zet het batterijdeksel terug.

Het is voor de werking van de klok niet nodig om er een batterij in te steken. De reserve batterij dient alleen maar om de tijd- en alarminstellingen te behouden voor het geval er een stroomuitval is of de AC/DC adapter losgekoppeld raakt. Als de AC/DC voeding onderbroken wordt, gaat de LCD display uit en werkt het alarm niet.

Controleer de conditie van de batterijen eens per jaar en vervang eventueel de oude batterijen. Een lekkende batterij kan schade aan uw klok veroorzaken.

TIJD EN SLUIMERDUUR INSTELLEN

1. Druk eenmaal op **SET**, de uren cijfers '0' knipperen. Druk op **PROJECT** of **TEST** om het uur te wijzigen (houdt **PROJECT** of **TEST** ingedrukt om de gewenste waarde sneller te bereiken).
2. Druk nogmaals op **SET**; de minutencijfers '00' knipperen. Druk op **PROJECT** of **TEST** om de minuten te wijzigen (houdt **PROJECT** of **TEST** ingedrukt om de gewenste waarde sneller te bereiken).
3. Druk nogmaals op **SET**; de display toont '24Hr' en knippert. Druk op **PROJECT** of **TEST** om '12Hr' of '24Hr' te kiezen. Als '12Hr' gekozen wordt, dan verschijnt **AM** of **PM** in de linker bovenhoek om aan te geven of het ochtend of middag / avond is.
4. Druk nogmaals op **SET**; de display toont 'n05' en knippert. Druk op **PROJECT** of **TEST** om uw sluimerduur van 5 tot 60 minuten in te stellen.
5. Druk nogmaals op **SET**; om de instellingstand te verlaten. Als er geen toets ingedrukt wordt, zal de instellingstand automatisch na 10 seconden gesloten worden.

HET ALARM INSTELLEN (standaard is 6 uur AM)

1. Druk op **AL SET**, en houdt deze ingedrukt; AL verschijnt en de uren cijfers van de alarmklok knipperen. Druk op **PROJECT** of **TEST** om het uur te wijzigen (houdt **PROJECT** of **TEST** ingedrukt om de gewenste waarde sneller te bereiken).
2. Druk nogmaals op **AL SET** de minutencijfers van de alarmklok knipperen. Druk op **PROJECT** of **TEST** om de minuten te wijzigen (houdt **PROJECT** of **TEST** ingedrukt om de gewenste waarde sneller te bereiken).
3. Druk nogmaals op **AL SET**, 'HI' en [alarm icon] knipperen (vibratie op hoog niveau). Druk op **PROJECT** of **TEST** om 'LO' (vibratie op laag niveau) te kiezen.
4. Druk nogmaals op **AL SET**, en 'F1' en [alarm icon] knipperen. Druk op **PROJECT** of **TEST** om de alarmtoon (frequentie) te kiezen: **F1 (lage toon, 800 Hz)**, **F2 (tussentoon, 1 KHz)**, **F3 (hoge toon, 1,5 Hz)**.
5. Druk nogmaals op **AL SET**, en 'L1' en [alarm icon] (laag) knipperen. Druk op **PROJECT** of **TEST** om het geluidsniveau van het alarm te kiezen: **L1 (laag)**, **L2 (medium)**, **L3 (hoog)**.
6. Druk nogmaals op **AL SET**; de display toont 'A60' en knippert. Druk op **PROJECT** of **TEST** om uw sluimerduur van 5 tot 60 minuten in te stellen.
7. Druk nogmaals op **AL SET** om de instellingstand te verlaten. Als er geen toets ingedrukt wordt, zal de instellingstand automatisch na 10 seconden gesloten worden.

DE ALARMSTAND KIEZEN

1. In de stand van normale tijd tonen drukt u eenmaal op **AL SET** op een tijd dat het/de alarm(s) geactiveerd moet(en) worden; de bijbehorende alarmindicator(s) aan de linkerkant van de display gaan aan:

[alarm icon]	[alarm icon]	[alarm icon]	[alarm icon]
alleen het trilkussen van het alarm is geactiveerd	zowel het geluid als het trilkussen werken	zowel het stroboscopisch licht als het trilkussen werken	zowel het stroboscopisch licht en geluid als het trilkussen werken

2. Press **AL SET** om alle alarmen uit te zetten; alle [alarm icon], [alarm icon], [alarm icon], ALARMTIJD en AL alarmindicators gaan uit.

Opmerking: Verzekert u ervan dat het trilkussen is verbonden met de achterkant van de alarmklok (het alarmklok is) om het trilkussen te kunnen gebruiken.

HET ALARM STOPPEN EN RESETTEN OM DE VOLGENDE DAG AAN TE GAAN

Als het alarm afgaat, knippert de bijbehorende alarmindicator. Druk eenmaal op **AL SET** om het alarm te stoppen en te resetten om de volgende dag 'Aan' te gaan. De bijbehorende alarmindicator zal op de display 'Aan' blijven staan.