

Maxi

Personal amplifier




For use in all EU countries

Hereby, Bellman & Symfon AB, declares that this BE2020 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives: EMC 1989/336/EC.


Correct use and disposal of batteries:

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Please dispose of old, defective batteries in an environmentally friendly manner in accordance with the relevant legislation.


Gecombineerde signaalbronnen

Wanneer u een geluidsbron hebt aangesloten op de ingang van de externe geluidsbron (1), dan kan deze geluidsbron worden gecombineerd met het geluid dat de interne microfoon (2) ontvangt. Dit kunt u doen door de knop  (6) ingedrukt te houden.

Het geluid van de geluidsbron die op de ingang van de externe geluidsbron (1) is aangesloten, wordt verlaagd en de interne microfoon wordt aangesloten, zodat u bijvoorbeeld geluid kunt ontvangen of met iemand anders kunt praten. Het indicatielampje van de microfoon (3) knippert terwijl de knop wordt ingedrukt.

Wanneer u weer naar de signaalbron wilt luisteren die op de ingang van de externe geluidsbron (1) is aangesloten, laat u de knop  (6) los. De interne microfoon wordt daarna losgekoppeld en de externe geluidsbron keert terug naar het normale volume.

Clip

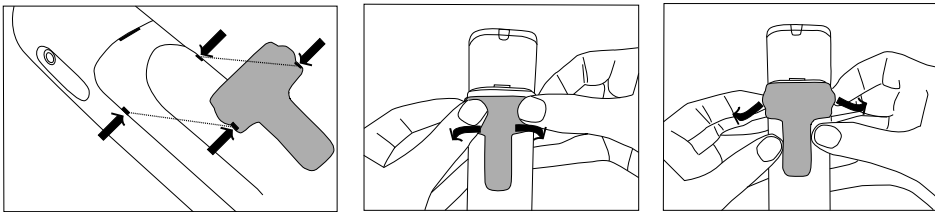

Plaats de clip tegen het batterijdeksel en druk er stevig op zodat de clip goed vastzit.

Verwijder de clip door de kleine ronde greepjes vanaf de zijkanten naar buiten te drukken.

Indicatielampjes en instellingen

Indicatielampje voor Volume en Toon

Het indicatielampje voor Volume en Toon (8) wordt gebruikt als indicator voor de regeling van het volume en de toon.



Het indicatielampje voor Volume en Toon gaat na ongeveer 3 seconden uit om energie te besparen.

Indicatielampje voor batterij bijna leeg


Het indicatielampje voor batterij bijna leeg (11) is meestal uit, maar het gaat branden als de batterij nog minder dan 10 uur kan werken. Dit is uiteraard afhankelijk van het volume en de gebruikte luisteraccessoires.


Wanneer het indicatielampje voor batterij bijna leeg (11) elke zeven seconden knippert, moeten de batterijen worden vervangen. Gebruik uitsluitend AA alkalinebatterijen.

Volumeknop


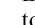
De Maxi heeft digitale volumeregeling  (9); dit betekent dat u het volume kunt verhogen of verlagen met de drukknoppen  (9). Telkens wanneer u op de knop drukt, neemt het volume één stap toe of af.

Wanneer u een van de volumeknoppen langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, neemt het volume met één stap per seconde toe of af, zolang de knop wordt ingedrukt of totdat de minimale of maximale stand wordt bereikt.


Wanneer u op de knop  (9) drukt, neemt het volume met één stap per keer toe totdat het maximale volume is bereikt. Op maximaal volume branden alle lampjes voor het indicatielampje Volume en Toon (8).


Wanneer u op de knop  (9) drukt, neemt het volume met één stap per keer af totdat het minimale volume is bereikt, hoewel de Maxi nooit helemaal stil is. Op minimaal volume brandt alleen het lampje links voor Volume en Toon (8).

Toonregeling

BE2020 heeft digitale volumeregeling  (10); dit betekent dat u het niveau voor de hoge tonen kunt verhogen of verlagen met de drukknoppen  (10). Telkens wanneer u op de knop drukt, neemt het niveau van de hoge tonen één stap toe of af.

Wanneer u een van de toonknoppen langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, neemt het niveau van de hoge tonen met één stap per seconde toe of af, zolang de knop wordt ingedrukt of totdat de minimale of maximale stand wordt bereikt.

Wanneer u op de knop  (10) drukt, neemt het niveau voor de hoge tonen met één stap per keer toe totdat het maximale niveau voor de hoge tonen is bereikt. Op het maximale niveau voor de hoge tonen brandt het lampje helemaal rechts van het indicatielampje voor Volume en Toon (8).


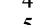
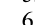
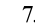
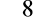
Wanneer u op de knop  (10) drukt, neemt het niveau voor de hoge tonen met één stap per keer af totdat het minimale niveau voor de hoge tonen is bereikt. Op het minimale niveau voor de hoge tonen brandt het indicatielampje helemaal links van het indicatielampje voor Volume en Toon (8).

Wanneer het middelste lampje van het indicatielampje voor Volume en Toon (8) brandt, worden de hoge tonen uitgeschakeld.

Verhelpen van de meest voorkomende problemen

| Probleem | Oplossing |
|---|---|
| Er gebeurt niets wanneer u de Maxi probeert op te starten met de knop On/Off. | <ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterijen. Gebruik uitsluitend AA-alkalinebatterijen. |
| Er komt geen geluid in de koptelefoon wanneer de Maxi is ingeschakeld. | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de juiste signaalbron is geselecteerd, bijvoorbeeld de interne microfoon (M-positie). |

Zie de Appendix voor meer Nederlandstalige informatie over het product.

- | | |
|--|--|
| 1. Contact 2,5 mm ingang externe geluidsbron | 10. Toonregeling  |
| 2. Interne microfoon | 11. Indicatielampje voor batterij bijna leeg |
| 3. Indicatielampje microfoon | 12. Contact 3,5 mm uitgang koptelefoon |
| 4. Indicatielampje Telecoil | 13. Bevestiging voor neklint |
| 5. Knop On/Off  | 14. Batterijvakje |
| 6. Keuzeknop microfoon  | 15. Knop instellingen |
| 7. Keuzeknop Telecoil  | 16. Vergrendeling batterijdeksel |
| 8. Indicatielampje voor Volume en Toon | 17. Batterijdeksel |
| 9. Volumeregeling  | 18. Clip |