


Aansluiting

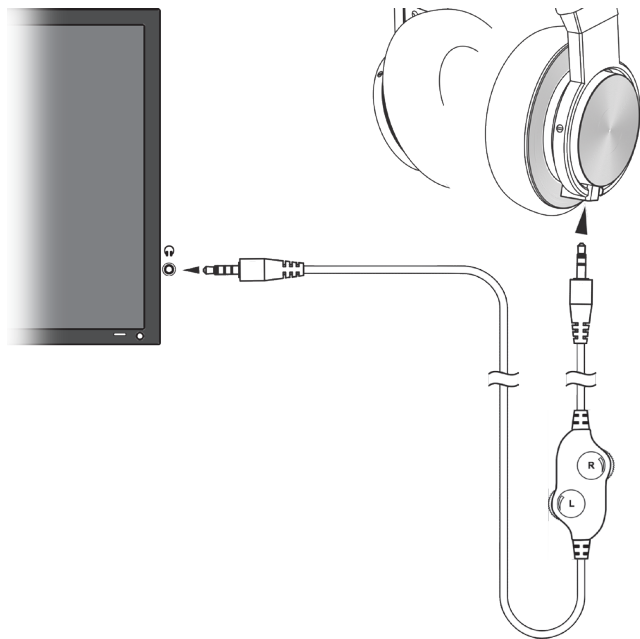

Gefeliciteerd met de aanschaf van de comfort-hoofdtelefoon „LH-060TV“. Met zijn Neodymiummagneettechnologie levert de LH-060TV een aangenaam en krachtig geluid. De zachte oorkussens maken een comfortabel gebruik gedurende uren mogelijk.

Lees deze handleiding om de hoofdtelefoon correct aan te sluiten en te gebruiken

Standaard leveringsomvang

Controleer of alle hieronder opgesomde delen aanwezig zijn:

- Hoofdtelefoon »LH-060TV«
- Aansluitkabel met volumeregelaar
- Jack adapter 6,3 mm
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

Mochten er delen ontbreken, gelieve dan contact op te nemen met de vakhandelaar of rechtstreeks met de fabrikant.

Aansluiting

Sluit de stekker die het dichtst bij de volumeregelaar van de kabel zit aan op de aansluitbus van de hoofdtelefoon. Sluit de tweede stekker aan op de aansluiting van uw TV-toestel of een andere audiobron (mobiele telefoon, MP3-speler, stereoset), die voorzien is van een hoofdtelefoon-aansluiting.

Gebruik indien nodig de meegeleverde adapter.

Gebruik van de hoofdtelefoon

Stel het volume op de TV of andere audiobron in op het hoogste comfortabele niveau. Via de volumeregelaar op de aansluitkabel kan het volume aan de linker- of rechterzijde afzonderlijk worden ingesteld.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Uitgangsvermogen: | 20 mW |
| Diameter van de magnetische spoelen: | 50 mm |
| Gevoeligheid: | 113 dB |
| Impedantie: | 24 Ω |
| Frequentiebereik: | 20Hz ~ 20KHz |
| Lengte van de kabel: | 5,5 m |



Dit apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen:

- 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn
- 2011/65/EU RoHS-Richtlijn
- 2012/19/EU WEEE-Richtlijn
- 2014/30/EU EMC-Richtlijn

De conformiteit met de voornoemde richtlijnen wordt bevestigd door het CE-teken op het apparaat.

EG-conformiteitsverklaringen staan online ter beschikking onder www.humantechnik.com.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Onderhoud en storingen

De »LH-060TV« is onderhoudsvrij. Wanneer het apparaat vuil is, hoeft u het enkel met een zachte, vochtige doek te reinigen (let op: eerst de stekkers uit het stopcontact halen). Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere organische oplosmiddelen.

De »LH-060TV« mag niet langdurig blootgesteld worden aan rechtstreekse zonnestralen en moet beschermd worden tegen grote hitte, vocht of sterke mechanische trillingen.

Opmerking:

Het apparaat is **niet** beschermd tegen spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, naast het apparaat.

Ook open vuur, zoals bijv. brandende kaarsen, mag in geen geval naast het apparaat worden geplaatst.

Garantie

De »LH-060TV« heeft een hoge bedrijfszekerheid. Mochten er ondanks correcte bediening storingen optreden, neem dan contact op met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant.

De garantie omvat de kostenloze reparatie en het gratis terugsturen van defecte apparaten. Het wordt aanbevolen om het product in de originele verpakking op te sturen, dus bewaar de verpakking voor de duur van de garantieperiode.

De garantie vervalt bij beschadigingen die veroorzaakt werden door verkeerd gebruik of bij reparatieopgingen van niet erkende personen (verbreking van het garantiezegel op het apparaat).

Reparaties op garantie kunnen alleen worden uitgevoerd als de garantiekaart samen met een kopie van de rekening/bon van de handelaar wordt ingestuurd.

Het serienummer van het apparaat moet steeds vermeld worden.

Verwijdering



van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (toe te passen in de landen van de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelsysteem voor deze apparaten).

Het symbool op het product of de verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld maar bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden afgegeven.

Met uw bijdrage tot de correcte verwijdering van dit product beschermt u het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Milieu en gezondheid worden geschaad door een foute verwijdering.

Recycling helpt het gebruik van grondstoffen te reduceren.

Meer informatie over de recycling van dit product krijgt u bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijven of de zaak waar u dit product heeft ge kocht.