


Belangrijk!

Installeer het product alvorens deze quick guide te lezen.

INSTALLATIE VAN DE NEKLOOP

1. Maak de nekloop los van de ontvanger aansluiting **R9** door aan de draad te trekken.
2. Plaats de ontvanger op de borst en plaats de nekloop om de nek.
3. Maak de nekloop opnieuw vast in de ontvanger aansluiting **R9**.

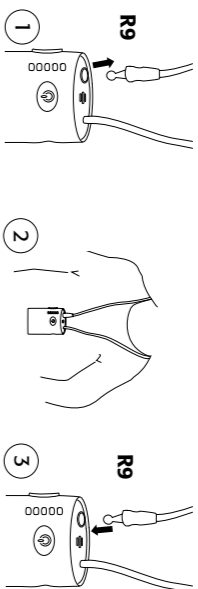


CONVERSEREN

1. Pak de ontvanger en de zender uit het laadstation.
2. Plaats de ontvanger om uw nek
3. Om de ontvanger en de zender aan te zetten, drukt u eenmaal op zender knop **T1** en houdt u ontvangerknop **R1** gedurende 5 seconden ingedrukt.
4. Kies voor een directioneel of omni directioneel opname karakteristiek voor de microfoon
5. Houd de zender in uw hand en richt deze op de geluidsbron.
6. Om de ontvanger en de zender uit te schakelen, drukt u eenmaal op de zenderknop en houdt u de ontvanger knop ingedrukt.


*Als er geen geluid hoorbaar is, druk dan de knop **R2+** gedurende 5 seconden om de draadloze verbinding tot stand te brengen.*

CONVERSEREN

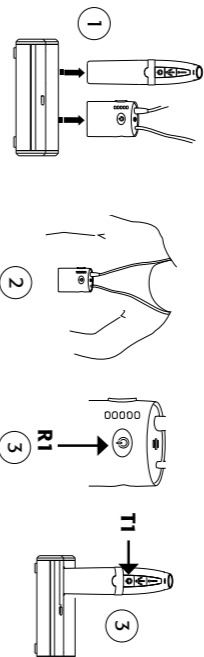

HET OPBELLEN VAN IEMAND

1. Zet de ontvanger aan door gedurende 5 seconden op ontvangerknop **R1** te drukken.
2. Druk op ontvangerknop **R1** en wacht op de kiestoon.
3. Neem de hoorn van de haak en wacht op de kiestoon.
4. Kies het telefoonnummer.
5. Om het telefoongesprek te beëindigen, druk op ontvangerknop **R1**.

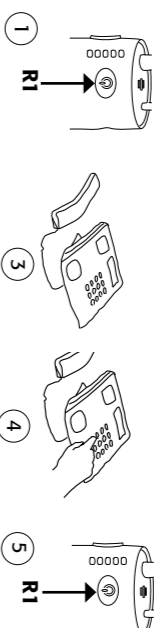


HET OPBELLEN VAN IEMAND

1. Zet de ontvanger aan door gedurende 5 seconden op ontvangerknop **R1** te drukken.
2. Kies het telefoonnummer dat u wilt bellen.
3. Het telefoongesprek wordt automatisch doorgezet naar de HearIt All ontvanger.
4. Om het gesprek te beëindigen, druk op ontvangerknop **R1** of beëindig het gesprek op de GSM telefoon.

OPBELLEN NAAR EEN GSM TELEFOON

HET AANNEMEN VAN EEN BINNENKOMEND TELEFOONGESPREK

1. Als de telefoon gaat, zal in het apparaat voor gehoorondersteuning of in de hoofdtelefoon een gerinkel te horen zijn en zal ontvanger indicator **R1** blauw knipperen.
2. Druk ontvanger knop **R1** kort in om het gesprek aan te nemen.
3. Om het telefoongesprek te beëindigen, druk op ontvangerknop **R1**.

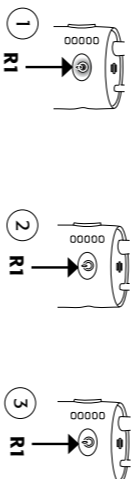

HET AANNEMEN VAN EEN BINNENKOMEND TELEFOONGESPREK

Kijk voor meer informatie op:
www.phonicear.com

Connected to life
Phonic Ear

921-34-740-00 Rev. A 0209

U kunt Horen!

- Mobilele Telefoon
- Telefoon
- Gesprekken
- Televisie



Verkorte Gids
Installatie en Opstelling


Geproduceerd door: **Phonic Ear**
Connected to life

Kongebakken 9 • 2765 Smørum • Denmark
Phone: +45 3917 7101 • Fax: +45 3927 7900
E-mail: mail@phonicear.com

Knop / functie	Functionaliteit
Ontvanger	
R1	<ul style="list-style-type: none"> Aan knop (vasthouden gedurende 5 seconden) Uit knop (vasthouden gedurende 5 seconden) Aannemen en beeindigen van telefoongesprek via mobiele lijn Aannemen en beeindigen van telefoongesprek via vaste lijn Wit licht: WDA Actief Blauw licht: Bluetooth actief Blauw knipperlicht: inkomend telefoongesprek
R2+ (up)	<ul style="list-style-type: none"> Volume knop voor harder Verbinden / verbreken WDA
R2- (down)	<ul style="list-style-type: none"> Volume knop zachter Weigeren van telefoongesprek via GSM (twee seconden inhouden)
R3	<ul style="list-style-type: none"> Blauw knipperlicht: Bluetooth niet verbonden Groen licht: Volume level 1
R4	<ul style="list-style-type: none"> Groen licht: Volume niveau 2
R5	<ul style="list-style-type: none"> Tijdens gebruik Rood knipperlicht: Batterijspanning laag Groen licht: Volume niveau 3 Tijdens opladen: Rood licht: opladen Groen licht: volledig opgeladen
R6	<ul style="list-style-type: none"> Groen licht: Volume niveau 4
R7	<ul style="list-style-type: none"> Wit licht: WDA verbinding verbroken Groen licht: Volume niveau 5
R8	<ul style="list-style-type: none"> Hoofdtelefoon aansluiting
R9	<ul style="list-style-type: none"> Nek koord aansluiting
R10	<ul style="list-style-type: none"> Nek koord
R11	<ul style="list-style-type: none"> Aansluiting voor lader
Zender	
T1	<ul style="list-style-type: none"> Aan / uit knop, DAS en batterij indicator
T2	<ul style="list-style-type: none"> Knop voor omnidirectionele microfoon om geluid uit de gehele omgeving op te vangen
T3	<ul style="list-style-type: none"> Knop voor directionele microfoon om gericht geluid op te vangen.
T4	<ul style="list-style-type: none"> Aansluiting voor lader
T5	<ul style="list-style-type: none"> Gat voor polsband
T6	<ul style="list-style-type: none"> Clip voor riem
T7	<ul style="list-style-type: none"> Gat voor nekband
Lader	
C1	<ul style="list-style-type: none"> Laadstation voor zender
C2	<ul style="list-style-type: none"> Laadstation voor ontvanger
C3	<ul style="list-style-type: none"> Stroom en Bluetooth indicator
C4	<ul style="list-style-type: none"> DAS kanaal selector
C5	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth en DAS aansluiting / kanaal knop
C6	<ul style="list-style-type: none"> 6V DC aansluiting voor stroom
C7	<ul style="list-style-type: none"> Geluidsingang aansluiting voor televisie, radio, MP3 etc.
C8	<ul style="list-style-type: none"> Telefoon in aansluiting
C9	<ul style="list-style-type: none"> Telefoon uit aansluiting

Ontvanger

- R1:** Aan / uit knop en aanneemknop, DAS en Bluetooth indicator
- R2:** Volume knop +/- (meer / minder)
- R3:** Bluetooth en volume niveau indicator
- R4:** Volume niveau 2 indicator
- R5:** Batterij en volume niveau 3 indicator
- R6:** Volume niveau 4 indicator
- R7:** DAS en volume niveau 5 indicator
- R8:** Hoofdtelefoon aansluiting
- R9:** Nek koord aansluiting
- R10:** Nek koord
- R11:** Aansluiting voor lader

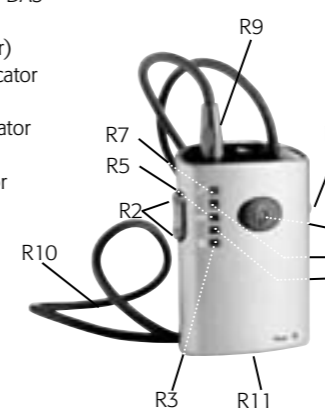


Zender

- T1:** Aan / uit knop, DAS en batterij indicator
- T2:** Knop voor omnidirectionele microfoon met indicator
- T3:** Knop voor directionele microfoon met indicator
- T4:** Aansluiting voor lader
- T5:** Gat voor polsband
- T6:** Clip voor riem
- T7:** Gat voor nekband




Lader

- C1:** Laadstation voor zender
- C2:** Laadstation voor ontvanger
- C3:** Stroom en Bluetooth indicator
- C4:** DAS kanaal selector
- C5:** Bluetooth en DAS aansluiting / kanaal knop
- C6:** 6V DC aansluiting voor stroom
- C7:** Geluidsingang aansluiting voor televisie, radio, MP3 etc.
- C8:** Telefoon in aansluiting
- C9:** Telefoon uit aansluiting

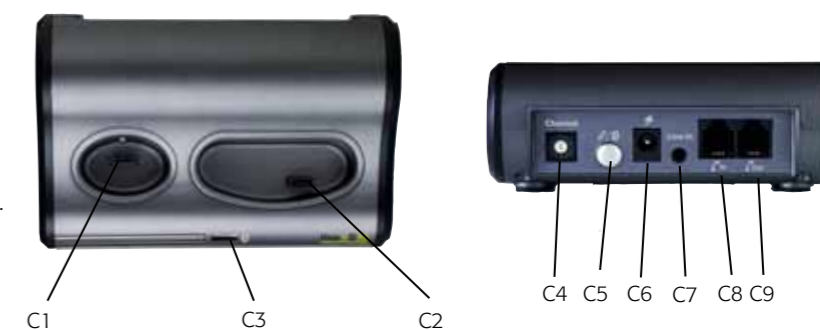

VOLUME INSTELLEN

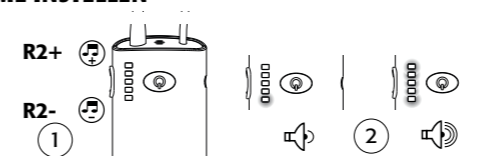

VOLUME INSTELLEN

- Druk de ontvanger knop **R2+** of **R2-** om het volume op een gewenst niveau te zetten.
- Afhankelijk van het volumenniveau lichten de ontvanger indicatoren **R3** tot **R7** op.

OPLADEN

Als de zender indicator **T1** of de ontvanger indicator **R5** rood knippert tijdens gebruik of de apparaten gaan niet aan wanneer u dat wilt, dan is het tijd om ze op te laden.

- Plaats de zender en/of de ontvanger in **C1**, respectievelijk **C2**.
- Ontvanger indicator **R5** en zender indicator **T1** lichten rood op tijdens het laden.
- Zodra het laden gereed is, kleuren de zender indicator **T1** en de ontvanger indicator **R5** groen.

OPLADEN

