


INSTALLATIE EN OPSTELLING

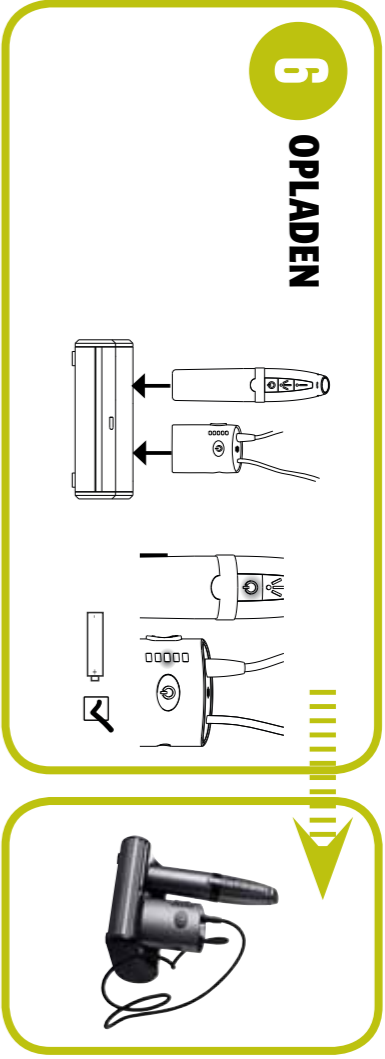

6 OPLADEN

Uw Heartt All is nu klaar voor gebruik

Oplossen van eventuele problemen

Geen geluid van televisie / radio of geluidsbron

- Houd de ontvanger knop R2+ (Volume op) voor twee seconden vast om de draadloze verbinding tot stand te brengen.

Alle 5 ontvanger indicatoren branden en het geluid is zwak

- Het maximale volumeniveau is bereikt. Als het geluidssignaal nog steeds te zwak is, pas dan het volume op uw televisie aan. Bij geen verbetering raadpleeg uw specialist voor gehoor ondersteunende apparatuur en laat de telecoil aanpassen.

Heartt All werkt niet

- Controleer of de voedingskabel is verbonden met de lader en dat de transformator stevig is verbonden met een werkend wand contact doos, zodat er een verbinding is op het lichtnet. (Lader indicator 3 kleurt permanent groen of knippert afwisselend blauw / groen).

Geen draadloze verbinding met de vaste of mobiele telefoonaansluiting

- Maak een draadloze verbinding door eenmaalig op de lader knop C5 te drukken. Zorg hierbij ervoor dat de ontvanger aan staat.
- Als de draadloze verbinding is verbroken door een slechte of geen ontvangst, zal de verbinding automatisch weer tot stand komen zodra de ontvangst weer voldoende is.
- Als de draadloze verbinding is verbroken door het ontbreken van stroom in de ontvanger, dan zal de verbinding automatisch worden hersteld als de ontvanger weer is opgeladen.



Phonic Ear[®]
Connected to life

Kijk voor meer informatie op:
www.phonicear.com

U kunt Horen!

Televisie
Gesprekken
Telefoon
Mobiele Telefoon



921-34-840-00 Rev. A 0209

Geproduceerd door: **Phonic Ear**[®]
Connected to life

Kongebakken 9 • 2765 Smørum • Denmark
Phone: +45 3917 7101 • Fax: +45 3927 7900
E-mail: mail@phonicear.com

Verkorte Gids
Installatie en Opstelling


INSTALLATIE EN OPSTELLING




1 VERBIND KABELS AAN EEN TELEVISIE OF EEN ANDERE GELUIDSBRON

a



a of b of c

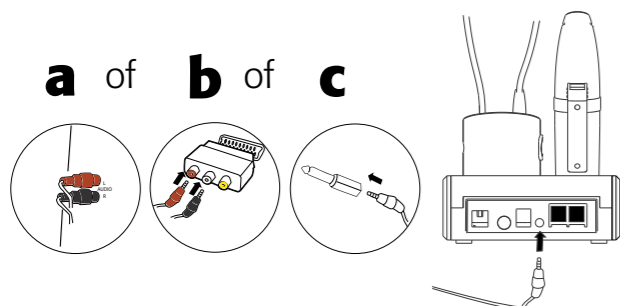

b VERBIND KABELS AAN EEN VASTE TELEFOONAANSLUITING

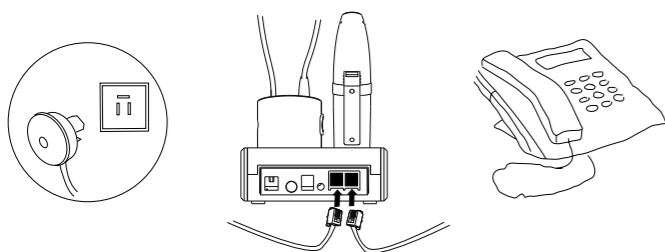

2 STOP DE STEKKER IN CONTACT

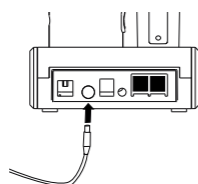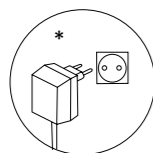

Belangrijk!





Schakel het apparaat nog niet aan totdat dit in stap 3 is gemeld.

* Stekker kan per land verschillen

3

DRAADLOZE OPSTELLING VOOR VASTE TELEFOONLIJN

1. Schakel de ontvanger aan door de **R1** knop ingedrukt te houden voor 5 seconden
2. Schakel de oplader aan.
3. Oplader indicator **C3** begint snel te knipperen tijdens het maken van de connectie
4. Zodra de verbinding tot stand is gekomen, stoppen de blauwe oplader indicatoren **C3** en **R3** met knipperen.

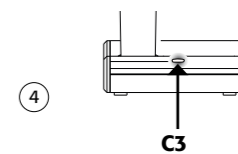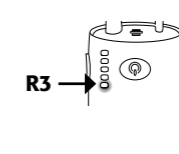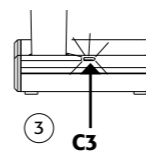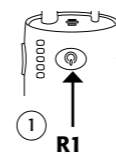


4

DRAADLOZE OPSTELLING VOOR MOBIELE TELEFOON

1. open het menu van de mobiele telefoon om de telefoon te laten zoeken naar beschikbare Bluetooth apparatuur binnen bereik.
2. Kies de Bluetooth optie "**HearIt All**".
3. Voer de code (**8888**) in de mobiele telefoon in. Kies de optie om de mobiele telefoon te verbinden. Een korte pieptoon zal klinken in het apparaat voor gehoorondersteuning of in de hoofdtelefoon.
4. Zodra de draadloze verbinding tot stand is gekomen, stopt de blauwe ontvanger indicator met knipperen.

1 2

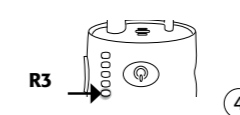

4

5

DRAADLOZE OPSTELLING VOOR RADIO OF TELEVISIE OF COMMUNICEREN

1. Schakel de zender aan door kort de zender knop **T1** in te drukken.
2. **Televisie:**
 - Plaats de zender in de oplader en hang de ontvanger om de nek.
 - Schakel de Televisie aan.


2. Communiseren:

- Houd de zender in uw hand en plaats de ontvanger om uw nek.
- Kies tussen een omni directionele of directionele instelling door de zender knoppen **T2** of **T3** in te drukken

3. schakel de ontvanger in door de ontvanger knop **R1** gedurende 5 seconden in te drukken.

4. Indien het geluid niet direct beschikbaar is, druk dan op de ontvanger knop **+R2** gedurende 2 seconden.

5. ontvanger indicator **R1** wordt wit zodra de verbinding tot stand is gekomen.

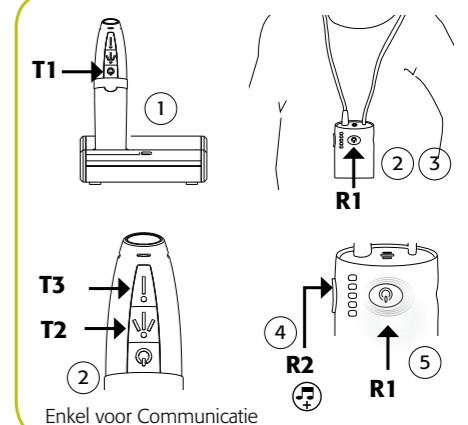

Enkel voor Communicatie